

Brugerguide voor de Rehab-set

Inhoudsopgave

1. Voorwoord
2. Productbeschrijving
3. Materiaal
4. Houdbarhed
5. Gebruik
6. Belangrijke info
7. Reiniging
8. Contraindicaties
9. Bijwerkingen



1. Voorwoord

De kegel, "egel" en XL geluidsplaat opzetstukken van Novafon worden gebruikt als aanvulling op de bestaande opzetstukken die worden meegeleverd bij de aankoop van een Novafon geluidsgolftoestel. Ze zijn compatibel met alle Novafon apparaten en zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik met Novafon. De onderdelen in de Rehab-kit mogen daarom niet worden gebruikt met andere soorten apparaten dan Novafon. Lees de instructies zorgvuldig door voordat u de onderdelen gebruikt om zeker te zijn van correct gebruik en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

2. Productbeschrijving

2.1 **Kegel**



Door zijn vorm is de geluidskegel geschikt voor zeer precieze en gerichte toepassing op bijvoorbeeld triggerpoints en acupressuurpunten. Hij kan ook worden gebruikt voor het masseren van weefsellagen en littekenweefsel en voor nauwkeurige puntbehandeling van de structuur van het gezicht, de handen en de voeten.

2.2 **"Egel"**



De "egel" is bijzonder stimulerend door zijn stekelige oppervlak. Het zorgt voor een andere overdracht van geluidsgolven dan de vlakke geluidsdelen. De puntige uiteinden kunnen worden gestimuleerd om desensibilisatie en gevoeligheidsverhoging te bereiken. Met de borstelachtige stekels is het ook mogelijk om de hoofdhuid en het hoofd direct te behandelen.

2.3 **XL plaat**



De XL-geluidsplaat heeft een diameter van 6 cm en is aanzienlijk groter dan standaardgeluidsplaten. Hij brengt trillingen over op grotere gebieden en maakt het mogelijk om grote gebieden tegelijk te behandelen met geluidsgolven. Hij is vooral geschikt voor grote delen van het lichaam, zoals de rug en dijen, maar kan gebruikt worden om het hele lichaam te behandelen.

3. Materiaal

De Novafon Rehab kit is gemaakt van een hoogwaardige kunststof die bijzonder geschikt is voor medisch gebruik. De kit moet op een koele en droge plaats worden bewaard. De audio-onderdelen mogen niet worden opgeslagen bij hoge temperaturen of worden blootgesteld aan direct zonlicht.

4. Houdbaarheid

De houdbaarheid van Novafon Rehab onderdelen hangt af van hoe vaak ze gebruikt worden en hoe ze bewaard worden. Bewaar de onderdelen gerust in de meegeleverde doos. Controleer de geluidsonderdelen na elk gebruik. Vervang geluidsonderdelen die beschadigd zijn of hun vorm verloren hebben. We raden aan om bevestigingsonderdelen na ongeveer 2 jaar gebruik te vervangen.

5. Gebruik

De bevestigingsonderdelen kunnen eenvoudig worden vervangen door ze los te draaien (linksom) en vast te klikken (rechtsom). De geluidsonderdelen passen op alle Novafon geluidsgolftoestellen. Let op de contra-indicaties in hoofdstuk 8.

Eksempler på anvendelse:

Kegel	"Egel"	XL plaat
Puntbehandeling op trigger-, pijn- en accupressuurpunten	Speciale sensorische behandeling en desensibilisatie	Behandeling van grote gebieden zoals de rug en dijen
Nauwkeurige massage van weefsellagen en littekenweefsel	Circulerende bewegingen voor een betere doorbloeding	Verbeterd lichaamsgevoel van top tot teen
Behandeling van fijne structuren op het gezicht, handen en voeten	Hoofd- en hoofdpijn behandelen	Behandeling van het hele lichaam na het sporten of voor pijn in grotere gebieden

6. Belangrijke informatie

- Afhankelijk van de lichaamsgevoeligheid van de persoon kunnen de trillingen verschillend worden ervaren. Behandel op bijzonder gevoelige plekken op de laagste sterkte door kleding of een dun stuk stof heen.
- Het Novafon apparaat mag maximaal 20 minuten gebruikt worden. Laat het daarna ongeveer 15 minuten afkoelen voordat u het weer inschakelt.
- Als u zich duizelig of onwel voelt of als de symptomen toenemen, stop dan met de behandeling.
- Houd alle accessoires buiten het bereik van kinderen. Er zitten kleine onderdelen in de doos.
- Gebruik de applicatiedelen niet op slijmvliezen en open wonden.
- LET OP! Bij onjuist gebruik bestaat het risico op letsel.
- Lees en volg alle informatie in de gebruikershandleiding van het Novafon geluidsgolftoestel en deze instructies voordat u de hulpstukken gebruikt.

7. Reiniging

Onderdelen van Novafon Rehab-kits kunnen gedesinfecteerd worden met een oppervlakte-desinfectiemiddel ('veegdesinfectie'). Wij raden een anti-alcoholisch desinfectiemiddel voor oppervlakken van medische hulpmiddelen aan. Veeg het bevestigingsonderdeel af met het desinfectiedoekje en laat het 60 seconden inwerken. Veeg het onderdeel vervolgens indien nodig af. Voor het hulpstuk "Egel" raden we een alcoholvrij desinfectiemiddel aan voor oppervlakte-desinfectie van medische producten. Als de onderdelen van het hulpstuk vuil zijn en anderszins nodig, kunnen ze worden gereinigd met een zachte doek en een neutraal reinigingsmiddel onder lauw water of met een huishoudelijk ontsmettingsmiddel. Gebruik geen bleekmiddel of schuurmiddelen.

8. Contraindicaties

Gebruik de onderdelen van de Rehab-kit in combinatie met de Novafon NIET voor:

- Open wonden/eczeem
- Slagaderverkalking
- Huidige episodes van epilepsie
- Zwangerschap
- Metalen implantaten
- Pacemaker
- Trombose
- Hersenpacemakers
- Hartritmestoornissen
- Tumoren

Neem bij twijfel contact op met de (dieren)arts of onze klantenservice.

9. Bijwerkingen

Houd er rekening mee dat in zeldzame gevallen de volgende bijwerkingen kunnen optreden:

- Toegenomen pijn/ongemakkelijk gevoel
- Onbehagen/duizeligheid
- Huidirritatie
- Reflexen/ongewenste spiersamentrekkingen

Als misselijkheid, duizeligheid, verhoogde pijn of huidirritatie optreedt, stop dan onmiddellijk met de behandeling. Een lichte roodheid of opwarming van de huid is geen reden tot bezorgdheid. Dit is het gewenste effect van een behandeling met geluidsgolven, dat optreedt als gevolg van een verhoogde doorbloeding.