

Manuální prsní odsávačka Amaryll

Návod k použití



1. Obsah balení:

Amaryll prsní odsávačka:

- a.) Páčka
- b.) Kryt pro odsávání
- c.+d.) membrána úchytky k membráně
- e.) úchytky k membráně
- f.) ventil (1 náhradní)
- g.) lahev 150 ml
- h.) stojan na lahev
- i.) víko
- j.) těsnící víko
- k.) čistící kartáč
- l.) prsní nástavec 31 mm
- m.) prsní nástavec 28 mm
- n.) masážní vložka OptiFlow 26 mm

Amaryll start: a až j

Amaryll KombiKit: a až d

2. Indikace

Amaryll prsní odsávačka je používána pro odsávání mateřského mléka, sběr a skladování.

3. Návod k použití:

3.1. Sestavení:

Důležité: Před prvním použitím vyvařte (Viz. Část o čištění)

1. Sestavte podle obrázku.
2. Nasadte těsnící membránu s dobře usazenou úchytkou. Přesvědčte se, že hladká část membrány je usazena směrem ven.

3. Nasadte kryt pro odsávání do požadované


3.1 standardní pozice

3.2 Odsávání na levé straně

3.3 Odsávání na pravé straně


Značka na krytu musí přesně sedět na značce na prsním nástavci. Poté otočte kryt ve směru hodinových ručiček.

4. Rukojeť je namontována k úchytky membrány tak, aby působila tlak při odsávání.

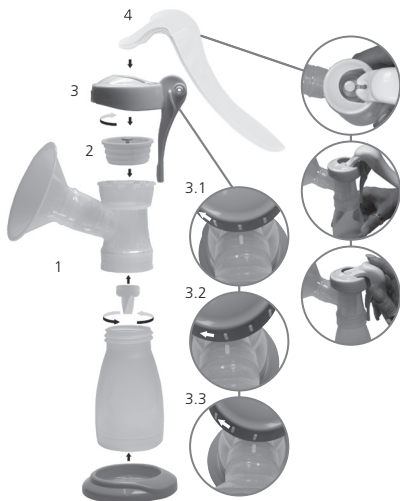

3.2 Odsávání



- Před používáním si vždy umyjte ruce. Pohodlně se posadte a uvolněte se.
- Otočte víčko s páčkou do požadované pozice.
- Bradavka by měla být ve středu nástavce tak, aby se mohla volně pohybovat, když vzniká za pomoci páčky podtlak.
- Upravení síly sání: Čím více páčku stlačujete, tím je síla sání vyšší. (Obr. 1)
- Upravení rychlosti: Čím rychleji páčku stlačujete, tím je rytmus odsávání vyšší. (Obr. 2)
- Naše doporučení: Začít s rychlým intervalem a nízkou silou sání, aby se stimuloval tok mateřského mléka. Jakmile mléko začíná vytékat, snižte rychlost intervalu a naopak zvýšte sílu sání.

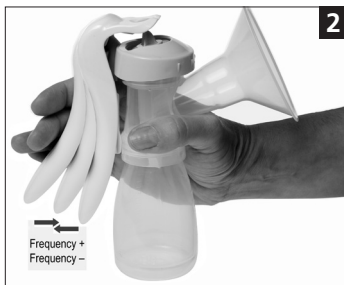

3.3 Výběr prsního nástavce a masážní vložka Optiflow

Pokud se bradavka nepříjemně tře o vnitřní část v trychtýřku, použijte širší prsní nástavec/nebo vložku prsního nástavce. Pokud se do trychtýřku dostává i dvorec bradavky, použijte menší prsní nástavec. Masážní vložka OptiFlow může být použita pouze s prsním nástavcem o velikosti 31 mm.

28 mm breast shell insert Optiflow

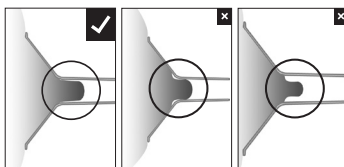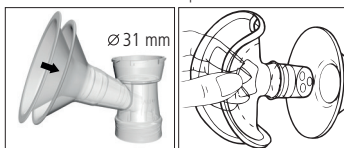

4. Skladování mateřského mléka:

- pokojová teplota: 3-4 hodiny při maximálně 25°C
- v lednici: 3 dny při maximálně 4°C
- v mrazničce s dvířky: 6 měsíců při méně než -16°C

5. Čištění/sterilizace

Doma: Po každém použití pečlivě umyjte a opláchněte. Jednou denně prsní odsávačku rozloženou na jednotlivé části vyvařte po dobu 10 minut, umyjte v myčce, v parním sterilizátoru, nebo vložte do sterilizačního sáčku a sterilizujte v mikrovlnné troubě. Osušte a překryjte čistou utěrkou. Ventil nečistěte kartáčkem. Kryt na odsávání, páčku a stojan na láhev očistěte hadříkem. Tyto části mohou, ale nemusí být vyvařovány.

Čištění v nemocnici: Jediné části sterilizujte 20 minut při 121°C nebo 5 minut při 134°C. Kryt na odsávání, páčku a stojan na láhev otřete desinfekční utěrkou. Tyto části mohou, ale nemusí být sterilizovány.

6. Možné problémy a jejich řešení:

Slabý nebo žádný podtlak:

- Ujistěte se, že odsávačka Amaryll je dobře složená a není nikde poškozená.
- Zkontrolujte, zda není ventil slepený nebo poškozený.
- Zkontrolujte, zda je kryt pro odsávání pevně nasazený.

Bolest při odsávání:





- Ujistěte se, že je bradavka uprostřed prsního nástavce.
- Zkontrolujte, zda máte správnou velikost prsního nástavce.
- Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na odbornou pomoc.





7. Kontaindikace:

Nejsou známy žádné.

8. Bezpečnostní pokyny:

Používejte jen umytou či sterilizovanou prsní odsávačku. Po čištění zkontrolujte, zda není nikde poškozená.

 M	Materiál: Polypropylen (PP), Silikon
	Teplota: při činnosti +40 až -10°C; doprava +50 až -20°C
	Likvidace: Zlikvidujte v souladu s místními zákony o likvidaci odpadu.
	Balení: Pozor, křehké.

	Relativní vlhkost: 20-95%
	Tlak vzduchu: 900 – 1060 hPa
	Skladujte mimo zdroj tepla
	Skladujte mimo zdroj vlhkosti

Optiflow skladujte na tmavém místě (jedná se o silikon).

