



1.)

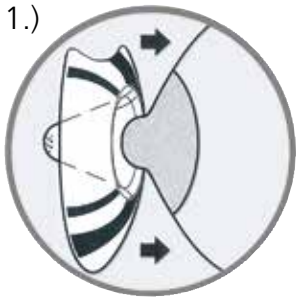

2.)

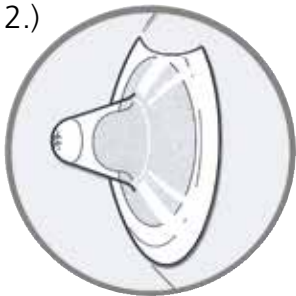

 **ARDO**



Ardo medical AG
Gewerbstrasse 19
6314 Unterägeri
Switzerland
T +41(0)41 754 70 70
F +41(0)41 754 70 71
info@ardo.ch
www.ardomedical.com

CE 0123 Class IIa

NÁVOD K POUŽITÍ

TULIPS

KOJÍCÍ KLOBOUČKY



 **ARDO**

12.2016

Kojící kloboučky **TULIPS** Návod k použití

Obsah balení:

2 silikonové kloboučky velikost M (20 mm) nebo L (24mm), skladovací krabička, návod k použití.

Indikace:

Tulips kojící kloboučky jsou vhodné pro krátkodobé použití na podporu přísátí a k ochraně bolavé, citlivé bradavky při kojení.

Použití:

1. Před použitím si vždy nejprve umyjte ruce mýdlem a opláchněte.
2. Navlhčete vnitřek kloboučku trochou mateřského mléka, vodou nebo Lanolinem (např. ARDO Gold Cream), aby lépe přilnul k prsu. Ohněte okraje kloboučku směrem ven a přiložte ho tak, aby bradavka byla uprostřed a vykrojená strana byla nahoře (Obr. 1). Ta umožňuje, aby se nos miminka přímo dotýkal maminčiny pokožky.
3. Ohněte okraje kloboučku zpět, aby celý klobouček přilnul k prsu (Obr. 2).

Doporučení:

Používejte kojící kloboučky jen v době kojení. Poté je sejměte a umyjte podle pokynů. Častá sterilizace urychluje opotřebení materiálu. Před vložením do skladovací krabičky nechte kloboučky oschnout. Pokud uvidíte jakýkoliv náznak poškození, přestaňte kloboučky používat. Kloboučky a ostatní příslušenství skladujte mimo dosah dětí. V případě jakýchkoli dotazů, kontaktujte zdravotnický personál.

Čištění a sterilizace:

Doma: Před prvním použitím povařte ve vodě po dobu 10 minut, poté jednou denně. Po každém použití umyjte klobouček v mýdlové vodě, opláchněte a položte na utěrku, aby se osušil. Kloboučky i skladovací krabičku je možné mýt v myčce.

Čištění v nemocnici: Sterilizujte 20 minut při 121°C, 18 minut při 134°C nebo tepelnou desinfekcí 10 min při 93°C. Skladovací krabičku čistěte tepelnou desinfekcí 10 min při 93°C.

Likvidace:

Podle místních vyhlášek.