

Dezinfekční vlhčené ubrousky STERIMED 100

Popis:

Vlhčené dezinfekční utěrky pro dezinfekci povrchů, drobného vybavení a neinvazivních lékařských nástrojů (tlakové snímače, kabely, glykemické testy, UZ sondy, atd.) a otření endoskopických pouzder než se ponoří do dezinfekční lázně. Silné ubrousky s jemnými vlákny jsou 100% biodegradabilní. Lze je použít i na údržbu inkubátorů, pokud není přítomno dítě.

Aktivní složky:

Ethanol (< 4%), Isopropanol (< 1%), Benzalkoniumchlorid, Trideceth -7

Účinnost:

- **Baktericidní** v souladu s normami EN 1040, EN 1276, EN 13697, EN14561 (i SARM) 5min
- **Tuberkulocidní** (Mycobacterium Terrae) v souladu s normami EN14348 a EN14563 15min
- **Fungicidní** (Aspergillus Niger) v souladu s normami EN 1275, EN 13697 a EN14562 5min
- **Mykobaktericidní** (Candida Albicans) v souladu s normami EN 1275, EN 1650, EN 13624, EN 13697 a EN14562 – 5min
- **Virucidní** v souladu s normami EN 14476 (HSV – 5min, Coronavirus, H1N1, HBC, HCV, Adenovirus, VRS, Polyomavirus, Norovirus – 1min, Rotavirus – 15min

Návod k použití:

Otevřete plastový kryt a odstraňte etiketu přelepenou přes otvor. Povytáhněte první ubrousek. Po použití vždy dobře uzavřete. Výrobek je připraven k jednorázovému použití. Opláchnutí je nutné jen v případě, že předmět bude v kontaktu se sliznicí. Usychá rychle a nenechává žádná rezidua. Spotřebujte do 3 měsíců od otevření balení.

Upozornění:

Před prvním použitím si přečtěte bezpečnostní informace.
Dermatologicky testováno.