

Lampe Blanchiment Dentaire

Fiche Notice



NIGHTN'GO

Merci d'avoir choisi NIGHTN°GO et bienvenue sur la notice d'utilisation de la Lampe Blanchiment Dentaire.

© TOUS DROITS RÉSERVÉS NIGHTN°GO
REPRODUCTION INTERDITE

Ceci n'est pas une formation mais une notice d'utilisation.
La formation détaillée est réservée aux clients ayant acquis l'appareil.

Notre vocation est de former tous les passionnés de l'esthétique. Nous proposons divers partenariats, destinés aux centres de formation, aux instituts de beauté formateurs et aux distributeurs.

Intéressé(e)s ? Contactez-nous à:
commercial@nightngo.fr



La norme «Conformité Européenne» est apposée sur l'appareil. Il est donc conforme aux normes européennes de protection de l'environnement, de la santé et de sécurité applicables dans sa catégorie de produits.

Pour avoir de plus amples renseignements, vous pouvez nous contacter par email ou téléphone:

- Email: contact@nightngo.fr
- Téléphone: 04 . 69 . 96 . 62 . 00

NIGHTN°GO

26 rue des Moulins à Huile
34300 Agde

NIGHTN°GO

65 rue Théodore Honoré
94130 Nogent-Sur-Marne

www.nightngo.fr



Visitez nos showrooms dans le Sud et le Nord de la France:

CARACTÉRISTIQUES

1 Corps principal

2 Barre


3 Socle

4 Protection

5 Clé


6 Cordon d'alimentation

7 Assembleur

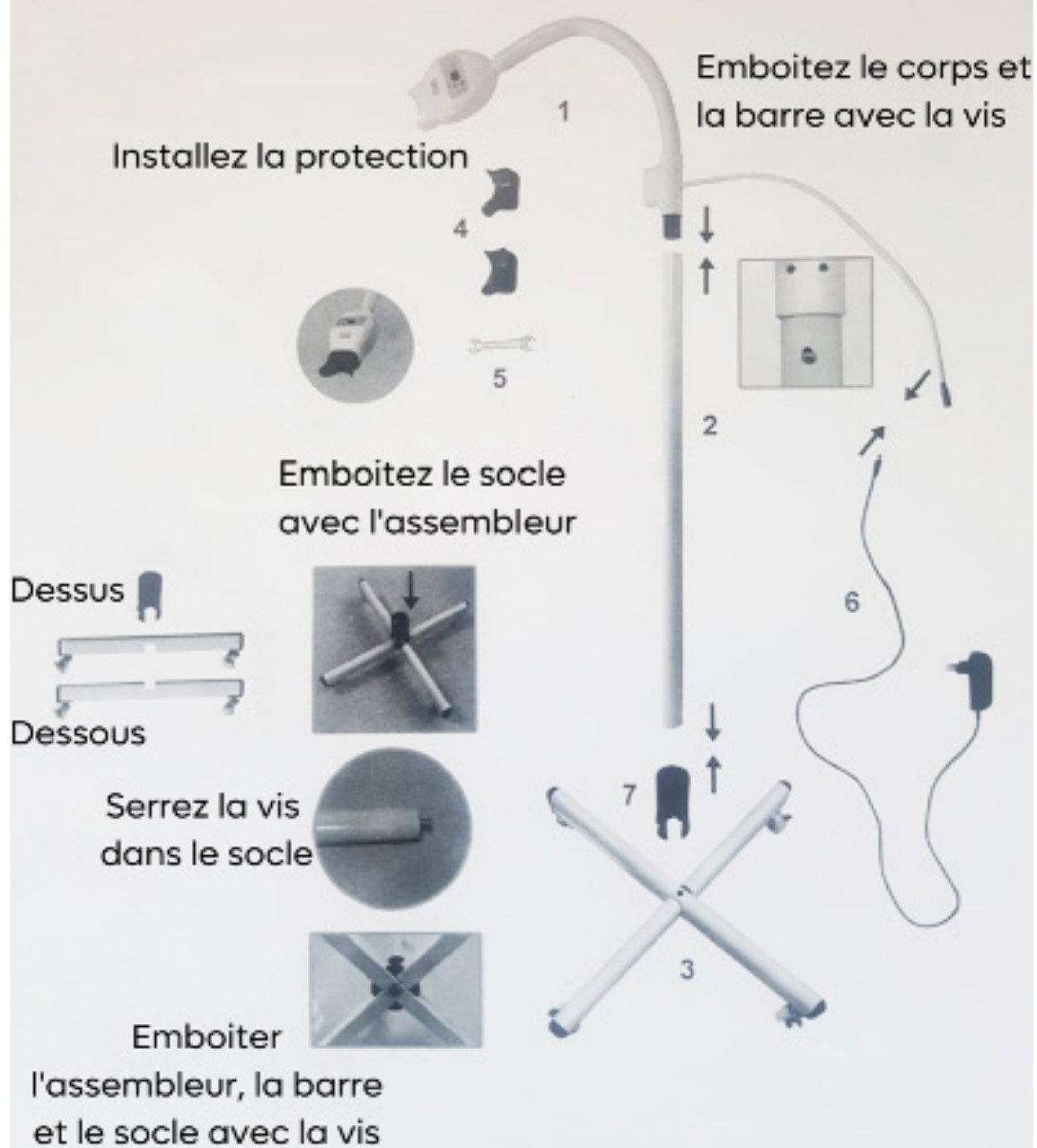


UTILISATION


ÉCRAN PRINCIPAL

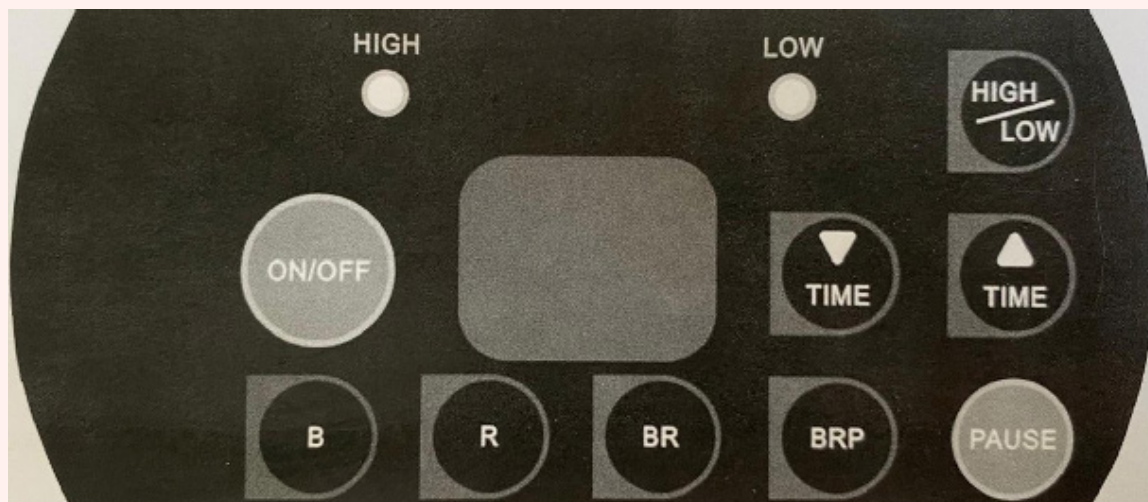

1. Connectez le cordon d'alimentation et branchez-le à la prise courant.

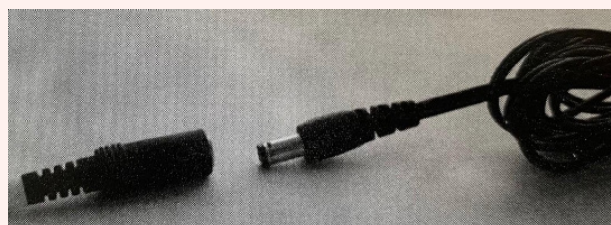

2. Appuyez sur le bouton [**ON/OFF**] pour allumer et éteindre l'écran principal. Remarque: la lampe émettra un «bip» chaque minute et 3 «bips» en fin de séance.

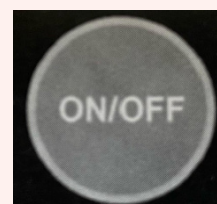


UTILISATION (SUITE)

3. Appuyez sur le bouton TIME [▲] ou [▼] pour augmenter ou diminuer le temps (0-30 minutes).



- 3 minutes pour la protection des gencives.
- 15 minutes (renouvelable 3 fois) pour le gel de blanchiment dentaire.
- 5 minutes pour le gel désensibilisant.

4. Contrôler le temps sur l'écran principal.

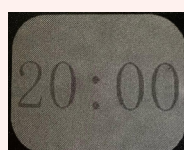


5. Appuyez sur le bouton [HIGH/LOW] pour choisir la puissance.




- Haute puissance: 100%
- Basse puissance: 50%

6. Contrôler la puissance sur l'écran principal.

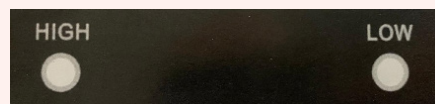

7. Appuyez sur le bouton de la couleur souhaitée pour choisir une couleur.

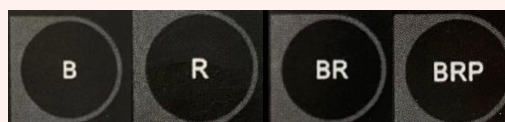

- Le bouton (B) couleur bleue pour la protection des gencives et le gel de blanchiment dentaire.
- Le bouton (R) couleur rouge pour le gel désensibilisant.
- Le bouton (BR) pour la combinaison de la couleur bleue et rouge.
- Le bouton (BRP) pour la combinaison de la couleur bleue, rouge et violette (purple en anglais d'où le «P» de BRP).

8. Appuyez de nouveau sur le bouton de la couleur utilisée pour la désélectionner.

9. Appuyez sur le bouton [PAUSE] pour mettre en pause.

Lampe Blanchiment Dentaire

Fiche Technique



NIGHTN'GO

Spécificités & Caractéristiques

Type d'appareil	Lampe blanchiment dentaire
Pilotage de l'appareil	Non-tactile
Couleurs	Blanc et noir
Dimensions zones des LEDs	33 * 74 cm
Poids net	5 kg
Fréquence	50 / 60 Hz
Voltage	220 V
Puissance	46 W
Longueur d'onde	Bleu: 430 - 490 nm Rouge: 620 - 640 nm Violet: 380 nm
Certification	CE, FDA, ROHS
Matières de l'appareil	ABS plastique et métal
Zones de traitement	Dents et gencives
Certification	CE, FDA, ROHS
Accessoires inclus	Lunettes de protection Câble d'alimentation

Lampe Blanchiment Dentaire

Fiche Légale



NIGHTN'GO

Conditions de Sécurité Générales

- Nous vous recommandons de bien conserver ce fascicule pour pouvoir le consulter ultérieurement.
- N'utilisez l'appareil que si vous avez pris intégralement connaissance de la notice d'utilisation.
- Ne pas utiliser sur les enfants de moins de 18 ans et sur les animaux.
- Ne pas utiliser sur les personnes dont leurs capacités sont altérées et dont leur consentement n'a pas été

La norme «Conformité Européenne» est apposée sur l'appareil. Il est donc conforme aux normes européennes de protection de l'environnement, de la santé et de sécurité applicables dans sa catégorie de produits.



Le non-respect de ces consignes de sécurité rend nulle la responsabilité de NIGHTN°GO.

www.nightngo.fr
Email: contact@nightngo.fr
Téléphone: 04 . 69 . 96 . 62 . 00

Visitez nos showrooms dans le Sud et le Nord de la France:

NIGHTN°GO
26 rue des Moulins à Huile
34300 Agde

NIGHTN°GO
65 rue Théodore Honoré
94130 Nogent-Sur-Marne

Suivez-nous sur les réseaux sociaux:



NIGHTN°GO

Respect des Conditions d'Installation et de Stockage

- Respectez les conditions de stockage de l'appareil, des produits et de ses accessoires.
- Respectez les informations données dans le protocole de formation et les instructions d'installation.
- Ne pas déposer d'objets sur l'appareil ou ses accessoires.
- Installez l'appareil sur une surface lisse et stable au risque de faire tomber l'appareil et de l'endommager fortement.
- Ne pas recouvrir les aérations de l'appareil.
- Ne pas installer l'appareil proche d'une source de chaleur.
- Ne pas installer l'appareil proche d'un point d'eau ou dans un endroit humide ou susceptible de recevoir de l'eau.
- Ne pas exposer l'appareil directement au soleil.
- Installez l'appareil dans un endroit dont la température est comprise entre 5°C et 40°C.
- Ne pas laisser allumer l'appareil sans surveillance.
- Éteignez puis débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Tenez les enfants de moins de 18 ans hors de portée de l'appareil.

Respect des Conditions d'Utilisation et de Branchement

- Retirez l'intégralité de l'emballage et vérifiez l'état de l'appareil.
- Ne branchez et n'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé.
- Restez toujours vigilant lorsque vous déplacez l'appareil car il est relativement lourd et ne le transportez pas en le tenant par le fil électrique.
- Ne branchez l'appareil que lorsque toutes les vérifications ont été faites.
- Ne branchez, ne débranchez et n'utilisez jamais l'appareil avec les mains ou le corps humides ou mouillés.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le fil du câble électrique.
- Ne vous servez pas de l'appareil pour une utilisation autre que celle pour laquelle il est prévu.
- Vérifiez que la prise d'alimentation est en bon état et que celle-ci est compatible avec l'appareil (bon voltage).
- Vérifiez que le réseau électrique local respecte la tension et la fréquence indiquées sur l'étiquette de l'appareil.
- Ne jetez jamais l'appareil sur la voie publique mais le déposer soit chez votre fournisseur soit dans une décharge publique et dans ce cas couper le câble d'alimentation afin d'éviter tout risque de blessure pour autrui.



NIGHTN°GO

Respect des Gestes d'Urgence et de Secours

- Si une personne pendant le traitement ou soin avec l'appareil réagit mal alors cessez toute utilisation ou adaptez le traitement en fonction de son état.
- Appelez le 18 ou le 15 et suivez leurs instructions (visite chez un médecin ou autres directives) en cas de brûlures graves ou de toutes autres réactions importantes et anormales.
- Respectez les règles d'hygiène de l'Agence Régionale de Santé (ARS).
- Placez la personne en position latérale de sécurité (PLS) et effectuez les premiers gestes de secours en cas de survenance d'une réaction grave avant d'appeler le 18 ou le 15.
- Rendez-vous aux urgences ou consultez un médecin en cas de réactions cutanées graves ou d'effets secondaires graves ou persistants dans les jours suivant le traitement.

Respect des Gestes d'Hygiène et de Sécurité

- Respectez la fréquence et la méthode de désinfection indiquée.
- Respectez les contre-indications.
- Utilisez un dispositif de protection adapté pour utiliser l'appareil.
- Portez des gants en latex, en vinyle ou en silicone pendant la manipulation de l'appareil en prenant en considération les allergies des clients.
- Aucun bijou et accessoire ne doit être porté par le praticien et le client.
- Ne dépassez pas la durée d'utilisation prescrite par séance et par traitement.
- Respectez les temps de repos prescrits entre chaque séance et chaque traitement.
- Respectez les temps de pause de l'appareil.
- Assurez-vous que la personne ne soit pas allergique aux composants et matériaux de l'appareil et des accessoires utilisés ainsi qu'aux ingrédients des produits utilisés.
- Adaptez l'intensité selon le confort de la personne.
- Respectez l'intensité indiquée pour chaque zone du corps.
- Établissez un diagnostic approfondi du client avant tout traitement: antécédents, traitements, maladies, allergies, anatomie de la peau, des dents et autres.
- Examinez la peau du client avant de commencer afin de déterminer s'il peut recevoir le traitement.
- Assurez-vous que les personnes souffrant d'asthme ou de toute autre maladie nécessitant une présence permanente d'un traitement l'aient sur elles en cas de crise.

Spécificités du Blanchiment Dentaire

- Le praticien et le client doivent porter des lunettes de protection pendant tout le traitement.
- Protégez minutieusement l'épiderme et les membranes muqueuses.

Contre-Indications Ne pas Utiliser l'Appareil sur:

- Les femmes enceintes ou allaitantes.
- Ne pas effectuer de blanchiment dentaire sur les personnes souffrant de maladies parodontales (émail détérioré ou fissuré, caries dentaires ou autres).
- Ne pas effectuer de blanchiment dentaire sur les personnes diabétiques.
- Ne pas effectuer de blanchiment dentaire sur les personnes présentant des dents avec des obturations volumineuses ou non étanches, des dents obturées à l'amalgame (compte tenu de la libération de vapeurs de mercure provoquée par l'action des peroxydes sur les amalgames).

En règle générale, il est impératif:

- Les personnes porteuses d'un appareil médical doivent absolument en parler avec leur médecin afin de savoir si les caractéristiques de l'appareil sont compatibles avec le traitement.
- Les personnes atteintes d'une quelconque maladie doivent absolument en parler avec leur médecin afin de savoir si les caractéristiques de leur maladie sont compatibles avec le traitement.

