

Masque Luminothérapie Photothérapie

Fiche Notice



NIGHTN'GO



Merci d'avoir choisi NIGHTN°GO et bienvenue sur la notice d'utilisation de Masque Luminothérapie.

© TOUS DROITS RÉSERVÉS NIGHTN°GO
REPRODUCTION INTERDITE

Ceci n'est pas une formation mais une notice d'utilisation.
La formation détaillée est réservée aux clients ayant acquis l'appareil.

Notre vocation est de former tous les passionnés de l'esthétique. Nous proposons divers partenariats, destinés aux centres de formation, aux instituts de beauté formateurs et aux distributeurs.

Intéressé(e)s ? Contactez-nous à:
commercial@nightngo.fr



La norme «Conformité Européenne» est apposée sur l'appareil. Il est donc conforme aux normes européennes de protection de l'environnement, de la santé et de sécurité applicables dans sa catégorie de produits.

Pour avoir de plus amples renseignements, vous pouvez nous contacter par email ou téléphone:

- Email: contact@nightngo.fr
- Téléphone: 04 . 69 . 96 . 62 . 00

NIGHTN°GO

26 rue des Moulins à Huile
34300 Agde

NIGHTN°GO

65 rue Théodore Honoré
94130 Nogent-Sur-Marne


www.nightngo.fr



Visitez nos showrooms dans le Sud et le Nord de la France:

UTILISATION

TÉLÉCOMMANDE PRINCIPALES

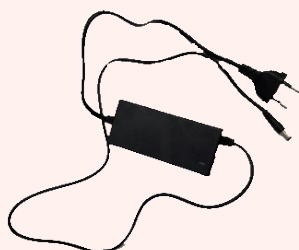

écran de contrôle

1. Branchez le cordon d'alimentation.
2. Branchez le cordon d'alimentation à la télécommande.
3. Raccordez la télécommande au masque.

4. Appuyez sur le bouton Time [▲] ou Time [▼] pour augmenter/diminuer le temps (1-30 minutes). Remarque: le temps est pré-réglé sur 30 minutes, il est affiché sur l'écran de contrôle.



5. Appuyez sur le bouton Color Select/Start [●] pour choisir la couleur qui sera affichée sur l'écran de contrôle.




C0: aucune - **C1:** rouge - **C2:** bleu - **C3:** vert

C4: violet - **C5:** vert clair **C6:** bleu clair

C7: blanche - **C8:** toutes les couleurs qui changent automatiquement

6. Appuyez sur le bouton Flicker [●] pour choisir le mode d'émission des couleurs qui sera affiché sur l'écran de contrôle.

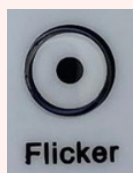


F1: continu - **F2:** discontinu vitesse rapide


F3: discontinu vitesse intermédiaire

F4: discontinu vitesse lente

7. Appuyez sur le bouton Microelectronics [▲] ou [▼] pour augmenter/diminuer l'électro-stimulation musculaire.

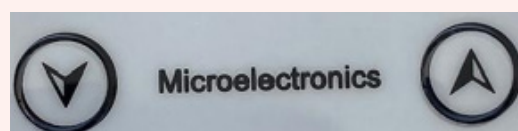

8. Appuyez sur le bouton Brightness [●] pour augmenter/diminuer l'intensité de la luminosité des LED.

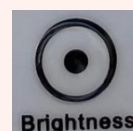

A1 à A9

Masque Luminothérapie Photothérapie

Fiche Technique



NIGHTN'GO



Spécificités & Caractéristiques

Type d'appareil	Masque luminothérapie
Pilotage de l'appareil	Télécommande
Couleur dominante	Violet Claire
Dimensions	24 * 12 * 20 cm
Poids net	1.5 kg
Fréquence	50/60 Hz
Voltage	110/220 V
Puissance	20 W
Certification	CE, FDA, ROHS
Matières de l'appareil	ABS plastique
Zones de traitement	Visage et corps
Certification	CE, FDA, ROHS
Accessoires inclus	Tournevis Télécommande Tournevis
Longueurs d'ondes	Rouge: 640 nm Jaune: 590 nm Vert: 520 nm Bleu: 470 nm Bleu clair: 490 nm Violet: 380 nm Laser (Blanche): 950 nm

Lampe Luminothérapie Photothérapie

Fiche Légale



NIGHTN'GO



Conditions de Sécurité Générales

- Nous vous recommandons de bien conserver ce fascicule pour pouvoir le consulter ultérieurement.
- N'utilisez l'appareil que si vous avez pris intégralement connaissance de la notice d'utilisation.
- Ne pas utiliser sur les enfants de moins de 18 ans et sur les animaux.
- Ne pas utiliser sur les personnes dont leurs capacités sont altérées et dont leur consentement n'a pas été

La norme «Conformité Européenne» est apposée sur l'appareil. Il est donc conforme aux normes européennes de protection de l'environnement, de la santé et de sécurité applicables dans sa catégorie de produits.



Le non-respect de ces consignes de sécurité rend nulle la responsabilité de NIGHTN°GO.

www.nightngo.fr
Email: contact@nightngo.fr
Téléphone: 04 . 69 . 96 . 62 . 00

Visitez nos showrooms dans le Sud et le Nord de la France:

NIGHTN°GO
26 rue des Moulins à Huile
34300 Agde

NIGHTN°GO
65 rue Théodore Honoré
94130 Nogent-Sur-Marne

Suivez-nous sur les réseaux sociaux:



NIGHTN°GO

Respect des Conditions d'Installation et de Stockage

- Respectez les conditions de stockage de l'appareil, des produits et de ses accessoires.
- Respectez les informations données dans le protocole de formation et les instructions d'installation.
- Ne pas déposer d'objets sur l'appareil ou ses accessoires.
- Installez l'appareil sur une surface lisse et stable au risque de faire tomber l'appareil et de l'endommager fortement.
- Ne pas recouvrir les aérations de l'appareil.
- Ne pas installer l'appareil proche d'une source de chaleur.
- Ne pas installer l'appareil proche d'un point d'eau ou dans un endroit humide ou susceptible de recevoir de l'eau.
- Ne pas exposer l'appareil directement au soleil.
- Installez l'appareil dans un endroit dont la température est comprise entre 5°C et 40°C.
- Ne pas laisser allumer l'appareil sans surveillance.
- Éteignez puis débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Tenez les enfants de moins de 18 ans hors de portée de l'appareil.

Respect des Conditions d'Utilisation et de Branchement

- Retirez l'intégralité de l'emballage et vérifiez l'état de l'appareil.
- Ne branchez et n'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé.
- Restez toujours vigilant lorsque vous déplacez l'appareil car il est relativement lourd et ne le transportez pas en le tenant par le fil électrique.
- Ne branchez l'appareil que lorsque toutes les vérifications ont été faites.
- Ne branchez, ne débranchez et n'utilisez jamais l'appareil avec les mains ou le corps humides ou mouillés.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le fil du câble électrique.
- Ne vous servez pas de l'appareil pour une utilisation autre que celle pour laquelle il est prévu.
- Vérifiez que la prise d'alimentation est en bon état et que celle-ci est compatible avec l'appareil (bon voltage).
- Vérifiez que le réseau électrique local respecte la tension et la fréquence indiquées sur l'étiquette de l'appareil.
- Ne jetez jamais l'appareil sur la voie publique mais le déposer soit chez votre fournisseur soit dans une décharge publique et dans ce cas couper le câble d'alimentation afin d'éviter tout risque de blessure pour autrui.



NIGHTN°GO

Respect des Gestes d'Urgence et de Secours

- Si une personne pendant le traitement ou soin avec l'appareil réagit mal alors cessez toute utilisation ou adaptez le traitement en fonction de son état.
- Appelez le 18 ou le 15 et suivez leurs instructions (visite chez un médecin ou autres directives) en cas de brûlures graves ou de toutes autres réactions importantes et anormales.
- Respectez les règles d'hygiène de l'Agence Régionale de Santé (ARS).
- Placez la personne en position latérale de sécurité (PLS) et effectuez les premiers gestes de secours en cas de survenance d'une réaction grave avant d'appeler le 18 ou le 15.
- Rendez-vous aux urgences ou consultez un médecin en cas de réactions cutanées graves ou d'effets secondaires graves ou persistants dans les jours suivant le traitement.

Respect des Gestes d'Hygiène et de Sécurité

- Respectez la fréquence et la méthode de désinfection indiquée.
- Respectez les contre-indications.
- Utilisez un dispositif de protection adapté pour utiliser l'appareil.
- Portez des gants en latex, en vinyle ou en silicone pendant la manipulation de l'appareil en prenant en considération les allergies des clients.
- Aucun bijou et accessoire ne doit être porté par le praticien et le client.
- Ne dépassez pas la durée d'utilisation prescrite par séance et par traitement.
- Respectez les temps de repos prescrits entre chaque séance et chaque traitement.
- Respectez les temps de pause de l'appareil.
- Assurez-vous que la personne ne soit pas allergique aux composants et matériaux de l'appareil et des accessoires utilisés ainsi qu'aux ingrédients des produits utilisés.
- Adaptez l'intensité selon le confort de la personne.
- Respectez l'intensité indiquée pour chaque zone du corps.
- Établissez un diagnostic approfondi du client avant tout traitement: antécédents, traitements, maladies, allergies, anatomie de la peau, des dents et autres.
- Examinez la peau du client avant de commencer afin de déterminer s'il peut recevoir le traitement.
- Assurez-vous que les personnes souffrant d'asthme ou de toute autre maladie nécessitant une présence permanente d'un traitement l'aient sur elles en cas de crise.

Spécificités du Masque Luminothérapie

- Portez les lunettes de protection durant le traitement.

Contre-Indications Ne pas Utiliser l'Appareil sur:

- Les femmes enceintes ou allaitantes.
- Les personnes sous traitement de médicaments photosensibilisants.
- Les personnes atteintes d'autisme.
- Les personnes atteintes d'une pathologie ophtalmique tels que cataracte, glaucome ou autres.

Impératifs en Cas de Panne

- Ne réparez rien vous-même en cas de panne.
- N'ouvrez pas l'appareil ou ses accessoires en cas de panne.

En règle générale, il est impératif:

- Les personnes porteuses d'un appareil médical doivent absolument en parler avec leur médecin afin de savoir si les caractéristiques de l'appareil sont compatibles avec le traitement.
- Les personnes atteintes d'une quelconque maladie doivent absolument en parler avec leur médecin afin de savoir si les caractéristiques de leur maladie sont compatibles avec le traitement.

