

# Thermhydro Hydro & Micro Dermabrasion

Fiche Notice



**NIGHTN'GO**

# Merci d'avoir choisi NIGHTN°GO et bienvenue sur la notice d'utilisation du Thermhydro.

© TOUS DROITS RÉSERVÉS NIGHTN°GO  
REPRODUCTION INTERDITE

Ceci n'est pas une formation mais une notice d'utilisation.  
La formation détaillée est réservée aux clients ayant acquis l'appareil.

Notre vocation est de former tous les passionnés de l'esthétique. Nous proposons divers partenariats, destinés aux centres de formation, aux instituts de beauté formateurs et aux distributeurs.

Intéressé(e)s ? Contactez-nous à:  
commercial@nightngo.fr



**La norme «Conformité Européenne» est apposée sur l'appareil. Il est donc conforme aux normes européennes de protection de l'environnement, de la santé et de sécurité applicables dans sa catégorie de produits.**

Pour avoir de plus amples renseignements,  
vous pouvez nous contacter par email ou téléphone:

- Email: [contact@nightngo.fr](mailto:contact@nightngo.fr)
- Téléphone: 04 . 69 . 96 . 62 . 00

## NIGHTN°GO

26 rue des Moulins à Huile  
34300 Agde

## NIGHTN°GO

65 rue Théodore Honoré  
94130 Nogent-Sur-Marne

Visitez nos  
showrooms dans le  
Sud et le Nord de la  
France:

[www.nightngo.fr](http://www.nightngo.fr)



# CARACTÉRISTIQUES

Le Thermhydro est la technologie la plus aboutie de soin du visage. Il combine plusieurs fonctionnalités, offrant un soin profond et efficace du visage en moins d'une heure. Son pilotage se fait via un écran tactile. Son usage convient aux professionnels et aux particuliers mais est plus adapté pour les professionnels. Il se caractérise par ses traitements personnalisables et est connu pour ses résultats exceptionnels.

Le Thermhydro a spécialement été conçu par NIGHTN°GO pour une utilisation performante et durable. Tous les matériaux ont été choisis avec soin, en privilégiant leur qualité et leur résistance.

Le Thermhydro comprend 10 sondes dont les intensités sont réglables, permettant une adaptation au ressenti des clients.

**Sonde Hydro Dermabrasion**

**Sonde Micro Dermabrasion**

**Sonde Jet Peel**

**Sonde Épurateur de Peau Ultrasons**

**Sonde Micro-Courant (1)**

**Sonde Micro-Courant (2)**

**Sonde Radiofréquence Bipolaire**

**Sonde Radiofréquence Tripolaire**

**Sonde Photo-Électrique Bio (1)**

**Sonde Photo-Électrique Bio (2)**

# TRAITEMENT

Le Thermhydro est un traitement indolore et non-invasif. Il utilise les pouvoirs de guérison naturels de l'eau, de l'oxygène combinés à de puissants nutriments tels que des antioxydants, des peptides et de l'acide hyaluronique. Il consiste en un soin du visage de 30 minutes, composé de 3 étapes qui vont tour à tour nettoyer, désincruster et hydrater la peau.

Ce dernier, largement développé aux États-Unis, connaît depuis quelques années en France, un engouement qui ne cesse de s'accroître. Les adeptes en sont de plus en plus nombreux. Il convient également aux peaux sensibles. Il ne provoque aucun dommage épidermique, et n'entraîne aucune éviction sociale.

- **L'hydro dermabrasion** utilise un embout vortex à double hélice. Un tuyau de la sonde va attirer les cellules mortes et la saleté de la peau tandis que l'autre va projeter des nutriments. Note: La sonde possède plusieurs embouts vortex.
- **La micro dermabrasion** utilise une fraise de diamants pour éliminer les cellules mortes. La sonde a une double action, elle va aspirer les impuretés tout en injectant les différentes lotions dans la peau. Note: La sonde possède plusieurs embouts diamants.
- **L'épurateur cutané** utilise la vibration ultrasonique pour éliminer les cellules mortes et stimuler la production de fibroblastes. Il réalise aussi une infusion cutanée de principes actifs.
- **Le micro-courant** utilise un faible niveau d'électricité qui reproduit les impulsions électriques naturelles du corps pour relancer le métabolisme cellulaire et lutter contre le vieillissement cutané.
- **La photo-électricité bio** utilise des ultrasons et le mécanisme de contraction pour améliorer le métabolisme cellulaire et régénérer les tissus.
- **La radiofréquence** utilise des ondes électromagnétiques qui produisent de la chaleur pour stimuler la production de fibroblastes. Elle raffermi considérablement les tissus cutanés et lutte contre le vieillissement cutané.

# UTILISATION



1. Branchez le cordon d'alimentation.
2. Allumez l'appareil via le bouton **[ON/OFF]** situé au dos de l'appareil.
3. Remplissez les bouteilles situées sur le flanc gauche de l'appareil.

## **Remarque:**

Diluez une solution de 50 ml avec 300 à 500 ml d'eau pure selon la concentration souhaitée.

Plusieurs interfaces de l'écran:

**HYDRA DERMABRASION / DIAMOND DERMABRASION**

**OXYGEN SPRAY GUN**

**SKIN SCRUBBER**

**BIO**

**BIPOLAR RF / THREE POLAR RF**

**BIO PHOTOELECTRIC**

# HYDRO & MICRO DERMABRASION



L'HYDRO DERMABRASION (aussi appelée Hydra Dermabrasion) va décoller les cellules mortes par l'intermédiaire d'un jet supersonique. La MICRO DERMABRASION va éliminer les couches superficielles par l'intermédiaire d'une fraise de diamants.

- Branchez la sonde correspondant au traitement souhaité au dos de l'appareil sur l'emplacement [ **HYDRA** ].
- Choisissez les embouts adaptés selon l'affection cutanée et la zone.
- Sélectionnez [ **HYDRA DERMABRASION / DIAMOND DERMABRASION** ].
- Sélectionnez [ **S1** ], [ **S2** ] ou [ **S3** ] en fonction de la solution souhaitée.
- Réglez l'intensité de l'aspiration via le bouton [ **VACUUM** ] situé sur le flanc droit de l'appareil.
- Réglez le débit d'eau via le bouton [ **FLOW** ] situé sur le flanc droit de l'appareil.
- Réglez la durée du traitement en sélectionnant [ **<** ] ou [ **>** ] sur 10 minutes.
- 
- Sélectionnez [ **▶** ] pour démarrer le traitement.
- 
- Sélectionnez [ **||** ] pour interrompre traitement .
- 
- Sélectionnez [ **⏪** ] pour revenir au menu principal.

# JET PEEL

Le JET PEEL va réaliser une infusion cutanée de principes actifs par l'intermédiaire d'un jet. Il permet la revitalisation instantanée et naturelle de la peau du visage.



- Branchez la sonde correspondant au traitement souhaité au dos de l'appareil sur l'emplacement [ **OXYGÈNE** ].
- Mélangez 2/3 gouttes d'huile essentielle de votre choix avec de l'eau pure dans la réserve de la sonde. L'eau doit représenter 2/3 de la réserve.
- Sélectionnez [ **OXYGEN SPRAY GUN** ].
- Réglez la durée du traitement en sélectionnant [ **<** ] ou [ **>** ] sur 10 minutes.
- Sélectionnez [ **▶** ] pour démarrer le traitement.
- Sélectionnez [ **||** ] pour interrompre traitement .
- Sélectionnez [ **↺** ] pour revenir au menu principal.

# ÉPURATEUR DE PEAU ULTRASONS




L'ÉPURATEUR DE PEAU ULTRASONS va soulever les cellules mortes et va réaliser une infusion cutanée de principes actifs par l'intermédiaire d'ultrasons.

- Branchez la sonde correspondant au traitement souhaité au dos de l'appareil sur l'emplacement [ **SCRUBBER** ].
- Sélectionnez [ **SKIN SCRUBBER** ].
- Allumez la sonde via le bouton [ **ON/OFF** ].
- Utilisez le bouton [ **C** ] pour changer les modes et les énergies:
  - [ **L** ] pour une faible consommation d'énergie et un mode continu,
  - [ **Z** ] pour une consommation d'énergie modérée et un mode continu,
  - [ **H** ] pour une haute consommation d'énergie et un mode continu,
  - [ **?** ] pour une consommation d'énergie modérée et un mode discontinu.
- Utilisez le bouton [ **VOL** ] pour régler l'intensité des ultrasons.
- Réglez la durée du traitement en sélectionnant [ **<** ] ou [ **>** ] sur 10 minutes.
- 
- Sélectionnez [ **▶** ] pour démarrer le traitement.
- 
- Sélectionnez [ **||** ] pour interrompre traitement .
- 
- Sélectionnez [ **⏪** ] pour revenir au menu principal.



## MICRO COURANT

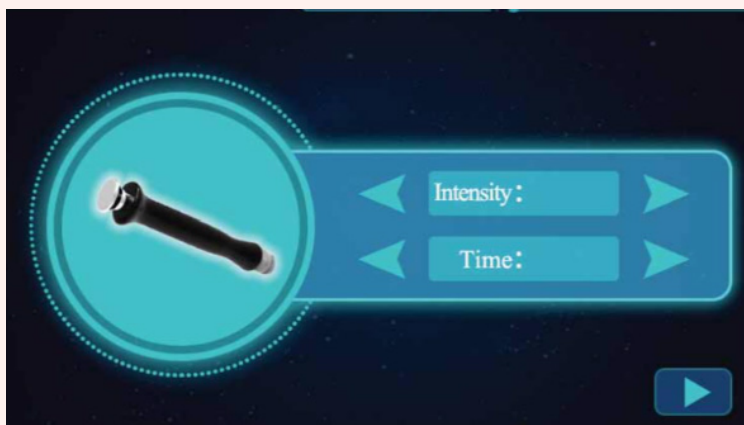


Le MICRO COURANT va réduire les signes du vieillissement cutané par l'intermédiaire d'un courant continu pulsé de faible intensité.

- Branchez la sonde correspondant au traitement souhaité au dos de l'appareil sur l'emplacement **[ BIO ]**. Remarque: les deux sondes fonctionnent simultanément.
- Sélectionnez **[ BIO ]**.
- Réglez l'intensité du micro courant en sélectionnant les flèches **[ < ]** ou **[ > ]**.
- Réglez la durée du traitement en sélectionnant **[ < ]** ou **[ > ]** sur 15 minutes.
- Sélectionnez **[ ▶ ]** pour démarrer le traitement.
- Sélectionnez **[ || ]** pour interrompre traitement.
- Sélectionnez **[ ⏪ ]** pour revenir au menu principal.


# RADIOFRÉQUENCE

La RADIOFRÉQUENCE est un traitement esthétique permettant de raffermir les tissus cutanés et de traiter le relâchement cutané par l'intermédiaire d'émission d'ondes électromagnétiques à très haute fréquence.

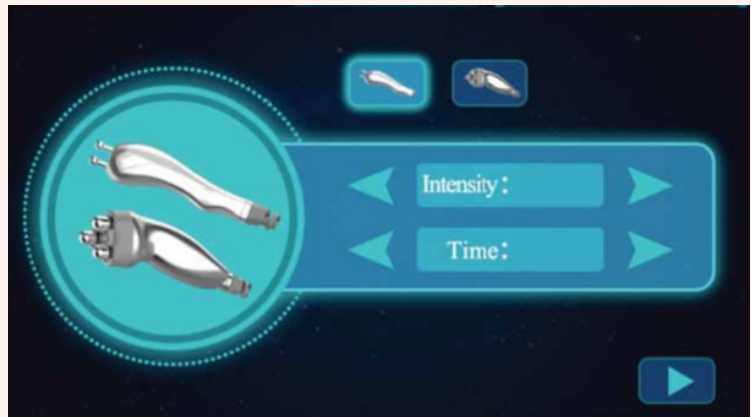

- Branchez la sonde souhaitée au dos de l'appareil sur son emplacement **[ BIPOLAIRE RF ]** ou **[ TRIPOLAIRE RF ]**.
- Sélectionnez **[ BIPOLAR RF/THREE POLAR RF ]**.
- Sélectionnez **[ PHOTO BIPOLAIRE ]** ou **[ PHOTO TRIPOLAIRE ]** selon la sonde souhaitée.
- Réglez l'intensité de la chaleur en sélectionnant **[ < ]** ou **[ > ]**.
- Réglez la durée du traitement en sélectionnant **[ < ]** ou **[ > ]** sur 15 minutes.
- Sélectionnez **[ ▶ ]** pour démarrer le traitement. Appliquez préalablement du gel conducteur sur la zone traitée.
- Sélectionnez **[ || ]** pour interrompre traitement.
- Sélectionnez **[ ⏪ ]** pour revenir au menu principal.

# PHOTO ÉLECTRIQUE

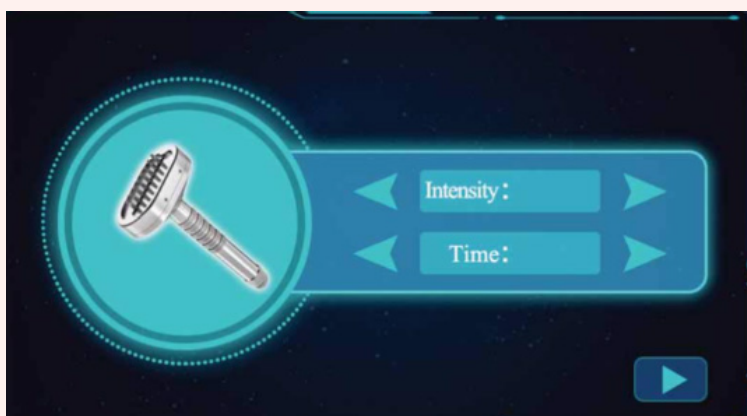

Le traitement PHOTO ÉLECTRIQUE BIO va permettre l'émission de photons sur les tissus cutanés afin de produire une réaction biochimique. Les cellules de la peau sont oxygénées et régénérées, et les imperfections cutanées résorbées.

- Branchez la sonde souhaitée au dos de l'appareil sur son emplacement **[ BIO PHOTO RF ]**.
- Sélectionnez **[ BIO PHOTOELECTRIC ]**.
- Réglez l'intensité des ultrasons en sélectionnant **[ < ]** ou **[ > ]**.
- Réglez la durée du traitement en sélectionnant **[ < ]** ou **[ > ]** sur 20 minutes.
- Sélectionnez **[ ▶ ]** pour démarrer le traitement. Appliquez préalablement du gel conducteur sur la zone traitée.
- Sélectionnez **[ || ]** pour interrompre traitement.
- Sélectionnez **[ ⏪ ]** pour revenir au menu principal.

# Thermhydro Hydro & Micro Dermabrasion

Fiche Technique



**NIGHTN'GO**

# Spécificités & Caractéristiques

Nom de l'appareil	Thermhydro
Type d'appareil	Hydro/Micro Dermabrasion
Type d'écran	Tactile
Couleur	Blanc
Dimensions de l'appareil	63 * 47 * 62 cm
Poids	15 kg
Voltage	220 V
Matière	ABS plastique
Zone de traitement	Visage
Aspiration à vide	1 bar
Certification	CE
Sondes	Hydro dermabrasion Micro dermabrasion Jet peel Épurateur cutané ultrasons Micro-courant x2 Photo-électricité bio x2 Radio fréquence bipolaire Radio fréquence tripolaire
Accessoires inclus	30 filtres 9 embouts micro dermabrasion 9 embouts hydro dermabrasion fins 9 embout hydro dermabrasion larges Câble d'alimentation

# Thermhydro Hydro & Micro Dermabrasion

Fiche Légale



# Conditions de Sécurité Générales

- Nous vous recommandons de bien conserver ce fascicule pour pouvoir les consulter ultérieurement.
- N'utilisez l'appareil que si vous avez pris intégralement connaissance de la notice d'utilisation.
- Ne pas utiliser sur les enfants de moins de 18 ans et sur les animaux.
- Ne pas utiliser sur les personnes dont leurs capacités sont altérées et dont leur consentement n'a pas été

**La norme «Conformité Européenne» est apposée sur l'appareil. Il est donc conforme aux normes européennes de protection de l'environnement, de la santé et de sécurité applicables dans sa catégorie de produits.**



**Le non-respect de ces consignes de sécurité rend nulle la responsabilité de NIGHTN°GO.**

www.nightngo.fr  
Email: contact@nightngo.fr  
Téléphone: 04 . 69 . 96 . 62 . 00

.....  
Visitez nos showrooms dans le Sud et le Nord de la France:

**NIGHTN°GO**  
26 rue des Moulins à Huile  
34300 Agde

**NIGHTN°GO**  
65 rue Théodore Honoré  
94130 Nogent-Sur-Marne

.....  
Suivez-nous sur les réseaux sociaux:



**NIGHTN°GO**

## Respect des Conditions d'Installation et de Stockage

- Respectez les conditions de stockage de l'appareil, des produits et de ses accessoires.
- Respectez les informations données dans le protocole de formation et les instructions d'installation.
- Ne pas déposer d'objets sur l'appareil ou ses accessoires.
- Installez l'appareil sur une surface lisse et stable au risque de faire tomber l'appareil et de l'endommager fortement.
- Ne pas recouvrir les aérations de l'appareil.
- Ne pas installer l'appareil proche d'une source de chaleur.
- Ne pas installer l'appareil proche d'un point d'eau ou dans un endroit humide ou susceptible de recevoir de l'eau.
- Ne pas exposer l'appareil directement au soleil.
- Installez l'appareil dans un endroit dont la température est comprise entre 5°C et 40°C.
- Ne pas laisser allumer l'appareil sans surveillance.
- Éteignez puis débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Tenez les enfants de moins de 18 ans hors de portée de l'appareil.

## Respect des Conditions d'Utilisation et de Branchement

- Retirez l'intégralité de l'emballage et vérifiez l'état de l'appareil.
- Ne branchez et n'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé.
- Restez toujours vigilant lorsque vous déplacez l'appareil car il est relativement lourd et ne le transportez pas en le tenant par le fil électrique.
- Ne branchez l'appareil que lorsque toutes les vérifications ont été faites.
- Ne branchez, ne débranchez et n'utilisez jamais l'appareil avec les mains ou le corps humides ou mouillés.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le fil du câble électrique.
- Ne vous servez pas de l'appareil pour une utilisation autre que celle pour laquelle il est prévu.
- Vérifiez que la prise d'alimentation est en bon état et que celle-ci est compatible avec l'appareil (bon voltage).
- Vérifiez que le réseau électrique local respecte la tension et la fréquence indiquées sur l'étiquette de l'appareil.
- Ne jetez jamais l'appareil sur la voie publique mais le déposer soit chez votre fournisseur soit dans une décharge publique et dans ce cas couper le câble d'alimentation afin d'éviter tout risque de blessure pour autrui.





## Respect des Gestes d'Urgence et de Secours

- Si une personne pendant le traitement ou soin avec l'appareil réagit mal alors cessez toute utilisation ou adaptez le traitement en fonction de son état.
- Appelez le 18 ou le 15 et suivez leurs instructions (visite chez un médecin ou autres directives) en cas de brûlures graves ou de toutes autres réactions importantes et anormales.
- Respectez les règles d'hygiène de l'Agence Régionale de Santé (ARS).
- Placez la personne en position latérale de sécurité (PLS) et effectuez les premiers gestes de secours en cas de survenance d'une réaction grave avant d'appeler le 18 ou le 15.
- Rendez-vous aux urgences ou consultez un médecin en cas de réactions cutanées graves ou d'effets secondaires graves ou persistants dans les jours suivant le traitement.

## Respect des Gestes d'Hygiène et de Sécurité

- Respectez la fréquence et la méthode de désinfection indiquée.
- Respectez les contre-indications.
- Utilisez un dispositif de protection adapté pour utiliser l'appareil.
- Portez des gants en latex, en vinyle ou en silicone pendant la manipulation de l'appareil en prenant en considération les allergies des clients.
- Aucun bijou et accessoire ne doit être porté par le praticien et le client.
- Ne dépassez pas la durée d'utilisation prescrite par séance et par traitement.
- Respectez les temps de repos prescrits entre chaque séance et chaque traitement.
- Respectez les temps de pause de l'appareil.
- Assurez-vous que la personne ne soit pas allergique aux composants et matériaux de l'appareil et des accessoires utilisés ainsi qu'aux ingrédients des produits utilisés.
- Adaptez l'intensité selon le confort de la personne.
- Respectez l'intensité indiquée pour chaque zone du corps.
- Établissez un diagnostic approfondi du client avant tout traitement: antécédents, traitements, maladies, allergies, anatomie de la peau, des dents et autres.
- Examinez la peau du client avant de commencer afin de déterminer s'il peut recevoir le traitement.
- Assurez-vous que les personnes souffrant d'asthme ou de toute autre maladie nécessitant une présence permanente d'un traitement l'aient sur elles en cas de crise.



## Spécificités de l'Hydro & Micro Dermabrasion

Ne pas pratiquer de Thermhydro:

- Sur les personnes sous traitement oraux tels que Roaccutane ou ses dérivés ou qui a été sous ce traitement dans les 12 semaines avant le traitement.\*
- Sur les personnes sous antibiotiques pour des affections cutanées ou qui a été sous ce traitement dans les 3 semaines avant le traitement.\*
- Sur les personnes qui ont subi un resurfaçage au laser ou une dermabrasion sur la zone traitée dans les 6 mois avant le traitement.\*
- Sur les personnes qui ont subi une chirurgie plastique sur la zone traitée dans les 6 mois avant le traitement.\*
- Sur les personnes qui ont reçu des injections de congélation musculaire ou de comblement dans les 3 semaines avant le traitement.\*
- Sur les personnes qui utilisent des produits contenant des taux élevés de vitamine A ou qui ont utilisé ces produits dans les 4 semaines avant le traitement.\*
- Sur les personnes qui ont reçu une série de peelings glycoliques (20%+) dans les 4 avant le traitement.
- Sur les personnes avec des antécédents de kératoses solaires, de rosacée, d'eczéma, de psoriasis ou de dermatites sous-jacentes aiguës sur la zone traitée.
- Sur les personnes avec des antécédents de zona ou d'herpès sur la zone traitée.
- Sur les personnes présentant des lésions ou plaies ouvertes sur la zone traitée.
- Sur les personnes présentant de l'acné kystique sur la zone traitée.
- Sur les personnes présentant une peau endommagée.
- Ne pas pulvériser l'oxygène du jet peel dans la bouche, les yeux et le nez.
- Ne pas pratiquer de Thermhydro sur les personnes présentant des coups de soleil.

\* Obtenez le consentement écrit du chirurgien ou médecin traitant avant tout traitement pour ces cas.

## Impératifs en Cas de Panne

- Ne réparez rien vous-même en cas de panne.
- N'ouvrez pas l'appareil ou ses accessoires en cas de panne.
- Dans certains cas spécifiques, il peut être nécessaire de changer le fusible.



## Contre-Indications

### Ne pas Utiliser l'Appareil sur:

- Les personnes présentant des maladies graves et/ou auto-immunes.
- Les personnes présentant du cholestérol.
- Les personnes diabétiques.
- Les personnes présentant des altérations et inflammations veineuses.
- Les personnes présentant des altérations de la coagulation et de la circulation sanguine et lymphatique.
- Les personnes présentant de l'hypertension.
- Les personnes présentant des infections ou des altérations de la peau.
- Les femmes enceintes ou allaitantes.
- Les personnes sous aspirine ou anticoagulant.
- Les personnes présentant des paralysies.
- Les personnes présentant un état fébrile et fiévreux.
- Les personnes comprenant des produits de comblements (acide hyaluronique, botox ou autres).
- Les personnes portant des implants fessiers et mammaires, des dispositifs électriques, des implants électroniques (pacemaker, neurostimulateur) ou des prothèses et stérilets métalliques.

### En règle générale, il est impératif:

- Les personnes porteuses d'un appareil médical doivent absolument en parler avec leur médecin afin de savoir si les caractéristiques de l'appareil sont compatibles avec le traitement.
- Les personnes atteintes d'une quelconque maladie doivent absolument en parler avec leur médecin afin de savoir si les caractéristiques de leur maladie sont compatibles

