



NIGHTN'GO

# "ULTIME"

**Cavitation**  
**Radiofréquence**  
**Lipolaser**  
**Vacuum**  
**EMS-EL**

" La technologie NIGHTN'GO au service de la beauté. La beauté est un art et l'art est une question de détails."



# Bienvenue à la notice d'utilisation de l'Ultime !

**Cher Client (e),**

**Merci d'avoir choisi les produits de notre société.**

**Afin d'utiliser pleinement nos produits, veuillez suivre les instructions suivantes:**

**Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation pour utiliser correctement nos produits.**

**Ceci n'est pas une formation, mais une notice d'utilisation.  
La formation détaillée est réservée aux clients l'ayant acquis.**

## **Politique & Conditions**

En achetant notre cours en ligne ou au magasin, vous avez pris connaissance de nos politiques et conditions générales. Si vous souhaitez les relire, veuillez les retrouver [ici](#). Veuillez noter que ces conditions n'incluent aucun remboursement sur les appareils qui requièrent des liens vidéos et des protocoles. Notez également que tous les élèves sont susceptibles de trouver une assurance pour la pratique liée à l'appareil que vous avez acheté. NIGHTN°GO ne peut pas être tenue responsable si vous ne pouvez pas obtenir d'assurance. Nous pouvons vous aider à assurer votre activité avec l'un de nos partenaire d'assurance. N'hésitez pas nous faire la demande par email: [contact@nightngo.fr](mailto:contact@nightngo.fr)

Notre VOCATION: former toute personne passionnée par l'industrie de la beauté. Vous êtes un centre de formation ou en cours, vous souhaitez être distributeur, ou un projet dans le domaine de l'esthétique ? N'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous envoie la maquette commerciale; email: [commercial@nightngo.fr](mailto:commercial@nightngo.fr)

**Tout notre matériel est COPYRIGHT à NIGHTN°GO, écrit et publié par NIGHTN°GO. Tous les droits sont réservés.**

Aucune partie de cette publication, document ou partie de celui-ci ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'enregistrement, le stockage dans un système de récupération, ou autrement sans l'autorisation préalable de l'auteur.

**Avertissement** : Il est strictement interdit d'utiliser nos appareils pour promouvoir toute sorte de formation, sans contrat de partenariat. Nous garantissons d'intenter une action en justice si de telles violations deviennent apparentes.

**La norme «Conformité Européenne» est apposée sur tous nos appareils. Ils sont donc conformes aux normes européennes de protection de l'environnement, de la santé et de sécurité applicables dans leurs catégories de produits.**

## **Garantie, Service & Maintenance des Produits**

Il est interdit d'ouvrir l'appareil à l'exception des personnes autorisées par notre entreprise. La garantie sera caduque si nous constatons une détérioration de l'appareil.

Les matériels et équipements sont garantis 2 ans pour les professionnels, pièces et main d'œuvre en général ou durant une autre durée contractuelle indiquée sur la fiche produit correspondante. Les accessoires sont garantis 1 an c'est-à-dire du consommable (tuyaux, sondes, écran tactile, câble d'alimentation, etc.).

Tout produit défectueux pourra faire l'objet d'une réparation, d'un remplacement par un produit identique ou équivalent, selon la solution que le Vendeur ou les fabricants concernés estimeront la plus adaptée, sauf en cas de:

- Altération ou de modification des Produits.
- Usage ou d'utilisation anormale ou non conforme des Produits.
- Défauts et conséquences liés à l'utilisation non conforme à l'usage pour lequel les Produits sont destinés.
- Défauts et conséquences liés à toute cause extérieure.
- Usure normale des Produits.
- Non-respect de la procédure de retour\* par le Client (ci-dessous).

La garantie ne couvre pas les chocs, un mauvais déballage, une mauvaise installation, un mauvais entretien, l'intervention d'un tiers qualifié ou non.

La garantie cesse de plein droit si l'Acheteur entreprend de sa propre initiative des travaux de remise en état ou de modification.

La date de facture tient lieu de début de garantie.

\* Les articles défectueux couverts par la garantie doivent être réexpédiés par l'acheteur à l'adresse suivante : NIGHTN°GO, 26 rue des Moulins à Huile, 34300 Agde. Téléphone : 04.69.96.62.00. Pendant la période de garantie, les frais de retour sont à notre charge : pour les articles d'une valeur minimum de 400 €, cette période s'étend sur 3 mois à compter de la date de livraison, tandis que pour les articles d'une valeur de 401 € ou plus, elle dure 6 mois.

Si vous expédiez un article, vous devriez vous assurer que l'article est bien protégé, emballé, de la mousse pour caler et du papier bulle pour protéger le matériel. Vous devriez envisager d'utiliser un service de livraison qui vous permet de suivre l'envoi ou de souscrire à une assurance de livraison. Nous ne garantissons pas que nous recevrons l'article que vous nous retournez et en bon état.

L'Acheteur aura au préalable averti le Service Après-Vente aux coordonnées et horaires précisés dans la rubrique «Contactez-Nous», pour obtenir un accord préalable au retour du matériel ou équipement défectueux sous garantie.

La réparation, la modification ou le remplacement des pièces pendant la période de garantie ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de garantie du matériel. En aucun cas, il ne pourra être demandé une indemnité ou des dommages et intérêts à quelque titre que ce soit.

Les réparations hors garantie sont devisées, puis réalisées après accord de l'Acheteur et payables au comptant avant la réexpédition de matériel par NIGHTN°GO, aux frais de l'Acheteur. Leur prise en charge doit également faire l'objet d'un accord obtenu auprès du Service Après-Vente, comme décrit ci-dessus.

## À NOTER

**Nous vous informons que les produits NIGHTN'GO sont vendus selon une politique de vente finale. Pour cette raison :**

- Non-remboursabilité : Nos produits sont non remboursables. Nous invitons nos clients à consulter attentivement la description et les spécifications avant tout achat.
- Exceptions Commerciales : Les fluctuations de l'activité commerciale ne constituent pas un motif valable pour un remboursement. Nous encourageons les clients à planifier leurs achats en conséquence.
- Cas de Force Majeure : Les événements de force majeure, tels que les incendies, séismes et autres catastrophes naturelles, ne sont pas couverts par une garantie de remboursement.
- Nous vous recommandons vivement de lire et de comprendre nos [conditions générales de ventes](#).

## Comment Nous Contacter

### EMAILS

Pour des renseignements ou des questions d'ordre générales

[contact@nightngo.fr](mailto:contact@nightngo.fr)

Pour des questions d'ordre technique, pannes ou réparations

[sav@nightngo.fr](mailto:sav@nightngo.fr)

### COURRIER

NIGHTN°GO  
26 rue des Moulins à Huile  
34300 AGDE

### TÉLÉPHONE

04 . 69 . 96 . 62 . 00

### HORAIRE D'OUVERTURE DU SHOW-ROOM SUR RDV

lundi au vendredi - 9H30 à 13H00 & 14H00 à 16H30

# Rejoignez la Team!

## #NIGHTNGO



INSTAGRAM:  
**@nightngo\_official**  
**#nightngo**

Rejoignez notre communauté Instagram et tenez-vous informé de nos toutes dernières nouveautés.

Explorez les photos avant/après mettant en évidence les résultats impressionnants obtenus par nos clients grâce à nos appareils.

N'oubliez pas de partager vos propres résultats avant/après et de nous identifier en utilisant le hashtag #nightngo. Nous serons là pour vous aider à booster votre activité et à accroître votre visibilité !



FACEBOOK:  
**Nightn'go**

Suivez-nous également sur Facebook!



NIGHTNGO

# Table des Matières

<b>PARTIE 01</b>	
1.1 Respect des Conditions d'Installation et de Stockage	9
1.2 Respect des Conditions d'Utilisation et de Branchement	10
1.3 Respect des Gestes d'Urgence et de Secours	11
1,4 Respect des Gestes d'Hygiène et de Sécurité	11
1.5 Spécificités de la Radiofréquence & Cavitation	12
1.6 En cas de Panne	12
<b>PARTIE 02</b>	
2.1 Spécificités & Caractéristiques	13
2.2 Nombres de Sondes & Accessoires	16
2.3 Installation	18
<b>PARTIE 03</b>	
3.1 Contre-indications & Zones de Traitement par Cavitation	19
3.2 Contre-indications & Zones de Traitement par Radiofréquence	22
8.5 Dangers de la Radiofréquence	22
<b>PARTIE 04</b>	
4.1 Utilisation de l'Interface	24
4.2 Sonde pour le Corps Cavitation + RF & son Utilisation	24

# Table des Matières

4.3 Sonde pour le Corps Vacuum + RF & son Utilisation	29
4.4 Pads Lipolaser pour le corps et visage	32
4.5 Sonde pour le Visage RF + Vacuum & son Utilisation	34
4.6 Sonde pour le Visage EMS + EL & son Utilisation	37
4.7 Conseils après la Cavitation Radiofréquence	39
<b>PARTIE 05</b>	
5.1 Entretien de l'appareil & Fausse panne	40
5.1 Garantie NIGHTN°GO	42



Fiche Légale

**“ULTIME”  
Cavitation  
Radiofréquence  
Lipolaser  
Vacuum  
EMS-EL**



# PARTIE 01

## 1.1 Respect des Conditions d'Installation et de Stockage

- Cette notice d'utilisation est spécialement conçue pour votre sécurité et celle des autres.
- Veuillez lire attentivement les instructions pour installer et utiliser l'appareil.
- NIGHTN°GO n'assume aucune responsabilité pour les accidents et les problèmes causés par un mauvais fonctionnement à l'exclusion des problèmes de qualité.
- Le temps d'utilisation de l'appareil est d'une heure maximum et ensuite il est impératif de maintenir l'appareil éteint au moins trente minutes afin de dissiper l'énergie et la chaleur des composants électroniques.
- Respectez les conditions de stockage de l'appareil, des produits et de ses accessoires.
- Respectez les informations données dans la notice et les instructions d'installation.
- Ne pas déposer d'objets sur l'appareil ou ses accessoires.
- Ne pas installer l'appareil proche d'un point d'eau ou dans un endroit humide ou susceptible de recevoir de l'eau.
- Ne pas exposer l'appareil directement au soleil.
- Installez l'appareil dans un endroit dont la température est comprise entre 5°C et 40°C.
- Ne pas laisser allumer l'appareil sans surveillance.
- Éteignez puis débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Tenez les enfants de moins de 18 ans hors de portée de l'appareil.
- Installez l'appareil sur une surface lisse et stable au risque de faire tomber l'appareil et de l'endommager fortement.
- Ne pas recouvrir les aérations de l'appareil.
- Ne pas installer l'appareil proche d'une source de chaleur.
- Ne pas détacher les étiquettes de l'appareil.

## 1.2 Respect des Conditions d'Utilisation et de Branchement

- Retirez l'intégralité de l'emballage et vérifiez l'état de l'appareil.
- Ne branchez pas et n'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé.
- Restez toujours vigilant lorsque vous déplacez l'appareil car il est relativement lourd et ne le transportez pas en le tenant par le fil électrique.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le fil du câble électrique.
- Ne branchez, ne débranchez et n'utilisez jamais l'appareil avec les mains ou le corps humides ou mouillés.
- Ne vous servez pas de l'appareil pour une utilisation autre que celle pour laquelle il est prévu.
- N'essayez pas d'utiliser cette unité si le cordon d'alimentation a été effiloché ou cassé.



- Ne branchez l'appareil que lorsque toutes les vérifications ont été faites.
- Vérifiez que le réseau électrique local respecte la tension et la fréquence indiquées sur l'étiquette de l'appareil.
- Vérifiez que la prise d'alimentation est en bon état et que celle-ci est compatible avec l'appareil (bon voltage)
- Ne jetez jamais l'appareil sur la voie publique mais le déposer soit chez votre fournisseur soit dans une décharge publique et dans ce cas couper le câble d'alimentation afin d'éviter tout risque de blessure pour autrui.

## 1.3 Respect des Gestes d'Urgence et de Secours

- Si une personne pendant le traitement ou soin avec l'appareil réagit mal alors cessez toute utilisation ou adaptez le traitement en fonction de son état.
- Appelez le 18 ou le 15 et suivez leurs instructions (visite chez un médecin ou autres directives) en cas de brûlures graves ou de toutes autres réactions importantes et anormales.
- Respectez les règles d'hygiène de l'Agence Régionale de Santé (ARS).
- Placez la personne en position latérale de sécurité (PLS) et effectuez les premiers gestes de secours en cas de survenance d'une réaction grave avant d'appeler le 18 ou le 15.
- Rendez-vous aux urgences ou consultez un médecin en cas de réactions cutanées graves ou d'effets secondaires graves ou persistants dans les jours suivant le traitement.

## 1,4 Respect des Gestes d'Hygiène et de Sécurité

- Respectez les contre-indications.
- Utilisez un dispositif de protection adapté pour utiliser l'appareil.
- Portez des gants en latex, en vinyle ou en silicone pendant la manipulation de l'appareil en prenant en considération les allergies des clients.
- Aucun bijou et accessoire ne doit être porté par le praticien et le client.
- Ne dépassez pas la durée d'utilisation prescrite par séance et par traitement.
- Respectez les temps de repos prescrits entre chaque séance et chaque traitement.
- Respectez les temps de pause de l'appareil.
- Adaptez l'intensité selon le confort de la personne.
- Assurez-vous que la personne ne soit pas allergique aux composants et matériaux de l'appareil et des accessoires utilisés ainsi qu'aux ingrédients des produits utilisés.
- Respectez l'intensité indiquée pour chaque zone du corps.
- Établissez un diagnostic approfondi du client avant tout traitement: antécédents, traitements, maladies, allergies, anatomie de la peau, des dents et autres.
- Examinez la peau du client avant de commencer afin de déterminer s'il peut recevoir le traitement.
- Assurez-vous que les personnes souffrant d'asthme ou de toute autre maladie nécessitant une présence permanente d'un traitement l'aient sur elles en cas de crise.



## 1.5 Spécificités de la Radiofréquence & Cavitation

- Ne posez jamais de matériaux susceptibles de fondre sur les zones chauffantes.
- Ne touchez pas les zones chauffantes pendant qu'elles fonctionnent ni pendant certain temps après leur utilisation.
- Appliquez une crème conductrice compatible avec les dispositifs de radiofréquence et cavitation avant le traitement.
- Les personnes hypersensibles aux ultrasons ne doivent pas subir de traitement de radiofréquence.
- La sonde de cavitation ne doit jamais être utilisée sur le visage.
- Ne jamais utiliser la cavitation ou la radiofréquence sur une partie du corps qui a perdu sa sensibilité ou dont les réflexes sont émoussés.
- Il est déconseillé de pratiquer la cavitation sur la zone abdominale pendant les périodes de menstruation.
- Ne pas dépasser 43°C de température avec les sondes de radiofréquence au risque de brûler gravement la peau de la personne.
- L'appareil ne dispose pas d'un indicateur de température. Il convient ainsi aux utilisateurs de contrôler la chaleur procurée par les sondes de radiofréquence avec un thermomètre.
- N'utilisez pas une sonde destinée au corps pour le visage et inversement.
- Utilisez toujours les sondes qui conviennent à chaque zone du corps.
- Ne pas dépasser l'intensité recommandée pour chaque zone du corps.
- Ne pas pratiquer de cavitation et radiofréquence sur une personne présentant un indice de masse corporelle (IMC) dépassant 35.

## 1.6 En cas de Panne

- Ne réparez rien vous-même en cas de panne.
- N'ouvrez pas l'appareil ou ses accessoires en cas de panne.
- Dans certains cas spécifiques, il peut être nécessaire de changer le fusible.
- Respectez la fréquence de changement des filtres.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des diluants, du gazole, du kérosène, de l'alcool ou des produits chimiques.
- Pour le nettoyage, il suffit d'utiliser un chiffon souple et légèrement humide avec de l'eau saline.
- Si l'appareil rencontre un problème, arrêter immédiatement l'appareil.

Fiche Technique  
& Installation

# “Ultime” Cavitation Radiofréquence Vacuum EMS-EL



# PARTIE 02

## 2.1 Spécificités & Caractéristiques

APPAREIL	
Nom de l'appareil	Ultime
Type d'appareil	Cavitation - Radiofréquence - Lipolaser - Vacuum-Thérapie - Électrostimulation - Électroporation
Type d'écran	Tactile
Couleur	Gold-Métalisée / Noir
Matière carrosserie	Aluminium
Dimensions de l'appareil	L: 37,5* l: 40* 22.4 cm (dimension carrosserie, sans la hauteur de l'écran)
Poids net	16 kg
Consommation	Max 150 W
Tension & Fréquence	CA 110V / 220V 50 / 60Hz
Certification	CE, FDA, ROSH
CAVITATION + RADIOFRÉQUENCE	
Fréquence ultrason	30 KHz Version 2.5
Puissance ultrason	50 W
Fréquence radiofréquence	5 MHz
Émission d'onde	3 cm de diamètre
Puissance radiofréquence	85 W
Diamètre	7,5 cm

VACUUM + RADIOFRÉQUENCE CORPS	
Fréquence radiofréquence	5 MHz
Puissance radiofréquence	85 W
Vide d'aspiration	<-80 kPa
Pression d'aspiration	> 250 kPa
Flux d'air	> 10L / minute
Puissance d'aspiration sous vide	60 W
Diamètre	7,5 cm
VACUUM + RADIOFRÉQUENCE VISAGE	
Fréquence radiofréquence	5 MHz
Puissance radiofréquence	25 W
Vide d'aspiration	<-80 kPa
Pression d'aspiration	> 250 kPa
Flux d'air	> 10L / minute
Niveau sonore	<70 dB (à 30 cm)
Puissance d'aspiration sous vide	20 W
EMS + EL VISAGE	
Fréquence EMS	4,5 KHz
Puissance EMS	10 W
Fréquence EL	65 Hz
Puissance EL	10 W
PADS LASER	
Longueur d'onde lumineuse	650 nm ~ 980 nm
Grand pad	1 pad = 10 diodes laser 650nm + 7 diodes laser 980nm
Petit pad	1 pad = 2 diodes laser 650nm + 1 diode laser 980nm
Puissance de chaque lumière	160 MW

## 2.2 Nombres de Sondes & Accessoires

# “ULTIME”

**Le meilleur de la technologie  
au service de votre beauté.**



- Appareil principal x1
- Sonde corps Cavitation ultrasons + Radiofréquence x 1
- Sonde corps Vacuum + Radiofréquence x1
- Sonde visage Vacuum + Radiofréquence (RF) x1
- Sonde visage Electro-Stimulation-Musculaire (EMS) + Électroporation (EL) x1
- Grands pads laser x6 / petits pads x2
- Support métal x1 / Support sonde plastique x4 / Support pads x2
- Vis 1 cm support métal x2 / Vis 0,5 cm support sonde x8
- Prise électrique x1
- Sachet filtres coton pour sondes vacuum x1
- Fusibles x2
- Joint noir pour sonde vacuum x5/ Joint blanc pour flacon de filtration x4 grands, petits x8







### CAVITATION

- Longueur d'ondes de la cavitation 30 kHz basse fréquence.
- Décompose les adipocytes et cible les graisses localisées.
- Effet minceur instantané et définitif.
- Zones ciblées: cuisses, culotte de cheval, poignées d'amour, hanches, ventre, bas du dos, bras, mollets, fesses.

### RADIOFRÉQUENCE SEXTUPOALIRE

- Renouvellement cellulaire en stimulant la production de fibroblastes : élastine et collagène.
- Permet de traiter le relâchement cutané sans anesthésie, ni chirurgie.
- Peau raffermit et plus tonique, aspect lissé avec réduction de la cellulite.
- Zones ciblées : tout le corps.

**Note :** La sonde peut être utilisée indépendamment ou simultanément.



### VACUUM

- Augmentation de la fermeté et de la tonicité du corps.
- Rehaussement des parties du corps telles que fesses et poitrine.
- Drainage lymphatique et épuration.
- Élimination des toxines, détoxification.
- Amélioration de la cellulite.

### RADIOFRÉQUENCE SEXTUPOALIRE

- Renouvellement cellulaire en stimulant la production de fibroblastes : élastine et collagène.
- Permet de traiter le relâchement cutané sans anesthésie, ni chirurgie.
- Peau raffermit et plus tonique, aspect lissé avec réduction de la cellulite.
- Zones ciblées : tout le corps.

**Note :** La sonde peut être utilisée indépendamment ou simultanément.



### VACUUM

- Augmentation de la fermeté et de la tonicité du visage.
- Drainage lymphatique et épuration.
- Diminution des cernes et des rides

### RADIOFRÉQUENCE OCTOPOLAIRE

- Renouvellement cellulaire en stimulant la production de fibroblastes: élastine et collagène.
- Permet de traiter le relâchement cutané sans anesthésie, ni chirurgie.
- Réduction du double menton, lisse les rides, la peau est plus ferme.

**Note :** La sonde peut être utilisée indépendamment ou simultanément.




### EMS

- Va réparer les tissus endommagés, éviter les dégénérescences ou les traumatismes.
- Les micro-courants vont réparer la peau, améliorer la perméabilité de la peau et agir sur le derme pour améliorer la fermeté.
- Stimuler les contractions musculaires.

### EL

- Va permet d'introduire de façon simple, rapide et efficace les soins tels que les sérums, crèmes... elle les fait pénétrer plus en profondeur dans les cellules.

**Note :** La sonde peut être utilisée indépendamment ou simultanément.

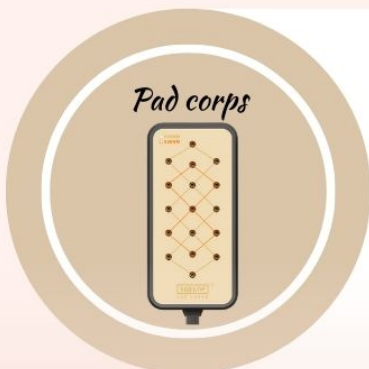

### LIPOLASER GRAND PADS

- Longueur d'onde lumineuse : 650 nm ~ 980 nm
- Décompose les adipocytes et cible les graisses localisées.
- Stimulation de la production de collagène et l'amélioration de la circulation sanguine.
- Effet minceur instantané et définitif.
- Zones ciblées : cuisses, culotte de cheval, poignées d'amour, hanches, ventre, dos, bras, mollets, cou, menton, fesse.





## LIPOLASER PETIT PADS

- Longueur d'onde lumineuse : 650 nm ~ 980 nm
- Décompose les adipocytes et cible les graisses localisées.
- Stimulation de la production de collagène et l'amélioration de la circulation sanguine.
- Effet minceur instantané et définitif.
- Zones ciblées : cuisses, culotte de cheval, poignées d'amour, hanches, ventre, dos, bras, mollets, cou, menton, fesse.

## 2.3 Installation

1. Vissez le support métallique avec les deux vis de 1 cm.
2. Vissez les supports des sondes avec les huit vis de 0,5 cm.
3. Vissez les supports des pads.
4. Veuillez connecter les sondes et les pads dans les connecteurs correspondants de l'appareil. Attention pour les deux sondes de vacuum, referez-vous à la couleur.



A: Corps Cavitation + RF

B: Corps Vacuum + RF

C: Visage Vacuum + RF

D: Visage EMS + EL

E : Corps Pads

F : Visage Pads

2. Branchez le cordon d'alimentation.



3. **Attention:** Veuillez insérer soigneusement et emboîter le bocal situé à l'arrière de l'appareil. Sinon, la sonde à vide ne produira pas d'aspiration en raison de l'entrée d'air.





NIGHTN'GO

Fiche Notice d'utilisation

**“Ultime”  
Cavitation  
Radiofréquence  
Lipolaser  
Vacuum  
EMS-EL**



# PARTIE 03

## 3.1 Contre-indications & Zones de Traitement par Cavitation

### Contre-Indications à l'Utilisation de la Cavitation

- Thrombophlébites car les ultrasons peuvent provoquer la rupture des embolies.
- Une zone affectée par sepsi aiguë car les ultrasons pourraient diffuser l'infection.
- La radiothérapie produit un effet contraire sur les tissus donc les ultrasons ne doivent pas être appliqués aux zones soumises à radiations avant qu'il ne soit passé six mois depuis les irradiations.
- Les tumeurs ne doivent pas être soumises aux ultrasons puisqu'ils pourraient en stimuler la croissance et/ou causer des métastases.
- Un utérus pendant la grossesse ne doit pas être traité par les ultrasons car ceux-ci pourraient provoquer des dommages au fœtus (la scansion avec ultrasons comme instrument diagnostique pendant la grossesse est différente de celle utilisée en thérapie).
- Le patient porteur de pacemaker ne peut pas être traité avec les ultrasons.
- Ne pas utiliser dans les zones avec prothèses ou matériaux d'ostéosynthèse.
- Grossesse et allaitement maternel. Pas de cavitation immédiatement après la grossesse. Attendre au moins 6 mois.
- Sur des sujets en état fébrile.
- Ne pas utiliser directement sur un chéloïde existant.
- Mauvaise circulation (sang et lymphes), varice.
- Épilepsie.
- Abus d'alcool ou de drogues.
- Maladies cardiaques.
- Paralysie.
- Taux de cholestérol élevé.
- Maladie du foie.
- VIH ou SIDA.
- Système immunitaire déficient.
- Stérilet: pas de soin sur la zone abdominale.
- Prothèses métalliques.
- Moins de 18 ans.

- Les personnes porteuses d'un appareil médical doivent absolument en parler avec leur médecin afin de savoir si les caractéristiques de l'appareil sont compatibles avec le traitement.
- Les personnes atteintes d'une quelconque maladie doivent absolument en parler avec leur médecin afin de savoir si les caractéristiques de leur maladie sont compatibles

## Zones à Ne Pas Traiter par la Cavitation

- Ne pas utiliser sur la moelle osseuse et l'épine dorsale.
- Sur des organes nobles: ovaires, cœur, tête, poitrine, visage, cou, menton, aisselle, vaisseaux sanguins visibles, veines superficielles, varice, zones enflées.
- Sur les zones osseuses: chevilles, coudes, colonne vertébrale, etc.

## Zones pouvant Être Traitées par la Cavitation

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• La taille</li> <li>• Les poignées d'amour</li> <li>• Les cuisses</li> <li>• L'intérieur des cuisses</li> <li>• Bas du dos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le ventre</li> <li>• La culotte de cheval</li> <li>• Les fesses</li> <li>• Les bras</li> <li>• Les flancs</li> </ul> |
|---|---|

## 3.2 Contre-indications & Zones de Traitement par Radiofréquence

### Contre-Indications à l'Utilisation de la Radiofréquence

#### Le contres indications sont:

- Grossesse
- Troubles vasculaires
- Stimulateurs cardiaques, pacemaker ou autres appareils électriques
- Prothèse métallique
- Infections cutanées
- Plaies ouvertes
- Maladie neuro-musculaire
- Varices

## 3.3 Dangers de la Radiofréquence

Le resserrement de la peau par radiofréquence est généralement considéré comme sûr lorsqu'il est effectué conformément à notre formation.

Les clients doivent être interrogés tout au long du traitement sur leur niveau de confort sur une échelle de 1 à 10. Le but est de calibrer les réglages de température à environ un niveau de confort.

Des niveaux de douleur élevés chez le client signifient que la température est trop élevée et que les réglages doivent être abaissés pour réduire le risque. C'est pour cela qu'il faut prendre la température immédiatement après que vous avez retiré la sonde.

Si la procédure n'est pas correctement effectuée, il est possible de se brûler.

Des températures à atteindre pour traiter chaque problème de peau, relâchement cutané, cellulite... Nous vous recommandons fortement la formation pour avoir de bons résultats.

Les effets secondaires les plus courants comprennent: Gonflement temporaire  
Rougeurs Picotements Érythème persistant Urticaire

## Zones pouvant Être Traitées par la Radiofréquence

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• La taille</li><li>• Les poignées d'amour</li><li>• Les cuisses</li><li>• L'intérieur des cuisses</li><li>• Le visage</li><li>• Le buste</li><li>• Le contour des yeux</li><li>• Le cou</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Le ventre</li><li>• La culotte de cheval</li><li>• Les fesses</li><li>• Les bras</li><li>• Les flancs</li><li>• Les jambes</li><li>• Le menton</li><li>• Les bajoues</li></ul> |
|--|--|

## 3.4 Contre-indications & Zones de Traitement par Lipolaser

### Contre-Indications à l'Utilisation du Lipolaser

- Grossesse
- Troubles vasculaires
- Stimulateurs cardiaques ou autres appareils électriques
- Prothèse métallique
- Infections cutanées
- Plaies ouvertes
- Maladie neuro-musculaire
- Varices

### Zones Pouvant Être Traitées par le lipolaser

- La taille
- Les poignées d'amour
- Les cuisses
- L'intérieur des cuisses
- Le visage
- Le buste
- Le contour des yeux
- Le cou

- Le ventre
- La culotte de cheval
- Les fesses
- Les bras
- Les flancs
- Les jambes
- Le menton
- Les bajoues



# PARTIE 04

## 4.1 Utilisation de l'Interface




Allumez l'appareil pour afficher l'écran d'accueil et l'interface de sélection principale. Sélectionnez ensuite les paramètres appropriés en fonction des besoins spécifiques du client pour procéder au traitement.

Préférez l'utilisation de vos doigts plutôt que d'objets pointus ou de stylos pour interagir avec l'écran. Veillez à ne pas exercer une pression excessive sur l'écran tactile afin d'éviter tout risque de dommage.

## 4.2 Sonde pour le Corps Cavitation + RF & son Utilisation



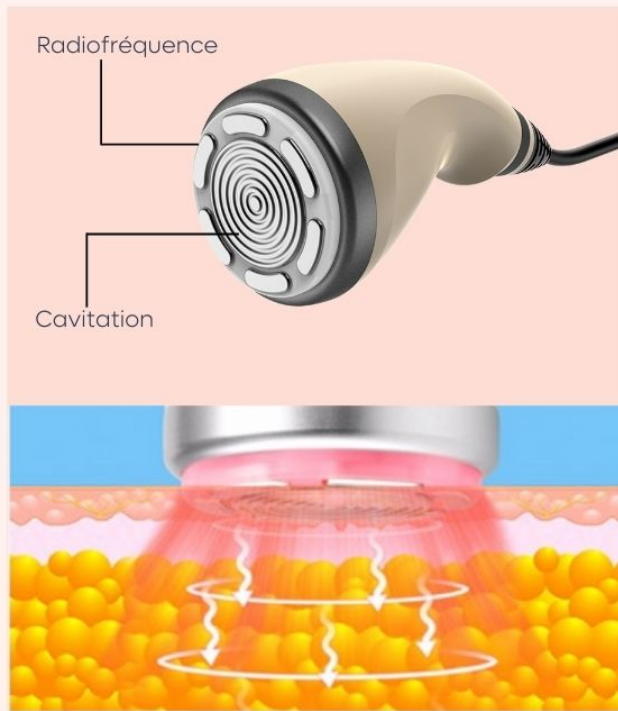

Appuyez sur le bouton [🏠] pour revenir à la page d'accueil.

Appuyez sur le bouton [▶] pour démarrer ou mettre en pause.

Appuyez sur le bouton [◀] ou [▶] pour régler le temps de travail.

Appuyez sur le bouton [↻] pour réinitialiser le paramètre.



Appuyez sur le bouton [-] ou [+] pour diminuer ou augmenter l'intensité de la cavitation de 1 à 10 niveaux.

Appuyez sur le bouton [📄] pour la graisse épaisse ou [⏏] pour la mince

Appuyez sur le bouton [NOR] pour les habitués ou [PRO] pour les débutants.

Appuyez sur le bouton [-] ou [+] pour diminuer ou augmenter l'intensité de la radiofréquence de 1 à 10 niveaux.

## **SONDE DE CAVITATION + RADIOFRÉQUENCE**

Vous pouvez utiliser simultanément ou indépendamment les deux fonctions. La cavitation, va détruire la graisse et la radiofréquence va raffermir la peau.

### **RAPPEL CAVITATION**

- Le programme de remodelage corporel s'adresse à l'homme ou à la femme, quel que soit son âge (à partir de 18 ans)
- D'autres conseils dans notre formation...

### **RAPPEL RADIOFRÉQUENCE**

- Le programme de raffermissement et anti-cellulite s'adresse à l'homme ou à la femme, quel que soit son âge (à partir de 18 ans).
- Pour traiter une cellulite, une réduction adipocytaire, un relâchement cutané, il faut atteindre une certaine température.

## **La cavitation**

La cavitation est une alternative non invasive aux traitements plus lourds qui nécessitent des opérations ou période de rétablissement longue. C'est une technologie révolutionnaire qui, grâce aux ondes ultrasons de basse fréquence, produit des bulles microscopiques brisant les membranes des cellules graisseuses sans endommager les tissus qui les entourent (peau, vaisseaux, nerfs). La cavitation est le seul traitement en mesure d'éliminer la graisse au niveau cellulaire. La transformation des adipocytes en triglycérides empêche leur reproduction. Lorsque la cellule adipeuse est détruite, ce phénomène libère des triglycérides et les amas graisseux se décomposent.

Les adipocytes et les amas graisseux se liquéfient et quittent l'organisme de manière naturelle en passant par les reins et le foie, grâce au système lymphatique et à la circulation sanguine. La graisse de votre corps sera facilement éliminée par le système lymphatique et urinaire au rythme que votre corps décidera de tolérer.

Étant donné que les adipocytes sont complètement détruits et pas simplement vidés (comme c'est le cas avec d'autres programmes d'amincissement), les résultats obtenus sont définitifs. Le nombre de traitements nécessaires dépend de l'épaisseur de la couche graisseuse.

Des processus tels que notre appareil combinant la RF et Cavitation garantissent que la peau se resserre en même temps que les cellules graisseuses sont détruites, de sorte que le résultat final n'est pas seulement une perte de poids réelle, mais aussi une peau plus lisse et plus ferme.

D'autres informations disponibles dans notre formation.

## Procédure cavitation

→ Portez des gants. Nettoyez la zone. Appliquez suffisamment de crème conductrice, mais sans excès sur la zone à traiter. Cette couche de crème permet de transmettre l'onde électromagnétique de façon uniforme et de faire glisser correctement la pièce à main.

[Cliquez-ici pour la crème.](#)



→ Intensité de la cavitation - Montez l'intensité progressivement de la cavitation car les oreilles peuvent être douloureuses à causes des ultrasons.

→ Durée du traitement de la cavitation - Utilisez la sonde de cavitation pendant 50 minutes maximum. Bien évidemment, la durée peut-être réduite si la zone à traiter est plus petite.

- Il est recommandé de travailler de 30 à 40 minutes, cela dépend de la zone (e.g. Pour l'abdomen 40 minutes au total, culotte de cheval 20 minutes par jambe ce qui correspond à 40 minutes au total pour les deux jambes).
- Le temps et l'intensité dépendra de la quantité de graisse accumulée. Vous devez travailler sur la peau du client en effectuant des mouvements circulaires de pincement c'est-à-dire que vous devez pousser le tissu graisseux vers la sonde. Ne laissez pas la sonde immobile.
- Nombre de séances : une cure de cavitation dure minimum 5 séances, 2 séances par semaine maximum.
- 16 séances au total (peu importe la zone à traiter). Pour recommencer un traitement, il faut attendre un minimum d'un mois et demi.

## La Radiofréquence

La cavitation est une alternative non invasive aux traitements plus lourds qui nécessitent des opérations ou période de rétablissement longue. C'est une technologie révolutionnaire qui, grâce aux ondes ultrasons de basse fréquence, produit des bulles microscopiques brisant les membranes des cellules graisseuses sans endommager les tissus qui les entourent (peau, vaisseaux, nerfs). La cavitation est le seul traitement en mesure d'éliminer la graisse au niveau cellulaire. La transformation des adipocytes en triglycérides empêche leur reproduction. Lorsque la cellule adipeuse est détruite, ce phénomène libère des triglycérides et les amas graisseux se décomposent.

Les adipocytes et les amas graisseux se liquéfient et quittent l'organisme de manière naturelle en passant par les reins et le foie, grâce au système lymphatique et à la circulation sanguine. La graisse de votre corps sera facilement éliminée par le système lymphatique et urinaire au rythme que votre corps décidera de tolérer.

Puisque les adipocytes sont complètement détruits et pas simplement vidés (comme c'est le cas avec d'autres programmes d'amincissement), les résultats obtenus sont définitifs. Le nombre de traitements nécessaires dépend de l'épaisseur de la couche graisseuse.

Des processus tels que notre appareil combinant la RF et Cavitation garantissent que la peau se resserre en même temps que les cellules graisseuses sont détruites, pour que le résultat final n'est pas seulement une perte de poids réelle, mais aussi une peau plus lisse et plus ferme.

D'autres informations disponibles dans notre formation...

## Procédure Radiofréquence

NOR : adaptez au praticien habitué. C'est le mode défini. La LED rouge est allumée. La température de la RF monte au niveau de l'intensité réglée et reste à l'intensité réglée après la mise en marche de l'appareil même si la sonde ne touche pas la peau.

PRO : adaptez au praticien débutant. C'est le mode intelligent. La LED rouge est allumée. La température de la RF monte lentement à l'intensité réglée dès que la sonde entre en contact complète avec la peau.

Conseils: Nous vous conseillons d'utiliser le mode NOR pour monter assez rapidement en température.

→ Portez des gants. Nettoyez la zone. Appliquez suffisamment de crème conductrice, mais sans excès sur la zone à traiter. Cette couche de crème permet de transmettre l'onde électromagnétique de façon uniforme et de faire glisser correctement la pièce à main.

[Cliquez-ici pour la crème.](#)




→ Intensité de la radiofréquence - Montez l'intensité progressivement. Sur les zones du visage, la peau est plus fine, la température montera ainsi plus vite.

→ Durée du traitement de la radiofréquence - utilisez la sonde Rf pendant 50 mn maximum. Bien évidemment, la durée peut être réduite si la zone à traiter est plus petite.

- Délivrant les ondes électromagnétiques, la sonde doit être déplacée sur une autre zone lorsqu'une température cutanée est atteinte
- La température externe de la peau est contrôlée avec un thermomètre infrarouge au cours du soin pour éviter toute brûlure cutanée. Une sensation de chaleur intense et d'aspiration peuvent être perçues mais sans douleur. Le soin est souvent décrit comme un moment agréable et apaisant.
- Durée totale du traitement par jour: de 30 à 50 minutes selon la zone.
- Nombre de séances: un traitement de radiofréquence comprend jusqu'à 20 séances sachant qu'on peut réaliser une à deux séances par semaine selon le type de peau. Exemple: pour les peaux plus matures, il convient de réaliser 2 séances par semaine pour les 2 première semaines puis une par semaine pour le reste de séances. Pour recommencer un traitement, laissez-passer un mois et demi minimum.

**Rappel - Vous pouvez combiner la cavitation et la RF.**

## 4.3 Sonde pour le Corps Vacuum + RF & son Utilisation

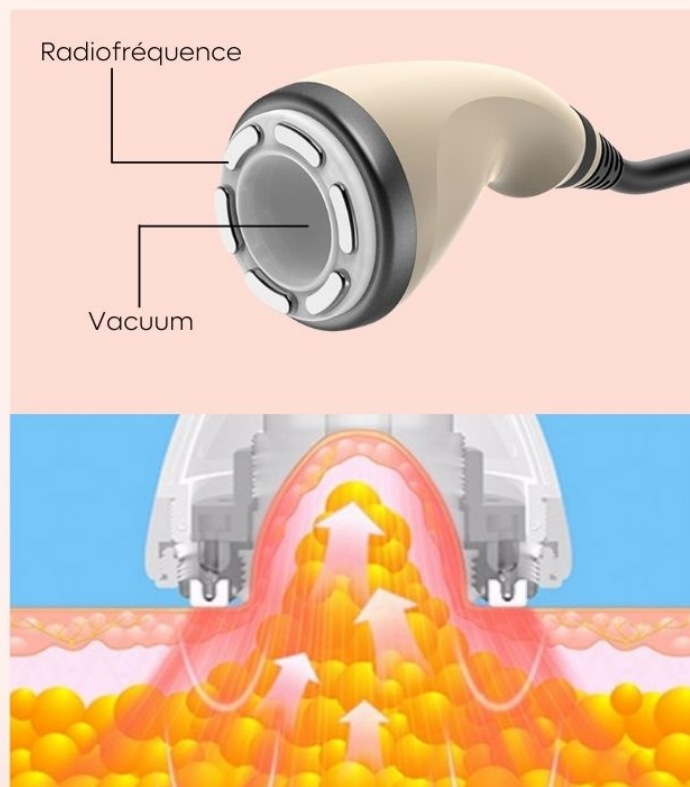


Appuyez sur le bouton [ 🏠 ] pour revenir à la page d'accueil.

Appuyez sur le bouton [ ▶ ] pour démarrer ou mettre en pause.

Appuyez sur le bouton [ < ] ou [ > ] pour régler le temps de travail.

Appuyez sur le bouton [ ⌂ ] pour réinitialiser le paramètre.

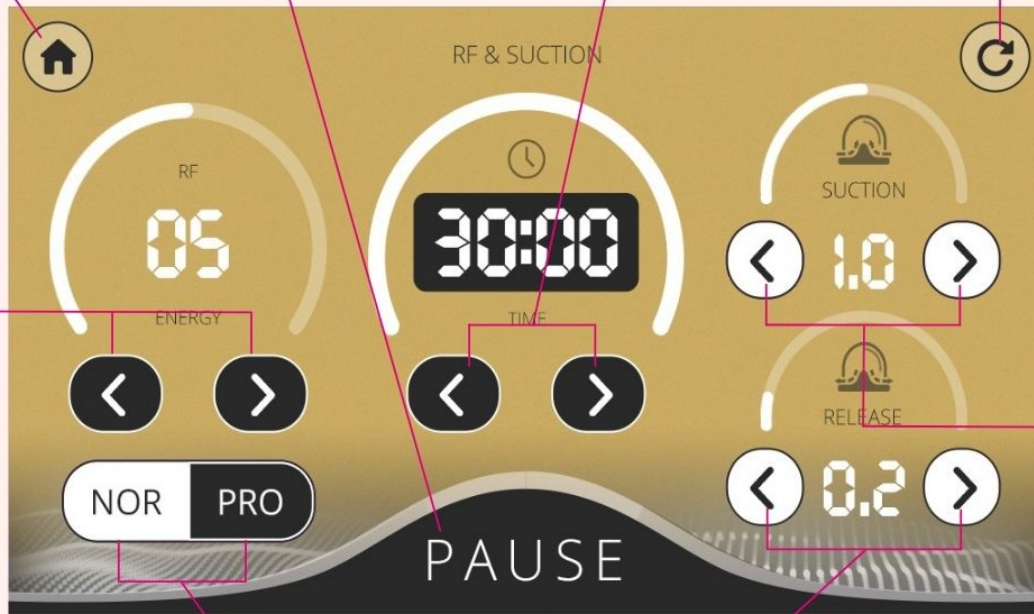

Appuyez sur le bouton [ - ] ou [ + ] pour diminuer ou augmenter l'intensité de la radiofréquence de 1 à 10 niveaux.

Appuyez sur le bouton [ NOR ] pour les habitués ou [ PRO ] pour les débutants.

Appuyez sur le bouton [ - ] ou [ + ] pour régler le temps d'aspiration.

Appuyez sur le bouton [ - ] ou [ + ] pour régler le temps d'aspiration.



Tournez le bouton pour régler l'intensité d'aspiration

## La Vacuum thérapie

La technologie de la radiofréquence peut être associée à la vacuum thérapie : traitement non-invasif qui consiste à exercer une aspiration pour stimuler l'irrigation sanguine de la peau et lui redonner un aspect plus ferme et tonique. Sur le corps, la thérapie de vacuum permet de traiter la cellulite, le raffermissment et l'amincissement. Les parties du corps telles que les fesses et les seins sont rehaussées et raffermies. Utilisée sur le visage, la thérapie de vacuum aide notamment à décongestionner les cernes et à redonner de l'éclat au teint. Cette méthode permet également le drainage lymphatique qui assure les fonctions d'épuration et de détoxification. Notre appareil Magic 30K émet une aspiration continue ou discontinue.

### Procédure Vacuum thérapie

#### SONDE DE VACUUM + RADIOFRÉQUENCE

Vous pouvez utiliser simultanément ou indépendamment les deux fonctions. La Vacuum + RF sextupolaire associe un mécanisme d'énergie 3D RF et une thérapie par le vide qui va permettre de régénérer et stimuler le collagène. Diminution de la cellulite, remodelage du corps, raffermissment de la peau et meilleure circulation sanguine.

#### ZONE À TRAITER

Vacuum: Elle est utilisée sur la taille, poignée d'amour, le ventre, les cuisses, culotte de cheval, l'intérieur des cuisses, les fesses, les bras, les flancs, le dos...

Radiofréquence: Elle est utilisée sur le dos, la taille, poignée d'amour, le ventre, les cuisses, culotte de cheval, l'intérieur des cuisses, les fesses, les bras, les flancs (voir pages: contre-indications et zones de traitement par radiofréquence).

NOR: adaptez au praticien habitué. C'est le mode défini. La LED rouge est allumée. La température de la RF monte au niveau de l'intensité réglée et reste à l'intensité réglée après la mise en marche de l'appareil même si la sonde ne touche pas la peau.

PRO: adaptez au praticien débutant. C'est le mode intelligent. La LED rouge est allumée. La température de la RF monte lentement à l'intensité réglée dès que la sonde entre en contact complète avec la peau.

Conseils: Nous vous conseillons d'utiliser le mode NOR pour monter assez rapidement en température.

→ Appliquez une huile sur les zones à traiter, PAS DE GEL -> risque de boucher les trous de la vacuum et de l'endommager. [Cliquez-ici pour l'huile NIGHTN°GO.](#)

→ Durée du traitement de la vacuum - Utilisez la sonde de vacuum pendant 10-15 mn en fin de traitement de cavitation.

→ Intensité de la radiofréquence - pour atteindre rapidement la température, montez l'intensité à 9, une fois les zones bien chauffées, baissez l'intensité à 7 ou 8.

→ Durée du traitement de la radiofréquence - utilisez la sonde Rf pendant 50 mn maximum. Bien évidemment la durée peut-être réduite si la zone à traiter est plus petite.

→ Contact - maintenez une bonne pression entre la sonde et la peau.


Note: Si vous utilisez la vacuum et la radiofréquence simultanément, pensez à baisser l'intensité de la RF pour ne pas brûler le client (e), lors de l'aspiration de la peau par la vacuum.

## 4.4 Pads Lipolaser pour le corps et visage

Appuyez sur le bouton [ 🏠 ] pour revenir à la page d'accueil.

Appuyez sur le bouton [ ▶ ] pour démarrer ou mettre en pause.

Appuyez sur le bouton [ ↻ ] pour réinitialiser le paramètre.

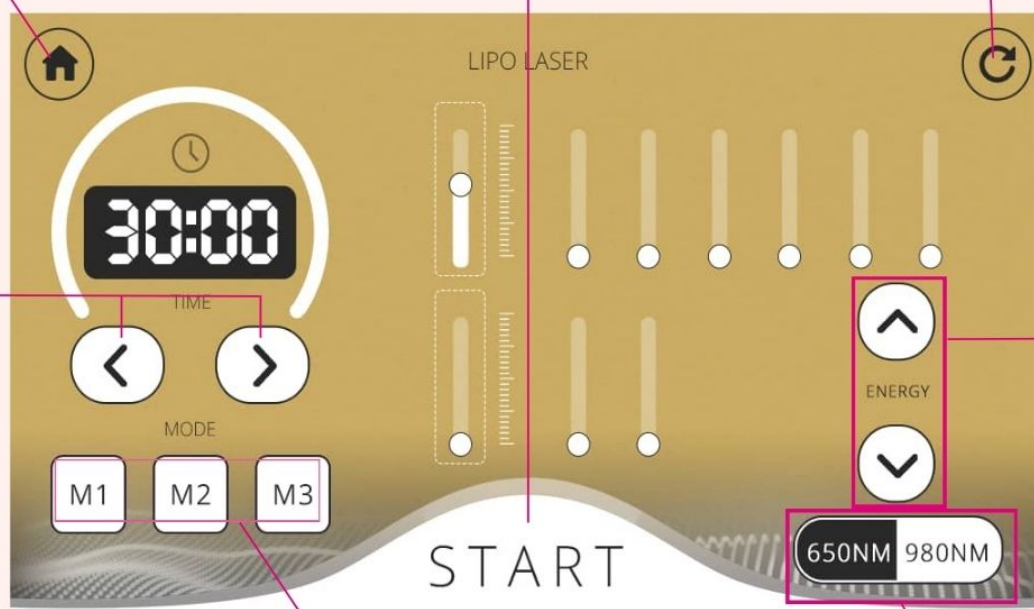

Appuyez sur le bouton [ - ] ou [ + ] pour diminuer ou augmenter l'intensité de l'énergie des lasers.

Appuyez sur le bouton [ - ] ou [ + ] pour diminuer ou augmenter l'intensité de la radiofréquence de 1 à 10 niveaux.

Appuyez sur le bouton pour régler le mode de travail des lumières.

Appuyez sur le bouton [ 650NM ] ou [ 980NM ] pour choisir la longueur d'onde. Appuyez sur les 2 boutons [ 650NM ] ou [ 980NM ] pour les combiner.



**M1 :** Mode de fonctionnement continu, ce qui est idéal pour stimuler le processus de lipolyse avec le lipolaser, favorisant ainsi une perte efficace de graisse.

**M2 :** Mode de fonctionnement discontinu, le laser clignotera lentement, ce qui est idéal pour maintenir et renforcer les résultats déjà obtenus.

**M2 :** Mode de fonctionnement discontinu, avec des intervalles de flash plus courts, où les lasers clignotent rapidement. Ce mode est spécialement adapté aux débutants qui commencent leur traitement de lipolaser.

## Le Lipolaser

Le lipolaser est une technique qui vise à réduire les cellules adipeuses (cellules graisseuses) en utilisant la technologie laser. Dans le cas spécifique du lipolaser avec des pads contenant des diodes laser sont placés sur la peau à des endroits ciblés du corps. Ces diodes laser émettent une lumière de bas niveau qui pénètre la peau et cible les cellules graisseuses situées juste en dessous. L'énergie du laser déclenche une réaction dans les cellules graisseuses, provoquant la libération des acides gras stockés. Ces acides gras sont ensuite métabolisés par l'organisme et éliminés naturellement.

Notre appareil présente des caractéristiques prometteuses qui le placent au cœur de l'innovation en matière de remodelage corporel et de réduction des graisses. Avec des pads émettant une lumière de précision dans la plage de longueur d'onde de 650 nm à 980 nm, chaque lumière étant puissante à 160 milliwatts (mw), notre dispositif incarne la technologie de pointe du lipolaser à bas niveau.

Il est intéressant de noter que ces longueurs d'onde lumineuses ne se limitent pas uniquement à la décomposition des graisses. Elles pourraient également offrir des avantages pour la santé de la peau. La stimulation potentielle de la production de collagène et l'amélioration de la circulation sanguine témoignent de l'impact positif qu'elles pourraient avoir sur l'apparence générale de la peau.

## Procédure Lipolaser

### Préparation :

L'étape pour la dissolution des graisses et la consolidation de l'effet.

Avant de commencer, veuillez porter des gants.

Nettoyez soigneusement la zone à traiter pour éliminer toute saleté ou impureté.

Évitez d'appliquer tout produit sur la peau.

Utilisez les sangles pour positionner les pads sur les zones à traiter.

Disposez préalablement les pads sur la zone à traiter avant de les activer.

### Réglage de l'intensité du Lipolaser :

Mode conseillé : A

Pendant la séance de lipolaser, augmentez progressivement l'intensité, en ajustant celle-ci en fonction de la quantité de graisse présente.

### Durée de traitement du Lipolaser :

Laissez les pads durant 20 min au maximum.

### Nombre de séances :


Une cure de lipolaser nécessite au minimum 5 séances, avec un maximum de 2 séances par semaine. Au total, 16 séances sont recommandées, indépendamment de la zone à traiter. Pour envisager un nouveau traitement, il est nécessaire d'attendre au moins un mois et demi entre les cures.

### Note :

Lors de l'utilisation des pads laser, il est crucial que l'ensemble de leur surface soit en contact total avec la peau, il ne doit pas se limiter à une petite zone de contact.

## 4.5 Sonde pour le Visage RF Octopolaire + Vacuum & son Utilisation

[Cliquez ici sur pour visualiser la vidéo de la sonde Vacuum + RF](#)

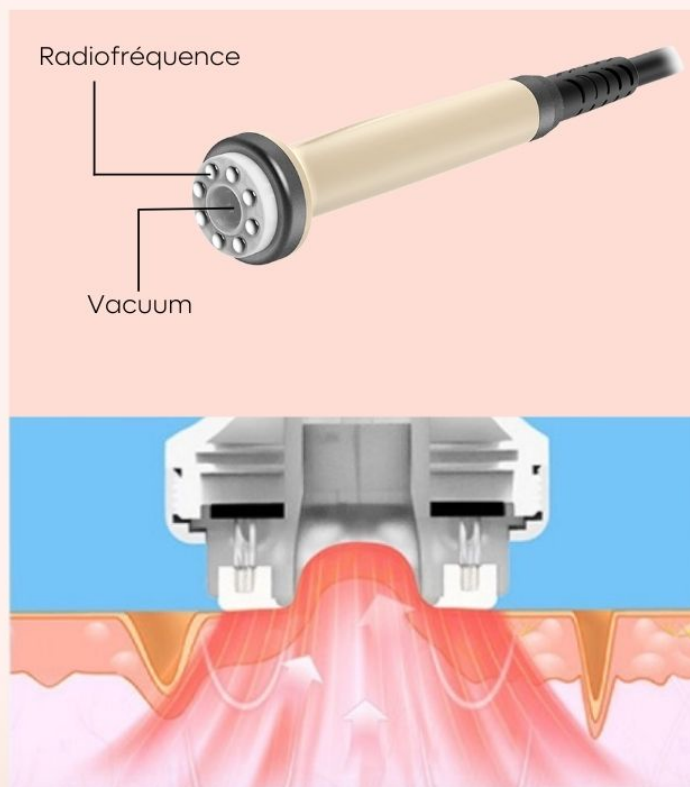


Appuyez sur le bouton [ 🏠 ] pour revenir à la page d'accueil.

Appuyez sur le bouton [ ▶ ] pour démarrer ou mettre en pause.

Appuyez sur le bouton [ < ] ou [ > ] pour régler le temps de travail.

Appuyez sur le bouton [ ⌂ ] pour réinitialiser le paramètre.

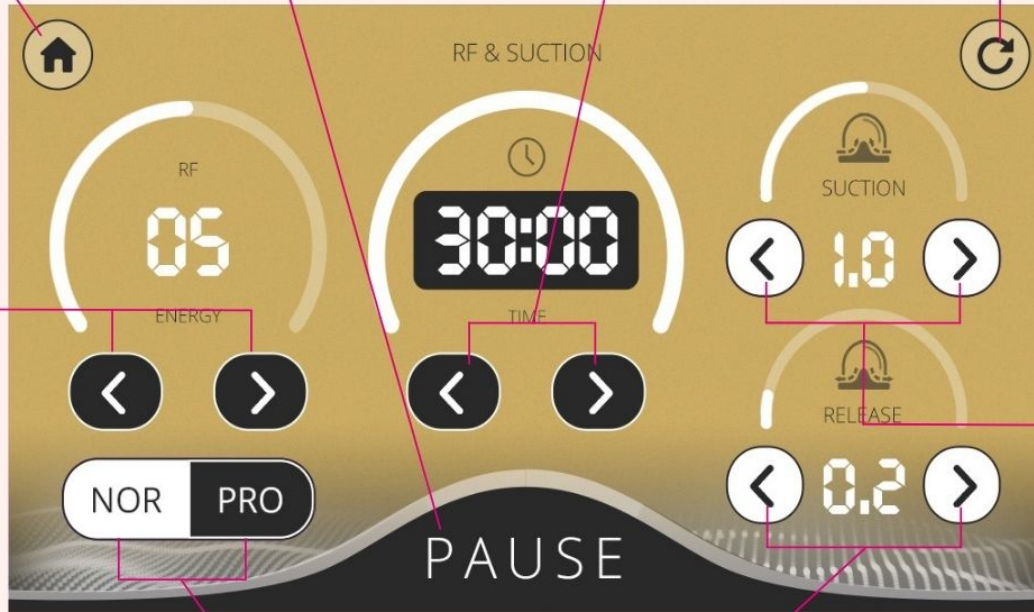

Appuyez sur le bouton [ - ] ou [ + ] pour diminuer ou augmenter l'intensité de la radiofréquence de 1 à 10 niveaux.

Appuyez sur le bouton [ NOR ] pour les habitués ou [ PRO ] pour les débutants.

Appuyez sur le bouton [ - ] ou [ + ] pour régler le temps d'aspiration.

Appuyez sur le bouton [ - ] ou [ + ] pour régler le temps d'aspiration.



Tournez le bouton pour régler l'intensité d'aspiration

## **Procédure Vacuum thérapie**

### **SONDE DE VACUUM + RADIOFRÉQUENCE**

Vous pouvez utiliser simultanément ou indépendamment les deux fonctions.

La Vacuum + RF sextupolaire associe un mécanisme d'énergie 3D RF et une thérapie par le vide qui va permettre de régénérer et stimuler le collagène.

Raffermissment de la peau et meilleure circulation sanguine.

Stimule le système lymphatique pour une meilleure évacuation des toxines.

### **ZONE À TRAITER**

Vacuum: Elle est utilisée sur le visage, le menton, le cou, le buste.

Radiofréquence: Elle est utilisée sur le visage, menton, contour des yeux, sur le buste.

NOR: adaptez au praticien habitué. C'est le mode défini. La LED rouge est allumée. La température de la RF monte au niveau de l'intensité réglée et reste à l'intensité réglée après la mise en marche de l'appareil même si la sonde ne touche pas la peau.

PRO: adaptez au praticien débutant. C'est le mode intelligent. La LED rouge ne s'allume pas tant que la sonde n'est pas bien en contact avec la peau. La température de la RF monte lentement à l'intensité réglée après que la sonde entre en contact complet avec la peau.

Conseils: Nous vous conseillons d'utiliser le mode NOR pour monter assez rapidement en température.

→ Pour la sonde radiofréquence appliquez une crème conductrice sur les zones à traiter. [Cliquez-ici pour la crème NIGHTN°GO.](#)

→ Intensité de la radiofréquence - pour atteindre rapidement la température, montez l'intensité à 9, une fois les zones bien chauffées, baissez l'intensité à 7 et maintenez ce niveau tout le long du traitement. La peau sur le visage est plus fine, la température montera plus vite.

→ Durée du traitement radiofréquence - 15-20 mn sur tout le visage. Traitement double menton 5-10 mn. Traitement contour des yeux 5 mn sur chaque oeil.

→ Pour la sonde vacuum, appliquez une huile sur les zones à traiter, PAS DE GEL -> risque de boucher les trous de la vacuum et de l'endommager. [Cliquez-ici pour l'huile NIGHTN°GO.](#)

→ Durée du traitement de la vacuum - Utilisez le mode d'aspiration continue pour tonifier et / ou le mode discontinue pour drainer. Ajuster l'intensité selon le confort. Utilisez la sonde de vacuum pendant 10-15 mn en fin de traitement Rf.

## 4.6 Sonde pour le Visage EMS + EL & son Utilisation

[Cliquez ici pour visualiser la vidéo de la sonde EMS + El pour le visage](#)



Appuyez sur le bouton [ 🏠 ] pour revenir à la page d'accueil.

Appuyez sur le bouton [ ▶ ] pour démarrer ou mettre en pause.

Appuyez sur le bouton [ < ] ou [ > ] pour régler le temps de travail.

Appuyez sur le bouton [ ↻ ] pour réinitialiser le paramètre.



Appuyez sur le bouton [ - ] ou [ + ] pour diminuer ou augmenter l'énergie de EMS de 1 à 10 niveaux.

Appuyez sur le bouton [ - ] ou [ + ] pour diminuer ou augmenter l'énergie de EL de 1 à 10 niveaux.

## Électro-Stimulation-Musculaire (EMS) & Électroporation (EL)

L'électrostimulation musculaire (EMS) provoque la contraction des muscles grâce à la stimulation des fibres nerveuses par des impulsions électriques appliquées à la surface de la peau. Utilisée sur le visage, l'électrostimulation musculaire aide à réhydrater la peau par l'effet d'hydrolyse, à défroisser les pattes d'oie et à diminuer les cernes. L'électroporation (EL) émet un courant électrique court et intense, totalement indolore, favorisant la formation de micropores au niveau de la couche cornée. Les pores du visage s'ouvrent permettant ainsi la diffusion de sérums et d'ingrédients actifs en profondeur dans la peau. Utilisez la sonde EMS & EL pendant 5 à 10 minutes sur le visage et les yeux.

### Procédure EMS & EL

#### SONDE DE EMS+ EL

Vous pouvez utiliser simultanément ou séparément les deux fonctions.

- La fonction EL (électroporation) est l'application d'impulsions électriques afin de perméabiliser la membrane cellulaire. Cette technique permet d'introduire de façon simple, rapide et efficace les soins tels que les sérums, crèmes... elle les fait pénétrer plus en profondeur dans les cellules.
- La fonction EMS (électro-stimulation-musculaire) est une technique qui consiste à appliquer une décharge électrique sur un muscle précis pour provoquer une contraction contrôlée. C'est une méthode thérapeutique, car elle contrôle le travail des fibres musculaires dans un but précis: réparer les tissus endommagés, éviter les dégénérescences ou les traumatismes. Les micro-courants vont réparer la peau, améliorer la perméabilité de la peau et agir sur le derme pour améliorer la fermeté.

#### ZONE À TRAITER

Elle est utilisée sur le visage, le menton, le contour des yeux et le cou.

→ EMS appliquez notre crème conductrice programmer l'intensité sur 2 ou 3 puis posez la sonde sur le visage. Vous verrez les muscles du visage qui sont sollicités. Montez ensuite progressivement l'intensité. Durée du traitement 10 mn.

→ EL appliquez un sérum sur la zones à traiter. Découvrez notre gamme de sérum. Durée du traitement 10 mn.

→ Contact: Maintenez une bonne pression entre la sonde et la peau.

## 4.7 Conseils après la Cavitation Radiofréquence

### **HYDRATATION**

Boire de l'eau est essentiel pour éliminer les déchets et les toxines dont votre corps se débarrassera. Nous recommandons de boire au moins 1,5 à 2 litres par jour pendant les 2 jours précédents la séance et boire 1,5 à 2 litres par jour pendant les 3 jours suivant la séance, en plus de toujours boire beaucoup d'eau régulièrement. Si votre client suit déjà un programme de perte de poids, recommandez-lui de poursuivre son programme actuel.

Il faut boire BEAUCOUP!!! Il est très important de maintenir une grande hydratation afin de favoriser l'élimination des toxines hors du corps.

### **MODE DE VIE**

Votre client a également le devoir de changer son mode de vie, il reçoit un ensemble de recommandations avant et après le traitement, qu'il est essentiel de suivre.

### **ALIMENTATION**

Suivre une alimentation saine et équilibrée.

S'ils continuent d'adopter de vieilles habitudes, suralimentation d'aliments gras et sucrés et consommation excessive d'alcool, ils vont simplement continuer le cycle de reproduction des cellules graisseuses.

### **ACTIVITÉ PHYSIQUE**

Faire de l'exercice régulièrement pour tirer le meilleur parti de leur traitement. Un minimum de 20 minutes d'exercice cardio avec fréquence cardiaque élevée est nécessaire après le traitement.

# PARTIE 05

## 5.1 Entretien de l'appareil & Fausse panne

**Après chaque utilisation, veuillez suivre ces instructions pour nettoyer et entretenir les composants de l'appareil :**

1. Nettoyez les sondes et l'appareil à l'aide d'un chiffon en microfibre. Évitez l'utilisation de désinfectants contenant de l'alcool ou de la javel.
2. Utilisez des lingettes nettoyantes sans alcool ou humidifiez un chiffon avec de l'eau saline pour le nettoyage.
3. Assurez-vous que les composants sont correctement séchés avant de les ranger.

**Pour prévenir toute réduction de l'aspiration de la sonde de vacuum therapy, suivez ces étapes supplémentaires :**

1. Utilisez une petite pince pointue pour retirer délicatement l'opercule en silicone blanc en le saisissant par le trou.
2. Nettoyez soigneusement l'opercule en silicone et remplacez le filtre en coton par un nouveau.
3. Le colmatage des trous de l'opercule ou la présence de résidus sur le filtre peuvent causer une diminution de l'aspiration.
4. Changez régulièrement le filtre pour éviter toute saturation d'huile ou de saleté, ce qui pourrait affecter le bon fonctionnement de l'appareil.

**Pour nettoyer le flacon de filtration, suivez ces étapes :**

1. Vérifiez que le flacon et le joint transparent ne sont ni huileux ni sales.
2. Nettoyez soigneusement le flacon et le joint transparent.
3. Si les joints ne sont plus étanches, remplacez-les pour éviter toute perte d'aspiration.
4. Vérifiez périodiquement que le flacon est correctement emboîté, car les vibrations peuvent le faire bouger.



Avant et après chaque utilisation, assurez-vous que la sonde et sa plaque sont bien assemblées pour éviter toute infiltration de crème ou d'huile à cet endroit.

Il est essentiel de changer régulièrement le filtre pour éviter que celui-ci ne soit saturé d'huile ou de saleté. Si l'intérieur de l'appareil devient huileux à cause d'un filtre non entretenu, cela pourrait entraîner une dégradation de l'appareil et potentiellement annuler la garantie.

En suivant ces étapes de nettoyage et d'entretien, vous pouvez assurer un fonctionnement optimal de la sonde de vacuum therapy et prolonger la durée de vie de l'appareil.



NIGHTN'GO

ULTIME

Appareil Cavitation-  
Radiofréquence-  
Lipolaser-Vacuum-  
EMS-EL



**GARANTIE  
TERMES & CONDITIONS**

## Garantie NIGHTN°GO

Bien que nous accordions une grande attention à la fabrication et à l'amélioration de nos produits, il est important de noter qu'il est toujours possible de rencontrer des pannes ou des dysfonctionnements. Malgré tous nos efforts pour assurer la qualité et la fiabilité de nos appareils, il peut y avoir des situations imprévues qui peuvent entraîner des problèmes techniques. Nous comprenons l'importance de fournir des produits fiables et performants, et nous nous engageons à résoudre rapidement tout problème rencontré pendant la période de garantie. Notre équipe technique est à votre disposition pour vous assister et trouver la meilleure solution en cas de panne avérée. Nous tenons à vous rassurer que nous prenons ces problèmes très au sérieux et que nous nous efforçons continuellement d'améliorer nos produits et nos processus de fabrication afin de minimiser les risques de pannes. Votre satisfaction est notre priorité absolue, et nous ferons tout notre possible pour résoudre tout problème rencontré.

La date de facture servira de point de départ de la période de garantie. Nos matériels et équipements sont couverts par une garantie de deux ans pour les professionnels, y compris les pièces et la main-d'œuvre de manière générale, ou pour une durée contractuelle différente précisée sur la fiche produit correspondante. Les accessoires, considérés comme des consommables (tels que les tuyaux, les sondes, écrans tactiles, câbles d'alimentation, etc.), bénéficient d'une garantie de un an. Il est important de noter qu'il est strictement interdit d'ouvrir l'appareil, sauf si vous êtes autorisé par notre entreprise. Toute altération de l'appareil annulera la garantie. Pendant la période de garantie, les frais de retour sont à notre charge : pour les articles d'une valeur minimum de 400 €, cette période s'étend sur 3 mois à compter de la date de livraison, tandis que pour les articles d'une valeur de 401 € ou plus, elle dure 6 mois.

Tout produit défectueux pourra faire l'objet d'une réparation ou d'un remplacement par un produit identique ou équivalent, selon la solution jugée la plus appropriée par le vendeur ou les fabricants concernés. Cependant, veuillez noter que cette politique de garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :

- Altération ou modification des produits : toute altération ou modification apportée aux produits annulera la garantie.
- Usage anormal ou non conforme : la garantie ne couvre pas les défauts résultants d'une utilisation anormale ou non conforme aux instructions d'utilisation des produits.

- Utilisation non conforme à l'usage prévu : les défauts et les conséquences résultant d'une utilisation des produits pour un usage autre que celui pour lequel ils sont destinés ne sont pas couverts par la garantie.
- Causes extérieures : les défauts et les conséquences causés par des causes extérieures, telles que des accidents, des chocs, des catastrophes naturelles, ne sont pas couverts par la garantie.
- Usure normale : l'usure normale des produits au fil du temps n'est pas couverte par la garantie.
- Non-respect de la procédure de retour : si le client ne respecte pas la procédure de retour définie par le vendeur, cela peut annuler la possibilité de bénéficier de la garantie.
- Les Produits dont des protocoles de formation et des vidéos explicatives ont été envoyés et les Produits soldés ne sont pas remboursables.

## Conditions de Mise en Œuvre

Pour toute réclamation relevant des garanties, veuillez adresser un courrier électronique au service après-vente à l'adresse suivante : [sav@nightngo.fr](mailto:sav@nightngo.fr). Avant de retourner le produit, veuillez obtenir l'accord préalable dudit service. Les articles défectueux couverts par la garantie doivent être renvoyés par l'Acheteur à ses frais, à l'adresse suivante : NIGHTN°GO, 26 rue des moulins à huile 34300 AGDE. Contact téléphonique : 04 69 96 62 00.

Lors de l'expédition de l'article, veuillez assurer une protection adéquate en utilisant de la mousse pour le caler et du papier bulle pour le préserver. Opter pour un service de livraison avec suivi ou souscrire à une assurance de livraison est vivement recommandé. Nous ne pouvons garantir la réception de l'article retourné en bon état.

Toute réparation, modification ou remplacement de pièces durant la période de garantie ne prolongera pas la durée de celle-ci. En aucun cas, une indemnisation ou des dommages-intérêts ne pourront être réclamés.

Pour les réparations hors garantie, un devis sera établi et devra être approuvé par l'Acheteur avant toute intervention. Le paiement doit être effectué intégralement avant que le matériel ne soit renvoyé par NIGHTN°GO, aux frais de l'Acheteur. Tout remboursement de ces frais doit faire l'objet d'une autorisation préalable obtenue du Service Après-Vente, conformément à la procédure précitée. Une fois réparé ou échangé, NIGHTN°GO réexpédiera l'article à la charge de l'acheteur et à l'adresse indiquée par ce dernier.

À réception du ou des produits, en cas d'incohérence entre le problème constaté par les techniciens de NIGHTN°GO et les dires de l'acheteur, NIGHTN°GO se réserve le droit de ne pas envoyer l'article en réparation, ni de l'échanger.

Cette garantie répond aux normes de la garantie légale de conformité telle que mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-14 du Code de la consommation et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du Code Civil. Extraits du Code de la Consommation :

Art. L. 217-4 : « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».

Art. L. 217-12 : « L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ».

Art. L. 217-5 : « Le bien est conforme au contrat :

1. S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage.

2. Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties, ou s'il est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et accepté par ce dernier." Les garanties légales ne s'appliquent pas aux Acheteurs professionnels ; elles concernent uniquement les Acheteurs particuliers.

## Garantie par Type de Produit

CATÉGORIES DE PRODUITS	PÉRIODE DE GARANTIE
Appareil Magic	2 ans
Accessoires & Consommables	1 an

## Certificat de Garantie

INFORMATIONS PERSONNELLES	
Nom	
Prénom	
Adresse postale	
Adresse mail	
Téléphone	
Professionnel / Particulier	

INFORMATIONS DE LA COMMANDE	
Date de la commande	
Numéro de la commande	
Nom de l'appareil	
Numéro de série de l'appareil	
Téléphone	
Professionnel / Particulier	
INFORMATIONS PROFESSIONNELLES	
Profession	
Nom de l'entreprise	
Adresse postale de l'entreprise	
Adresse mail de l'entreprise	
Téléphone de l'entreprise	
N° SIRET de l'entreprise	

Je déclare sur  
l'honneur l'exactitude  
des renseignements  
fournis, sous peine de  
sanctions pénales.

**oui**

fait le :

Signature :

**SAS NIGHT'N'GO**  
34 AV DES CHAMPS-ELYSEES  
75008 PARIS  
SIREN 849040738