



NIGHTN'GO

SUBLIME

Cavitation

Radiofréquence

Lipolaser

" La technologie NIGHTNGO'GO au service de la beauté. La beauté est un art et l'art est une question de détails."



Bienvenue à la notice d'utilisation du Sublime !

Cher client(e),

Nous vous remercions d'avoir choisi nos produits pour répondre à vos besoins esthétiques.

Afin de vous assurer une utilisation optimale de nos produits, nous tenons à souligner l'importance de suivre attentivement les instructions ci-dessous :

- Lire attentivement la notice d'utilisation : Il est essentiel de prendre le temps de parcourir attentivement la notice d'utilisation fournie avec nos produits. Cela vous permettra de comprendre les fonctionnalités spécifiques et les étapes appropriées pour les utiliser correctement.
- Remarque concernant la formation : **Veillez noter que la notice d'utilisation fournie n'est pas une formation complète**, mais plutôt un guide pour vous accompagner dans l'utilisation quotidienne de nos produits. Pour une formation plus détaillée et approfondie, elle est réservée exclusivement aux clients ayant fait l'acquisition.

Politique & Conditions

En achetant nos produits en ligne ou en magasin, vous avez pris connaissance de nos politiques et conditions générales. Si vous souhaitez les consulter à nouveau, veuillez les retrouver [ici](#). Veuillez noter que ces conditions ne prévoient aucun remboursement pour les appareils nécessitant l'accès à des vidéos et des protocoles. De plus, il est de la responsabilité de chaque élève de souscrire une assurance pour la pratique liée à l'appareil acheté. NIGHTN°GO ne peut être tenue responsable si vous n'êtes pas en mesure d'obtenir une assurance. Nous pouvons cependant vous aider à assurer votre activité en vous mettant en relation avec l'un de nos partenaires assureurs. N'hésitez pas à nous contacter par e-mail à l'adresse suivante : contact@nightngo.fr

Notre vocation est de former toutes les personnes passionnées par l'industrie de la beauté. Que vous soyez un centre de formation, en cours d'étude, ou que vous ayez un projet dans le domaine de l'esthétique, n'hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions vous envoyer notre maquette commerciale. Vous pouvez nous joindre par e-mail à l'adresse suivante : commercial@nightngo.fr. Nous sommes impatients de collaborer avec vous et de vous aider à réaliser vos ambitions dans le domaine de l'esthétique.

Il est strictement interdit d'utiliser nos appareils pour promouvoir toute forme de formation sans un contrat de partenariat préalable.

Tout notre matériel est protégé par le droit d'auteur de NIGHTN°GO. Toutes les informations, documents et parties de celui-ci sont la propriété exclusive de NIGHTN°GO et sont soumis à des droits d'auteur. Tous les droits sont réservés. Aucune partie de cette publication, document ou partie de celui-ci ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'enregistrement, le stockage dans un système de récupération, ou autrement sans l'autorisation préalable de l'auteur.

Nous prenons cette question très au sérieux et nous sommes déterminés à tenter une action en justice en cas de violation de cette politique. Nous vous remercions de respecter nos droits d'auteur et de nous contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir une autorisation spécifique.

Norme CE Dispositifs Médicaux

La norme de "Conformité Européenne" est apposée sur tous nos appareils. Cela signifie que nos produits respectent les exigences réglementaires et de sécurité applicables dans l'Union européenne pour les dispositifs médicaux, en matière de protection de l'environnement, de la santé et de sécurité applicables à leur catégorie de produits.

Nous attachons une grande importance à offrir des produits de qualité qui répondent aux normes les plus strictes de l'industrie. La norme CE médicale garantit que nos appareils ont subi une évaluation de conformité rigoureuse et qu'ils répondent aux normes de qualité et de sécurité établies par les autorités compétentes. Lorsque vous utilisez nos appareils esthétiques, vous pouvez avoir confiance en leur efficacité et en leur sécurité, car ils ont été conçus et fabriqués en respectant les normes strictes de l'industrie.

Garantie, Service & Maintenance des Produits

Bien que nous accordions une grande attention à la fabrication et à l'amélioration de nos produits, il est important de noter qu'il est toujours possible de rencontrer des pannes ou des dysfonctionnements. Malgré tous nos efforts pour assurer la qualité et la fiabilité de nos appareils, il peut y avoir des situations imprévues qui peuvent entraîner des problèmes techniques.

Nous comprenons l'importance de fournir des produits fiables et performants, et nous nous engageons à résoudre rapidement tout problème rencontré pendant la période de garantie. Notre équipe technique est à votre disposition pour vous assister et trouver la meilleure solution en cas de panne avérée.

Nous tenons à vous rassurer que nous prenons ces problèmes très au sérieux et que nous nous efforçons continuellement d'améliorer nos produits et nos processus de fabrication afin de minimiser les risques de pannes. Votre satisfaction est notre priorité absolue, et nous ferons tout notre possible pour résoudre tout problème rencontré.

Veillez noter que l'appareil ne doit en aucun cas être ouvert, sauf par des personnes autorisées par notre entreprise. La garantie sera automatiquement annulée si l'Acheteur entreprend de sa propre initiative des travaux de remise en état ou de modification sur le matériel.

Nos matériels et équipements sont généralement garantis pendant un an pour les professionnels, comprenant les pièces et la main-d'œuvre, sauf indication contraire sur la fiche produit correspondante. Les accessoires, tels que les tuyaux, les sondes, écrans tactiles, câbles d'alimentation, etc, sont garantis durant six mois, étant considérés comme des consommables.

Pour obtenir des informations plus détaillées sur les garanties et la maintenance, je vous invite à vous référer à la page 41 de notre documentation dédiée à la rubrique "Garantie". Cette section fournira des explications plus approfondies sur les termes, les conditions et les procédures spécifiques associées à nos garanties et à la maintenance des produits.

À NOTER

- Notre produit est non remboursable.
- Nous ne remboursons pas pour les motifs de baisse d'activité.
- Nous ne remboursons pas en raison de forces imprévisibles (comme les incendies, les tremblements de terre et autres catastrophes naturelles).
- Veuillez prendre connaissance de [nos conditions générales de ventes](#).

Comment Nous Contacter

EMAILS

pour des renseignements ou
des questions d'ordre générale

contact@nightngo.fr

pour des questions d'ordre
technique, pannes ou réparations

sav@nightngo.fr

COURRIER

NIGHTN°GO
26 rue des Moulins à Huile
34300 AGDE

TÉLÉPHONE

04 . 69 . 96 . 62 . 00

HORAIRE D'OUVERTURE


lundi au vendredi - 9H30 à 13H00 & 14H00 à 16H30

Rejoignez la Team!

#NIGHTNGO

En nous rejoignant sur Instagram, vous aurez accès à un flux constant d'inspiration, de conseils et de témoignages de réussite. Rejoignez notre communauté dynamique et découvrez comment nos appareils peuvent transformer vos résultats esthétiques.

N'attendez plus, suivez-nous dès maintenant sur Instagram et faites partie de la team NIGHTN°GO !

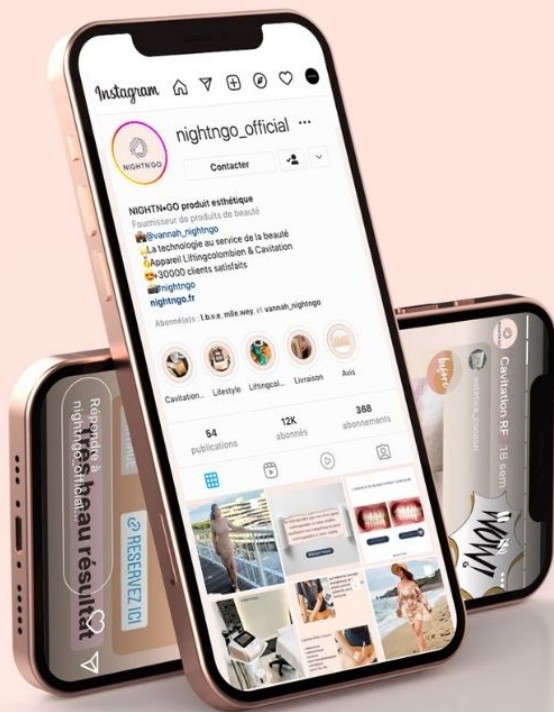

INSTAGRAM:
@nightngo_official
#nightngo

Rejoignez notre communauté Instagram et tenez-vous informé de nos toutes dernières nouveautés.

Explorez les photos avant/après mettant en évidence les résultats impressionnants obtenus par nos clients grâce à nos appareils.

N'oubliez pas de partager vos propres résultats avant/après et de nous identifier en utilisant le hashtag #nightngo. Nous serons là pour vous aider à booster votre activité et à accroître votre visibilité !



FACEBOOK:
Nightn'go

Suivez-nous également
sur Facebook!



NIGHTN°GO

Table des Matières

PARTIE 01	
1.1 Respect des Conditions d'Installation et de Stockage	11
1.2 Respect des Conditions d'Utilisation et de Branchement	11
1.3 Respect des Gestes d'Urgence et de Secours	12
1.4 Respect des Gestes d'Hygiène et de Sécurité	12
1.5 Spécificités de la Radiofréquence & Cavitation	13
1.6 En cas de Panne	13
PARTIE 02	
2.1 Spécificités & Caractéristiques	15
2.2 Nombres de Sondes & Accessoires	18
2.3 Installation	21
PARTIE 03	
3.1 Contre-indications & Zones de Traitement par Cavitation	23
3.2 Contre-indications & Zones de Traitement par Radiofréquence	24
3.3 Dangers de la Radiofréquence	25
3.4 Contre-indications & Zones de Traitement par Lipolaser	26
PARTIE 04	
4.1 Utilisation de l'Interface	27
4.2 Sonde Cavitation pour le Corps	28

Table des Matières

4.3 Sonde Radiofréquence Sextupolaire, Quadripolaire et Tripolaire	29
4.4 Sonde Vacuum + Radiofréquence pour le corps	31
4.5 Pads Lipolaser pour le corps et visage	32
4.6 Procédure complète	34
4.6 Conseils après la Cavitation Radiofréquence	38
PARTIE 05	
5.1 Entretien de l'appareil & Fausse panne	39
5.1 Garantie NIGHTN°GO	41

Fiche Légale

SUBLIME

Cavitation

Radiofréquence

Lipolaser



PARTIE 01

1.1 Respect des Conditions d'Installation et de Stockage

Cette notice d'utilisation a été spécialement conçue pour garantir votre sécurité et celle des autres. Veuillez donc :

- Veuillez lire attentivement les instructions pour installer et utiliser l'appareil.
- NIGHTN°GO n'assume aucune responsabilité pour les accidents et les problèmes causés par un mauvais fonctionnement à l'exclusion des problèmes de qualité.
- Le temps d'utilisation de l'appareil est d'une heure maximum et ensuite il est impératif de maintenir l'appareil éteint au moins trente minutes afin de dissiper l'énergie et la chaleur des composants électroniques.
- Respectez les conditions de stockage de l'appareil, des produits et de ses accessoires.
- Respectez les informations données dans la notice et les instructions d'installation.
- Ne pas déposer d'objets sur l'appareil ou ses accessoires.
- Évitez d'installer l'appareil à proximité d'un point d'eau ou dans un endroit humide susceptible de recevoir de l'eau.
- Ne placez pas l'appareil directement sous les rayons du soleil.
- Choisissez un emplacement pour l'appareil où la température ambiante est comprise entre 18°C et 25°C.
- Avant de quitter l'appareil, assurez-vous de l'éteindre et de le débrancher.
- Gardez l'appareil hors de la portée des enfants de moins de 18 ans.
- Installez l'appareil sur une surface lisse et stable pour éviter tout risque de chute et de dommages importants.
- Assurez-vous de ne pas obstruer les aérations de l'appareil.
- Évitez de placer l'appareil à proximité d'une source de chaleur.
- Ne retirez pas les étiquettes de l'appareil.

1.2 Respect des Conditions d'Utilisation et de Branchement

- Retirez l'intégralité de l'emballage et vérifiez l'état de l'appareil.
- Ne branchez pas et n'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé.
- Restez toujours vigilant lorsque vous déplacez l'appareil, car il est relativement lourd et ne le transportez pas en le tenant par le fil électrique.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le fil du câble électrique.
- Il est important de ne jamais brancher, débrancher ou utiliser l'appareil avec les mains ou le corps humides ou mouillés.
- Veuillez à n'utiliser l'appareil que pour l'usage spécifique pour lequel il est conçu.
- Si le cordon d'alimentation est effiloché ou cassé, ne tentez pas d'utiliser l'appareil.

- Ne branchez l'appareil que lorsque toutes les vérifications ont été faites.
- Vérifiez que le réseau électrique local respecte la tension et la fréquence indiquées sur l'étiquette de l'appareil.
- Vérifiez que la prise d'alimentation est en bon état et que celle-ci est compatible avec l'appareil (bon voltage)
- Ne jetez jamais l'appareil sur la voie publique, mais le déposer soit chez votre fournisseur, soit dans une décharge publique et dans ce cas, couper le câble d'alimentation afin d'éviter tout risque de blessure pour autrui.

1.3 Respect des Gestes d'Urgence et de Secours

- Si une personne réagit de manière anormale pendant le traitement avec l'appareil, veuillez cesser toute utilisation ou adapter le traitement en fonction de son état.
- Placez la personne en position latérale de sécurité (PLS) pour assurer sa stabilité et éviter tout risque d'étouffement.
- Administrez les premiers gestes de secours appropriés en fonction de la situation. Si vous êtes formé aux premiers secours, appliquez les techniques nécessaires pour assurer la sécurité et le bien-être de la personne.
- Après avoir prodigué les premiers secours, si la situation le requiert, appelez immédiatement les services d'urgence en composant le 18 ou le 15. Suivez attentivement leurs instructions pour obtenir une assistance médicale spécialisée.
- Si des réactions cutanées graves ou des effets secondaires graves ou persistants se manifestent dans les jours suivant le traitement, il est conseillé de vous rendre aux urgences ou de consulter un médecin.
- Respectez les règles d'hygiène de l'Agence Régionale de Santé (ARS).

1,4 Respect des Gestes d'Hygiène et de Sécurité

- Respectez les contre-indications.
- Utilisez un dispositif de protection adapté pour utiliser l'appareil.
- Portez des gants en latex, en vinyle ou en silicone pendant la manipulation de l'appareil en prenant en considération les allergies des clients.
- Aucun bijou et accessoire ne doit être porté par le praticien et le client.
- Ne dépassez pas la durée d'utilisation prescrite par séance et par traitement.
- Respectez les temps de repos prescrits entre chaque séance et chaque traitement.
- Respectez toujours l'intensité recommandée pour chaque zone du corps lors du traitement. Cela garantira des résultats efficaces tout en minimisant les risques potentiels.
- Avant d'entreprendre tout traitement, effectuez un diagnostic approfondi du client. Prenez en compte ses antécédents médicaux, les traitements précédemment suivis, les maladies existantes, les allergies connues

- Adaptez l'intensité selon le confort de la personne.
- Veillez à vous assurer que la personne n'est pas allergique aux composants et matériaux utilisés, ainsi qu'aux ingrédients des produits associés.
- Examinez attentivement la peau du client pour déterminer si elle est adaptée au traitement envisagé. Cela permettra d'éviter toute complication ou réaction indésirable.

1.5 Spécificités de la Radiofréquence Cavitation Lipolaser

- Ne posez jamais de matériaux susceptibles de fondre sur les zones chauffantes.
- Ne touchez pas les zones chauffantes pendant qu'elles fonctionnent ni pendant un certain temps après leur utilisation.
- Appliquez une crème conductrice compatible avec les dispositifs de radiofréquence et de cavitation avant le traitement.
- Les personnes hypersensibles aux ultrasons ne doivent pas subir de traitement par cavitation.
- La sonde de cavitation ne doit jamais être utilisée sur le visage.
- N'utilisez jamais la cavitation la radiofréquence le lipolaser sur une partie du corps qui a perdu sa sensibilité ou dont les réflexes sont émoussés.
- Il est déconseillé de pratiquer la cavitation sur la zone abdominale pendant les périodes menstruelles.
- Ne pas dépasser 43°C de température avec les sondes de radiofréquence au risque de brûler gravement la peau de la personne.
- L'appareil ne dispose pas d'un indicateur de température. Il convient ainsi aux utilisateurs de contrôler la chaleur procurée par les sondes de radiofréquence avec un thermomètre.
- N'utilisez pas une sonde destinée au corps pour le visage et inversement.
- Utilisez toujours les sondes qui conviennent à chaque zone du corps.
- Ne pas dépasser l'intensité recommandée pour chaque zone du corps.
- Ne pas pratiquer de cavitation et radiofréquence sur une personne présentant un indice de masse corporelle (IMC) dépassant 35.

1.6 En cas de Panne

- Ne réparez rien vous-même en cas de panne.
- N'ouvrez pas l'appareil ou ses accessoires en cas de panne.
- Dans certains cas spécifiques, il peut être nécessaire de changer le fusible.
- Respectez la fréquence de changement des filtres.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des diluants, du gazole, du kérosène, de l'alcool ou des produits chimiques.
- Pour le nettoyage, il suffit d'utiliser un chiffon souple et légèrement humide avec de l'eau saline.
- Si l'appareil rencontre un problème, arrêter immédiatement l'appareil.

Fiche Technique & Installation

SUBLIME Cavitation Radiofréquence Lipolaser



PARTIE 02

2.1 Spécificités & Caractéristiques

APPAREIL	
Nom de l'appareil	Sublime
Domaine de l'appareil	Radiofréquence - Cavitation - Lipolaser - Vacuum
Type d'écran	Tactile
Couleur	Rose Métallisé / Blanc
Matière carrosserie	ABS
Dimensions de l'appareil	L 32 x l 29 x h 18 cm
Puissance	<=190W
Poids net	8 kg
Consommation	Max 150 W
Entrée d'alimentation	110V / 220V 50/60 Hz
Certification	CE, FDA, ROSH
CAVITATION	
Fréquence ultrason	40 KHz
Puissance ultrason	50 W
Diamètre sonde	7 cm
RADIOFRÉQUENCE SEXTUPOLAIRE CORPS	
Type de radiofréquence	Sextupolaire
Puissance radiofréquence	70 W

Fréquence	1 MHz
Diamètre sonde	6,5 cm
RADIOFRÉQUENCE QUADRIPOLAIRE CORPS ET VISAGE	
Type de radiofréquence	Quadripolaire
Puissance radiofréquence	55 W
Fréquence	1 Mhz
Diamètre sonde	4,5 cm
RADIOFRÉQUENCE TRIPOLAIRE VISAGE	
Type de radiofréquence	Tripolaire
Puissance radiofréquence	40 W
Fréquence	1 Mhz
Diamètre sonde	2,5 cm
VACUUM + RADIOFRÉQUENCE BIPOLAIRE	
Vide d'aspiration	<-80 kPa
Pression d'aspiration	>250 kPa
Débit d'air	1>10L/minute
Niveau sonore	<70 dB (à 30 cm)
Type de radiofréquence	Bipolaire
Puissance radiofréquence	76 W
Fréquence	1 Mhz
Diamètre sonde	6,5 cm

LIPOLASER PADS	
Longueur d'onde lumineuse	650 nm ~ 980 nm
Grands pads x 6	1 pad = 10 diodes laser 650 nm + 7 diodes laser 980 nm
Petits pads x 2	1 pad = 2 diodes laser 650 nm + 1 diode laser 980 nm
Puissance de chaque lumière	160 MW
Sortie d'énergie totale	64 x 160 mW = 10 240 mw
Puissance de sortie secteur	100 VA

2.2 Nombres de Sondes, de Pads & Accessoires

Sublime

**Le meilleur de la technologie
au service de votre beauté.**



- Appareil principal x1
- Sonde corps Cavitation ultrasons x1
- Sonde corps Radiofréquence sextuolaire x1
- Sonde corps Vacuum + Radiofréquence bipolaire x1
- Sonde corps et visage Radiofréquence quadripolaire x1
- Sonde visage Radiofréquence tripolaire x1
- Grands pads laser x6 / petits pads x2
- Support métal x1 / Support sonde plastique x1 / Support pads x2
- Prise électrique x1
- Sachet filtres coton pour sondes vacuum x1
- Joint noir pour sonde vacuum / Joint blanc pour flacon de filtration
- Fusibles x2



CAVITATION

- Longueur d'ondes de la cavitation 40 kHz basse fréquence.
- Décompose les adipocytes et cible les graisses localisées.
- Effet minceur instantané et définitif.
- Zones ciblées : cuisses, culotte de cheval, poignées d'amour, hanches, ventre, bas du dos, bras, mollets, fesses.



VACUUM

- Augmentation de la fermeté et de la tonicité du corps.
- Rehaussement des parties du corps telles que fesses et poitrine.
- Drainage lymphatique et épuration.
- Élimination des toxines, détoxification.
- Amélioration de la cellulite.

RADIOFRÉQUENCE BIPOLAIRE

- Renouvellement cellulaire en stimulant la production de fibroblastes : élastine et collagène.
 - Permet de traiter le relâchement cutané sans anesthésie, ni chirurgie.
 - Peau raffermie et plus tonique, aspect lissé avec réduction de la cellulite.
 - Zones ciblées : tout le corps.
- Note :** La sonde peut être utilisée indépendamment ou simultanément.



RADIOFRÉQUENCE SEXTUPOLAIRE

- Renouvellement cellulaire en stimulant la production de fibroblastes : élastine et collagène.
- Permet de traiter le relâchement cutané sans anesthésie, ni chirurgie.
- Peau raffermie et plus tonique, aspect lissé avec réduction de la cellulite.
- Zones ciblées : tout le corps.



RADIOFRÉQUENCE QUADRIPOLAIRE

- Renouvellement cellulaire en stimulant la production de fibroblastes : élastine et collagène.
- Permet de traiter le relâchement cutané sans anesthésie, ni chirurgie.
- Peau raffermie et plus tonique, aspect lissé avec réduction de la cellulite.
- Zones ciblées : tout le corps.



RADIOFRÉQUENCE QUADRIPOLAIRE

- Renouvellement cellulaire en stimulant la production de fibroblastes : élastine et collagène.
- Permet de traiter le relâchement cutané sans anesthésie, ni chirurgie.
- Réduction du double menton, lisse les rides, la peau est plus ferme.
- Zones ciblées : visage.



LIPOLASER GRAND PADS

- Longueur d'onde lumineuse : 650 nm ~ 980 nm
- Décompose les adipocytes et cible les graisses localisées.
- Stimulation de la production de collagène et l'amélioration de la circulation sanguine.
- Effet minceur instantané et définitif.
- Zones ciblées : cuisses, culotte de cheval, poignées d'amour, hanches, ventre, dos, bras, mollets, cou, menton, fesse.



LIPOLASER PETIT PADS

- Longueur d'onde lumineuse : 650 nm ~ 980 nm
- Décompose les adipocytes et cible les graisses localisées.
- Stimulation de la production de collagène et l'amélioration de la circulation sanguine.
- Effet minceur instantané et définitif.
- Zones ciblées : cuisses, culotte de cheval, poignées d'amour, hanches, ventre, dos, bras, mollets, cou, menton, fesse.

2.3 Installation

1. Vissez les supports.
2. Veuillez connecter les sondes dans les connecteurs correspondants de l'appareil.



2. Branchez le cordon d'alimentation.



Emplacement fusible

3. **Attention:** Veuillez insérer soigneusement et emboîter le bocal situé à l'arrière de l'appareil. Sinon, la sonde à vide ne produira pas d'aspiration en raison de l'entrée d'air.





NIGHTN'GO

Fiche Notice d'utilisation

SUBLIME Cavitation Radiofréquence Lipolaser



PARTIE 03

3.1 Contre-indications & Zones de Traitement par Cavitation

Contre-Indications à l'Utilisation de la Cavitation

- Thrombophlébites, car les ultrasons peuvent provoquer la rupture des embolies.
- Une zone affectée par une septicémie aiguë, car les ultrasons pourraient propager l'infection.
- La radiothérapie produit un effet contraire sur les tissus, donc les ultrasons ne doivent pas être appliqués aux zones soumises à des radiations avant qu'il ne se soit écoulé six mois depuis les irradiations.
- Les tumeurs ne doivent pas être exposées aux ultrasons, car ils pourraient stimuler leur croissance et/ou provoquer des métastases.
- Un utérus pendant la grossesse ne doit pas être traité par les ultrasons, car ceux-ci pourraient causer des dommages au fœtus (la scansion avec ultrasons comme instrument diagnostique pendant la grossesse diffère de celle utilisée en thérapie).
- Un patient porteur de pacemaker ne peut pas être traité avec les ultrasons.
- Ne pas utiliser dans les zones avec prothèses ou matériaux d'ostéosynthèse.
- Grossesse et allaitement maternel. Évitez la cavitation immédiatement après la grossesse. Attendez au moins 6 mois.
- Sur des sujets en état fébrile.
- Ne pas utiliser directement sur un chéloïde existant.
- Mauvaise circulation (sang et lymphes).
- Épilepsie.
- Abus d'alcool ou de drogues.
- Maladies cardiaques.
- Paralysie.
- Taux de cholestérol élevé.
- Maladie du foie.
- VIH ou SIDA.
- Système immunitaire déficient.
- Stérilet: N'utilisez pas la sonde sur la zone où se trouve le stérilet.
- Prothèses métalliques.
- Moins de 18 ans.

- Les personnes porteuses d'un appareil médical doivent absolument en parler avec leur médecin afin de savoir si les caractéristiques de l'appareil sont compatibles avec le traitement.
- Les personnes atteintes d'une quelconque maladie doivent absolument en parler avec leur médecin afin de savoir si les caractéristiques de leur maladie sont compatibles

Zones à Ne Pas Traiter par la Cavitation

- Ne pas utiliser sur la moelle osseuse et l'épine dorsale.
- Sur des organes nobles: ovaires, cœur, tête, poitrine, visage, cou, menton, aisselle, vaisseaux sanguins visibles, veines superficielles, varice, zones enflées.
- Sur les zones osseuses: chevilles, coudes, colonne vertébrale, etc.

Zones pouvant Être Traitées par la Cavitation

<ul style="list-style-type: none"> • La taille • Les poignées d'amour • Les cuisses • L'intérieur des cuisses • Le bas du dos 	<ul style="list-style-type: none"> • Le ventre • La culotte de cheval • Les fesses • Les bras • Les flancs
--	---

3.2 Contre-indications & Zones de Traitement par Radiofréquence

Contre-Indications à l'Utilisation de la Radiofréquence

- Grossesse
- Troubles vasculaires
- Stimulateurs cardiaques, pacemaker ou autres appareils électriques
- Prothèse métallique
- Infections cutanées
- Plaies ouvertes
- Maladie neuro-musculaire
- Varices

3.3 Dangers de la Radiofréquence

Le resserrement de la peau par radiofréquence est généralement considéré comme sûr lorsqu'il est effectué conformément à notre formation.

Les clients doivent être interrogés tout au long du traitement sur leur niveau de confort sur une échelle de 1 à 10. Le but est de calibrer les réglages de température à environ un niveau de confort.

Des niveaux de douleur élevés chez le client signifient que la température est trop élevée et que les réglages doivent être abaissés pour réduire le risque. C'est pour cela qu'il faut prendre la température immédiatement après que vous avez retiré la sonde.

Si la procédure n'est pas correctement effectuée, il est possible de se brûler.

Des températures à atteindre pour traiter chaque problème de peau, relâchement cutané, cellulite... Nous vous recommandons fortement la formation pour avoir de bons résultats.

Les effets secondaires le plus courants comprennent : Gonflement temporaire, Rougeurs, Picotements, Érythème persistant.

Zones Pouvant Être Traitées par la radiofréquence

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• La taille• Les poignées d'amour• Les cuisses• L'intérieur des cuisses• Le visage• Le buste• Le contour des yeux• Le cou | <ul style="list-style-type: none">• Le ventre• La culotte de cheval• Les fesses• Les bras• Les flancs• Les jambes• Le menton• Les bajoues |
|--|--|

3.4 Contre-indications & Zones de Traitement par Lipolaser

Contre-Indications à l'Utilisation du Lipolaser

- Grossesse
- Troubles vasculaires
- Stimulateurs cardiaques ou autres appareils électriques
- Prothèse métallique
- Infections cutanées
- Plaies ouvertes
- Maladie neuro-musculaire
- Varices


Zones Pouvant Être Traitées par le lipolaser

- La taille
- Les poignées d'amour
- Les cuisses
- L'intérieur des cuisses
- Le visage
- Le buste
- Le contour des yeux
- Le cou

- Le ventre
- La culotte de cheval
- Les fesses
- Les bras
- Les flancs
- Les jambes
- Le menton
- Les bajoues

PARTIE 04


4.1 Utilisation de l'Interface

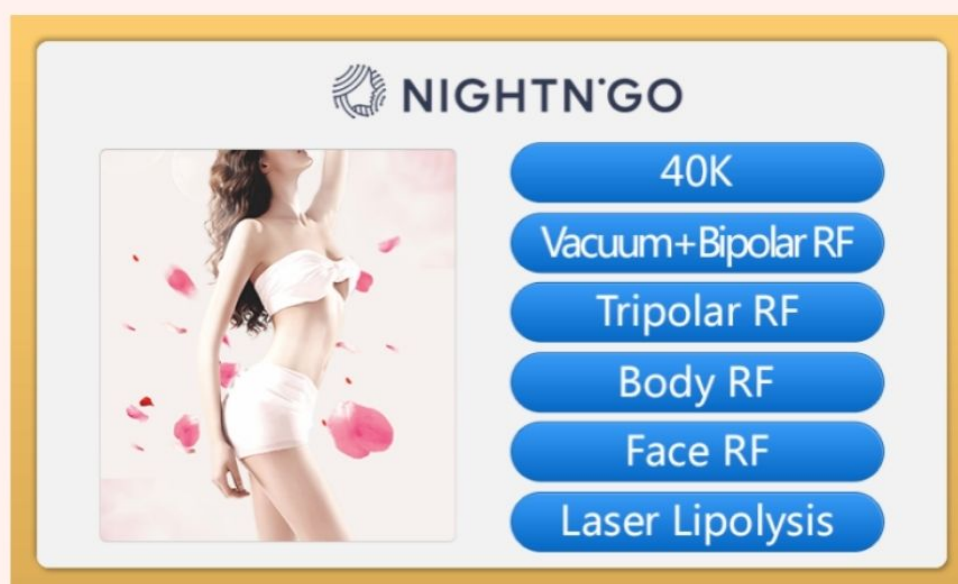

Allumez l'appareil pour afficher l'écran d'accueil et l'interface de sélection principale. Sélectionnez ensuite les paramètres appropriés en fonction des besoins spécifiques du client pour procéder au traitement.

Préférez l'utilisation de vos doigts plutôt que d'objets pointus ou de stylos pour interagir avec l'écran. Veillez à ne pas exercer une pression excessive sur l'écran tactile afin d'éviter tout risque de dommage.

4.2 Sonde Cavitation pour le Corps

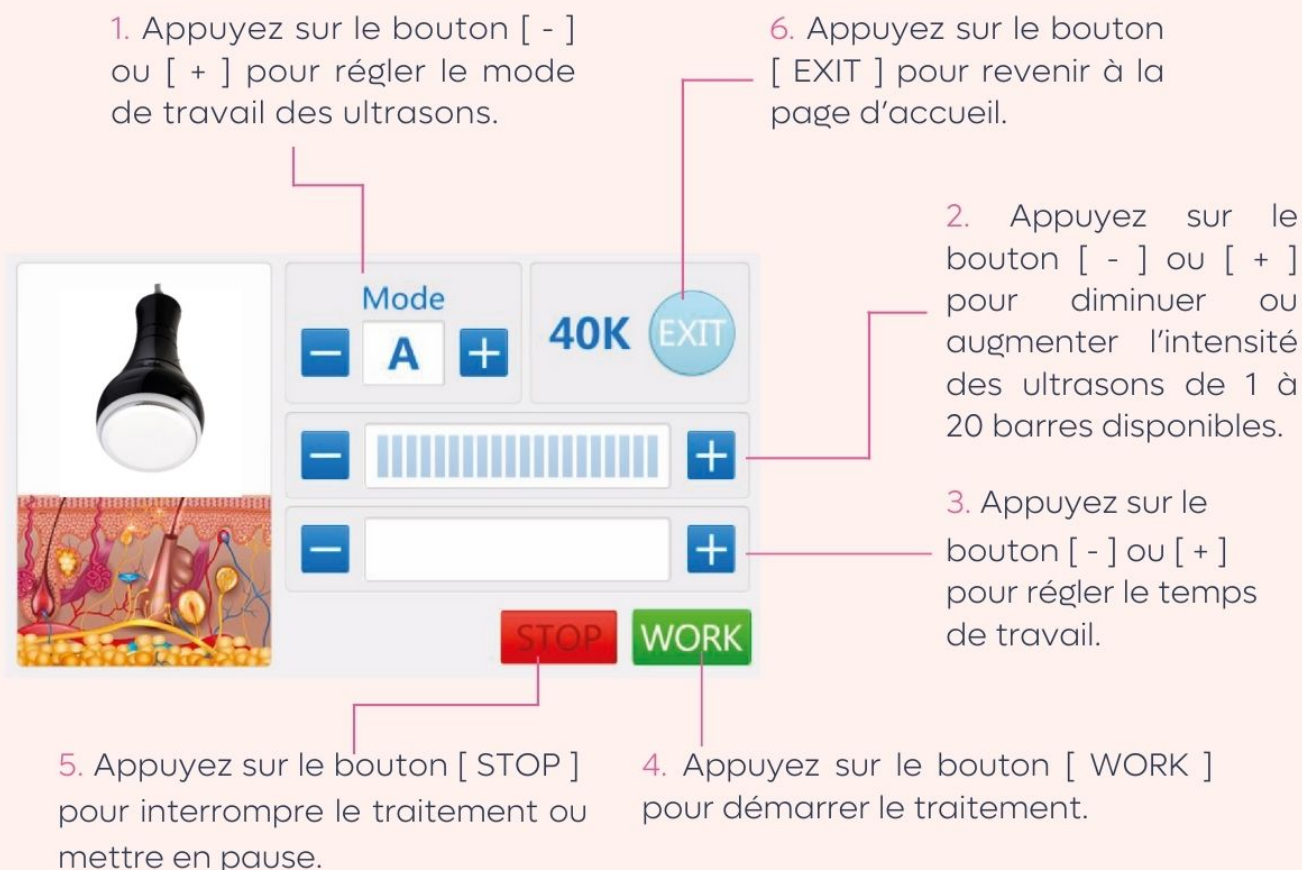

1. Appuyez sur le bouton [-] ou [+] pour régler le mode de travail des ultrasons.

2. Appuyez sur le bouton [-] ou [+] pour diminuer ou augmenter l'intensité des ultrasons de 1 à 20 barres disponibles.

3. Appuyez sur le bouton [-] ou [+] pour régler le temps de travail.

4. Appuyez sur le bouton [WORK] pour démarrer le traitement.

5. Appuyez sur le bouton [STOP] pour interrompre le traitement ou mettre en pause.

6. Appuyez sur le bouton [EXIT] pour revenir à la page d'accueil.

The diagram shows a control panel for a cavitation probe. On the left is an image of the probe and a cross-section of skin with fat cells. The panel features a 'Mode' section with minus and plus buttons and a display showing 'A'. To the right, it shows '40K' and an 'EXIT' button. Below this is a bar graph with minus and plus buttons. Further down are two more minus and plus buttons. At the bottom are 'STOP' and 'WORK' buttons. Red lines connect the numbered instructions to the corresponding buttons on the panel.

Mode A : Onde continue pour les zones où la graisse est épaisse.

Mode B : Onde discontinue pour les zones où la graisse est mince.

La cavitation

La cavitation est une alternative non invasive aux traitements plus lourds qui nécessitent des opérations ou période de rétablissement longue. C'est une technologie révolutionnaire qui, grâce aux ondes ultrasons de basse fréquence, produit des bulles microscopiques brisant les membranes des cellules graisseuses sans endommager les tissus qui les entourent (peau, vaisseaux, nerfs). La cavitation est le seul traitement en mesure d'éliminer la graisse au niveau cellulaire. La transformation des adipocytes en triglycérides empêche leur reproduction. Lorsque la cellule adipeuse est détruite, ce phénomène libère des triglycérides et les amas graisseux se décomposent.

Les adipocytes et les amas graisseux se liquéfient et quittent l'organisme de manière naturelle en passant par les reins et le foie, grâce au système lymphatique et à la circulation sanguine. La graisse de votre corps sera facilement éliminée par le système lymphatique et urinaire au rythme que votre corps décidera de tolérer.

Étant donné que les adipocytes sont complètement détruits et pas simplement vidés (comme c'est le cas avec d'autres programmes d'amaigrissement), les résultats obtenus sont définitifs. Le nombre de traitements nécessaires dépend de l'épaisseur de la couche graisseuse.

4.3 Sonde Radiofréquence Sextupolaire, Quadripolaire et Tripolaire


5. Appuyez sur le bouton [EXIT] pour revenir à la page d'accueil.

1. Appuyez sur le bouton [-] ou [+] pour diminuer ou augmenter l'intensité de la radiofréquence de 1 à 20 barres disponibles.

2. Appuyez sur le bouton [-] ou [+] pour régler le temps de travail.

4. Appuyez sur le bouton [STOP] pour interrompre le traitement ou mettre en pause.

3. Appuyez sur le bouton [WORK] pour démarrer le traitement.

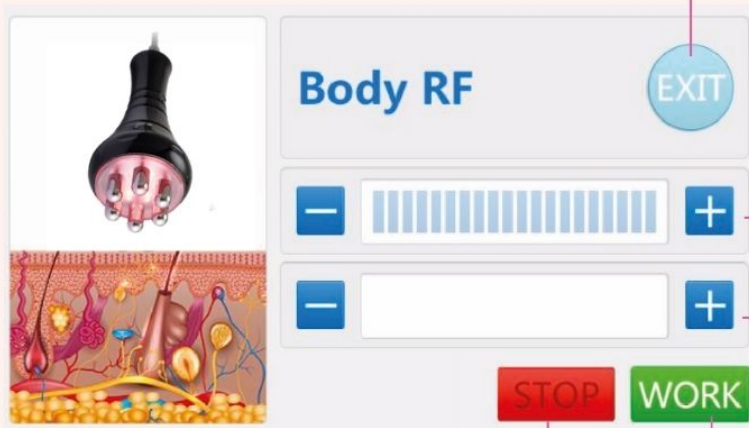

La Radiofréquence

La radiofréquence est une technologie innovante utilisée dans le domaine de l'esthétique pour améliorer l'apparence de la peau, raffermir les tissus et même traiter la cellulite. Cette méthode non invasive repose sur l'utilisation d'ondes radio à haute fréquence pour générer de la chaleur contrôlée dans les couches profondes de la peau, entraînant ainsi une série de bienfaits visibles.

Le principal mécanisme d'action de la radiofréquence est la stimulation du collagène, une protéine fondamentale pour la santé et la jeunesse de la peau. Lorsque les ondes de radiofréquence pénètrent dans les couches sous-cutanées, elles activent les fibroblastes, des cellules responsables de la production de collagène. Cette activation déclenche une cascade de processus naturels de régénération : les fibroblastes augmentent leur production de collagène, renforçant ainsi la structure de la peau et améliorant son élasticité.

L'objectif est de chauffer suffisamment les tissus pour stimuler la production de collagène, tout en évitant de dépasser des seuils de température qui pourraient causer des dommages. Une température optimale est généralement atteinte pour induire la contraction des fibres de collagène existantes et pour encourager la formation de nouveau collagène au fil du temps.

4.4 Sonde Vacuum Radiofréquence pour le corps +

6. Appuyez sur le bouton [-] ou [+] pour régler le temps de relâchement.

7. Appuyez sur le bouton [-] ou [+] pour diminuer ou augmenter le temps d'aspiration.



1. Appuyez sur le bouton [EXIT] pour revenir à la page d'accueil.

2. Appuyez sur le bouton [-] ou [+] pour diminuer ou augmenter l'intensité de la radiofréquence de 1 à 20 barres disponibles.

3. Appuyez sur le bouton [-] ou [+] pour régler le temps de travail.

5. Appuyez sur le bouton [STOP] pour interrompre le traitement ou mettre en pause.

4. Appuyez sur le bouton [WORK] pour démarrer le traitement.




Tournez le bouton pour ajuster l'intensité d'aspiration

La Vacuum thérapie

La technologie de la radiofréquence peut être associée à la vacuum thérapie : traitement non invasif qui consiste à exercer une aspiration pour stimuler l'irrigation sanguine de la peau et lui redonner un aspect plus ferme et tonique. Sur le corps, la thérapie de vacuum permet de traiter la cellulite, le raffermissment et l'amincissement. Les parties du corps telles que les fesses et les seins sont rehaussés et raffermiss. Utilisée sur le visage, la thérapie de vacuum aide notamment à décongestionner les cernes et à redonner de l'éclat au teint. Cette méthode permet également le drainage lymphatique qui assure les fonctions d'épuration et de détoxification. Notre appareil, le Sublime, émet une aspiration continue ou discontinue.

4.5 Pads Lipolaser pour le corps et visage

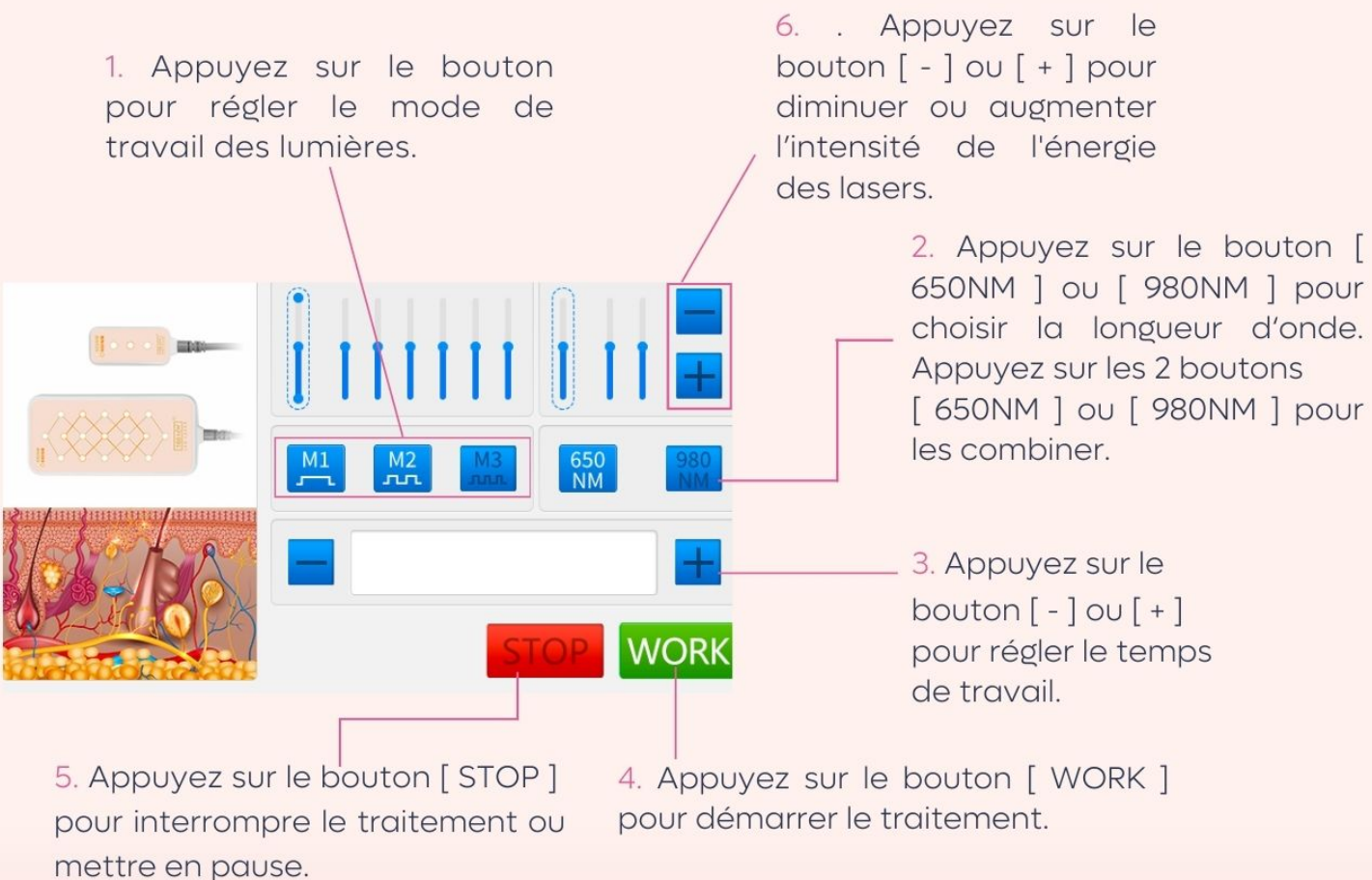

1. Appuyez sur le bouton pour régler le mode de travail des lumières.

2. Appuyez sur le bouton [650NM] ou [980NM] pour choisir la longueur d'onde. Appuyez sur les 2 boutons [650NM] ou [980NM] pour les combiner.

3. Appuyez sur le bouton [-] ou [+] pour régler le temps de travail.

4. Appuyez sur le bouton [WORK] pour démarrer le traitement.

5. Appuyez sur le bouton [STOP] pour interrompre le traitement ou mettre en pause.

6. Appuyez sur le bouton [-] ou [+] pour diminuer ou augmenter l'intensité de l'énergie des lasers.

The diagram shows the control panel of the Sublime device. It features a digital display, several buttons for mode selection (M1, M2, M3), wavelength selection (650 NM, 980 NM), intensity adjustment (+, -), and start/stop buttons (WORK, STOP). A red box highlights the M1, M2, and M3 buttons, and another red box highlights the 650 NM and 980 NM buttons. A third red box highlights the intensity adjustment buttons (+ and -). A fourth red box highlights the WORK and STOP buttons. A fifth red box highlights the intensity adjustment buttons (+ and -). A sixth red box highlights the intensity adjustment buttons (+ and -). The diagram also includes a small inset image of the device's applicator head and a cross-section of skin showing the effect of the treatment.

A : Mode de fonctionnement continu, ce qui est idéal pour stimuler le processus de lipolyse avec le lipolaser, favorisant ainsi une perte efficace de graisse.

B : Mode de fonctionnement discontinu, le laser clignotera lentement, ce qui est idéal pour maintenir et renforcer les résultats déjà obtenus.

C : Mode de fonctionnement discontinu, avec des intervalles de flash plus courts, où les lasers clignotent rapidement. Ce mode est spécialement adapté aux débutants qui commencent leur traitement de lipolaser.

Le Lipolaser

Le lipolaser est une technique qui vise à réduire les cellules adipeuses (cellules graisseuses) en utilisant la technologie laser. Dans le cas spécifique du lipolaser avec des pads contenant des diodes laser sont placés sur la peau à des endroits ciblés du corps. Ces diodes laser émettent une lumière de bas niveau qui pénètre la peau et cible les cellules graisseuses situées juste en dessous. L'énergie du laser déclenche une réaction dans les cellules graisseuses, provoquant la libération des acides gras stockés. Ces acides gras sont ensuite métabolisés par l'organisme et éliminés naturellement.

Notre appareil présente des caractéristiques prometteuses qui le placent au cœur de l'innovation en matière de remodelage corporel et de réduction des graisses. Avec des pads émettant une lumière de précision dans la plage de longueur d'onde de 650 nm à 980 nm, chaque lumière étant puissante à 160 milliwatts (mw), notre dispositif incarne la technologie de pointe du lipolaser à bas niveau.

Il est intéressant de noter que ces longueurs d'onde lumineuses ne se limitent pas uniquement à la décomposition des graisses. Elles pourraient également offrir des avantages pour la santé de la peau. La stimulation potentielle de la production de collagène et l'amélioration de la circulation sanguine témoignent de l'impact positif qu'elles pourraient avoir sur l'apparence générale de la peau.

4.6 Procédure complète

Personnaliser le traitement en fonction du profil de chaque individu s'avère essentiel. Par exemple, si une personne ne présente pas d'excès de poids ou de plis cutanés significatifs, il est judicieux de ne pas recourir à la cavitation. À la place, privilégiez l'utilisation de la radiofréquence (RF) et du Lipolaser pour viser la tonification et la préservation des résultats obtenus.

Adapter la procédure en fonction du profil de chaque individu est crucial, surtout lorsque des dépôts de graisse sont présents. Par exemple, si une personne présente des accumulations graisseuses, il convient de mettre en œuvre une approche complète. Cela pourrait inclure des séances de cavitation pour cibler spécifiquement les zones concernées par l'excès de graisse. De plus, envisagez d'intégrer la radiofréquence (RF) pour favoriser le raffermissement de la peau et de la technologie Lipolaser pour contribuer à la réduction des graisses tout en renforçant les résultats obtenus. En somme, une stratégie complète et personnalisée peut garantir des résultats optimaux pour chaque individu avec des préoccupations liées aux graisses.

Procédure

Étape 1. Cavitation

Préparation :

Avant de commencer, veuillez porter des gants.

Nettoyez soigneusement la zone à traiter pour éliminer toute saleté ou impureté. Appliquez une quantité suffisante de crème conductrice sur la zone à traiter. Veillez à ne pas en appliquer en excès. Cette couche de crème garantit une transmission uniforme de l'onde électromagnétique et facilite le glissement fluide de la pièce à main.

Accès à la crème :

Pour accéder à la crème, [veuillez cliquer ici](#).



Réglage de l'intensité de la cavitation :

Mode conseillé : A

Pendant la séance de cavitation, augmentez progressivement l'intensité. Soyez attentif, car les ultrasons peuvent provoquer des douleurs aux oreilles. Ajuster l'intensité des ultrasons selon la quantité de graisse.

Durée de traitement de la cavitation :

Utilisez la sonde de cavitation pendant un maximum de 40 minutes. Cependant, si la zone à traiter est plus petite, la durée peut être réduite. En général, travaillez de 30 à 40 minutes, en fonction de la zone. Par exemple, pour l'abdomen, la durée totale est de 40 minutes maximum, tandis que pour chaque jambe de la culotte de cheval, elle est de 20 minutes, soit 40 minutes pour les deux jambes combinées. Adaptez la durée et l'intensité en fonction de la quantité de graisse accumulée.

- Lors du traitement, assurez-vous d'effectuer des mouvements circulaires de pincement pour pousser le tissu graisseux vers la sonde. Évitez de laisser la sonde immobile.

Nombre de séances :

Une cure de cavitation nécessite au minimum 5 séances, avec un maximum de 2 séances par semaine. Au total, 16 séances sont recommandées, indépendamment de la zone à traiter. Pour envisager un nouveau traitement, il est nécessaire d'attendre au moins un mois et demi entre les cures.

Note :

- Assurez un contact optimal en maintenant une pression adéquate entre la sonde et la peau.
- Il est recommandé de compléter chaque séance de cavitation par une phase de traitement au vide (vacuum).

Étape 2. Radiofréquence

Préparation :

Avant de commencer, veuillez porter des gants.

Nettoyez soigneusement la zone à traiter pour éliminer toute saleté ou impureté. Appliquez une quantité suffisante de crème conductrice sur la zone à traiter. Veillez à ne pas en appliquer en excès. Cette couche de crème garantit une transmission uniforme de l'onde électromagnétique et facilite le glissement fluide de la pièce à main.

Réglage de l'intensité de la Radiofréquence :

Pendant la séance de RF, augmentez progressivement l'intensité. Sur les zones du visage, la peau est plus fine, la température montera ainsi plus vite.

Durée de traitement de la Radiofréquence :

Utilisez la sonde Rf durant 40 min maximum. Bien évidemment, la durée peut être réduite si la zone à traiter est plus petite. Par exemple : 10 min sur tout le visage. Traitement double menton 5-10 min.

- Lors du traitement, assurez-vous d'effectuer des mouvements circulaires. Évitez de laisser la sonde immobile.
- Pour parvenir rapidement à la température souhaitée, augmentez l'intensité à environ 90%. Une fois que les zones sont adéquatement réchauffées, ajustez l'intensité à un niveau compris entre 70 et 80%.

- La température externe de la peau est contrôlée avec un thermomètre infrarouge au cours du soin pour éviter toute brûlure cutanée. (Plus de détails dans la formation concernant les températures).

Durée du traitement RF Tripolaire pour le contour des yeux :

Traitement contour des yeux 5 min sur chaque oeil.

Nombre de séances :

Un traitement de radiofréquence comprend jusqu'à 20 séances sont recommandées, indépendamment de la zone à traiter, sachant qu'on peut réaliser une à deux séances par semaine selon le type de peau.

Note :

- Au cours d'une procédure, assurez-vous que la pièce à main soit en contact étroit avec la peau pour prévenir toute élévation de température inégale.

Étape 3. Vacuum thérapie

Préparation :

Avant de commencer, veuillez porter des gants.

Nettoyez soigneusement la zone à traiter pour éliminer toute saleté ou impureté.

Appliquez de l'huile sur les zones à traiter, pour faciliter le glissement fluide de la pièce à main. **Ne pas appliquer de gel ou de crème**, il existe un risque de colmatage des orifices de la ventouse et de dommage à celle-ci.

Accès à la crème :

Pour accéder à l'huile NIGHTN°GO, [veuillez cliquer ici](#).

Réglage de l'intensité de la Vacuum :

Pendant la séance de vacuum, optez pour le mode d'aspiration continue en vue de favoriser la tonicité et/ou optez pour le mode discontinue afin de stimuler le drainage. Ajustez le niveau d'intensité en fonction du degré de confort ressenti par le patient.

Durée de traitement de la Vacuum :

Prévoyez une utilisation de la sonde de vacuum pendant une durée de 10 à 15 minutes.

Note :

- Vous pouvez utiliser simultanément ou indépendamment les deux fonctions. La Vacuum + RF sextupolaire associe un mécanisme d'énergie 3D RF et une thérapie par le vide qui va permettre de régénérer et de stimuler le collagène. Diminution de la cellulite, remodelage du corps, raffermissement de la peau et meilleure circulation sanguine.
- En cas d'utilisation simultanée de la vacuum et de la radiofréquence, pensez à réduire l'intensité de la RF pour éviter toute sensation de brûlure chez le client lors de l'aspiration de la peau par la vacuum.

Étape 4. Lipolaser

Préparation :

L'étape pour la dissolution des graisses et la consolidation de l'effet.

Avant de commencer, veuillez porter des gants.

Nettoyez soigneusement la zone à traiter pour éliminer toute saleté ou impureté.

Évitez d'appliquer tout produit sur la peau.

Utilisez les sangles pour positionner les pads sur les zones à traiter.

Disposez préalablement les pads sur la zone à traiter avant de les activer.

Réglage de l'intensité du Lipolaser :

Mode conseillé : A

Pendant la séance de lipolaser, augmentez progressivement l'intensité, en ajustant celle-ci en fonction de la quantité de graisse présente.

Durée de traitement du Lipolaser :

Laissez les pads durant 20 min au maximum.

Nombre de séances :

Une cure de lipolaser nécessite au minimum 5 séances, avec un maximum de 2 séances par semaine. Au total, 16 séances sont recommandées, indépendamment de la zone à traiter. Pour envisager un nouveau traitement, il est nécessaire d'attendre au moins un mois et demi entre les cures.

Note :

- Lors de l'utilisation des pads laser, il est crucial que l'ensemble de leur surface soit en contact total avec la peau, il ne doit pas se limiter à une petite zone de contact.

4.7 Conseils après la Cavitation Radiofréquence Lipolaser

HYDRATATION

L'hydratation joue un rôle crucial dans l'élimination des déchets et des toxines de votre organisme. Nous vous recommandons de consommer au moins 1,5 à 2 litres d'eau par jour durant les 2 jours précédant la séance, ainsi que 1,5 à 2 litres par jour pendant les 3 jours suivant la séance. Il est également essentiel de maintenir une hydratation adéquate en buvant suffisamment d'eau de façon régulière. Si votre client suit déjà un programme de perte de poids, nous vous suggérons de l'encourager à poursuivre son programme actuel.

L'importance de la quantité d'eau ne doit pas être sous-estimée. Maintenir une hydratation optimale est un élément clé pour favoriser l'élimination des toxines hors du corps.

MODE DE VIE

Il est essentiel que votre client adopte un changement de mode de vie et suive les recommandations fournies avant et après le traitement.

ALIMENTATION

Il est recommandé de suivre une alimentation équilibrée et saine. Si des habitudes alimentaires peu saines telles que la surconsommation d'aliments riches en matières grasses et en sucre ainsi qu'une consommation excessive d'alcool persistent, cela risque de perpétuer le cycle de formation des cellules graisseuses.

ACTIVITÉ PHYSIQUE

Pour optimiser les résultats du traitement, il est conseillé de pratiquer régulièrement une activité physique. Après le traitement, il est nécessaire de faire au moins 20 minutes d'exercice cardiovasculaire à intensité élevée pour tirer pleinement parti des bienfaits du traitement.

PARTIE 05

5.1 Entretien de l'appareil & Fausse panne

Après chaque utilisation, veuillez suivre ces instructions pour nettoyer et entretenir les composants de l'appareil :

1. Nettoyez les sondes, les pads et l'appareil à l'aide d'un chiffon en microfibre. Évitez l'utilisation de désinfectants contenant de l'alcool ou de la javel.
2. Utilisez des lingettes nettoyantes sans alcool ou humidifiez un chiffon avec de l'eau saline pour le nettoyage.
3. Assurez-vous que les composants sont correctement séchés avant de les ranger.

Pour prévenir toute réduction de l'aspiration de la sonde de vacuum therapy, suivez ces étapes supplémentaires :

1. Utilisez une petite pince pointue pour retirer délicatement l'opercule en silicone blanc en le saisissant par le trou.
2. Nettoyez soigneusement l'opercule en silicone et remplacez le filtre en coton par un nouveau.
3. Le colmatage des trous de l'opercule ou la présence de résidus sur le filtre peuvent causer une diminution de l'aspiration.
4. Changez régulièrement le filtre pour éviter toute saturation d'huile ou de saleté, ce qui pourrait affecter le bon fonctionnement de l'appareil.

Pour nettoyer le flacon de filtration, suivez ces étapes :

1. Vérifiez que le flacon et le joint transparent ne sont ni huileux ni sales.
2. Nettoyez soigneusement le flacon et le joint transparent.
3. Si les joints ne sont plus étanches, remplacez-les pour éviter toute perte d'aspiration.
4. Vérifiez périodiquement que le flacon est correctement emboîté, car les vibrations peuvent le faire bouger.

Avant et après chaque utilisation, assurez-vous que la sonde et sa plaque sont bien assemblées pour éviter toute infiltration de crème ou d'huile à cet endroit.

Il est essentiel de changer régulièrement le filtre pour éviter que celui-ci ne soit saturé d'huile ou de saleté. Si l'intérieur de l'appareil devient huileux à cause d'un filtre non entretenu, cela pourrait entraîner une dégradation de l'appareil et potentiellement annuler la garantie.

En suivant ces étapes de nettoyage et d'entretien, vous pouvez assurer un fonctionnement optimal de la sonde de vacuum therapy et prolonger la durée de vie de l'appareil.



NIGHTN'GO

SUBLIME

Appareil Cavitation
Radiofréquence
Lipolaser & Vacuum



**GARANTIE
TERMES & CONDITIONS**

Garantie NIGHTN°GO

Bien que nous accordions une grande attention à la fabrication et à l'amélioration de nos produits, il est important de noter qu'il est toujours possible de rencontrer des pannes ou des dysfonctionnements. Malgré tous nos efforts pour assurer la qualité et la fiabilité de nos appareils, il peut y avoir des situations imprévues qui peuvent entraîner des problèmes techniques. Nous comprenons l'importance de fournir des produits fiables et performants, et nous nous engageons à résoudre rapidement tout problème rencontré pendant la période de garantie. Notre équipe technique est à votre disposition pour vous assister et trouver la meilleure solution en cas de panne avérée. Nous tenons à vous rassurer que nous prenons ces problèmes très au sérieux et que nous nous efforçons continuellement d'améliorer nos produits et nos processus de fabrication afin de minimiser les risques de pannes. Votre satisfaction est notre priorité absolue, et nous ferons tout notre possible pour résoudre tout problème rencontré.

La date de facture servira de point de départ de la période de garantie. Nos matériels et équipements sont couverts par une garantie de deux ans pour les professionnels, y compris les pièces et la main-d'œuvre de manière générale, ou pour une durée contractuelle différente précisée sur la fiche produit correspondante. Les accessoires, considérés comme des consommables (tels que les tuyaux, les sondes, écrans tactiles, câbles d'alimentation, etc.), bénéficient d'une garantie de six mois. Il est important de noter qu'il est strictement interdit d'ouvrir l'appareil, sauf si vous êtes autorisé par notre entreprise. Toute altération de l'appareil annulera la garantie.

Tout produit défectueux pourra faire l'objet d'une réparation ou d'un remplacement par un produit identique ou équivalent, selon la solution jugée la plus appropriée par le vendeur ou les fabricants concernés. Cependant, veuillez noter que cette politique de garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :

- Altération ou modification des produits : toute altération ou modification apportée aux produits annulera la garantie.
- Usage anormal ou non conforme : la garantie ne couvre pas les défauts résultants d'une utilisation anormale ou non conforme aux instructions d'utilisation des produits.

- Utilisation non conforme à l'usage prévu : les défauts et les conséquences résultant d'une utilisation des produits pour un usage autre que celui pour lequel ils sont destinés ne sont pas couverts par la garantie.
- Causes extérieures : les défauts et les conséquences causés par des causes extérieures, telles que des accidents, des chocs, des catastrophes naturelles, ne sont pas couverts par la garantie.
- Usure normale : l'usure normale des produits au fil du temps n'est pas couverte par la garantie.
- Non-respect de la procédure de retour : si le client ne respecte pas la procédure de retour définie par le vendeur, cela peut annuler la possibilité de bénéficier de la garantie.
- Les Produits dont des protocoles de formation et des vidéos explicatives ont été envoyés et les Produits soldés ne sont pas remboursables.

Conditions de Mise en Œuvre

Pour toute réclamation relevant des garanties, veuillez adresser un courrier électronique au service après-vente à l'adresse suivante : sav@nightngo.fr. Avant de retourner le produit, veuillez obtenir l'accord préalable dudit service. Les articles défectueux couverts par la garantie doivent être renvoyés par l'Acheteur à ses frais, à l'adresse suivante : NIGHTN°GO, 26 rue des moulins à huile 34300 AGDE. Contact téléphonique : 04 69 96 62 00.

Lors de l'expédition de l'article, veuillez assurer une protection adéquate en utilisant de la mousse pour le caler et du papier bulle pour le préserver. Opter pour un service de livraison avec suivi ou souscrire à une assurance de livraison est vivement recommandé. Nous ne pouvons garantir la réception de l'article retourné en bon état.

Toute réparation, modification ou remplacement de pièces durant la période de garantie ne prolongera pas la durée de celle-ci. En aucun cas, une indemnisation ou des dommages-intérêts ne pourront être réclamés.

Pour les réparations hors garantie, un devis sera établi et devra être approuvé par l'Acheteur avant toute intervention. Le paiement doit être effectué intégralement avant que le matériel ne soit renvoyé par NIGHTN°GO, aux frais de l'Acheteur. Tout remboursement de ces frais doit faire l'objet d'une autorisation préalable obtenue du Service Après-Vente, conformément à la procédure précitée. Une fois réparé ou échangé, NIGHTN°GO réexpédiera l'article à la charge de l'acheteur et à l'adresse indiquée par ce dernier.

À réception du ou des produits, en cas d'incohérence entre le problème constaté par les techniciens de NIGHTN°GO et les dires de l'acheteur, NIGHTN°GO se réserve le droit de ne pas envoyer l'article en réparation, ni de l'échanger.

Cette garantie répond aux normes de la garantie légale de conformité telle que mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-14 du Code de la consommation et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du Code Civil.

Extraits du Code de la Consommation :

Art. L. 217-4 : « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».

Art. L. 217-12 : « L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ».

Art. L. 217-5 : « Le bien est conforme au contrat :

1. S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage.

2. Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties, ou s'il est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et accepté par ce dernier." Les garanties légales ne s'appliquent pas aux Acheteurs professionnels ; elles concernent uniquement les Acheteurs particuliers.

Garantie par Type de Produit

CATÉGORIES DE PRODUITS	PÉRIODE DE GARANTIE
Appareil Sublime	1 an
Accessoires & Consommables	6 mois

Certificat de Garantie

INFORMATIONS PERSONNELLES	
Nom	
Prénom	
Adresse postale	
Adresse mail	
Téléphone	
Professionnel / Particulier	

INFORMATIONS DE LA COMMANDE	
Date de la commande	
Numéro de la commande	
Nom de l'appareil	
Numéro de série de l'appareil	
Téléphone	
Professionnel / Particulier	
INFORMATIONS PROFESSIONNELLES	
Profession	
Nom de l'entreprise	
Adresse postale de l'entreprise	
Adresse mail de l'entreprise	
Téléphone de l'entreprise	
N° SIRET de l'entreprise	

Je déclare sur
l'honneur l'exactitude
des renseignements
fournis, sous peine de
sanctions pénales.

oui

fait le :

Signature :

SAS NIGHT'N'GO
34 AV DES CHAMPS-ELYSEES
75008 PARIS
SIREN 849040738