


Gluco III Manuel de l'utilisateur

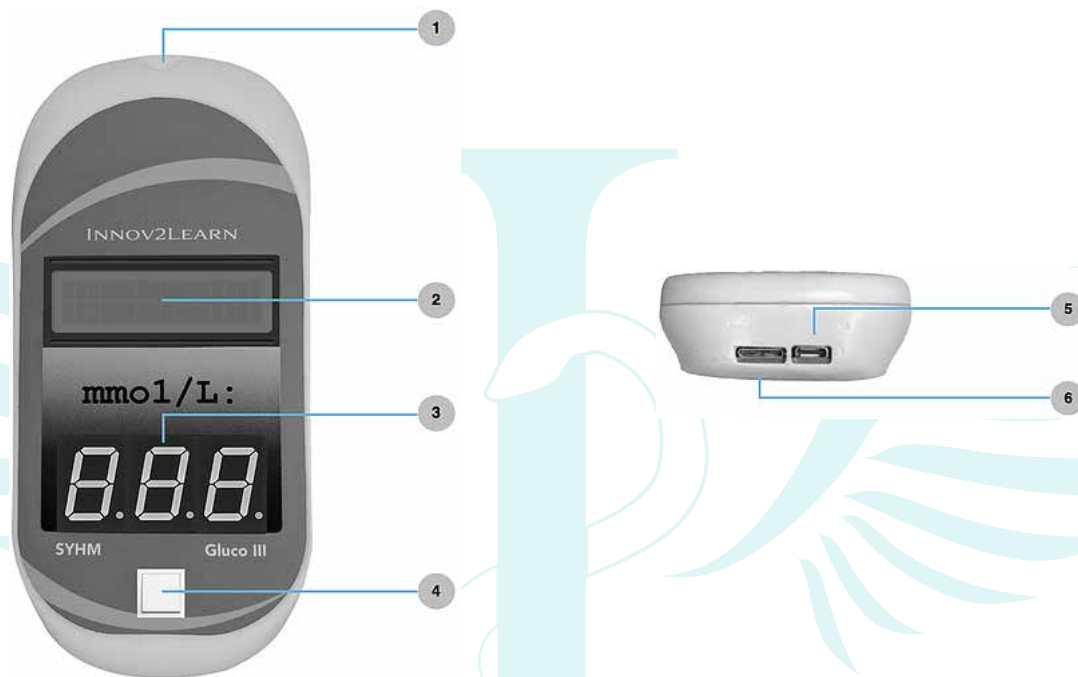

a- Guide de bande de test
Faites glisser la bandelette de test (1).

b- Affichage de l'état
Visualisez l'état actuel de l'appareil (2).

c- Affichage des résultats
Visualisez les résultats du test en cours (3).

d- Bouton ON / OFF
Allumez ou éteignez l'appareil et affichez l'état actuel de la batterie (4).

- Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.

e- USB type C
Insérer le câble USB pour recharger l'appareil (5).

f- USB 3 Micro-B
Insérer le câble USB pour recharger l'appareil (6).

Gluco III Manuel de l'utilisateur

Comment ça fonctionne

1- Allumer l'appareil

Maintenir le bouton d'allumage enfoncé pendant environ 3 secondes.

2- Vérifier l'état de l'appareil

L'affichage de l'état est maintenant Prêt.

3- Se connecter à l'appareil

Ouvrir l'application SYHM

3.1 - Applications Android/iOS :

- Ouvrir l'application, sélectionner la langue puis cliquer sur OK.
- Cliquer sur le Glucomètre.
- Votre appareil apparaîtra dans la liste disponible.
- Cliquer sur le nom de l'appareil.

3.2 - Applications Windows / Mac OS X :

- Connecter l'USB "bluetooth dongle" sur votre PC.
- Ouvrir l'application et cliquer sur "Ajouter Appareil + "

- Votre appareil doit maintenant apparaître sur la liste.

- Cliquer sur le nom de l'appareil.

4- Insérer la bandelette-test

Glisser la bandelette-test dans le guide de la bandelette-test.

5- Envoyer les résultats du test à l'appareil

L'application affiche maintenant une notification indiquant que l'appareil est prêt à recevoir les résultats.

Entrer la valeur désirée et cliquez sur le bouton "Envoyer".

6- Vérifier les résultats des tests

Les résultats des tests s'affichent sur l'écran de l'appareil.

Recharger la batterie

Lorsque la pile est faible, le bouton ON/OFF commence à clignoter de la manière suivante : deux clignotements rapides suivis d'un clignotement long.

Pour recharger l'appareil, brancher la charge sur l'un des ports USB. Les deux ports USB peuvent être utilisés pour recharger l'appareil.

Le bouton ON/OFF clignote en continu pendant que la batterie se recharge.

Lorsque la recharge est terminée, le voyant du bouton ON /OFF reste allumé, indiquant que la batterie est à 100%.