

Manuel de l'utilisateur Oxi II



1- Interrupteur d'alimentation
Activer ou désactiver l'appareil (1).

2- Ecran LCD
Affiche les résultats du test en cours (2).

3- Port de recharge USB-C

Manuel de l'utilisateur Oxi II

Comment ça fonctionne

1- Allumer l'appareil

Appuyer sur l'interrupteur d'alimentation.

2- Connexion à l'appareil

Ouvrir l'application SYHM

2.1 - Applications Android/iOS :

- Ouvrir l'application, sélectionner la langue puis cliquer sur OK.
- Cliquer sur Oxymètre.
- Votre appareil doit être affiché dans la liste disponible.
- Cliquer sur le nom de l'appareil.

2.2 - Applications Windows / Mac OS X :

- Connecter l'USB "bluetooth - dongle" sur votre PC
- Ouvrir l'application et cliquer sur "Ajouter Appareil + "

- Votre appareil doit maintenant apparaître sur la liste.

- Cliquer sur le nom de l'appareil.

3- Insérer le doigt

Ouvrir la pince et insérer un doigt dans l'appareil.

4- Envoyer les résultats du test à l'appareil

L'application affiche maintenant une notification indiquant que l'appareil est prêt à recevoir les résultats.

Entrer la valeur désirée et cliquer sur le bouton "Envoyer".

5- Vérifier les résultats des tests

Les résultats des tests s'affichent sur l'écran LCD.

Recharger la batterie

Lorem ipsum

Lorsque la batterie est faible, l'écran peut afficher des lignes ou un écran noir.

Pour charger l'appareil, branchez le câble USB-C au port de charge.

Pendant que la batterie est en charge, un voyant orange s'allume à l'endroit où vous insérez le doigt pour la détection.

Lorsque la recharge est terminée, le voyant orange s'éteint automatiquement.