


## Manuel de l'utilisateur Oxy

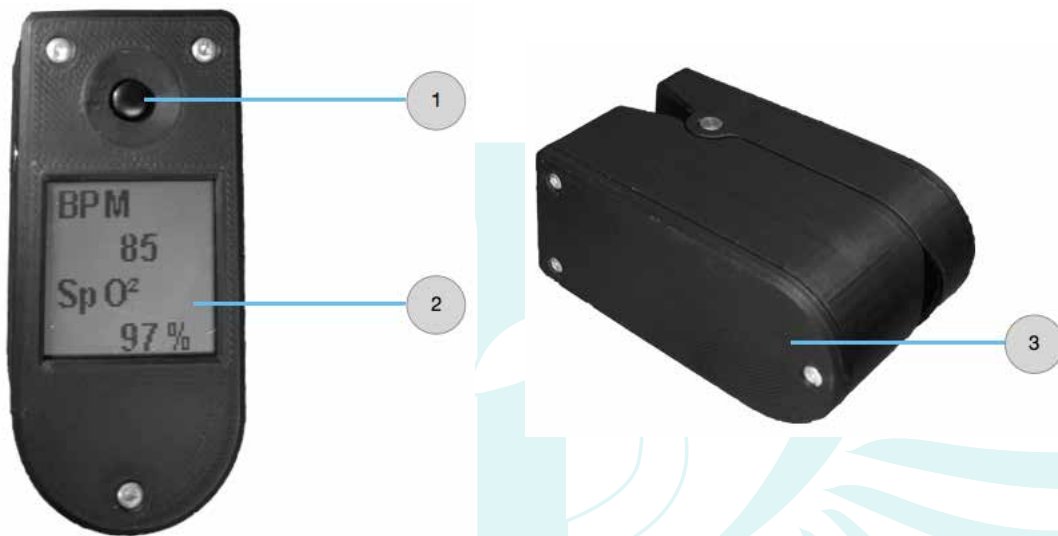

**a- Interrupteur d'alimentation**  
Activer ou désactiver l'appareil (1).

**b- Ecran LCD**  
Affiche les résultats du test en cours (2).

**c- Compartiment des piles**  
Fonctionne seulement avec deux piles AAA (3).

## Manuel de l'utilisateur Oxy

### Comment ça fonctionne

#### **1- Allumer l'appareil**

Appuyer sur l'interrupteur d'alimentation.

#### **2- Connexion à l'appareil**

Ouvrir l'application SYHM

##### **2.1** - Applications Android/iOS :

- Ouvrir l'application, sélectionner la langue puis cliquer sur OK.
- Cliquer sur Oxymètre.
- Votre appareil doit être affiché dans la liste disponible.
- Cliquer sur le nom de l'appareil.

##### **2.2** - Applications Windows / Mac OS X :

- Connecter l'USB "bluetooth dongle" sur votre PC
- Ouvrir l'application et cliquer sur "Ajouter Appareil + "

- Votre appareil doit maintenant apparaître sur la liste.

- Cliquer sur le nom de l'appareil.

#### **3- Insérer le doigt**

Ouvrir la pince et insérer un doigt dans l'appareil.

#### **4- Envoyer les résultats du test à l'appareil**

L'application affiche maintenant une notification indiquant que l'appareil est prêt à recevoir les résultats.

Entrer la valeur désirée et cliquer sur le bouton "Envoyer".

#### **5- Vérifier les résultats des tests**

Les résultats des tests s'affichent sur l'écran LCD.

### Recharger la batterie

Retirer les vis du compartiment des piles.

Placer les deux piles AAA dans le compartiment en respectant les polarités.