



ES

COSMEDENT® www.cosmedent.com | 800.621.6729

Prevue® Try-In Gel System

## INSTRUCCIONES DE EMPLEO

## DESCRIPCIÓN

Prevue® water-soluble try-in gels evitan las conjeturas y el desorden de la evaluación del color de las coronas de porcelana y de resina indirecta. Tiene un color exactamente coincidente con los 7 tonos del sistema de cementación Insure®.

Las coronas se cargan con Prevue® Try-in Gel y se colocan sobre todos los dientes preparados, lo que permite una visualización completa de la corona por el paciente.

Prevue Try-in Gels se eliminan fácilmente de las coronas y de la estructura del diente con un pulverizador de agua.

## TONOS

Prevue Try-in Gels se comercializan en los siguientes tonos, con colores coincidentes a los tonos Insure:  
Clear, Yellow Red Light, Yellow Red Universal, Grey Light, White Opaque, Yellow Opaque, Pink Opaque

## COMPOSICIÓN

Prevue Try-In Gel consta de propilenglicol, glicerina, agua, polímero de acrílico y pigmentos. Su pH es neutro.

## INDICACIONES

(Zonas de aplicación)

- Sistema de cemento de corona de prueba hidrosoluble.

## DISPENSACIÓN DE PREVUE TRY-IN GEL

Coloque la punta desechable sobre la abertura de la jeringa y enrósquela firmemente antes de dispensar Prevue Try-In Gel. Esto facilitará una colocación controlada en el cilindro de la corona, sin que haya un exceso de Try-In Gel extrayéndose de la jeringa y causando un desperdicio del material. Elimine la punta después del uso y vuelva a colocar inmediatamente el tapón en la jeringa de Try-In Gel.

## APLICACIÓN

Antes del tratamiento, se debe obtener el tono del diente con ayuda de una guía de tonos estándar. Mantenga los dientes húmedos mientras obtiene el tono.

- 1 Seleccione el tono o mezcla adecuada de Prevue Try-in Gel para la evaluación de prueba.
- 2 Cargue completamente la superficie interna, previamente grabada, de cada corona con Prevue Try-in Gel.
- 3 Limpie y seque todos los dientes que reciben las coronas, pero no grabe los dientes o condicione la dentina.
- 4 Coloque cada corona en el diente receptor y asiente completamente con una ligera presión. Limpie cualquier exceso de Prevue Try-in Gel de los márgenes.
- 5 Coloque al paciente en posición erguida y evalúe el color frente a un espejo grande, en diversas condiciones de iluminación, por ejemplo, luz diurna, iluminación de oficina, etc.
- 6 Si el color es favorable, seleccione el correspondiente cemento resinoso Insure o mezcla de cemento resinoso; p. ej., Clear Prevue Try-In Gel requeriría Clear Insure resin cement.
- 7 Extraiga las coronas de cada diente. Con un pulverizador vigoroso de agua, enjuague el Prevue Try-In Gel de las coronas y los dientes.

## HIGIENE Y DESINFECCIÓN

- Se puede llevar a cabo la desinfección de la jeringa con una solución desinfectante existente en el mercado.
- Se deben lavar y autoclavar a conciencia todos los instrumentos usados.

## CONSERVACIÓN

- Conservar a una temperatura entre 4 y 24 °C.
- Vida útil: véase la información en las jeringas o los envases.
- Mantener alejado de la luz solar.

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No se debe usar después de la fecha de caducidad.

**Nota.** Se ha desarrollado este producto para su uso en el sector dental y debe utilizarse de conformidad con las instrucciones de empleo. El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por los daños causados por su uso con ninguna otra finalidad. Asimismo, el usuario está obligado a aceptar la responsabilidad de comprobar, antes del uso, que el material sea idóneo y que pueda usarse con el fin previsto, sobre todo si este no se menciona en las instrucciones de empleo.

## INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN

Elimine el contenido y el recipiente con arreglo a las normativas locales.

## CONTRAINDICACIONES

La colocación de Prevue Try-In Gel está contraindicada si se tiene conocimiento de que el paciente es alérgico a alguno de los componentes.

## EFECTOS ADVERSOS

Puede producir irritación.

## INTERACCIONES

Ninguna.

## AVISO

Se deben informar los incidentes graves a DeltaMed GmbH, el importador responsable y la autoridad responsable.

## ADVERTENCIA

Prevue Try-in Gels contienen glicerina y propilenglicol, y pueden producir irritación en las personas sensibles. En caso de contacto con los ojos, se debe enjuagar inmediatamente con abundante cantidad de agua y consultar al médico si la irritación persiste.

## ENVASES

Prevue jeringas de 2,5 g (incluye 3 puntas de calibre 19)

DE

COSMEDENT® www.cosmedent.com | 800.621.6729

Prevue® Try-In Gel System

## GEBRAUCHSINFORMATION

## BESCHREIBUNG

Die wasserlöslichen Prevue® Try-in Gels beenden das Rätselraten und die Unwägbarkeiten bei der Farbbestimmung von Keramik- und indirekten Kunststoffveneers. Sie sind farblich exakt auf alle 7 Farben des Insure® Zementierungssystems abgestimmt.

Die Veneers werden mit Prevue Try-in Gel befüllt und auf alle präparierten Zähne gesetzt, so dass sich der Patient von den eingesetzten Veneers ein Bild machen kann.

Prevue Try-In Gels können mit Wasser leicht von den Veneers und von der Zahnschubstanz entfernt werden.

## FARBEN

Prevue Try-in Gels sind in den folgenden Farben erhältlich, die auf die Insure Farben abgestimmt sind:  
Clear, Yellow Red Light, Yellow Red Universal, Grey Light, White Opaque, Yellow Opaque, Pink Opaque

## ZUSAMMENSETZUNG

Prevue Try-In Gel besteht aus Propylenglykol, Glycerin, Wasser, Acrylpolymer und Pigmenten. Es ist pH-neutral.

## INDIKATIONEN

(Anwendungsbereiche)

- Wasserlösliches Einprobe-Veneerszementssystem.

## ABGABE VON PREVUE TRY-IN GEL

Die Einweg-Kanüle über die Spritzenöffnung setzen und festschrauben, bevor Prevue Try-In Gel ausgedrückt wird. Dies ermöglicht eine kontrollierte Platzierung in der Verblendschale, ohne dass überschüssiges Try-In Gel aus der Spritze extrudiert wird und Materialabfall entsteht. Die Kanüle nach Gebrauch wegwerfen und die Kappe wieder auf die Try-In Gel Spritze setzen.

## APPLIKATION

Vor der Behandlung sollte die Zahnfarbe mit einem handelsüblichen Farbschlüssel bestimmt werden. Bei der Farbbestimmung sind die Zähne feucht zu halten.

- 1 Die geeignete Farbe des Prevue Try-In Gel für die Einprobe wählen oder mischen.
- 2 Die zuvor geätzte Innenfläche jedes Veneers mit Prevue Try-in Gel vollständig befüllen.
- 3 Alle zu verblendenden Zähne reinigen und trocknen, die Zähne jedoch nicht ätzen bzw. das Dentin nicht konditionieren.
- 4 Die Veneers auf die jeweiligen Empfängerzähne setzen und mit leichtem Druck vollständig einpassen. Überschüssiges Prevue Try-in Gel von den Rändern wegwischen.
- 5 Den Patienten in eine aufrechte Position setzen und die Farbe vor einem großen Spiegel bei verschiedenen Lichtverhältnissen, z. B. Tageslicht, Praxisbeleuchtung usw., bewerten.
- 6 Wenn die Farbe gefällt, den zugehörigen Insure Kunststoffzement oder die entsprechende Kunststoffzementmischung auswählen; z. B. würde Prevue Try-In Gel Clear Insure Resin Cement Clear erfordern.
- 7 Die Veneers von den Zähnen abnehmen. Prevue Try-In Gel mit einem kräftigen Wasserstrahl von den Veneers und den Zähnen abspülen.

## HYGIENE / DESINFEKTION

- Die Desinfektion der Spritze kann mit einer handelsüblichen Desinfektionslösung durchgeführt werden.
- Alle verwendeten Instrumente sollten gründlich gereinigt und autoklaviert werden.

## LAGERUNG

- Bei 4 – 24 °C lagern.
- Haltbarkeit: Siehe Informationen auf den Spritzen und/oder auf der Verpackung.

- Vor Sonnenlicht schützen.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.

**Hinweis:** Das Produkt wurde für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt und muss gemäß Gebrauchsinformation verwendet werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Verwendung für andere Zwecke entstehen. Der Anwender ist auch verpflichtet, vor der Verwendung zu prüfen, ob das Material geeignet und für den vorgesehenen Zweck verwendbar ist, insbesondere wenn dies nicht in der Gebrauchsinformation aufgeführt ist.

## ENTSORGUNGSHINWEISE

Den Inhalt / Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

## KONTRAINDIKATIONEN

Die Applikation von Prevue Try-In Gel ist kontraindiziert, wenn bekannt ist, dass ein Patient gegen einen der Inhaltsstoffe allergisch ist.

## NEBENWIRKUNGEN

Kann Reizungen hervorrufen.

## WECHSELWIRKUNGEN

Keine

## HINWEIS

Schwerwiegende Vorfälle sind der DeltaMed GmbH, dem zuständigen Importeur und der zuständigen Behörde zu melden.

## WARNHINWEIS

Prevue Try-In Gels enthalten Glycerin und Propylenglykol und können bei empfindlichen Personen Reizungen hervorrufen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren, wenn die Reizung bestehen bleibt.


## LIEFEREINHEITEN

Prevue 2,5 g-Spritzen (inkl. 3 Kanülen, 19 Gauge)

## Manufactured for:

Fabriqué pour :  
Fabricado para:  
Fabricado para:  
Hergestellt für:  
**Cosmedent® Inc.**  
401 N. Michigan Ave., Suite 2500  
Chicago, IL 60611-4243  
USA (1) 312-644-9586  
USA (1) 800-621-6729  
**www.cosmedent.com**

V01 2019-09-13

 **DeltaMed GmbH**  
Raiffeisenstraße 8a  
61169 Friedberg  
Germany  
**www.deltamed.de**

medical device  
dispositif médical  
dispositivo médico  
dispositivo médico  
Medizinprodukt

 **0124**