




QUICKCHANGE®

PROTECTOR PARA INCONTINENCIA

800.206.2816
quickchange.com



Se cambia
en 60
segundos

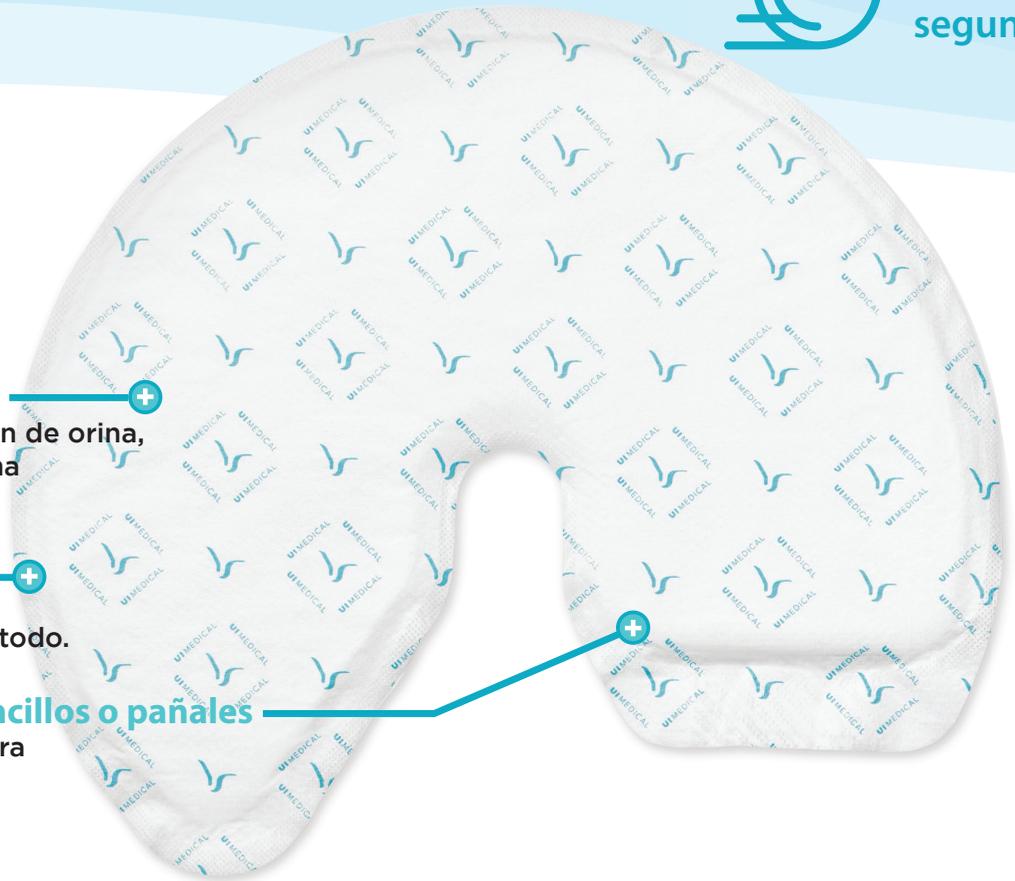

Núcleo superabsorbente

Bloquea la humedad y emisión de orina, y mantiene seca la zona vecina (piel y ropa de cama).

Forma única

Diseñado para cambiarlo sin necesidad de desvestirse del todo.

Se puede usar con calzoncillos o pañales

Use dentro de calzoncillos para cambios más rápidos

PERFIL DEL USUARIO:

Este producto es principalmente para hombres con incontinencia urinaria, que están en cama o silla de ruedas con una movilidad mínima o para uso nocturno en hombres activos.

¿POR QUÉ PROTECTORES QUICKCHANGE?

Se llama QuickChange (cambio rápido) por una buena razón: solo toma 60 segundos cambiar un protector, independientemente del tamaño, la anatomía o el peso de un hombre. Un cuidador, un cambio muy rápido, que permite un mayor y mejor nivel de atención... en casa.

LOGRE UN MÁXIMO RENDIMIENTO

- La base debe tener un cierre hermético alrededor del pene. Asegúrese de que no queden espacios.
- El protector generalmente se dobla dos veces. Nunca debe enrollarse en forma de cono o embudo.
- El borde redondo del protector doblado debe apuntar hacia la cabeza.
- El cierre de gancho requiere un agarre firme para fijarse.
- Cambie el protector las veces que sea necesario.
- Si se usan dentro de un pañal o calzoncillo, los protectores se pueden reemplazar sin tener que cambiar el pañal limpio.



Cambios más fáciles



Favorece la salud de la piel



Minimiza las interrupciones del sueño



Retiene hasta 500 ml



Sin necesidad de levantar al paciente



Minimiza las interrupciones del sueño

ESCANEE

Para ver videos de capacitaciones fáciles de seguir
Llame para programar una sesión de capacitación sin compromiso al 800.206.2816
quickchange.com/how-to-use



BROCHURE & OUTCOMES



DIRECTIONS FOR USE



PRE-RECORDED IN-SERVICE




INPUTS & OUTPUTS

800.206.2816 | quickchange.com



PERFIL DEL USUARIO:

Pene Normal: Presión urinaria baja (1 protector)

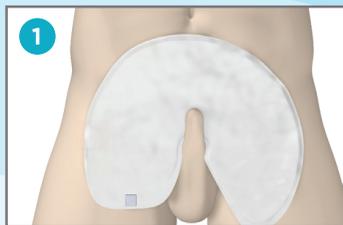

1 Coloque el lado blanco hacia arriba, el **borde redondo hacia la cabeza**, las dos aletas hacia las piernas.



2 Doble la aleta con punta sobre el pene a 45° y luego doble la aleta estirada, **tirando ligeramente hacia arriba**.



3 Con dos dedos, **sujete** el cierre de gancho con la aleta interior para **asegurar** la fijación.

Pene Normal: Presión urinaria fuerte (2 protectores)



1 Siga los pasos 1-3 anteriores. Coloque el 2do. protector **debajo y 7-10 cm más alto** que el primer protector.




2 Tire del centro superior del 2do. protector hacia **abajo y sobre** el 1er. protector, justo a la derecha del centro.




3 Levante la aleta **estirada hacia el centro**, apretando el cierre de gancho para asegurarla.

Pene Retraído/Oculto (1 protector)

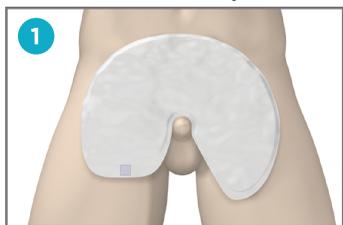

1 Coloque el lado blanco hacia arriba, el borde redondo hacia la cabeza y las **dos aletas apuntando hacia las piernas**.

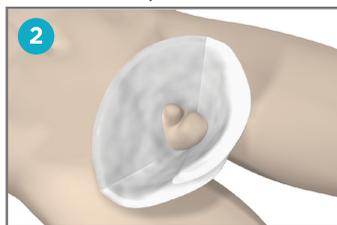

2 Deslice la aleta en punta **debajo del escroto**, levántela y sáquela hacia arriba y luego doble la aleta estirada.



3 **Sujete** el cierre de gancho **con** la aleta interior para asegurar la fijación.

Obesidad abdominal: Pene Oculto/Cubierto (2 protectores)



1 Coloque debajo del escroto, **tire** hacia la cabeza para asegurar el contacto, **meta** entre las piernas para retener la salida de orina.




2 Coloque un 2do protector, el lado blanco hacia arriba, sobre el vientre para que la fuente de la orina sea **visible a través de la abertura central**. Doble la aleta del gancho.




3 Doble el 2do. protector por la mitad hacia abajo y en sentido longitudinal, asegurándose de que el orificio **central esté cubierto de manera adecuada**.


Escroto Agrandado: Medio (1 protector)

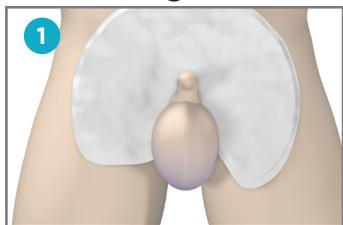

1 Coloque el lado blanco hacia arriba, el borde redondo hacia la cabeza, **las dos aletas hacia las piernas**.

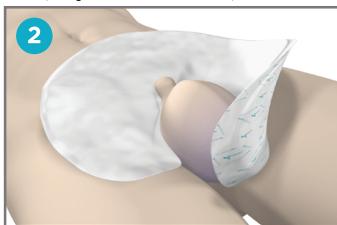

2 Tire de la aleta con punta debajo del escroto **creando una forma de cuenco** y tire de la aleta recta por encima.

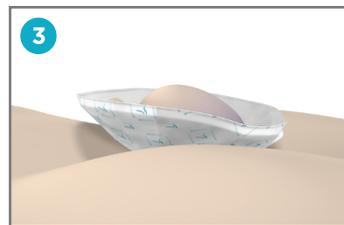

3 Sujete el cierre de gancho con la aleta interior para asegurar la fijación.


Escroto Agrandado: Grande (2 protectores)



1 Coloque dos protectores alrededor del escroto y el pene, **pellizque** y fije una aleta recta con una en punta, como **punto de apoyo**.




2 Tire las otras **dos aletas una hacia la otra**, comenzando una forma de cuenco debajo del escroto y pellizque dos aletas juntas.

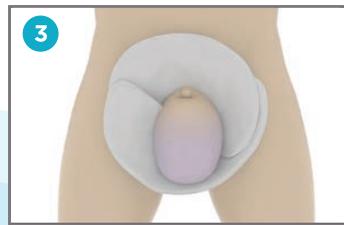


3 **Reajuste** y apriete las aletas **repetidamente**, completando el cuenco. Asegure un buen contacto debajo del escroto.

NO...

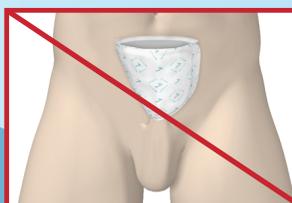

Enrolle en forma apretada de cono o embudo

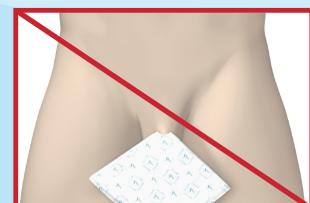

Deje el QuickChange apuntando hacia las piernas.