

Merci d'avoir acheté le SinuPulse Traveler

Le SinuPulse Traveler® irrigateur nasal pulsatile est un système portable facile à utiliser qui vous permet d'administrer un rinçage salin pulsatile doux pour nettoyer les passages nasaux en profondeur. L'action pulsatile rince doucement les allergènes, la poussière, le mucus et les germes, vous laissant une sensation de fraîcheur et une respiration améliorée.

Health Solutions Medical Products Corporation

PO Box 4278

Culver City, CA 90231-4278

Tel: 800.305.4095 (Within US) Tel: 310.837.3191 (Outside US)


Web: www.sinupulse.com

Email: sales@sinupulse.com

SinuPulse Traveler®

Irrigateur nasal sans fil

Manuel de l'utilisateur
SPT300

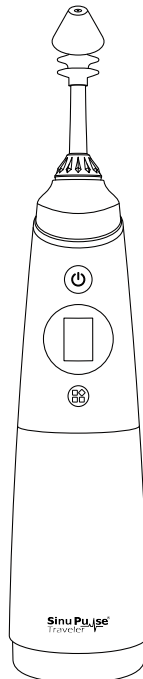

Merci d'avoir choisi le SinuPulse Traveler pour un soulagement naturel et sans médicament des allergies et de la congestion nasale. Faites l'expérience de la différence pulsatile.

Contenu	01
Norme UL	02-04
Descriptions du produit	05
Accessoires	06
Étapes	07-09
Technique recommandée	10
Démontage	11
Problèmes et Solutions	12
Service après-vente	13

Health Solutions Medical Products se réserve le droit d'interprétation finale pour toute erreur ou incompréhension du contenu de ce manuel d'utilisation ; tout produit ou donnée mise à jour sera incorporé dans la nouvelle version sans préavis ; et en cas de changement dans l'apparence et la couleur du produit, le produit à l'intérieur de l'emballage prévaudra.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation de produits électriques, en particulier en présence d'enfants, les précautions de sécurité de base ci-dessous doivent toujours être suivies.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

DANGERS:

Pour réduire le risque d'électrocution :

- Ne manipulez pas le chargeur avec des mains mouillées.
- Ne pas immerger dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas utiliser pendant le bain.
- Ne pas placer ou ranger le produit là où il pourrait tomber ou être tiré dans une baignoire, une cabine de douche ou un lavabo.
- Ne cherchez pas à récupérer un produit tombé dans l'eau. Débranchez immédiatement.
- Vérifiez le cordon du chargeur pour tout dommage avant la première utilisation et tout au long de la durée de vie du produit.
- Utilisation avec chargeur mural : AC 100-240 VAC, 50/60 Hz sortie 5V 1A

Veillez lire les AVERTISSEMENTS avant utilisation

UTILISER UNIQUEMENT SELON LES DIRECTIVES. SI LES SYMPTÔMES PERSISTENT, CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN OU UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ. TOUJOURS LIRE L'ÉTIQUETTE.



AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie, de blessures graves ou de dommages.

- Ne branchez pas cet appareil sur un système de tension différent de celui spécifié sur l'appareil ou le chargeur.
- Ne pas utiliser ce produit s'il présente un cordon ou une fiche cassé(e). En cas de dysfonctionnement ou s'il est tombé dans un liquide, contactez votre distributeur local.
- Utilisez toujours de l'eau distillée, micro-filtrée (1 micron ou moins), embouteillée commercialement ou préalablement bouillie et refroidie à température tiède ou corporelle. Peut être utilisé avec tous les produits salins. Ne pas utiliser d'eau du robinet pour dissoudre le mélange à moins qu'elle n'ait été préalablement bouillie et refroidie.
- Ne pas rincer si les voies nasales sont complètement obstruées ou si vous avez une infection de l'oreille ou des oreilles bouchées. Si vous avez récemment subi une intervention chirurgicale de l'oreille ou des sinus, contactez votre médecin avant l'irrigation. Si vous ressentez une pression dans les oreilles ou une sensation de brûlure dans les voies nasales, arrêtez l'irrigation et demandez des instructions supplémentaires à votre médecin. Tenir hors de portée des enfants.
- Lisez tous les documents d'instructions et avertissements inclus avant utilisation. SinuPulse Traveler® est conçu uniquement pour le rinçage des sinus. Veuillez ne pas l'utiliser à d'autres fins.
- Ne laissez tomber ni n'insérez aucun objet étranger dans le produit.

- Gardez le chargeur et le cordon éloignés des surfaces chauffées.
- Ne pas utiliser là où de l'oxygène ou des sprays aérosols sont utilisés.
- Nous recommandons d'irriguer au moins UNE HEURE AVANT le coucher afin d'éviter tout drainage résiduel de la solution.
- Nous ne recommandons pas l'utilisation pour les enfants ou les adultes ayant des limitations physiques ou des handicaps mentaux dus à des troubles développementaux ou acquis. Tous les utilisateurs doivent être capables de comprendre pleinement les instructions d'utilisation avant le rinçage.
- Ne placez pas l'unité motrice blanche dans un micro-ondes pour la désinfection. En raison des composants en acier inoxydable de l'unité, cela peut causer des dommages ou des risques d'incendie.
- Pour éviter tout inconfort auriculaire lors du rinçage : si vous avez subi une chirurgie de l'oreille, veuillez contacter votre médecin avant l'irrigation. Ne pas utiliser en cas d'infection de l'oreille ou d'oreilles bouchées.
- À usage domestique uniquement. Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Instruisez et surveillez étroitement les enfants et les personnes ayant des besoins spéciaux dans l'utilisation appropriée de ce produit.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

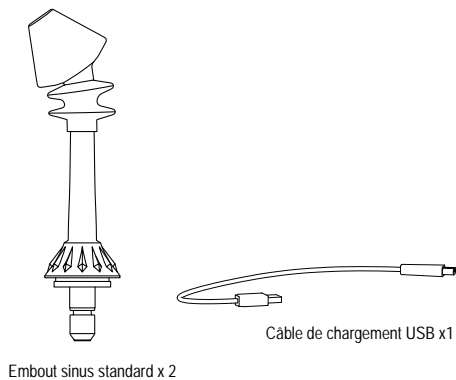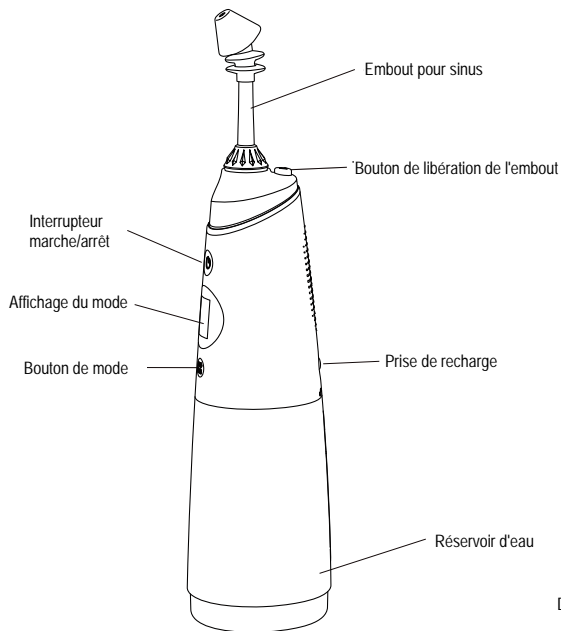

Des embouts/accessoires remplaçables sont disponibles auprès des détaillants.





Pour commencer
Très important ! Veuillez charger entièrement l'appareil avant la première utilisation. Branchez le câble USB dans la prise de charge, puis connectez-le à l'alimentation. Le produit ne peut pas être utilisé pendant la charge.

Installation et retrait des embouts

Insérez l'embout au centre du bouton de la poignée de l'irrigateur nasal jusqu'à ce qu'il soit correctement en place.

Pour remplacer ou retirer l'embout de la poignée, appuyez sur le bouton d'éjection de l'embout et tirez sur l'embout de la poignée.

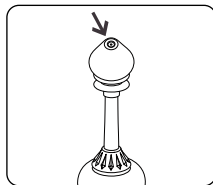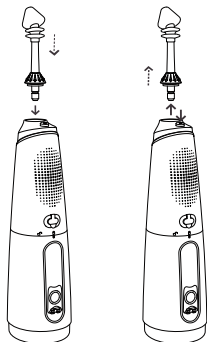

Assurez-vous que le bulbe en silicone bleu est complètement enfoncé sur l'embout nasal blanc afin qu'il n'y ait aucune interférence avec l'écoulement de l'eau. Le trou de sortie de l'embout nasal doit atteindre le trou de sortie du bulbe en silicone bleu.

Mélangez un sachet de solution saline avec 240 mL (8 fl oz) d'eau tiède, distillée, micro-filtrée (1 micron ou moins) ou préalablement bouillie et refroidie.

Remplissez le réservoir en le faisant tourner et en le retirant de l'unité supérieure unité moteur blanche comme indiqué dans la figure 1. Remplacez l'unité moteur blanche sur le réservoir et tournez-la jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée. Remuez bien l'unité pour dissoudre le mélange. Vous pouvez également remplir en soulevant le petit couvercle sur le réservoir.

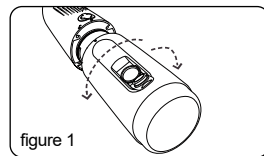


figure 1

- Les boutons d'alimentation et de mode se trouvent sur le panneau avant. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour l'éteindre. Le SinuPulse Traveler se remettra par défaut sur le réglage qui était utilisé en dernier.
- Appuyez sur le bouton de mode pour parcourir les différents réglages de rinçage : DOUX, MOYEN, INTENSE et ONDE. Vous pouvez également sélectionner le mode avant d'allumer l'appareil.
- After 120 seconds of continuous operation, the device will automatically shut down
- La charge de la batterie est affichée pendant l'utilisation; appuyez sur le bouton de mode pour vérifier la puissance de la batterie lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Chargez le SinuPulse Traveler lorsque l'indicateur de batterie affiche une faible charge. Le Traveler ne peut pas être utilisé pendant la charge.
- Lors de la charge, l'indicateur de batterie s'affichera jusqu'à ce qu'elle soit pleine.
- Charger: AC 100-240VAC, 50/60Hz, output 5V 1A

Positionnez l'unité pour vous assurer qu'elle est dans les meilleures conditions de fonctionnement.


La pointe nasale peut être tournée à 360 degrés pour ajuster la direction du flux d'eau.

Lors de l'utilisation du produit pour la première fois, commencez par le réglage le plus bas (DOUX) et augmentez la pression progressivement selon votre confort.



Si le couvercle du réservoir est retiré

1. Alignez le joint du couvercle du réservoir avec le port du réservoir;
2. Appuyez dessus jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

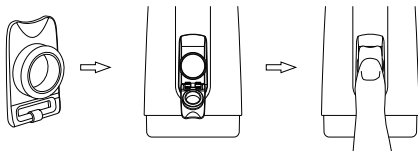


Étape 1: Debout devant un évier, penchez-vous légèrement vers l'avant jusqu'à votre niveau de confort et inclinez la tête vers le bas. Gardez la bouche ouverte, sans retenir votre respiration, et placez l'embout nasal contre votre narine.

Étape 2: Appuyez sur le bouton d'alimentation bleu et la solution entrera dans la narine et commencera bientôt à s'écouler de l'autre côté. Selon la position de la tête, une petite quantité de solution résiduelle peut s'écouler de votre bouche. Il est préférable de la cracher. Cependant, il n'y a aucun danger si elle est accidentellement avalée. Arrêtez si vous ressentez un quelconque inconfort, douleur ou pression pendant l'irrigation.

Étape 3: Continuez à rincer jusqu'à ce que la moitié de la solution soit utilisée. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour arrêter et passez à l'autre narine. Répétez maintenant les étapes 1 et 2 et rincez le passage nasal ou la narine opposée. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour arrêter lorsque vous avez terminé.

Étape 4: Mouchez-vous très doucement, sans pincer complètement le nez pour éviter une pression sur les tympans.

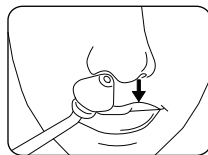


Instructions de nettoyage:


Rincez le SinuPulse Traveler après chaque utilisation en faisant passer de l'eau propre à travers l'unité et en séchant avec une serviette propre et sans peluches, puis laissez sécher à l'air. Nous recommandons de faire passer une solution de vinaigre diluée (2:1) à travers l'unité une fois par mois pour aider à la désinfection et au détartrage de l'unité.

Démontage

Lorsque vous avez terminé
Éteignez l'appareil. Soulevez le petit volet sur le réservoir comme indiqué, et videz tout liquide restant dans le réservoir. Allumez l'appareil jusqu'à ce que le réservoir soit vide, puis éteignez l'appareil.

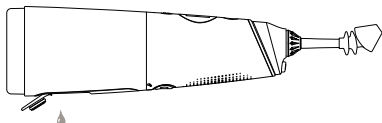

Pour retirer le réservoir, tenez l'unité avec votre main gauche et faites glisser le réservoir vers le bas dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec votre main droite.

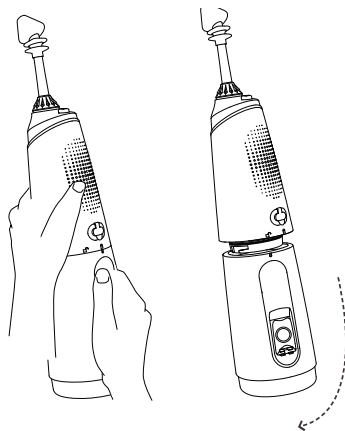

Problèmes et Solutions

Problèmes	Raisons	Solutions
Fuite entre l'embout et le bouton	Joint torique endommagé / Embout mal placé.	Lubrifiez le joint torique d'étanchéité avec de la vaseline et réinsérez-le.
Fuite du réservoir d'eau	Joint torique sec	Lubrifiez le joint torique d'étanchéité avec de la vaseline.
La pression n'est pas suffisante	Tension faible	Utilisez après une charge complète
L'appareil ne démarre pas / ne se charge pas	Tension faible Port de charge sale Câble USB desserré Chargeur mural USB	Utilisez après une charge complète, Nettoyez le port de charge, Fixez le câble USB, Utilisez un chargeur 5V/1A
Aucun écoulement d'eau	Filtre de tuyau bloqué	Nettoyez le filtre

Si vous ne parvenez pas à résoudre les problèmes selon les méthodes ci-dessus, veuillez consulter les revendeurs ou vous rendre au service après-vente désigné pour une maintenance.

Service après-vente

Health Solutions Medical Products Corporation garantit à l'acheteur que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant 12 mois à compter de la date d'achat. Si le produit s'avère défectueux, Health Solutions le réparera ou le remplacera gratuitement à condition que le produit n'ait pas été maltraité, utilisé de manière abusive, endommagé ou altéré. Les embouts d'irrigation, le réservoir et autres accessoires sont expressément exclus.

Pour commander des pièces de rechange ou signaler un problème, veuillez contacter Health Solutions Medical Products Corporation :

Téléphone : 800.305.4095 (appel gratuit aux États-Unis continentaux)
Téléphone : 310.837.3191 (en dehors des États-Unis, de l'Alaska et d'Hawaï)
Fax : 310.837.1065
E-mail : sales@sinupulse.com
Web : www.sinupulse.com