


Bedienungsanleitung

1. Funktionen

- 1) Schnelle Messung des Blutalkohols
- 2) Dreistufige Konzentration-LED-Anzeige
- 3) Digitaluhr mit Stoppuhr und Countdown
- 4) LED Taschenlampe für Schlüsselbund
- 5) Versorgung durch 2 AAA Batterien

2. Einzelteile

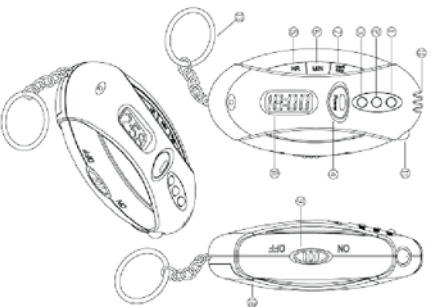

- (1) Rote LED (2) Gelbe LED (3) Grüne LED
- (4) Power Taste (5) HR Taste (6) MIN Taste
- (7) START/STOP Taste (8) LCD Anzeige
- (9) Taschenlampe-Taste (10) Mundstück
- (11) Taschenlampe (12) AAA Batteriefach
- (13) Schlüsselring

3. Batterien einlegen

- 1) Batterieabdeckung abnehmen
- 2) 2 x AAA Batterien einlegen
- 3) Batterieabdeckung aufsetzen

4. Alkohlmessung

- 1) Power Taste drücken bis die grüne LED ununterbrochen leuchtet
- 2) Während des Drückens der Power Taste tief einatmen und dann für 2 Sekunden in das Mundstück pusten

Nach Beendigung des Testes zeigen die LEDs Folgendes an:

Nur grüne LED: BAC ist unter 0,02%

Nur gelbe LED: BAC ist zwischen 0,02% und 0,05%

Rote und gelbe LED: BAC ist über 0,05%

*BAC=Blutalkoholkonzentration,
(0,05% BAC=0,05g/100ml=50g/100ml=0,5g/l)

Hinweis:

- 1) Halten Sie die Power Taste fest gedrückt während Messung und Ergebnisanzeige
- 2) Falls nach Schritt 1 die rote und grüne LED leuchtet, beginnen Sie bitte nochmals von vorn.

- 3) Falls nach Schritt 1 die grüne LED nicht leuchtet, tauschen Sie bitte die Batterien und beginnen nochmals von vorn.
 - 4) Für möglichst genaue Messergebnisse lassen Sie bitte 3 Minuten Pause zwischen den Messungen.
 - 5) Bitte rauchen, essen und trinken Sie nicht 20 Minuten vor den Messungen.
 - 6) Reinigen Sie das Gerät bitte nur mit einem feuchten Tuch.
 - 7) Lagern und betreiben Sie das Gerät nur in gut belüfteten Räumen.
- 5. Taschenlampe**
Die Taschenlampe-Taste schaltet die Taschenlampe ein und aus. Bitte schalten Sie während eines Messvorganges die Taschenlampe immer aus.
- 6. Uhr**
Sie können die Uhrzeit entweder nach dem Einlegen neuer Batterien einstellen oder indem Sie die Start/Stop Taste für 5 Sekunden gedrückt halten. Während 0:00 auf der LED Anzeige blinkt, nutzen Sie die HR Taste um Stunden und die MIN Taste um Minuten einzustellen.
- 7. Stoppuhr**
 - 1) Um den Stoppuhrmodus zu aktivieren, drücken Sie gleichzeitig HR- und MIN Taste.
 - 2) Mit Start/Stop starten oder pausieren Sie die Stoppuhr.
 - 3) Durch gleichzeitiges Drücken der HR- und MIN Taste setzen Sie die Zeit zurück.
 - 4) Durch Betätigung der HR-, MIN- und Start/Stop Taste verlassen Sie die Stoppuhrfunktion.
- 8. Countdown**
 - 1) Um den Countdownmodus zu aktivieren, drücken Sie gleichzeitig HR- und MIN Taste.

- 2) Benutzen Sie HR- und MIN Tasten um die Dauer des Countdowns einzustellen.
- 3) Drücken Sie Start/Stop zum Beginnen.
- 4) Bei 10:00 und 5:00 ertönt ein Alarmsignal für 2 Sekunden.
- 5) Bei 0:00 ertönt ein 60 Sekunden Alarm.
- 6) Drücken Sie Start/Stop, HR oder MIN um den Alarm zu stoppen.

Hinweis:

Während des Countdowns können Sie Start/Stop drücken um die Uhr anzuhalten oder fortzusetzen. Während des Pause können Sie die HR und MIN Taste nutzen um die Dauer zu ändern. Drücken Sie HR und MIN gleichzeitig um den Countdown auf 0:00 zurückzusetzen.

9. Verzichtserklärung

- 1) Dieses Produkt misst lediglich Blutalkohol-Stufen. Es ist kein Indikator bezüglich der Fahrtauglichkeit oder Bedienung von Maschinen.
- 2) Da die Blutalkoholkonzentration durch verschiedene körperliche Faktoren beeinflusst wird, sind die Messungsergebnisse lediglich als Richtlinie zu betrachten.

Bitte beachten Sie, die oben aufgeführten Hinweise sind nur Vorschläge und haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Digital Daffodil behält sich das Recht vor, das Gerät hinsichtlich Spezifikationen, Funktionen und Aussehen ohne Hinweis ändern zu können.

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice unter der Rufnummer +44 (0)871 423 2368 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an service@digitaldaffodil.co.uk