


Manuale Utente

1. Caratteristiche

- 1) Misura rapidamente il livello di alcool nel sangue
- 2) Display a LED con 3 livelli di concentrazione
- 3) Orologio digitale con timer e conto alla rovescia
- 4) Torcia LED Portachivi
- 5) Alimentato da 2 batterie AAA

2. Parti

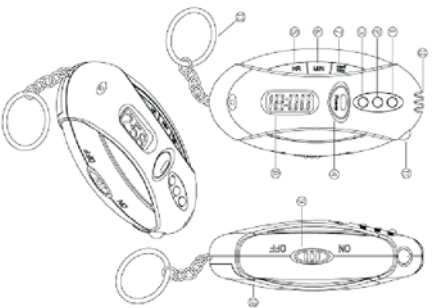

-13-

- (1) LED Rosso (2) LED Giallo (3) LED Verde
- (4) Pulsante di accensione (5) Tasto HR (6) Tasto MIN
- (7) Tasto Start/Stop (8) Schermo LCD
- (9) Interruttore Torcia (10) Boccaglio (11) Torcia
- (12) Vano Batterie AAA (13) Portachivi

3. Installazione della batteria

- 1) Togliere il coperchio del vano batterie
- 2) Inserire 2 batterie AAA
- 3) Riposizionare il coperchio del vano batterie

4. Misurazione del Tasso Alcolémico

- 1) Premere e tenere premuto tasto di accensione fino a quando il LED verde rimane acceso (ca. 10 secondi).
- 2) Continuare a tenere premuto il pulsante di accensione, fare un respiro profondo e soffiare nel boccaglio per 2 secondi.

Una volta completato il test, il LED si accende indicando:

LED verde: la concentrazione di alcool è inferiore a

0,02% BAC

LED giallo: la concentrazione di alcool è compresa tra

0,02% BAC e 0,05% BAC

Entrambi i LED rosso e giallo: la concentrazione di alcool è superiore a 0,05% BAC

* BAC: alcolemia

(0,05% BAC = 0,05g/100ml BAC = 50mg/100ml

BAC = 0,5 g/l BAC)

Note:

- 1) Tenere premuto il pulsante di accensione per tutta la durata del test e risultati.
- 2) Se dopo la fase uno i LED rosso e giallo restano accesi rilasciare il tasto di accensione e riprovare.

-14-

- 3) Se dopo la fase uno il LED verde non si accende, sostituire le batterie e riprovare.
 - 4) Per ottenere risultati accurati lasciate passare almeno 3 minuti tra le due prove.
 - 5) Non fumare, mangiare o bere per circa 20 minuti prima del test.
 - 6) Pulire l'apparecchio con un panno umido.
 - 7) Conservare e usare sempre il dispositivo in aree ben ventilate.
- 5. Torcia**
Premere l'interruttore della torcia per accendere e spegnere. Ricordarsi di tenere spenta la torcia durante il test alcolometrico.
- 6. Orologio**
L'orologio può essere impostato quando si inseriscono le nuove batterie oppure premendo e tenendo premuto il tasto START / STOP per 5 secondi. Mentre la scritta 00:00 lampeggia sullo schermo LCD usare il tasto HR per modificare le ore, il tasto MIN per modificare i minuti e il tasto START / STOP per salvare le impostazioni.
- 7. Timer**
- 1) Per entrare in modalità timer premere il tasto MIN e HR.
 - 2) Premere START / STOP per mettere in pausa o riprendere la temporizzazione.
 - 3) Premere i tasti MIN e HR per resettare il timer.
 - 4) Premere i tasti MIN, HR e START / STOP per uscire dalla modalità timer.
- 8. Countdown (Conteggio alla rovescia)**
- 1) Per entrare in modalità timer premere contemporaneamente il pulsante MIN e HR.
 - 2) Utilizzare il tasto HR e MIN per impostare la durata del conto alla rovescia.

- 3) Premere START / STOP per avviare il conto alla rovescia.
- 4) A 10:00 e a 5:00 un allarme acustico suonerà per 2 secondi.
- 5) A 0:00 un allarme acustico suonerà per 60 secondi.
- 6) Premere i tasti MIN, HR o START / STOP per interrompere l'allarme.

Note:

Durante un conto alla rovescia usare START / STOP per mettere in pausa e per riprendere il cronometraggio. Mentre in pausa, la durata può essere modificata usando i tasti HR e MIN.
Per azzerare il timer a 0:00, premere i tasti HR e MIN in qualsiasi momento.

9. Dichiarazioni

- 1) Questo prodotto può solo misurare i livelli di alcol nel sangue, non è in grado di dirvi se siete in grado di guidare o di usare macchinari.
- 2) Poiché la concentrazione di alcol nel sangue può essere influenzata da diversi fattori fisici, i risultati mostrati sono solo a scopo indicativo.

Si prega di notare che le istruzioni di cui sopra sono intese solo come riferimento. Daffodil Digital Ltd si riserva il diritto di modificare le funzioni, le caratteristiche e il design del prodotto senza preavviso.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il servizio assistenza Digital Daffodil Ltd telefonando al numero: +44 (0) 871 423 2368 oppure inviate una e-mail all'indirizzo: service@digitaldaffodil.co.uk