



**MASSAGE
THERAPY
CONCEPTS**

UNIDAD TENS Dispositivo de Terapia Dual



**RELAJACIÓN, EN CUALQUIER MOMENTO, A
CUALQUIER HORA**

Por favor lea las instrucciones cuidadosamente antes
de usar este dispositivo.

Tabla de Contenido

Accesorios.....	2
Funciones y Características.....	2
Principio.....	3
Beneficios Clave.....	4
Funciones del Dispositivo y Accesorios.....	5
Descripción de las Funciones de los botones...6	
Descripción de las Modalidades.....	7
Instrucciones de Funcionamiento.....	10
Reglas Generales del Uso de Electrodo.....	11
Principios de Aplicación.....	12
Cuidado y Mantenimiento.	15
Carga de Batería	16
Precauciones de Seguridad.....	17
Reacciones Adversas.....	19
Solución de Problemas.....	20
Definiciones.....	22
Condiciones de Almacenamiento.....	23
Especificaciones.....	23
Advertencias.....	24

ACCESORIOS

Incluidos en este paquete:

- 1 Unidad de Control
- 2 pares de almohadillas de palma grandes (4 piezas)
- 1 par de almohadillas XL (2 piezas)
- 2 cables eléctricos a presión con 2 conductores (2 piezas)
- 1 Cable de Extensión USB
- 1 Soporte de Almohadilla
- Adaptador AC/DC
- Diagrama de Puntos de Acupuntura
- 1 Manual de Instrucciones

FUNCIONES Y CARACTERISTICAS

- Dos canales de Electroterapia de estimulación
- 10 Modalidades
- 20 Niveles de ajuste de intensidad
- Temporizador ajustable hasta 60 min
- Gran pantalla LCD con iluminación de fondo
- Batería de litio recargable de gran intensidad
- 4 almohadillas en el cuerpo al mismo tiempo
- Indicador de batería baja
- Función de bloqueo de intensidad para ayudar a prevenir un aumento o disminución accidental de la intensidad mientras la unidad se mantiene en el bolsillo o en un cinturón.
- CA 110-240V, DC 5V 500mA

PRINCIPIO

¿Sufre de dolor, tensión muscular, estrés o mala circulación?

Este dispositivo puede relajar rápidamente los músculos tensos y aliviar el dolor. Es un dispositivo moderno para realizar terapias diarias en el hogar que utiliza la última tecnología bioeléctrica. Está diseñado para proporcionar sensaciones relajantes y profundas en áreas donde necesite alivio. Relájese, siéntase bien y rejuvenezca su cuerpo y alma. No viva más con tensiones físicas y mentales que no son nada saludables.


Este dispositivo Tens funciona con una batería de litio recargable y puede aplicar 4 almohadillas al mismo tiempo. Ayuda a aliviar dolores y molestias menores de nervios y músculos. Tens (Estimulador Electrónico de Nervios Transcutáneo) se usa para el alivio temporal del dolor asociado con lesiones y molestias en los nervios y músculos en la parte inferior de la espalda, las extremidades superiores (brazo) y las extremidades inferiores (piernas) debido a la tensión provocada por el ejercicio o las actividades normales del trabajo doméstico.

Tenga en cuenta que para generar las señales de estimulación requeridas, deberá colocar dos almohadillas conectadas a un juego de cables conductores en su cuerpo al mismo tiempo.

BENEFICIOS CLAVE



- Acción rápida -- aunque la velocidad y el grado de respuesta varían entre personas, muchos usuarios afirman resultados positivos después de 10 - 20 minutos de uso.
- Alternativa saludable que siempre está disponible -- no hay medicamentos ni sustancias químicas involucradas en esta forma efectiva de alivio del dolor. Tiene acceso a este alivio del dolor las 24 horas del día, todos los días. Puede usar el dispositivo tantas veces como quiera.
- Portátil -- su tamaño de bolsillo le permite recibir tratamiento en cualquier lugar a su conveniencia.
- Rentable -- el dispositivo le ahorrará tiempo y dinero, además de mejorar su vida diaria.
- Fácil de usar -- dispositivo fácil de usar que es sencillo de manejar.
- Terapia en el hogar - con este dispositivo, usted puede controlar su salud, bienestar y tener acceso a la terapia en cualquier momento en la comodidad de su hogar.
- Regalo de Salud - todos, jóvenes y personas mayores, sufren de algún tipo de tensión muscular. Usted puede ayudarse a sí mismo y a otros con un regalo para la salud y el bienestar.
- Alivio efectivo -- este dispositivo proporciona resultados efectivos. La tecnología avanzada envía múltiples ondas eléctricas terapéuticas pre configurado a través de los electrodos. Estas ondas estimulan la combinación de técnicas de alivio del dolor de tejidos profundos y diversos movimientos musculares, mitigando la tensión muscular.

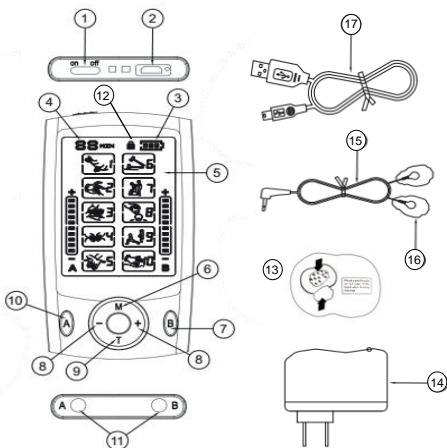FUNCIONES DEL DISPOSITIVO Y ACCESORIOS



1. Botón de Encendido/Apagado
2. Puerto USB
3. Indicador de Batería
4. Indicador de tiempo restante
5. Pantalla LCD
6. Selector de modalidad
7. Canal B
8. Ajuste de intensidad (+)(-)
9. Ajuste de tiempo

10. Canal A
11. Conector de salida canal A y B
12. Función de bloqueo
13. Placa de almohadillas adherible
14. Adaptador
15. Cables de almohadillas
16. Almohadillas de electrodos
17. Cable USB

1. Botón de Encendido/Apagado – Deslice el interruptor de encendido/apagado de izquierda a derecha para encender el dispositivo. Deslice de derecha a izquierda para apagarlo.
2. Puerto USB para cargar su batería
3. Indicador del nivel de batería 
4.  MIN Indicador de Tiempo: muestra cuanto tiempo restante queda.
5. Pantalla LCD – Pantalla LCD con iluminación de fondo.
6. Selector de Modalidad – Presione el botón M para seleccionar la configuración apropiada que se requiere.
7. Canal B – Seleccione el canal que deseado y luego presione M para seleccionar el modo o la intensidad requerida.
8. Botones de Aumento y Disminución de la intensidad – 10 bar/ 20 niveles de intensidad ajustable. Presione - para disminuir o + para aumentar el nivel de intensidad. El nivel más bajo es 0.
9. Botón de Ajuste de tiempo – Presione el botón T para ajustar el tiempo a 10, 20, 30, 40, 50, 60 min
10. Canal A – seleccione el canal deseado y luego presione el botón M para seleccionar el modo o la intensidad requerida.
11. Conector de Salida de los Canales A y B
12. Función de bloqueo - mantenga presionado el botón durante 3 segundos para bloquear la pantalla, vuelva a presionar 3 segundos para desbloquearla.

DESCRIPCIÓN DE LAS MODALIDADES

Le sugerimos que inicialmente experimente con cada una de las modalidades. El modo o combinación de modalidades que le proporcionen las sensaciones y el confort más convenientes es el más apropiado para su uso.

La intensidad debe establecerse a un nivel en el que sentirá alguna vibración muscular y movimientos musculares involuntarios. Debe configurarse para proporcionarle una intensidad "agradable" y no debe ser dolorosa.

El tiempo de aplicación debe ser de al menos 10 a 20 minutos.

La frecuencia de la aplicación debe ser dos a tres veces por día.

DESCRIPCIÓN DE LAS MODALIDADES

Modo	Nombre	Descripción	Funcionalidad
1	Tui Na	La simulación de Tui Na es un tratamiento corporal directo que abre el flujo de Qi a través de los meridianos.	Es especialmente efectivo para los dolores articulares, la ciática, los espasmos musculares y el dolor en la espalda, el cuello y los hombros. También ayuda a enfermedades crónicas como el insomnio, el estreñimiento, los dolores de cabeza y la tensión asociada con el estrés.
2	Acupuntura	La simulación de acupuntura proporciona la misma sensación sin agujas, al utilizar pulsos electrónicos para lograr la sensación de diferentes profundidades de agujas.	Al estimular puntos de acupuntura específicos, corrige los desequilibrios en el flujo de Qi a través de canales conocidos como meridianos. Por favor lea el diagrama de acupuntura.
3	Shiatsu	La simulación Shiatsu, es un tipo de medicina alternativa que consiste en presión con los dedos y la palma de la mano, estiramientos y otras técnicas de masaje.	Shiatsu puede ayudar a facilitar la curación de muchas dolencias menores. Desde dolores de cabeza y dolor de espalda hasta problemas digestivos, sinusales y de la piel.
4	Presion	Es la manipulación de capas superficiales y profundas de músculo y tejido conectivo mediante diversas técnicas.	Puede mejorar la función, ayudar en el proceso de curación, disminuir la actividad del reflejo muscular, inhibir la excitabilidad de las neuronas motoras, promover la relajación y bienestar, y como actividad recreativa.
5	Masaje de Tejido Profundo	La terapia de masaje de tejido profundo es similar a un masaje sueco, pero la estimulación de presión más profunda es beneficiosa para liberar la tensión muscular crónica	El masaje de tejido profundo puede proporcionar alivio del dolor y la rigidez asociados con las lesiones deportivas, traumatismo cervical, la osteoartritis, los espasmos musculares, la fibromialgia y las lesiones por esfuerzo como el síndrome del túnel carpiano.
6	Tapping	La simulación de Tapping está dirigida a producir una sensación de punzación fuerte que recorre sus músculos, lo cual puede brindarle una sensación de fortalecimiento y revitalización.	Es especialmente efectivo para la relajación muscular.

DESCRIPCIÓN DE LAS MODALIDADES

7	Combinación	Combinación automática de varias modalidades para la relajación	Relajación completa del cuerpo después del entrenamiento: ejercicios y estado físico o después de un día de trabajo arduo.
8	Cupping	La simulación cupping, es estimulación relativamente constante que contrae los músculos.	El cupping se utiliza para aliviar dolores de espalda y cuello, músculos rígidos, ansiedad, fatiga, migrañas, reumatismo e incluso reducción de la celulitis, entre otras.
9	Desarrollo del Cuerpo	La aplicación de corriente eléctrica a los músculos hace que los músculos se contraigan. La estimulación repetida de los músculos con electricidad puede dar como resultado músculos que se fortalecen y tonifican en cierta medida.	La estimulación muscular eléctrica ayuda a la reducción muscular, a la relajación de los espasmos musculares, a aumentar el rango de movimiento, a la recuperación de lesiones y a la recuperación postoperatoria.
10	Gua Sha	La simulación Gua Sha con un ajuste de baja frecuencia proporciona al usuario una sensación de presión y rasguño. Gua Sha libera elementos no saludables de las áreas lesionadas y estimula el flujo sanguíneo y la curación.	Gua Sha es efectivo en trastornos agudos y crónicos de órganos internos. Los pacientes pueden ver un alivio inmediato a sus síntomas de dolor, rigidez, fiebre, escalofríos, tos, sibilancias, náuseas y vómitos, entre otros.

1. Conecte las almohadillas al cable asegurándolas, luego retire la película protectora.

Nota: agregar unas gotas de agua en las almohadillas aumentará su durabilidad.

2. Coloque las almohadillas donde desea las sensaciones de masaje. A continuación, conecte a uno de los puertos del dispositivo. Para alivio adicional, use el segundo puerto y repita el procedimiento para colocar las otras dos almohadillas. Asegúrese de que ambas almohadillas no se superpongan en la piel. Asegúrese de que su piel esté libre de suciedad, aceite o lociones.

3. Encienda el dispositivo deslizando el interruptor de encendido en la parte superior del equipo. El equipo se activará de inmediato.

4. Presione el botón de modalidad para seleccionar el modo deseado.

Recuerde que la intensidad se establecerá de forma predeterminada en la configuración más baja para cada modalidad seleccionada.

5. Una vez que seleccione un modo, aumente gradualmente la intensidad presionando el botón +; y disminúyala presionando el botón - .

Nota: El botón central también se puede usar como llave de bloqueo.

Manténgalo presionado durante 3 segundos para bloquear la pantalla, y 3 segundos nuevamente para desbloquearla.

REGLAS GENERALES DEL USO DE ELECTRODOS

1. Utilice electrodos únicamente suministrados por el fabricante.
2. No utilice los electrodos en diferentes personas. Cada usuario debe tener su propio juego.
3. Apague siempre el dispositivo antes de retirar o mover los electrodos.
4. Lave bien la piel y luego séquela antes de aplicar los electrodos. Se recomienda usar hisopos con alcohol o alcohol solo. Coloque las almohadillas sobre la piel asegurándose de que estén separadas al menos 2 cm entre sí.
5. Aplique firmemente toda la superficie de los electrodos a la piel. No utilice electrodos que no se adhieran correctamente a la piel o solo se adhieran parcialmente.
6. En caso de enrojecimiento de la piel debajo de los electrodos después de la estimulación, no lo use nuevamente en la misma área si el enrojecimiento de la piel aún es evidente.
7. Se recomienda usar las almohadillas más largas para áreas más grandes como los músculos de los hombros, la cintura, el abdomen y las piernas. Use almohadillas pequeñas para áreas más pequeñas como los músculos del antebrazo, articulaciones, entre otras.

PRINCIPIOS DE APLICACIÓN

1. Encuentre el punto exacto del dolor: coloque las almohadillas en esta posición. El diagrama de acupuntura también puede servir como una guía para la colocación específica de las almohadillas para cada dolencia.

2. Ajuste la intensidad gradualmente: es más efectivo llegar al nivel de intensidad más alto que pueda soportar.

3. La duración recomendada de la aplicación es de 2 a 3 veces por día durante 40 a 60 minutos por aplicación, por aproximadamente 10 días para cada programa

4. Las almohadillas se pueden colocar de dos maneras:

- Modo doble: con las 2 almohadillas una al lado de la otra en el mismo lado del cuerpo y ambas relativamente cerca.
- Modo opuesto: con las 2 almohadillas en un lugar similar, pero a ambos lados del cuerpo, es decir, el hombro delantero y trasero.

PRINCIPIOS DE APLICACIÓN



ESPALDA BAJA



CIATICO



DELTOIDES

Coloque una almohadilla en la parte delantera y otra en la parte posterior del musculo



PARTE SUPERIOR DEL BRAZO

Coloque ambas almohadillas a cada lado del área donde siente dolor



CODOS

Coloque ambas almohadillas a cada lado de la articulación con dolor




MUSLOS DE LA CADERA

Coloque ambas almohadillas a cada lado del área con dolor




RODILLA

Coloque ambas almohadillas por encima de la rodilla o por encima y por debajo de la articulación con dolor.

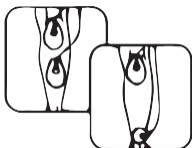

PANTORRILLAS

Coloque ambas almohadillas en la pantorrilla /pierna donde sienta dolor. (No coloque la almohadilla del electrodo simultáneamente en las pantorrillas de ambas piernas.

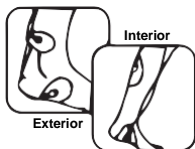

TOBILLO/PIE

Coloque almohadillas según la ilustración, a la izquierda, para el dolor en la parte exterior del tobillo/ pie. Coloque las almohadillas para el dolor en el interior de su tobillo/pie



ABDOMEN/HOMBROS

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

1. Asegúrese de que su piel esté libre de suciedad, aceite o lociones. Antes de aplicar las almohadillas, coloque unas gotas de agua en sus dedos y frótelas a ambas. Esto ayudará a que las almohadillas mantengan su adherencia y aumenten su durabilidad.
2. Cuando termine de usar el dispositivo, apáguelo y retire las almohadillas. Almacene la unidad en un lugar fresco y seco hasta su próximo uso.
3. No raspe las almohadillas. No las limpie con un pañuelo o servilleta. No las lave con detergente o agua caliente.
4. Reemplace las almohadillas después de usarlas 20-30 veces (varía según el uso, el tipo de cuerpo y el cuidado)
5. No aplique las almohadillas en la misma área más de 30 minutos a la vez.
6. Lave ligeramente las almohadillas, seque y coloque la película protectora, luego colóquelas en una bolsa con cierre hermético o ubíquelas en el soporte de la almohadilla.
7. Cargue la unidad al menos cada 3 meses en caso de que no se use con regularidad. También puede usar la unidad con el cargador de pared o directamente desde su computadora usando el cable USB.
8. Retire el cable del dispositivo y vuelva a colocarlo en la caja junto con la unidad hasta su próximo uso.
9. Almacene la unidad en un lugar fresco y seco.

CARGA DE BATERIA

- El equipo tiene una batería interna de litio recargable que se puede cargar a través de una toma de pared estándar o a través del puerto USB de su computadora.
- Es posible que el dispositivo también deba cargarse si la pantalla está borrosa, las sensaciones son débiles o si no se visualizada nada en la pantalla cuando está encendida.
- Normalmente se tarda alrededor de 4 horas cargar la batería.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Úselo bajo las instrucciones de su médico.
- No utilice este dispositivo cerca de equipos de terapia de onda corta, ya que su salida puede ser inestable.
- No utilice electrodos cerca del corazón, en la cabeza, áreas sensibles de la cabeza, en los ojos, por encima del cuello, en la región púbica, en áreas con cicatrices, en la garganta o en la boca.
- Aplique las almohadillas de electrodos solo en la piel normal, intacta y limpia. No aplique sobre heridas abiertas o sobre áreas inflamadas o infectadas.
- El tiempo de tratamiento no debe exceder más de 60 minutos a la vez.
- Evite tocar las almohadillas cuando el dispositivo está encendido. Si mueve, retira o cambia la posición de las almohadillas de electrodos, apáguelo primero.
- No utilice el dispositivo en la bañera o ducha.
- Nunca sumerja el dispositivo en ningún líquido.
- Nunca use el dispositivo mientras duerme.
- No use esta unidad si tiene un marcapasos, desfibrilador u otro dispositivo metálico o electrónico implantado o cualquier otro equipo de soporte vital, como un pulmón artificial o un respirador.
- No lo use si está embarazada.
- No utilice el dispositivo mientras conduce, opera maquinaria o durante cualquier actividad en la que las contracciones musculares involuntarias puedan poner al usuario en un riesgo inapropiado o alguna lesión
- No lo use si tiene las siguientes condiciones médicas:

Presión arterial alta

Fiebre alta

Enfermedad infecciosa

Epilepsia

Problemas de la piel

Síndromes de dolor no diagnosticados

Músculos dolorosos y/o atrofiados

Rango limitado de movimiento en las articulaciones esqueléticas

- Se recomienda que consulte a su médico antes de usar si:

1. Ha sido diagnosticado con cáncer

2. Ha sufrido algún traumatismo agudo o ha tenido un procedimiento quirúrgico reciente.

3. Tiene problemas cardíacos o cardiopatía congénita.

4. Tiene una hernia abdominal.

5. Tiene trombosis venosa.

- Este dispositivo está diseñado para ser usado por adultos, es posible usarlo en niños, solo bajo la supervisión de un adulto.

- No desarme ni repare el dispositivo usted mismo.

- Manténgalo alejado de la televisión, la radio y otros equipos electrónicos.

REACCIONES ADVERSAS

Si experimenta irritación en la piel, quemaduras debajo de las almohadillas de electrodos aplicadas a la piel o cualquier otra reacción adversa, el tratamiento debe interrumpirse inmediatamente. Debe consultar con su médico acerca del uso del dispositivo a futuro.

1P: El dispositivo no está encendido o no puedo ver nada en la pantalla.

R: Asegúrese de que el dispositivo se haya cargado completamente.

2P: El dispositivo parece no estar cargando:

R:

- Asegúrese de que el cable USB esté firmemente conectado en la unidad de un lado y conectado en el adaptador AC a la toma eléctrica en el otro lado.
- Aísle si hay un problema con el cable USB o el adaptador AC conectando el cable USB del dispositivo a un puerto USB en una computadora.

3P: La unidad está encendida, pero no siento ninguna sensación de las almohadillas:

R:

Verifique que los cables estén conectados firmemente en el puerto de la unidad y sujetos a las almohadillas conductoras.

Asegúrese de que está utilizando 2 almohadillas para un cable, de lo contrario no habrá corriente eléctrica.

Asegúrese de que las 2 almohadillas estén colocadas una cerca de la otra, es decir, que no estén en distintas extremidades o estén demasiado separadas.

4P: El dispositivo está encendido, pero no siento ninguna sensación en mis pies:

R: Es posible que deba ajustar el dispositivo a un nivel mucho más alto para sentir la sensación en sus pies, especialmente si tiene mala circulación o daño en los nervios.

5P: Solo funciona un puerto en el Dispositivo:

R: Aísle el problema probando otro cable conductor y un conjunto de almohadillas que sepa que funcionan en el puerto con el problema.

6P: Una almohadilla se siente más fuerte que la otra:

R: Esto es normal ya que las diferentes áreas del cuerpo reaccionan de formas distintas, solo asegúrese de que las almohadillas estén haciendo un buen contacto.

7P: Durante el uso, en la piel se siente una sensación de ardor dolorosa o la estimulación se ha debilitado:

R:

- Asegúrese de que las almohadillas adhesivas de gel se adhieran firmemente, esto es importante.
- Verifique que las almohadillas no estén demasiado secas y necesiten reemplazo

¿Qué es un Unidad TENS?

TENS significa (Estimulación Eléctrica Nerviosa Transcutánea) que se usa mayormente para afecciones del dolor relacionadas con los nervios (afecciones agudas y crónicas). Las máquinas TENS funcionan mediante el envío de pulsos estimulantes a través de la superficie de la piel y a lo largo de las cadenas nerviosas. Utilizan corriente eléctrica de bajo voltaje para aliviar el dolor. Pueden ayudar en muchas áreas del cuerpo, como es el caso del dolor de espalda y de cuello, que puede ser causado por un trauma o tensión continua. El cuerpo responde a tal dolor o lesión con la protección muscular, un intento de inmovilizar el área dolorosa apretando los músculos que rodean la lesión. La protección muscular dificulta la circulación en el área afectada. La disminución en el suministro de sangre conduce a una disminución en el metabolismo con una acumulación de desechos corporales.

La terapia TENS puede ayudar a romper este ciclo de dolor y ayudar en el proceso normal de curación. Además, los pulsos estimulantes ayudan a evitar que las señales del dolor lleguen al cerebro. Los dispositivos Tens también ayudan a estimular su cuerpo para producir niveles más altos de sus propios analgésicos naturales, llamados "Endorfinas".

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Temperatura de Almacenamiento:

- 20 °C a 60 °C, - 4 °F a 140 °F

Humedad relativa máxima: 80%

Presión atmosférica: 80KPa a 105KPa

Evite almacenar en áreas de alta temperatura, alta humedad o luz solar directa.

ESPECIFICACIONES

Nombre: Therapy Concepts Unidad Mini Tens

Tipo de Unidad: MT8012

Fuente de alimentación: 5V

Potencia de Entrada: CA 110 ~ 240V

Frecuencia de pulso: 0 ~ 65 HZ

Ancho de pulso: 130us

Max. Corriente de salida: 0-2MA

Humedad de temperatura de funcionamiento: <80%

Humedad de temperatura de transporte y almacenamiento: -4 - 140F (-20 - 60C)

Peso neto unitario: 66 G (2.3 onzas)

Tamaño de la unidad: 103.5 x 55 x 11.3mm (4 x 2.16 x .44 pulgadas)

Garantía (Limitada de 1 año)

Para su seguridad y para evitar cualquier daño a la propiedad, lea este manual con cuidado y úselo como se indica. La garantía del fabricante no tiene validez en las siguientes circunstancias, pero no se limita a:

1. Mantenimiento o modificación inadecuada o incorrecta.
2. Accidente, mal uso, abuso, contaminación u otras causas externas.
3. El uso de adaptadores y accesorios no especificados.
4. Pérdida o daño en tránsito.
5. Daños que se producen como resultado de que no se hayan seguido las instrucciones

Esta garantía no se aplica a piezas desechables o consumibles y no se extiende a ningún producto del cual se haya eliminado el número de serie.

Para activar su garantía de 1 año, vaya a www.MassageTherapyConcepts.com/warranty y registre su producto.

Conserve estas instrucciones

Garantía limitada de un (1) año desde la fecha de compra

Massage Therapy Concepts garantiza este producto contra defectos en materiales y/o mano de obra en condiciones normales de uso durante un período de UN (1) AÑO a partir de la fecha de compra por parte

del comprador original ("Período de garantía"). Si surge un defecto y se recibe un reclamo válido dentro del Período de garantía, como opción, Massage Therapy Concepts puede: 1) reparar el defecto sin cargo, utilizando piezas de repuesto nuevas o reparadas, o 2) reemplazará el producto con un producto nuevo que es al menos funcionalmente equivalente al productor original. Un producto o pieza de reemplazo, incluida una pieza instalable por el usuario e instalada de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por Massage Therapy Concepts, asume la garantía restante del producto original. Cuando se intercambia un producto o pieza, cualquier artículo de reemplazo se convierte en su propiedad y el artículo reemplazado se convierte en propiedad de Massage Therapy Concepts.

Obtención del Servicio: para obtener el servicio de garantía, envíe un correo electrónico al Servicio de garantía limitada de Massage Therapy Concepts en Support@MassageTherapyConcepts.com. Se requiere un recibo de compra. Todas las reparaciones y reemplazos deben ser autorizados por adelantado. Las opciones de servicio, la disponibilidad de piezas y los tiempos de respuesta variarán. Usted es responsable de la entrega y del costo de entrega del producto o de cualquier pieza al centro de servicio autorizado de Massage Therapy Concepts para su reemplazo, según nuestras instrucciones.

Límites y Exclusiones: la cobertura de esta Garantía se limita a los Estados Unidos de América, incluidos el Distrito de Columbia y los Territorios de los Estados Unidos de Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Esta Garantía

limitada se aplica solo a los productos fabricados por Massage Therapy Concepts que pueden identificarse con la marca registrada, el nombre comercial o el logotipo de "Massage Therapy Concepts" que se adjunta a ellos o a su embalaje. La garantía limitada no se aplica a ningún producto que no sea de Massage Therapy Concepts. Los fabricantes o proveedores que no sean Concepts de terapias de masajes pueden proporcionar sus propias garantías al comprador, pero Massage Therapy Concepts, en la medida que la ley lo permite, ofrecen estos productos "tal cual". Esta garantía no se aplica a: a) daños causados por fallas al seguir las instrucciones relacionadas con el uso del producto o la instalación de componentes; b) daños causados por accidente, abuso, mal uso, incendios, inundaciones, terremotos u otras causas externas; c) daño causado por el servicio realizado por cualquier persona que no sea representante de Massage Therapy Concepts; d) accesorios utilizados junto con un producto cubierto; e) un producto o pieza que ha sido modificada para alterar la funcionalidad o capacidad; f) artículos destinados a ser reemplazados periódicamente por el comprador durante la vida útil del producto incluyendo, sin limitaciones, baterías o bombillas; g) cualquier producto vendido "tal cual", incluidos, sin limitaciones, modelos de demostración de pisos y artículos restaurados; o h) un producto que se utiliza comercialmente o con un propósito comercial.

MASSAGE THERAPY CONCEPTS NO SE HARA RESPONSABLE POR DAÑOS CASUALES O SIGNIFICATIVOS QUE RESULTEN DEL USO DE ESTE PRODUCTO O QUE SURJAN DE

CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY APLICABLE, MASSAGE THERAPY CONCEPTS DESCONOCE CUALQUIERA Y TODAS LAS GARANTÍAS REGLAMENTARIAS O IMPLÍCITAS INCLUYENDO, SIN LIMITACIONES, GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y GARANTÍAS CONTRA DEFECTOS OCULTOS O LATENTES. SI MASSAGE THERAPY CONCEPTS NO PUEDE DESCONCER LEGAMENTE LAS GARANTÍAS RELAMENTARIAS O IMPLÍCITAS, ENTONCES HASTA EL GRADO PERMITIDO POR LA LEY, TODAS ESTAS GARANTÍAS SE LIMITARÁN EN LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA EXPRESS.

Algunos estados rechazan la exclusión o limitación de daños casuales o significativos o la duración de una garantía implícita, por lo que las exclusiones o limitaciones anteriores pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también tenga otros derechos, que varían de un estado a otro.



Massage Therapy Concepts
Chatham, NJ
USA