



Carex Health Brands



**Mobility & Comfort for  
your active lifestyle**

**Movilidad y Confort para  
tu estilo de vida activo**

COMPASSHEALTH 42-A22300\_06 © 2019

Manufactured for / Fabricado por: Compass Health Brands Corp.  
Middleburg Heights, OH 44130 • [www.compasshealthbrands.com](http://www.compasshealthbrands.com)  
Phone / Teléfono 800.376.7263 • Made in China / Hecho en China



# Step N' Rest®

Rolling Walker  
Andador con Ruedas



- ⚠ WARNING:** Read ALL warnings and instructions on enclosed insert prior to operating device.
- ⚠ ADVERTENCIA:** Lea TODAS las advertencias e instrucciones en el inserto adjunto antes de operar el dispositivo.

Save these instructions  
Guarde estas instrucciones



Carex Health Brands

# 1 Check Parts Revisar partes

Rolling walker frame  
Cuadro de Andador




Backrest  
Respaldo



Rear wheels  
Ruedas traseras




Handles with brake assembly  
Asas con montaje de freno

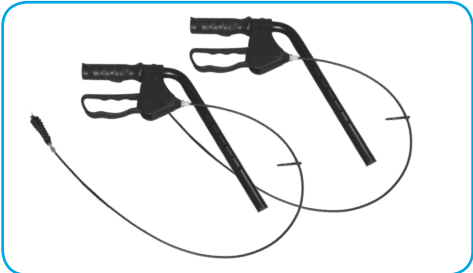

Front wheels  
Ruedas frontales




C-clips & hand screws with washers  
C-clips y tornillos de mano con arandelas

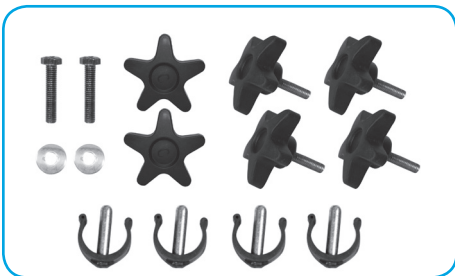


**Note:** Actual items may vary slightly from what is shown.  
**Nota:** Los artículos reales pueden variar ligeramente de lo que se muestra.

# 6 Adjusting the Handles & Seat Height Ajustando las asas y la altura del asiento

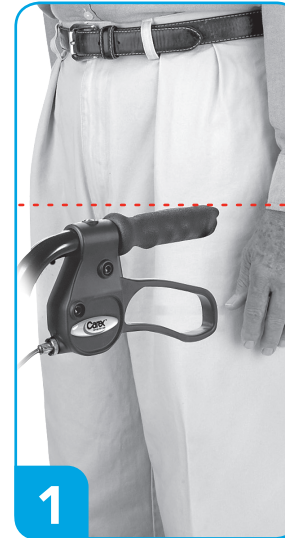


**NOTE:** Seat height adjustment for all four wheels.  
**NOTA:** Ajuste de altura del asiento para las cuatro ruedas.

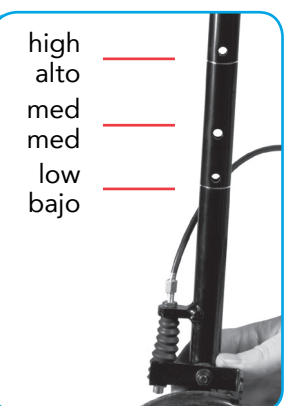

# 5 Backrest Assembly & Braking System Conjunto de respaldo y sistema de frenos

# 2 Brake Assembly Montaje de freno

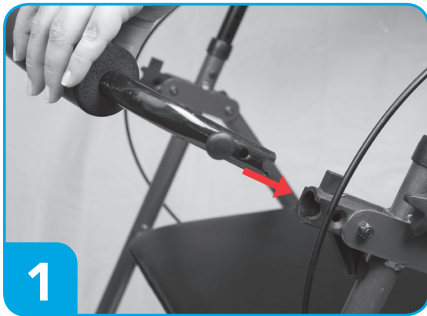

1

Push in side buttons and insert backrest. Flip up backrest for compact storage.

Presione los botones laterales e inserte el respaldo. Voltrear hacia arriba el respaldo para un almacenamiento compacto.



2

## Using the brakes / Usando los frenos



Pull up to apply brakes.  
Tire hacia arriba para aplicar los frenos.




Release brakes.  
Soltar los frenos.




Push down to lock brakes.  
Empuje hacia abajo para bloquear los frenos.

**NOTE:** Cable needs to be placed outside seating area and frames.  
**NOTA:** El cable debe colocarse fuera de la zona de asientos y los marcos.

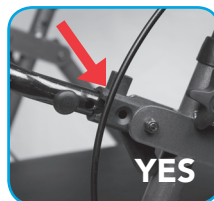


YES

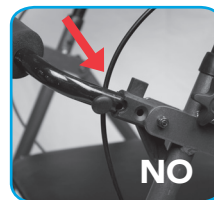


NO

**BRAKE** may come pre-assembled, if so skip to step 3.  
**EL FRENO** puede venir premontado, si es así, salta al paso 3.

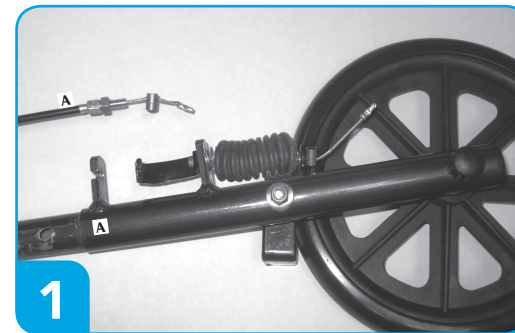

1

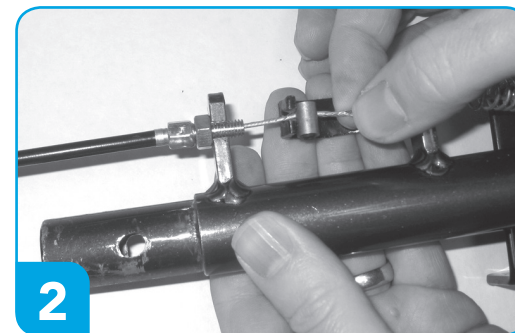

2



3


# 3 Handle Assembly Asa de montaje

# 4 Front & Rear Wheel Assembly Montaje de rueda delantera y trasera




1

**NOTE:** Cable should be outside frame.  
**NOTA:** El cable debe estar fuera del marco.

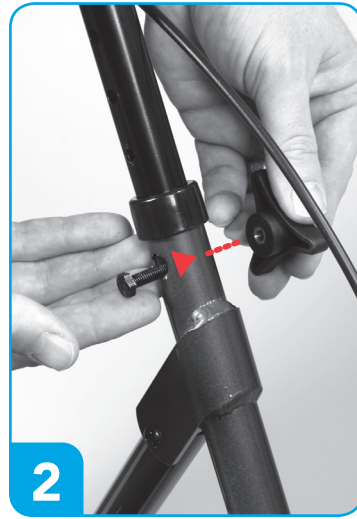

2

 **NOTE:** Hex shaped bolt should fit onto hex shaped hole in tubing. Hand screw faces out.  
**NOTA:** El perno con forma hexagonal debe encajar en el orificio con forma hexagonal en el tubo. Tornillo de mano hacia afuera.



3



4



1

**NOTE:** Replace wheels every 60 miles traveled or when they are visibly worn.  
**NOTA:** Reemplace las ruedas cada 60 millas recorridas o cuando estén visiblemente desgastadas.



2

Line up holes.  
C-clip in small hole.  
Alinear los agujeros.  
C-clip en agujero pequeño.



3

Hand screw in large hole.  
Tornillo de mano en agujero grande.



4