

Folding Crutches

1. Push in pop pin
2. Rotate and pull down to remove bottom of crutch
3. Open until flat sections click into place



4. Press in pop pin to lock
5. Insert bottom of crutch with tip
6. Height adjust the top and bottom using pop pins



1. Pasador automático a presión
2. Gire y baje para retirar la parte inferior de la muleta
3. Abra hasta que las secciones planas produzcan un chasquido cuando estén en su lugar.
4. Presione el pasador automático para cerrar
5. Inserte la parte inferior de la muleta con la punta
6. La altura se ajusta en forma superior e inferior por medio de los pasadores automáticos

