


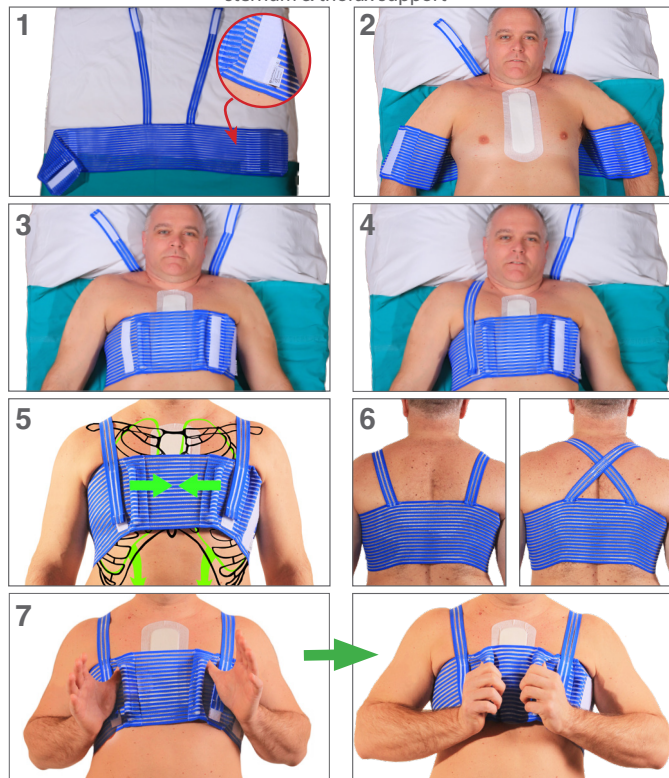

NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing.

VOLG DE VOLGENDE STAPPEN VOOR HET JUISTE GEBRUIK VAN QUALIBREATH:

1. Vouw QualiBreath uit en plaats deze op het bed. Het etiket van de fabrikant bevindt zich aan de buitenkant van het product en moet van de huid af gericht zijn.

2. Ga met uw rug op de QualiBreath liggen. Zorg ervoor dat het midden op de achterkant zit, met de schouderbanden aan weerszijden van uw hoofd.

3. Sluit de QualiBreath en zorg ervoor dat de borstbeen insnijding gecentreerd is tussen de geïntegreerde handgrepen.

4. Sluit de schouderbanden door ze vast te maken aan de klitteband aan de voorkant.

5. Zorg er tenslotte voor dat de QualiBreath helemaal dicht zit om ervoor te zorgen dat hij strak en comfortabel zit voor optimale zijdelingse ondersteuning op het borstbeen.

6. Pas de positie van de schouderbanden aan indien nodig. Kruis de schouderbanden op de achterkant voor een hogere fitting.

7. HOE MEER ONDERSTEUNING TE VERKRIJGEN: Grijp de geïntegreerde handvaten met één of twee handen en breng ze samen. Dit verhoogt de spanning rond de borst wat zorgt voor extra ondersteuning en comfort, indien nodig, bijvoorbeeld bij hoesten, niezen of bewegen.

Het beoogde doel van QualiBreath is het ondersteunen van pijnlijke ribben, spieren en het borstbeen bij patiënten die een operatie hebben ondergaan waarbij het borstbeen moet worden geopend, zoals een hartoperatie. De verwachte klinische voordelen zijn verminderde pijn, gemakkelijkere ademhaling en eerdere activiteit om herstel te bevorderen.

<https://www.qualiteam.com/pages/evaluation-of-external-chest-supports>

Aanbevolen om te gebruiken zoals voorgeschreven door een arts.

Als zich een ernstig incident voordoet dat verband kan houden met het gebruik van QualiBreath, neem dan onmiddellijk contact op met de fabrikant en de bevoegde gezondheidsinstantie.

De geschatte levensduur van dit product is afhankelijk van gebruik en wasverzorging. Extreem gebruik: tot 6 maanden. Zwaar gebruik tot 12 maanden.

Wassen en zorg: QualiBreath kan gewassen worden op 30°C, maar mag niet in de droger. Het wordt afgeraden om QualiBreath vaak te wassen.

Het elastiek kan zijn sterkte verliezen naarmate het vaak gewassen wordt – zoals bij elk ander product wat elastisch materiaal bevat.



QUALITEAM

Località Nassio Sopra 15A
10010 Chiaverano (TO),
ITALY

Tel: +39 0125 54691
info@qualiteam.com
www.qualiteam.com



Copyright © Qualiteam 2024
All rights reserved