

# OKEYEKO®

## WIE SIE DIE RICHTIGE STÄRKE FÜR IHRE LESEBRILLE AUSWÄHLEN OHNE ANDERE PROBLEME ALS DIE ALTERSWEITSICHTIGKEIT - GUTE FERNSICHT

1. Drucken Sie dieses Dokument im A4 Format in Originalgrösse aus.
2. Wählen Sie einen gut beleuchteten Ort aus.
3. Nehmen Sie Ihre Brille ab, falls Sie bereits eine tragen.
4. Positionieren Sie den Text zwischen 30 und 35 cm von Ihren Augen entfernt in Abhängigkeit Ihrer Grösse – angenehme Distanz.
5. Lesen Sie die Texte blockweise von oben nach unten.
6. Der Text, der noch knapp lesbar ist, gibt die zu verwendende Dioptrie für Ihre OKEYEKO Lesebrille an.
7. Die erforderliche Stärke sollte immer der niedrigste Dioptrienwert sein, der es Ihnen ermöglicht, in einer angenehmen Entfernung genau zu lesen.

Die Design Fertiglensebrille, praktisch, bequem, stilvoll und farbenfroh. Sie verlässt Sie nie dank ihres exklusiven Konzepts des magnetischen Verschlusses.

+3.00

Solide dank ihrer 180-Grad-Scharniere. Sie bringen Ihrer Sicht Stil. Empfohlen wird eine OKEYEKO-Lesebrille für Alterssichtige mit geringen, oder keinen Sehproblemen in der Ferne.

+2.50

Mit der Zeit verliert die Augenlinse (die innere Linse des Auges) ihre Flexibilität und hat Schwierigkeiten ihre Leistung ausreichend anzupassen, um die Bilder der Objekte auf der Netzhaut zu fokussieren. Die im OKEYEKO 1click2see Sortiment angebotenen Gläser sind sphärisch und rechts-links symmetrisch.

+2.00

Diese Lesebrille bringt Ihnen eine schnelle und wirksame Lösung, um die nachlassende Akkommodationsfähigkeit Ihrer Augen bei zunehmender Alterssichtigkeit (ein völlig normales Phänomen ab dem Alter von 40 Jahre alt) auszugleichen. Arbeiten im Nahbereich und Lesen werden somit schwieriger. Die ersten ganz normalen Symptome der Alterssichtigkeit treten ab dem Alter von 40 Jahren auf. Arbeiten im Nahbereich und Lesen werden somit schwieriger. Die ersten ganz normalen Symptome der Alterssichtigkeit treten ab dem Alter von 40 Jahren auf.

+1.50

Je weiter der Schärfbereich entfernt ist, desto höher muss die Dioptrienkorrektur ausfallen, um ein bequemes Lesen in einer guten Entfernung zu ermöglichen. Die benötigte Stärke sollte immer der niedrigste Dioptrienwert sein, der es Ihnen ermöglicht, in einer angenehmen Entfernung genau zu lesen. Nach dem Vergnügen, die gewünschte Form- und Farbkombination zu finden, ist es wichtig, die richtige Dioptrienstärke zu auswählen, um unangenehme Empfindungen zu vermeiden. Viele Alterssichtige haben bereits Erfahrungen mit einer zu schwachen, oder zu starken Korrektur gemacht, die mit folgenden Problemen einhergehen können unangenehme Empfindungen, oder sogar Kopfschmerzen bereiten. Die OKEYEKO-Brille, die als Konfektionsware erhältlich ist, bietet eine innovative, effektive und wirtschaftliche Lösung für die allgemeinen Probleme, die mit dem Auftreten von Alterssichtigkeit ab 40 Jahren einhergehen, und bringt gleichzeitig Stil und Farbe.

+1.00

### Durchschnittswert für eine Person ohne Sehprobleme in der Ferne

ALTER	40-45	45-50	50-55	55-60	>60
DIOPTRIE	+1.00	+1.50	+2.00	+2.50	+3.00

Dieser sehr kurze Sehtest ersetzt nicht die Augenuntersuchung bei Ihrem Optometristen, oder Ihrem Augenarzt.

Diese Tabelle berücksichtigt keine anderen Sehprobleme wie Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit, Hornhautverkrümmung oder Unterschiede in der Korrektur zwischen den beiden Augen.

Im Zweifelsfall empfehlen wir Ihnen dringend, einen Augenspezialisten zu Rate zu ziehen. Eine Liste der Partneroptiker finden Sie unter der Rubrik Partnernetzwerk.