




BLACK TRIDENT

SPECIAL PURPOSE GEAR

BEDIENUNGSANLEITUNG

TFC (Tactical Field Care) Kit

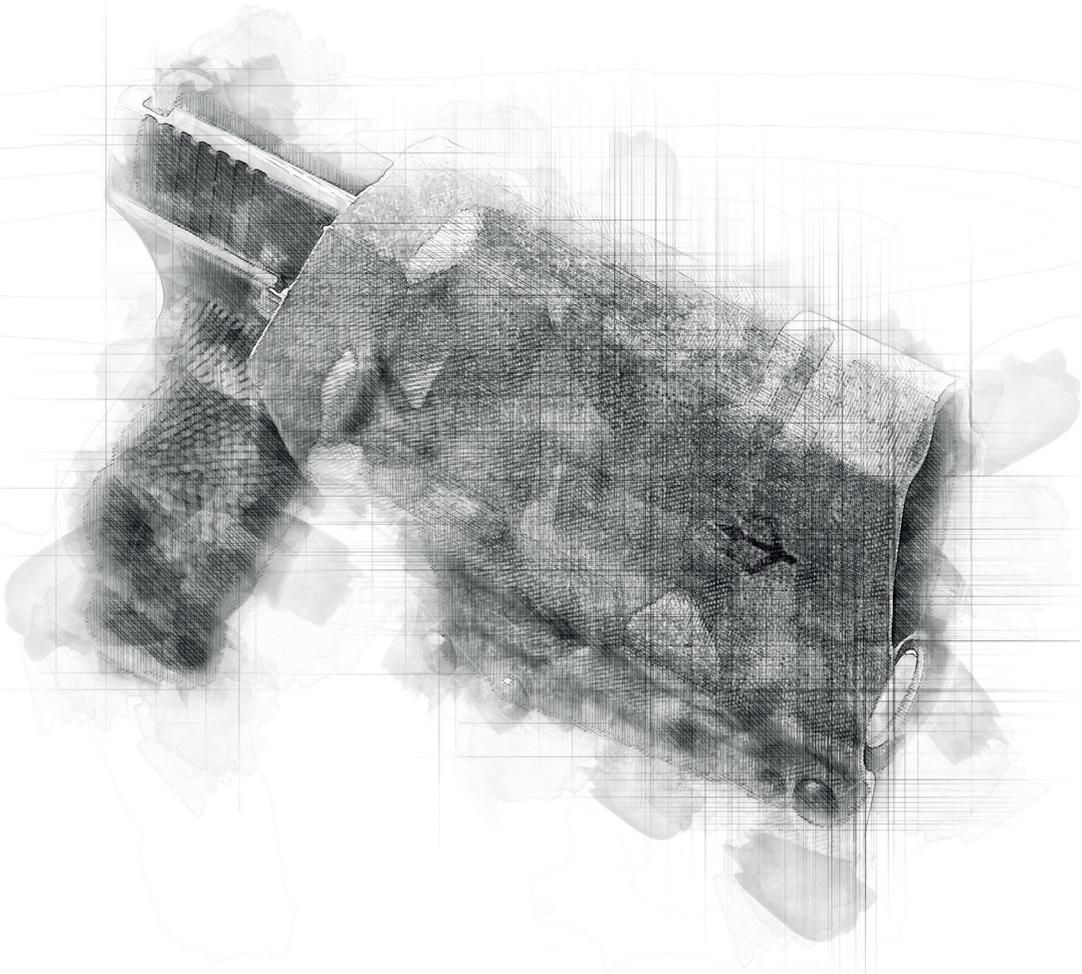

www.blacktrident.com

info@blacktrident.com // +43 660 4854157 // Industriestraße 1/1/A/27 // 2100 Korneuburg // Austria



TFC KIT Außenhülle



TFC KIT Innentasche



WARNUNG

LIES DIR DIE BEDIENUNGSANLEITUNG AUFMERKSAM DURCH,
BEVOR DU DEIN BLACK TRIDENT® TFC KIT BENUTZT.



Das Black Trident® TFC (Tactical Field Care) Kit

Das Black Trident® TFC KIT wurde designed um eine Vielzahl von lebensrettenden medizinischem Equipment aufzunehmen. Nicht nur die Anzahl, sondern auch in der Variation an Medizinprodukten die das Black Trident® TFC Kit aufnehmen kann, machen es einzigartig. All das in einem dem Inhalt anpassbaren kompakten Außenmaß wie kein anderes Produkt.

Mach keine halben Sachen wenn es um dein Leben geht!

Das Black Trident® TFC Kit besteht aus zwei Komponenten:

1. Einer Außenhülle, die an der Ausrüstung befestigt wird und
2. einer Innentasche, welche deine Medizinprodukte aufnimmt

Cold Hard Facts

Variable Anpassung der Größe an den Inhalt

Faltenfreie Aufnahme von mind. 2 Chest Seals

„Patiens Lanyard“ zur Sicherung der Innentasche am Patienten bei Abtransport

Molle Montage Horizontal/Vertikal

mit Klettflächen versehene 45mm Gurtband Gürtelschlaufen für die positionssichere Montage am Range Belt

Für Links- und Rechtshänder geeignet

Flauschklettfläche an der Außenhülle für Patches (Blutgruppe, Einheit, etc.)

zusätzliche Montagepunkte an der Außenhülle für weitere Erste Hilfe Mittel (z.B. Tourniquet, Knicklicht, Markierstifte, etc)


Hergestellt aus 500D Cordura

Außenhülle erhältlich in verschiedenen Farben, passend zu deiner Ausrüstung

Rascher Zugriff auf deine medizinische Ausrüstung

Beim Black Trident® TFC Kit handelt es sich um ein zwei Taschen System. Die Innentasche wird über ein breites Gurtband, durch Zug, aus der Außenhülle befördert. Die Zugschleufe kann zur besseren Sichtbarkeit optional farblich (im Lieferumfang; Rot) gekennzeichnet werden.

Vertikale Montage

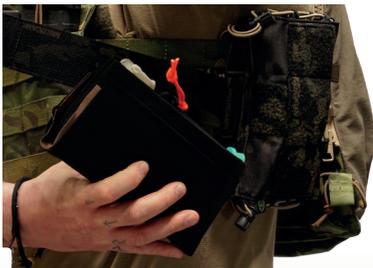

Horizontale Montage



Montage Optionen der Außenhülle



Vertikale Molle Montage

Die Außenhülle kann mit ihrer Befähigung mittels Malice Clips (separat erhältlich) an Molle Befähigungen wie z.B. Cumberbund eines Plattenträgers angebracht werden. Konfigurierbar für Links- als auch Rechtshänder.



Horizontale Molle Montage

Die Außenhülle kann auch horizontal mittels Malice Clips an Equipment wie z.B. Molle Gürtel oder anderen Ausrüstungsgegenständen befestigt werden. Der Innenteil kann je nach Konfiguration nach oben oder nach unten heraus gezogen werden (beachte dabei das Zusammenspiel mit deiner bereits bestehende Ausrüstung).



45mm Gurtband Montage

Die Außenhülle verfügt darüber hinaus über Gurtband Gürtelschlaufen (45mm) um mit Gürteln wie z.B. dem Black Trident® Range Belt zu interagieren. Die Innenseite der Gürtelschlaufen ist mit Flauschklett versehen, um einen sicheren Halt an der gewählten Position zu gewährleisten.




Aufbau Innentasche

Die Innentasche besteht aus zwei Teilen. In der Tasche werden die Medizinprodukte aufgenommen, der Verschluss erfolgt über die abnehmbare stretchband Lasche.



Die abnehmbare stretchband Lasche verfügt über 5 Staufächer und wird mit der Innentasche mittels Klett verbunden.

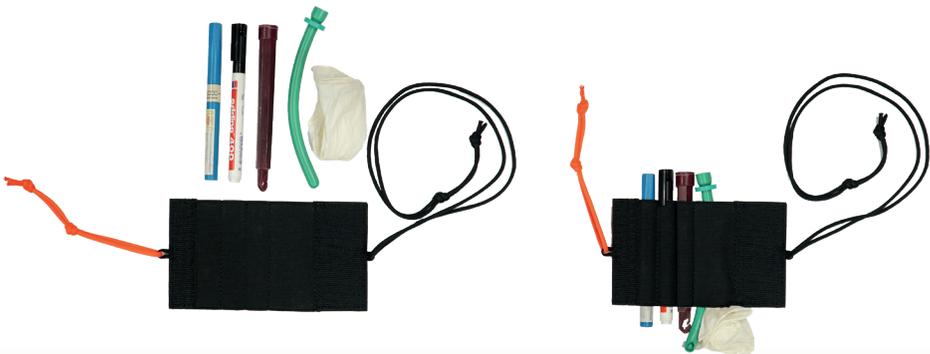



Packmaß Innentasche

Die abnehmbare stretchband Lasche hält die medizinischen Produkte in der Innentasche und reguliert das Packmaß.

Beispiel Packmaß klein



Beispiel Packmaß groß




Funktion TFC Kit Innenteil

Der Zugang zum Inhalt erfolgt durch Ziehen des signalfarbenen Paracords.



Das ca. 150cm lange „Patients Lanyard“ dient zur Sicherung der Innentasche am Patienten beim Abtransport. Da das Paracord mit der Streckband Lasche über Klett mit dem Innenteil verbunden ist, ist eine Strangulierungsgefahr durch hängenbleiben, mit der Innentasche (z.B. bei Abtransport, etc.), ausgeschlossen.

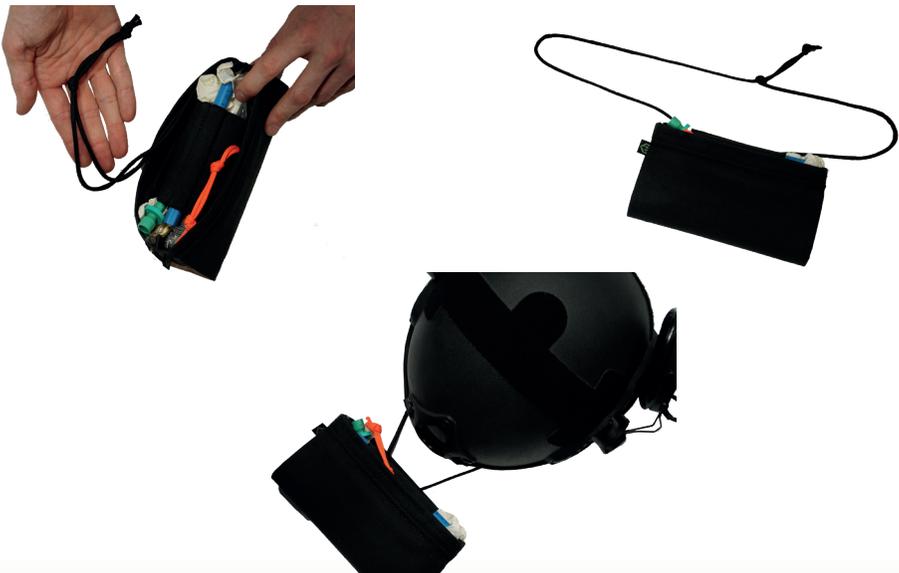



Verstauung von Chest Seals

Die Innentasche des Black Trident TFC KITs erlaubt es mindestens 2 Chest Seals faltenfrei und ohne knicken zu verstauen. Chest Seals können im sich außen befindlichen Zusatzfach der Innentasche verstaut werden.



Verstauung des Innenteils in der Außenhülle

Den Innenteil mit der stretchband Lasche/Öffnung, in der Außenhülle versorgen. Abschließend den Innenteil mittels des breiten Gurtbandes der Außenhülle sichern. Die Größe der Außenhülle kann mittels Shockcord an die Größe des Innenteils angepasst werden.



Funktion TFC Kit Außenhülle

An der Oberseite der Außenhülle des TFC KITS befinden sich insgesamt 6 verschiedene Montageschlaufen, an denen unterschiedliches Equipment befestigt werden kann (z.B. Schere, Tourniquet, Knicklicht, Stift, etc.)



Anpassungen Außenhülle

Die Abmaße des TFC KITs können variabel mittels Shockcord an das Packmaß der Innentasche angepasst werden.



Die rote Lasche welche die optische Signal Markierung zum Lösen der Innentasche aus der Außenhülle darstellt kann vom Nutzer abgenommen werden.

