




# BLACK TRIDENT

SPECIAL PURPOSE GEAR

## BEDIENUNGSANLEITUNG/DATENBLATT TRAUMA BURRITO

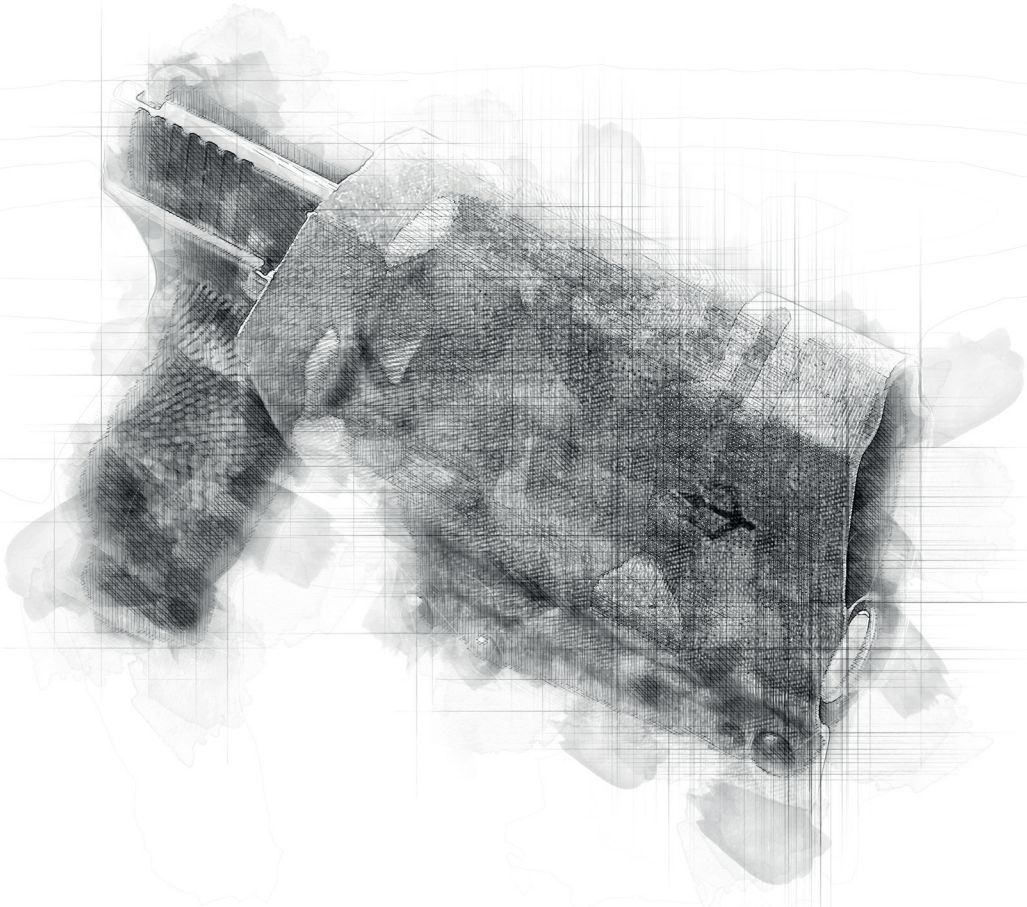

[www.blacktrident.com](http://www.blacktrident.com)

[info@blacktrident.com](mailto:info@blacktrident.com) // +43 660 4854157 // Industriestraße 1/1/A/27 // 2100 Korneuburg // Austria



# TRAUMA BURRITO

## Vielen Dank,

dass du dich für den Black Trident® Trauma Burrito entschieden hast.

Der Black Trident® Trauma Burrito ist eines der innovativsten Individual First Aid Kits (IFAK) auf dem Markt. Er ist dafür gemacht, alle nötigen medizinischen Hilfsmittel aufzunehmen und ist dabei so aufgebaut, dass der Inhalt nicht geknickt werden kann- denn beim Verstauen wird er gerollt. Durch die beiden Dust Flaps wird der Inhalt vor äußeren Einflüssen weitgehend geschützt. Außerdem kann jedes Medizinprodukt auch einhändig entnommen werden, ohne dass dabei etwas gerade nicht-Gebrauchtes herausfällt.

Dies erleichtert dir die Handhabung des IFAKs, und somit die Erste Hilfe, enorm - in jeder Situation.

Die Außenhülle dient als Schutz für den Innenteil und als Montageplattform. Außen- und Innenteil sind durch Flauschklett (am Außenteil) und Hakenklett (am Innenteil) miteinander verbunden.

Weil unser Trauma Burrito so individuell ist, wie sein Nutzer, haben wir mehrere Außenhüllen kreiert, zur Montage an unterschiedlichen Ausrüstungsgegenständen. Durch die verschiedenen Montagemöglichkeiten kannst du deinen Burrito missionsspezifisch an deiner Ausrüstung anbringen.

## Features

- Variable Anpassung der Größe an den Inhalt
- Für Links- und Rechtshänder geeignet
- Hergestellt aus 500D Cordura Laminat
- Frei konfigurierbare Spots für Medizinequipment
- Platz für alle notwendigen Erste-Hilfe-Produkte
- Hängefertigt in Österreich



## WARNUNG

BITTE LIES DIE BEDIENUNGSANLEITUNG AUFMERKSAM DURCH, BEVOR DU DEINEN BLACK TRIDENT® TRAUMA BURRITO BENUTZT.

## Trauma Burrito Innenteil

Der Black Trident Trauma Burrito besteht aus einem Innenteil und einem Außenteil. Der Trauma Burrito ist in verschiedenen Varianten erhältlich.

- CABCADE-System (in Österreich eher gängig)
- und für das MARCH System

Der Aufbau des Außenteils ist bei beiden gleich.



## Trauma Burrito Außenteil

Der Außenteil ist in 4 verschiedenen Montage-Varianten erhältlich:

1. Kangaroo Drop Burrito Mount für den Plattenträger
2. Range Belt Burrito Mount
3. MOLLE Burrito Mount mit speziellen Bohrungs-Pattern für MOLLE Montage
4. Fanny Pack Burrito Mount zum Tragen abseits anderer Ausrüstung



1. Kangaroo  
Drop Mount



2. Range Belt  
Mount  
(hinten)



3. MOLLE  
Mount Mount  
(hinten)



4. Fanny Pack  
Mount

## Black Trident Trauma Burrito Innenteil

Das Black Trident IFAK besteht aus einem Innenteil + Aussenhülle.

Der Innenteil lässt sich missionsspezifisch mit unterschiedlichen Außenhüllen verwenden.

Der Innenteil ist mit unterschiedlichen Inhalten befüllbar und kann darüber hinaus auch größere Gegenstände wie z.B. Tourniquets aufnehmen.

### Innenteil bepackt

C.A.B.C.D.E.  
Schema.  
Kann auch in  
M.A.R.C.H. oder  
anderen  
Schemata be-  
stellt werden

Abdeckung  
gegen Ver-  
schmutzung

Frei konfigurierbare  
Slots  
für Medizinprodukte

Markante rote  
Schlaufe zum  
öffnen



Staufach für  
Patientenkarte,  
Patients Lanyard  
(für Befestigung  
an Patienten)  
oder Stauraum  
für andere Ar-  
tikel

Befestigungsmög-  
lichkeit für Chemlight  
für Versorgung unter  
schlechten Lichtver-  
hältnissen

Staufach für faltenfreie  
Unterbringung von Chest Seals  
(Chest Seal hinter mit Shock-  
cord befestigten Artikeln mit  
Zugangsöffnung)

### Beispielhafte Bestückung des Trauma Burritos

Packmaß bestückt wie abgebildet 170 (L) x 100 (B) x 80 (H)

1.



2.



3.



4.



5.



### Bestückung am Bild

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1x Chest Seal            | 1x 5g Gel           |
| 1x Tourniquet (optional) | 1x Knicklicht       |
| 1x Chestseal (SAM Combo) | 1x Lackstift + Tape |
| 1x Combat Gauze          | 1x Rettungsdecke    |
| 1x Compressed Gauze      | 1x Handschuhe       |
| 1x Emergency Bandage     | 1x Schere           |
| 1x Needle D' Compression | 1x Patientenkarte   |
| 1x Wendltubus            |                     |

## Black Trident Trauma Burrito Außenteil

### Kangaroo Drop Mount

Für den Plattenträger



Montiert, ohne  
Schere & TQ



Montiert, ohne  
Innenteil; mit  
Schere durch  
Schleife



Montiert, mit Innen-  
teil; mit Schere & TQ  
durchs Shock Cord

### Range Belt Mount

Für Gürtelschlaufen 45mm – 50mm



Vorderseite



Rückseite

## MOLLE Mount



Vorderseite



Rückseite; Beispiel.  
Kompatibel mit  
untersch. Montagen

## Fanny Pack Mount



Vorderseite; am  
Körper; als solo  
Bauchtasche


## Lieferumfang

### Innenteil:

- 1x Trauma Burrito Innenteil nach Wahl
- 7x Kordelstopper
- 7x 30cm Shock Cord
- 1x 120cm Paracord (Patient Lanyard)

### Außenteil:

- 1 x Trauma Burrito Außenteil nach Wahl

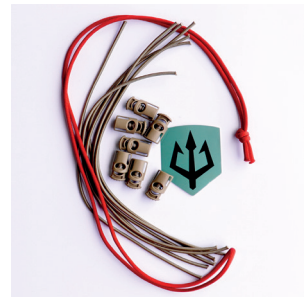



## Black Trident Trauma Burrito richtig rollen



Dust Flaps an den Klettflächen übereinanderlegen



1x mittig falten  
(an der roten Markierung)



Mit Druck zusammenrollen, bis sich die Klettflächen berühren



Fertig gerollter Burrito Innenteil



Innenteil in Seitenansicht



Außenteil mit Flauschklett, Innenteil mit Hakenklett miteinander verbinden



## Weitere Produkte von Black Trident®



Two Point Sling und Sling  
Keeper



Range Belt, Inner Belt,  
STB (Tourniquet Holder),  
& mehr.

Diese und noch viele weitere Produkte findest du  
auf unserer Website

[www.blacktrident.com](http://www.blacktrident.com)

## Black Trident® in den Sozialen Netzwerken



Facebook

<https://www.facebook.com/blacktrid3nt>



Instagram

<https://www.instagram.com/blacktridentofficial>



Youtube

<https://www.youtube.com/c/BlackTridentOfficial>