

## 6. Hilfe bei der Keton-Messung

Wenn Sie Hilfe bei der Auswertung Ihrer Ketonwerte benötigen, besuchen Sie bitte [ketobm.com/results](https://ketobm.com/results)

## Fehlermeldungen

\*Wenn bei den ersten Messungen E02 auf dem Bildschirm erscheint, sehen Sie sich bitte die Videoanleitung unter [ketobm.com/help](https://ketobm.com/help) an. Achten Sie darauf, dass Sie den Streifen in der Mitte halten und vermeiden Sie den Kontakt mit der Oberseite des Streifens, auf der das Blut aufgetropft wird. Sollten Sie trotz dieser Vorgehensweise weiterhin fehlerhafte Messwerte erhalten, wenden Sie sich bitte an [support@ketobm.com](mailto:support@ketobm.com), um Hilfe zu erhalten.

\*Wenn Ihre ersten Messwerte hoch sind (über 4,0 oder HI) obwohl Sie nicht nüchtern sind, ist der Teststreifen vielleicht falsch kalibriert. Versuchen Sie es erneut mit einem anderen Teststreifen und sollten die Messwerte weiterhin zu hoch sein wenden Sie sich an [support@ketobm.com](mailto:support@ketobm.com).

Weitere Hilfestellungen zu Fragen rund um das Gerät:

**[KetoBM.com](https://ketobm.com)**

oder senden Sie eine E-Mail an:  
**[support@ketobm.com](mailto:support@ketobm.com)**

## Schnellstart-Anleitung



Videoanleitung verfügbar auf  
**[ketobm.com/help](https://ketobm.com/help)**

## 1. Hände waschen

Waschen Sie Ihre Hände mit Wasser und Seife. Abspülen und gründlich abtrocknen.

## 2. Stichhilfe vorbereiten



## 3. Teststreifen in den Monitor einführen

Führen Sie den Teststreifen mit dem Pfeil nach unten in Richtung des Messgeräts ein, bis das Messgerät piept und sich einschaltet. Auf dem Bildschirm wird 880 angezeigt und ein blinkendes Blutropfensymbol erscheint unten auf dem Bildschirm.



## 4. Blutropfen abnehmen

Setzen Sie die Stechhilfe seitlich an der Fingerspitze an. Drücken Sie die Taste, um den Finger zu stechen.



## 5. Blutropfen auf den Teststreifen auftragen

Bringen Sie den Blutropfen an der oberen Spitze des Streifens auf, bis das Messgerät piept. Ein Countdown beginnt und Ihr Ketonwert wird in 10 Sekunden angezeigt. Entsorgen Sie anschließend die gebrauchte Lanzette und den Teststreifen.

