

6. Aiuto per le lettura dei risultati

Se vi serve aiuto per interpretare i risultati, visitate il sito ketobm.com/results.

Errori

* Se riscontrate errore E02 alle prime letture, riferitevi alle istruzioni video disponibili su ketobm.com/help. Assicuratevi di tenere la striscia al centro ed evitate di toccarne la parte superiore, dove si deposita il sangue. Se eseguite il test correttamente e continuate a ricevere messaggi di errore, contattate support@ketobm.com per assistenza.

* Se le prime letture risultano elevate (superiori a 4,0 o HI) e non siete a digiuno, è possibile che la striscia reattiva sia tarata male. Provate un'altra striscia test, e se i valori anomali persistono, contattate support@ketobm.com per farvi aiutare.

Per domande e assistenza, visitate:
KetoBM.com

o inviate email a:
support@ketobm.com

Guida Rapida



Istruzioni Video disponibili su:
ketobm.com/help

1. Lavare le mani

Lavare le mani con acqua e sapone, sciaquarle e asciugarle bene.

2. Caricare il pungidito



3. Inserire la striscia nel misuratore

Inserire bene la striscia con la freccia rivolta verso il misuratore, fino all'emissione del segnale acustico e all'accensione. Il monitor visualizza 880, e il simbolo di una goccia di sangue lampeggiante appare nella parte inferiore dello schermo.



4. Prelevare una goccia di sangue

Posizionare il pungidito sul polpastrello. Premere il pulsante per pungere il dito. Se necessario, spremere delicatamente il dito per favorire la fuoriuscita di una goccia di sangue.



5. Depositare una goccia di sangue

Applicare la goccia di sangue sul bordo della striscia fino al segnale acustico. Dopo questa operazione si avvia un conto alla rovescia e il risultato analitico è visualizzato dopo 10 secondi. Gettare la lancetta e la striscia reattiva usate.

