

Vertrieben von  
**KetoBM LLC**

30 N Gould St, Suite 2883  
Sheridan, WY, 82801

Bei Fragen besuchen Sie  
bitte:  
**KetoBM.com**

oder senden Sie uns eine  
E-Mail an:  
**support@ketobm.com**

## Blut-Keton Überwachungssystem

Benutzerhandbuch



Videoanleitung Verfügbar auf  
**ketobm.com/help**

# Inhaltsverzeichnis

Nutzung .....	2
Sicherheitshinweise .....	3-4
Messgerät Teile .....	5
Messgerät Bildschirm .....	6
Keton-Teststreifen .....	6
Stichhilfe .....	7
Datum/Uhrzeit einstellen .....	8
Ablauf des Tests .....	9-10
Fehlersuche/Fehlercodes .....	11
Produktspezifikationen .....	12
Produkt Garantie .....	13
Testgrundlagen .....	14
Erwartete Werte .....	15
Kontroll Ergebnisse .....	16
Einschränkungen .....	17
Störfaktoren .....	18
Anhang .....	19-20

# Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem KetoBM-Kauf!

Vielen Dank, dass Sie sich für das KetoBM Blut-Keton-Messgerät entschieden haben. Wir hoffen, dass wir einen kleinen Teil zu Ihrem Erfolg mit der ketogenen Diät beitragen können.

Ihr neues KetoBM Messgerät verwendet ein fortschrittliches Autocodierungssystem, das keine Codekartenkalibrierung oder Kontrollösung benötigt. Es ist so konzipiert, dass es zu Hause genaue Blutketon-Messwerte liefert. Bevor Sie das System verwenden, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung und die beiliegende Schnellstartanleitung.

Hilfe bei der Interpretation Ihrer Ergebnisse finden Sie unter **ketobm.com/results**. Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, besuchen Sie bitte unsere Website unter [www.ketobm.com](http://www.ketobm.com) oder senden Sie uns eine E-Mail an [support@ketobm.com](mailto:support@ketobm.com). Wir sind gerne für Sie da und möchten sicherstellen, dass Sie mit Ihrem neuen KetoBM-Produkt gute Erfahrungen machen.

## Verwendungszweck

Das KetoBM Keton-Blutmessgerät ist für die quantitative Messung von  $\beta$ -Keton (Beta-Hydroxybutyrat) in frischem Kapillarblut aus der Fingerspitze bestimmt.

Das System ist für die In-vitro-Diagnostik und für die Anwendung bei einem einzelnen Patienten bestimmt. Es soll als Hilfsmittel zur Überwachung einer ketogenen Diät bei gesunden Personen verwendet werden. Es ist nicht für die Diagnose oder das Screening von Diabetes und auch nicht für die Anwendung bei Säuglingen bestimmt. Er ist nicht für die Diagnose oder Behandlung von Krankheiten bestimmt. Er ist für Selbsttests oder die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal außerhalb des Körpers bestimmt. Die Messung wird als Referenz verwendet, um ein Gewichtsabnahme-Programm zu bewerten oder den Ketonspiegel zu überwachen um einen DKA zu verhindern. Der KetoBM wurde entwickelt, um Blut  $\beta$ -Keton (Beta- Hydroxybutyrat) in frischem Kapillarblut aus der Fingerspitze quantitativ zu messen. Diese Teststreifen sind nur für die In-vitro-Diagnostik (Verwendung außerhalb des Körpers) und für die Selbstkontrolle bestimmt. Die Testergebnisse sind plasmaäquivalent. Der Messbereich der Blut- $\beta$ -Keton-Konzentration im Kapillarblut liegt zwischen 0,0 und 8,0 mmol/L.

## Sicherheitshinweise

- Das Messgerät und die Stichhilfe sind für den Gebrauch durch nur einen Patienten bestimmt. Teilen Sie die Stichhilfe nicht mit anderen Personen, auch nicht mit anderen Familienmitgliedern.

- Alle Teile des Kits gelten als biologisch gefährlich und können potenziell Infektionskrankheiten übertragen, auch nachdem Sie eine Reinigung und Desinfektion durchgeführt haben.


### Siehe dazu:

"FDA-Mitteilung zur öffentlichen Gesundheit: Use of Fingertick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Bloodborne Pathogens: Initial Communication" (2010) <http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/ucm224025.htm>  
"CDC Clinical Reminder: Use of Fingertick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Bloodborne Pathogens" (2010) <http://www.cdc.gov/injectionsafety/Fingertick-DevicesBGM.html>

# Sicherheitshinweise und Beschränkungen


- Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Verwendungszweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Säuglingen.
- Nur zur Nutzung an einer einzigen Person. Nur für die In-vitro-Diagnostik geeignet.
- Testen Sie nur frisches Kapillarvollblut aus der Fingerbeere. Schwere Dehydrierung oder übermäßiger Wasserverlust kann zu ungenauen Ergebnissen führen.
- Wenn Sie glauben, dass Sie an einer schweren Dehydrierung leiden, wenden Sie sich sofort an Ihren medizinischen Betreuer.
- Halten Sie das Gerät und die Testausrüstung von kleinen Kindern fern. Kleinteile wie die Batterieabdeckung, Batterien, Teststreifen und Lanzetten stellen eine Erstickungsgefahr dar.
- Schwerkranke Patienten sollten dieses Gerät nicht verwenden. Verwenden Sie dieses Gerät nicht für die Diagnose oder Behandlung von Diabetes oder anderen Krankheiten.
- Wenden Sie sich bei gesundheitlichen Problemen oder Beschwerden an einen Arzt.
- Konsultieren Sie einen Arzt, bevor Sie Ihre Ernährung umstellen.

## Gerät Frontansicht

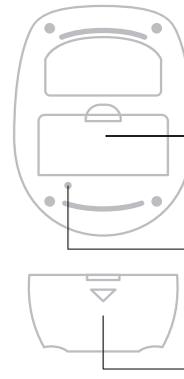

## Meter Rück Ansicht

## Anzeige

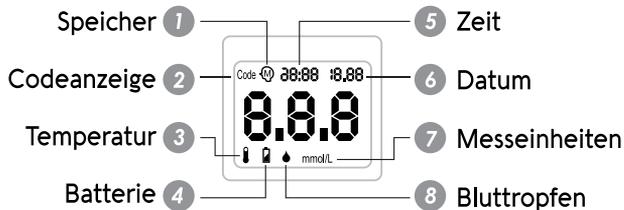


## Ketone Test Steifen



- 1 Probennahme Ende:**  
Platzieren Sie hier einen Tropfen Blut.  
Er wird automatisch absorbiert.
- 2 Messgeräte-Kontaktpunkte:**  
Führen Sie diese Seite in das Messgerät  
ein.

6

## Stich-Hilfe

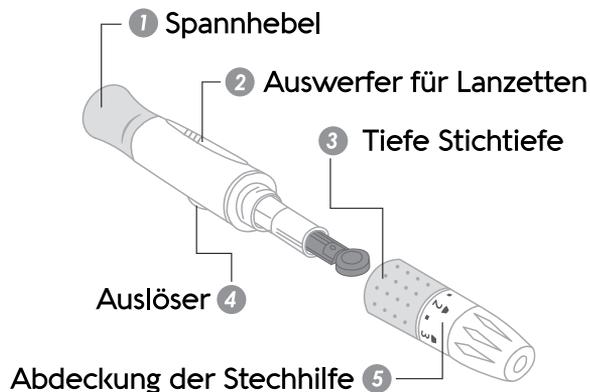

## Lanzette



7

# Einstellung von Datum, Uhrzeit (optional)

## Schritt 1:

Öffnen Sie das Batteriefach und suchen Sie die Taste für die Zeiteinstellung, die sich unten links auf der Rückseite des Messgeräts befindet.

## Schritt 2:

Drücken Sie die Einstelltaste und lassen Sie sie wieder los. Das Messgerät schaltet sich ein und die Jahreszahl blinkt auf dem Bildschirm.

## Schritt 3:

Drücken Sie die Eingabetaste auf der Vorderseite des Messgeräts, um das Jahr einzustellen, bis das richtige Jahr angezeigt wird. Es sind nur die letzten beiden Ziffern der Jahreszahl sichtbar. Wenn auf dem Bildschirm zum Beispiel "17" angezeigt wird, entspricht dies dem Jahr 2017.

## Schritt 4:

Drücken Sie die Einstelltaste auf der Rückseite des Messgeräts und lassen Sie sie wieder los, um den Monat einzustellen.

## Schritt 5:

Drücken Sie die Taste auf der Vorderseite des Messgeräts, bis der richtige Monat angezeigt wird.

## Schritt 6:

Fahren Sie mit dem gleichen Verfahren fort, indem Sie die Einstell- und Eingabetaste verwenden, um das Datum und die Uhrzeit (Stunden und die Minuten) zu ändern.

## Schritt 7:

Drücken Sie die Einstelltaste und das Messgerät schaltet sich automatisch aus.

\*Der Schalter unten rechts ist inaktiv und hat keine Funktion.

8

# Ketone Blut Test durchführen

## Schritt 1: Hände waschen

Waschen Sie Ihre Hände mit Wasser und Seife. Spülen Sie sie ab und trocknen Sie sie gründlich ab.

## Schritt 2: Stechhilfe laden

- (a) Drehen Sie die Endkappe ab.
- (b) Setzen Sie die Lanzette ein.
- (c) Drehen Sie die Lanzettenschutzhülle ab.
- (d) Drehen Sie die Endkappe auf.
- (e) Ziehen Sie den grauen Spannmechanismus zurück.

## Schritt 3: Teststreifen in das Messgerät einführen

Führen Sie einen KetoBM Ketonteststreifen in das Messgerät ein. Achten Sie darauf, dass die Seite mit der Kontaktstelle so in das Messgerät eingeführt wird, dass der Pfeil nach unten zeigt. Schieben Sie den Streifen bis zum Anschlag ein. Das Messgerät schaltet sich automatisch ein. Das Messgerät zeigt 880 an und ein blinkender Blutstropfen erscheint unten auf dem Bildschirm.

9

## Schritt 4: Blutropfen entnehmen

Setzen Sie die Stichhilfe seitlich an der Fingerspitze an. Drücken Sie den Knopf, um in den Finger zu stechen. Falls erforderlich, drücken Sie Ihre Fingerspitze leicht zusammen, um einen Blutropfen zu gewinnen.

## Schritt 5: Blutropfen auf den Teststreifen auftragen

Tragen Sie den Blutropfen auf den Rand des Streifens auf, bis der Monitor piept. Dadurch wird ein Countdown gestartet und Ihr Ketonwert wird in 10 Sekunden angezeigt. Entsorgen Sie die gebrauchte Lanzette und den Teststreifen.

Wenn Ihre ersten Messwerte hoch sind (Über 4,0 mmol/L oder HI) und Sie nicht nüchtern sind, ist Ihr Teststreifen möglicherweise falsch kalibriert. Versuchen Sie es mit einem anderen Teststreifen und wenden Sie sich an [support@ketobm.com](mailto:support@ketobm.com), wenn die abnormalen Messwerte weiterhin bestehen.

## Anzeigen der gespeicherten Messwerte aus dem Speicher

Ihr Messgerät kann bis zu 180 Ketontestergesulten einschließlich Datum und Uhrzeit speichern. Schalten Sie das Messgerät mit der Eingabetaste auf der Vorderseite ein und drücken Sie dann die Taste , um die Messwerte vom jüngsten bis zum ältesten anzuzeigen. Wenn der Speicher voll ist, wird das neueste Ergebnis gespeichert und das älteste Ergebnis gelöscht.

10

## Fehlersuche

Anzeige	Meldung	Was es bedeutet	Was zu tun ist
	E01	System Fehler	Tauschen Sie die Batterien aus und testen Sie sie mit einem neuen Streifen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an <a href="mailto:support@ketobm.com">support@ketobm.com</a>
	E02	Fehlerhafter oder Beschädigter Teststreifen	Testen Sie mit einem neuen Streifen. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an <a href="mailto:support@ketobm.com">support@ketobm.com</a>
	E03	Inkompatibler Teststreifen	Testen Sie erneut mit einem echten KetoBM-Teststreifen.
	Batterie Symbol	Geringe Batterie Ladung	Ersetzen Sie die Batterie bald
	Geringer Batterie Stand	Batterie Leer	Wechseln Sie die Batterie sofort aus, das Messgerät schaltet sich dann automatisch ab.
	Temperatur Symbol LO/HI	Die Raumtemperatur ist zu hoch, oder zu niedrig für eine Messung	Begeben Sie sich an einen Ort, an dem die Temperatur zwischen 10° C und 40° C (50-104° F) liegt, und warten Sie 20 Minuten, bevor Sie den Test mit einem neuen Teststreifen wiederholen.
	HI mit Blut Symbol	Das Blutketon-Ergebnis ist möglicherweise zu hoch (>8,0 mmol/L) oder der Teststreifen ist falsch kalibriert.	Testen Sie erneut mit einem neuen Teststreifen. Wenn die Fehlermeldung erneut erscheint, wenden Sie sich an <a href="mailto:support@ketobm.com">support@ketobm.com</a>

11

# Produkt-Spezifikationen

## KetoBM Keton-Blutüberwachungssystem

Marke	KetoBM
Modellnummer	KBM - K01
Sorte	Kapillares Vollblut
Position des Streifeneinsatzes	Top
Akzeptabler Hämatokritbereich	30-60%
Messzeit	10 Sekunden
Betriebstemperaturbereich	50°F - 104°F (10 - 40°C)
Betriebsbereich der relativen Luftfeuchtigkeit	<85%
Streifen Modell	KS - 01
Enzymtyp	beta-Hydroxybutyrat-Dehydrogenase(HBDH) Diaphorase(DAD)
Volumen der Probe	0.5 µL
Messbereich	0 - 8.0 mmol/L
Lagerbedingungen - Temperatur	39 - 86°F (4 - 30°C)
Modell	KBM - K01
Speichervolumen	180
Anzeigeeinheit	mmol/L
Zeit Bildschirm	24 Stunden
Lagerbedingungen - Temperatur	32 - 122°F (0 - 50°C)
Lagerungsbedingungen - Relative Luftfeuchtigkeit	<95%
Abmessung	87 x 63 x 23 (mm)
Gewicht	78 (g)
Stromversorgung	AAA x 2

12

# Produkt-Garantie

KetoBM LLC garantiert dem Verbraucher für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab Kaufdatum, dass das KetoBM Messgerät bei normalem Gebrauch frei von Verarbeitungs- und Materialfehlern ist.

Die Haftung von KetoBM LLC ist auf die Reparatur oder den Ersatz beschränkt und KetoBM LLC haftet in keinem Fall für Neben- oder Folgeschäden oder Verluste. Produkte, die unsachgemäßem Gebrauch, Missbrauch, Vernachlässigung, nicht autorisierten Reparaturen oder Modifikationen ausgesetzt waren, sind von dieser Garantie ausgeschlossen.

Diese Garantie schließt ausdrücklich Verbrauchsmaterialien und Verbrauchsgegenstände aus. Die Garantie gilt nur für den Erstkäufer des Systems.

13

## Test-Prinzip

Wenn die Probe (Blutprobe) auf den Teststreifen aufgetragen wird, reagiert das Beta-Hydroxybutyrat im Blut mit dem Reagenz, das auf der Reaktionsfläche des Teststreifens immobilisiert ist, und erzeugt einen kleinen elektrischen Strom. Dieser Strom wird gemessen, und das Ergebnis wird auf dem Bildschirm des Messgeräts angezeigt. Die Stärke des Stroms hängt von der Menge an Beta-Hydroxybutyrat in der Blutprobe ab.

## Kalibrierungsreferenz

Das KetoBM - Blutketonüberwachungssystem wurde mit dem RANDOX-Testkit (RB1007) von HITACHI 704 Automatic Analyzer für die Bestimmung von Beta-Hydroxybutyrat im Plasma kalibriert.

## Vorcodiertes Messgerät

Es ist nicht notwendig, das Messgerät zu kodieren, wenn es standardmäßig vorcodiert ist. Bei einem vorcodierten Messgerät trägt die neue Ampulle mit Teststreifen dieselbe Nummer, die auf dem Bildschirm des Messgeräts angezeigt wird. Es besteht keine Notwendigkeit, die Codekarte zu verwenden, und daher wird die Codekarte nicht mitgeliefert.

14

## Eine Reihe von erwarteten Werten

Das KetoBM - Blutketonüberwachungssystem ermittelt die B-Ketonwerte, die 78 % der im Blut vorhandenen Ketonkörper ausmachen. Der erwartete Blutketonspiegel einer gesunden Person liegt unter 0,6 mmol/L. Der BKeton-Spiegel kann ansteigen, wenn eine Person fastet, sich anstrengt oder eine ketogene Diät einhält.

\* Bitte konsultieren Sie Ihren Ernährungsberater oder Diätassistenten, bevor Sie dieses Produkt als Referenz für Ihr Abnehmprogramm verwenden.

\* Dieses Produkt ist ausschließlich dazu bestimmt, den Fortschritt der Diät zu verfolgen und dient nicht der Diagnose oder Behandlung von Diabetes.

15

## Kontrolle der Blutketonüberwachung Systems und des Teststreifens (optional)

Die KetoBM Keton-Kontrolllösung wird verwendet, um zu überprüfen, ob das Überwachungssystem (Messgerät in Verbindung mit Teststreifen) ordnungsgemäß funktioniert.

### Wann sollte ein Test mit der Kontrolllösung durchgeführt werden?

1. Wann immer Sie den Verdacht haben, dass das Messgerät oder der Teststreifen nicht richtig funktioniert.
2. Wenn Sie das Messgerät fallen gelassen haben.
3. Wann immer Sie Ihre Blutketonwerte in Frage stellen.

### Schritte zur Durchführung eines Kontrolllösungstests

#### Schritt1:

Führen Sie einen neuen Teststreifen in das Messgerät ein.

#### Schritt2:

Öffnen Sie eine Flasche der KetoBM Keton-Kontrolllösung. Die Aufbewahrungsfrist für die Kontrolllösung beträgt 3 Monate nach dem Öffnen der Flasche oder bis zum angegebenen Verfallsdatum, je nachdem, was zuerst eintritt.

#### Schritt3:

Schütteln Sie die Flasche gut und drücken Sie einen Tropfen der Kontrolllösung auf den Teststreifen. Das Messgerät startet automatisch den Countdown von 10 Sekunden.

#### Schritt4:

Nach Ablauf des Countdowns wird das Ergebnis des Kontrolltests auf dem Bildschirm angezeigt. Vergleichen Sie das Ergebnis mit dem auf dem Fläschchen aufgedruckten Bereich, um sicherzustellen, dass es innerhalb des Bereichs liegt.

## Beschränkungen:

Das KetoBM Blut-Keton-Messsystem liefert genaue Ergebnisse, wenn die folgenden Einschränkungen beachtet werden.

- Die Teststreifen sollten nicht für die Untersuchung von Neugeborenen verwendet werden.
- Die Teststreifen sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. NICHT wiederverwenden.
- Behandeln Sie das Messgerät mit Vorsicht, lassen Sie es NICHT absichtlich fallen und üben Sie keine starke Kraft auf das Messgerät aus.
- Versuchen Sie NICHT, das Messgerät zu zerlegen.
- Verwenden Sie KEINE Codekarte von einem anderen Testsystem.
- Führen Sie den Test NICHT durch, wenn das Messgerät auf einer heißen oder kalten Oberfläche liegt.
- Das Testergebnis kann aufgrund der Abweichung von der Normalverteilung vom Laboregebnis abweichen.
- Bewahren Sie das Messgerät in seiner Tragetasche auf.
- Vermeiden Sie, dass Schmutz, Staub, Blutproben oder Flüssigkeiten in die Teststreifenöffnung des Messgeräts gelangen.
- Reinigen Sie die Außenseite des Messgeräts mit einem feuchten Tuch und milder Seife. Für die Reinigung des Messgeräts durch medizinisches Fachpersonal ist eine Reinigungslösung mit 70%igem Ethanol geeignet.
- Entfernen Sie den Teststreifen NICHT, während die Messung durchgeführt wird.
- Testen Sie NICHT mit den folgenden Proben:

1. Hämatokritbereich von 30% bis 60%.

2. Plasma, Serum, venöse Vollblutprobe.

Führen Sie den Test NICHT durch, wenn der Teststreifen abgelaufen ist. Führen Sie den Test unter Umgebungsbedingungen durch, bei einer Temperatur von 10-40 (°C) und einer relativen Luftfeuchtigkeit von <85%. Befolgen Sie die Vorschriften in Ihrem Gebiet zur Entsorgung der gebrauchten Teststreifen und Stechmaterialien. Wenden Sie die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen für Blut an. Alle Patientenproben und Materialien, mit denen sie in Berührung kommen, gelten als biologisch gefährlich und sollten so gehandhabt werden, als könnten sie Infektionen übertragen.

## Störungen:

In der nachstehenden Tabelle sind die Konzentrationen aufgeführt, die die Funktion des Messgeräts beeinträchtigen können.

Substance	No interference
Acetaminophen	<1.0 mg/dl
Ascorbic acid	<1.2 mg/dl
Bilirubin	<12.5 mg/dl
Cholesterol	<500 mg/dl
Dopamine	<0.09 mg/dl
L-Dopa	<1.0 mg/dl
Gentisic acid	<1.5 mg/dl
Methyl dopa	<0.5 mg/dl
Tolazamide	<2.0 mg/dl
Triglyceride	<2000 mg/dl
Uric acid	<12.5 mg/dl



Nicht wiederverwenden



Gebrauchsanweisung konsultieren



Trocken halten



Begleitdokumente konsultieren



In-Vitro-Diagnose



Begrenzung der Betriebstemperatur

Begrenzung der Lagertemperatur



Hersteller



Herstellungsdatum



Von Sonnenlicht fernhalten



Medizinisches Gerät



Chargennummer



EU-Vertreter



Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 98/79/EG über In-vitro-Diagnostika.



Papier-Recycling



Bitte entsorgen Sie dieses Messgerät nicht mit anderen Haushalts- oder Siedlungsabfällen. Bitte befolgen Sie die Vorschriften zur Entsorgung des Messgeräts in einer zugelassenen Recyclinganlage oder geben Sie es an Ihren ursprünglichen Käufer zurück.

 Lancet  0197 und Lancing Device 

Beijing Ruicheng Medical Supplies Co., Ltd.  
No. 558 Zhangzikou, Yangsong Town,  
Hoairou District, 101400 Beijing, China

**EC REP**

Lotus NL B.V.  
Koningin Julianaplein 10, IeVerd, 2595 AA, Den Haag, Niederlande.

 Lancet  0123

Shandong Lionfa Medical Plastic Products Co., Ltd.  
No. 1 Shuangshan Sanjian Road, 250200 Zhangqiu City  
Jinan, Shandong, China

**EC REP**

Shanghai International Holding Corp. GmbH  
Eiffestaße 80 20537 Hamburg GERMANY


 **VISGENEER INC.**

No. 335, Sec. 6, Zhonghua Rd.,  
30094 Hsinchu City, TAIWAN  
Tel : 886-3-5181918  
Fax : 886-3-5181908  
E-mail : [vis@visgeneer.com.tw](mailto:vis@visgeneer.com.tw)  
Webseite : <http://www.visgeneer.com.tw>

 0123

**EC REP**

**EMERGO EUROPE B.V.**  
Prinsessegracht 20, 2514 AP,  
Den Haag, Niederlande.

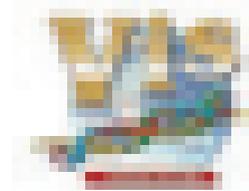Kunden Information		FARBCODE	BESCHREIBUNG	DESIGN VON: KetoBM	 <b>曁世生物科技</b> <b>VISGENEER INC.</b>																	
Datum	Unterschrift	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ CMYK 100 85 0 37</li> <li>■ CMYK 100 93 28 18</li> <li>■ K100</li> <li>■ K30</li> <li>■ K40</li> <li>■ K50</li> <li>■ K70</li> <li>■ K80</li> </ul>	Hülle Material: 180g特鋼  Herstellung: 英製  Matrial Inhaltsseiten 80g特鋼  Herstellung: 英製	GEZEICHNET: KetoBM	DIE AUF ALLEN BLÄTTERN DIESES DRUCKS ENTHALTENEN INFORMATIONEN DÜRFEN OHNE DIE ZUSTIMMUNG VON VISGENEER WEDER GANZ NOCH TEILWEISE VERVIELFÄLTIGT ODER VERWENDET WERDEN. DIESER HINWEIS IMPLIZIERT NICHT DIE VERÖFFENTLICHUNG.																	
				TITEL Nutzerhandbuch						<table border="1"> <tr> <td>EINHEIT</td> <td>VERHÄLTNIS GRÖSSE</td> <td>TEILNR.</td> <td>SEITEN</td> <td>REF</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>1:1</td> <td>1320755</td> <td>20</td> <td>Ver.1</td> </tr> </table>		EINHEIT	VERHÄLTNIS GRÖSSE	TEILNR.	SEITEN	REF	MM	1:1	1320755	20	Ver.1	<table border="1"> <tr> <td>GRÖSSE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>137x90mm</td> <td>JUL-2-2021</td> </tr> </table>
EINHEIT	VERHÄLTNIS GRÖSSE	TEILNR.	SEITEN	REF																		
MM	1:1	1320755	20	Ver.1																		
GRÖSSE																						
137x90mm	JUL-2-2021																					
				MODELNAME: KetoBM (EU)																		