

# Lainière Santé™


L'INNOVATION NOUS PROTÈGE




## NOTICE D'UTILISATION

Les masques 3 plis sont composés d'un mélange polyamide/polyester qui offre une excellente respirabilité et une filtration aux gouttelettes. Les tissus en contact avec la peau sont certifiés OEKO-TEX 1 afin de respecter les peaux les plus fragiles.

### HIGH FILTRATION TECHNOLOGY

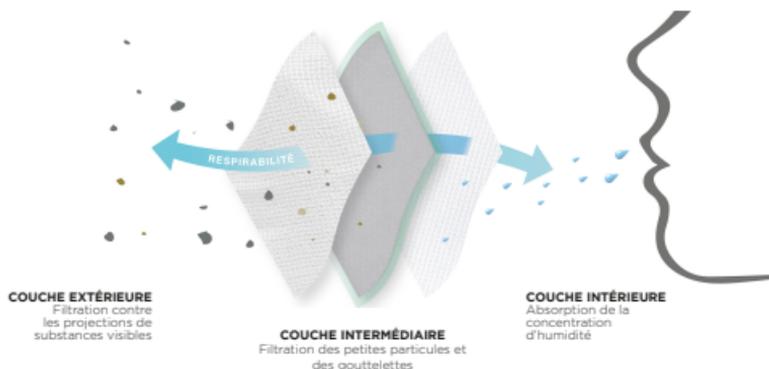


### COMMENT ENTRETENIR LE MASQUE ?

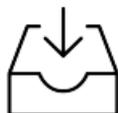

Stockez le masque dans son emballage d'origine protecteur, dans un endroit sec et à l'abri des rayons du soleil.

Lavez le masque à la machine avec de la lessive. Vous pouvez le mettre en machine avec votre linge. L'utilisation d'un filet de type linge délicat ou filet de lingerie est recommandée.

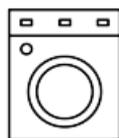


MINIMUM 30 MINUTES  
À 60°C



Lorsque la machine est terminée, sortez le masque et remettez-le en forme en aplatissant la barette nasale et en reformant les plis sans forcer.

Faites sécher le masque dans son intégralité. Vous pouvez utiliser un sèche-linge (en veillant à nettoyer les filtres du sèche-linge et à vous laver les mains après), ou faire sécher votre masque à l'air libre, sur un support propre et désinfecté. Repassez votre masque à fer doux, 110°C.

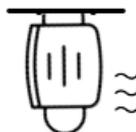

Conservez votre masque dans un emballage propre et hermétique (par exemple : sachet plastique, sac de congélation)

# Lainière Santé™

L'INNOVATION NOUS PROTÈGE



## COMMENT PORTER LE MASQUE ?

Les masques recouvrent intégralement le nez et la bouche avec un confort et une protection optimale pendant 4 heures. Au-delà ils doivent être changés. Ces masques ne remplacent pas les gestes barrières (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes). Ils ajoutent une barrière physique.

Ces masques répondent aux recommandations AFNOR puisqu'ils peuvent être lavés et réutilisés jusqu'à 20 fois conformément aux tests effectués dans nos laboratoires.



1. Lavez-vous les mains avant chaque utilisation du masque.



2. Prenez le bord rigide du masque vers le haut et attachez-le par les élastiques derrière les oreilles. Vous pouvez adapter les élastiques pour plus de confort.



3. L'étiquette doit être portée à l'intérieur du masque. Abaissez le masque sous le menton.



4. Moulez le renfort rigide du haut du masque sur la racine du nez.

## DÉCOMPTÉ D'UTILISATION DES MASQUES

Pour vous aider à suivre et gérer le décompte d'utilisation de vos masques, renseignez le tableau suivant en cochant les cases :

	UTILISATION 01	UTILISATION 02	UTILISATION 03	UTILISATION 04	UTILISATION 05	UTILISATION 06	UTILISATION 07	UTILISATION 08	UTILISATION 09	UTILISATION 10	UTILISATION 11	UTILISATION 12	UTILISATION 13	UTILISATION 14	UTILISATION 15	UTILISATION 16	UTILISATION 17	UTILISATION 18	UTILISATION 19	UTILISATION 20	
MASQUE																					

## CONFORMITÉ DES MASQUES

Ce masque barrière Lainière Santé™ est conforme au cahier des charges élaboré par la Direction Générale de l'Armement (DGA) et aux spécifications AFNOR SPEC S76-001:2020. « Ce dispositif n'est pas un masque chirurgical (règlement UE/2017/745) ni un masque de type FFP (Règlement UE/2016/425). »



60°C



Séchage en tambour



Nettoyage à sec



Max temp 110°C



Conservation