



NOTICE D'UTILISATION

AVERTISSEMENT

pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de respecter cette notice d'utilisation.

- Portez ce masque quand vous êtes **en contact avec d'autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez.**
- Vérifiez toujours que le masque est **bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez.**
- Attention : si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Demandez l'avis de votre médecin.
- Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant.
- **Ce masque ne remplace pas les gestes barrières** (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes). **Il ajoute une barrière physique, à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec d'autres personnes.**



Lainière Protection certifiée que le masque a été fabriqué dans le respect des spécifications définies par l'État.

UTILISATION DU MASQUE : METTRE ET PORTER LE MASQUE

- 01 Avant de toucher le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique.
- 02 Inspectez le masque et assurez-vous qu'il n'y a pas de trous, déchirures ou dégradations.
- 03 Il est recommandé de porter le masque sur une peau nue, en évitant le contact avec les cheveux.
- 04 Tenez le masque par les lanières élastiques, placez-le au niveau de votre bouche et passez les lanières élastiques derrière les oreilles.
- 05 Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton: vous pouvez pincer la barrette nasale pour vous aider.
- 06 Lorsque vous portez le masque, évitez de le toucher et de le déplacer. Ne le mettez jamais en position d'attente sur votre menton.

IL FAUT CHANGER LE MASQUE :

- 01 Quand vous avez porté le masque 4h.
- 02 Quand vous souhaitez boire ou manger.
- 03 Quand il devient difficile de respirer.
- 04 Si le masque s'humidifie.
- 05 Si le masque est endommagé.
- 06 Si le masque est déformé et ne tient plus correctement contre votre visage.

RETRAIT DU MASQUE

- 01 Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.
- 02 Retirez-le par l'arrière par l'intermédiaire des lanières élastiques, puis isolez le masque dans un contenant spécifique (sac plastique ou hydrosoluble), afin de le laver.
- 03 Si le masque est déformé ou usé, jetez-le tout de suite dans une poubelle qui se ferme.
- 04 Lavez-vous à nouveau les mains.

ENTRETIEN DU MASQUE

- 01 Avant utilisation, stockez le masque dans son emballage d'origine protecteur, dans un endroit sec et à l'abri des rayons du soleil.
- 02 Lavez le masque à la machine avec de la lessive. Choisissez un programme de lavage qui comprend au moins 30 min à 60°C minimum. Vous pouvez le mettre en machine avec votre linge.
- 03 Après avoir touché le masque, lavez-vous les mains.
- 04 Ce masque a été testé pour 20 lavages. Après 20 lavages, la filtration du masque n'est plus garantie.
- 05 Lorsque la machine est terminée, sortez le masque et remettez-le en forme en aplatissant la barrette nasale et en reformant les plis sans forcer.
- 06 Faites sécher le masque dans son intégralité (les couches intérieures doivent également être totalement sèches). Pour cela, vous pouvez utiliser un sèche-linge (en veillant à nettoyer les filtres du sèche-linge et à vous laver les mains après), ou faire sécher votre masque à l'air libre, sur un support propre et désinfecté.
- 07 Repassez votre masque à fer doux, 120°.
- 08 Dès que le masque est sec, stockez-le pour le conserver dans un emballage propre hermétique (sachet plastique ou sac de congélation, par exemple).

AVERTISSEMENT

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou fournisseur, de s'assurer de l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'usage. Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d'usage décrites ci-dessus.