



MASQUE

BY J & JOY

Masque « Community » selon NBN/DTT S
65-001 :2020 du 28 avril 2020 version 1.1

PORTER LE MASQUE




Étape 1 : Lavez-vous les mains à l'eau et au savon avant de toucher le masque.



Étape 2 : Vérifiez le masque pour vous assurer qu'il n'y ait ni trou ni déchirure.



Étape 3 : Tenez le masque avec la bande rigide pliable vers le haut et le côté foncé vers l'extérieur.

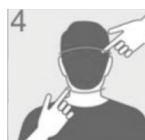

Étape 4 : tirez la bande inférieure sur votre tête puis la bande supérieure, ajustez le masque afin qu'il couvre le nez, la bouche et le menton.



Étape 5 : Formez ou serrez la bande nasale pour l'adapter à la forme de votre nez.


RETIRER LE MASQUE



Étape 1 : Lavez-vous les mains à l'eau et au savon avant de toucher le masque.



Étape 2 : Ne touchez pas l'avant du masque car il peut être contaminé. Ne touchez que les bandes.

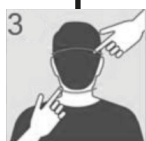

Étape 3 : Soulevez la bande supérieure sur votre tête puis tirez la bande inférieure sur votre tête, sans toucher l'avant du masque.



Étape 4 : Jetez le masque dans un panier à linge fermé.



Étape 5 : Lavez-vous les mains à l'eau et au savon avant de toucher à autre chose.

Instructions d'entretien

Recommandations pour l'entretien

- Le masque est capable de subir 25 cycles d'entretien.
- Aucun produit spécifique autre qu'un détergent neutre ne doit être utilisé, de préférence sans assouplissant.
- Les masques sont toujours lavés séparément avec du ballast supplémentaire (par exemple une serviette de bain usagée) dans le but de générer une action de nettoyage mécanique.
- Pour la désinfection, une température d'au moins 60 °C durant le lavage doit être maintenue pendant 30 minutes. Étant donné que certaines machines à laver domestiques ne peuvent pas garantir cela avec un programme de lavage à 60°, le programme de lavage avec température la plus élevée est recommandé.
- Il est possible que le masque rétrécisse légèrement après lavage. Si c'est le cas, il est recommandé d'utiliser un fer à repasser pour qu'il retrouve sa largeur initiale d'environ 17 centimètres.

Contrôle visuel après l'entretien

Un contrôle visuel doit être réalisé après chaque cycle de nettoyage et de séchage. En cas de détection de tout dommage du masque (moins d'ajustement, déformation, usure, etc.), le masque est considéré comme n'étant plus utilisable, ne doit plus être porté et doit être jeté.

Avertissements

- Ce produit ne peut être utilisé que par des enfants de plus de 3 ans en raison du risque de suffocation et les enfants doivent être surveillés lorsqu'ils portent ce produit.
- Le port d'un masque nécessite une adaptation, à savoir la sensation d'avoir moins d'air, c'est normal, le masque fonctionne.
- Attention : un masque buccal n'autorise certainement pas un effort intense, comme la pratique intensive du sport.
- Ce dispositif n'est pas un dispositif médical au sens du règlement (UE) 2017/745 / Directive 93/42/CEE ni un équipement de protection individuelle au sens du règlement (UE) 2016/425.

Jeter des masques endommagés ou en fin de vie

Si un masque « community » ou artisanal est endommagé ou en fin de vie, il peut, après avoir été lavé, être jeté avec les déchets habituels. Les masques non lavés doivent être emballés dans un sac en plastique fermé, puis jetés dans une poubelle fermée. Si une poubelle destinée aux déchets médicaux est disponible, un masque usagé non lavé peut y être jeté.