

Mode d'emploi

Bandelettes pour test de grossesse

Usage prévu

Les bandelettes pour test de grossesse Ovry offrent une façon rapide et facile pour détecter une grossesse. Chaque bandelette pour test de grossesse Ovry permet d'établir la présence de l'hormone de grossesse, soit la gonadotrophine chorionique humaine (HCG), qui apparaît dans l'urine tôt pendant la grossesse. Ces bandelettes pour usage à domicile sont conçues pour les femmes. Chaque bandelette donne un résultat visuel qualitatif.

Comment les bandelette pour test de grossesse Ovry détectent-elles une grossesse?

Les bandelettes pour test de grossesse Ovry détectent la présence de l'HCG qui apparaît tôt dans l'urine lors d'une grossesse normale.

Les bandelettes de test de grossesse Ovry peuvent détecter une grossesse jusqu'à 6 jours avant vos règles manquées; si votre cycle menstruel est de 28 jours, soit environ 23 jours après le début de vos dernières menstruations. Pendant les premières semaines d'une grossesse normale, le taux d'HCG double environ toutes les 48 heures. Par conséquent, si le résultat du test est négatif, nous vous conseillons de refaire le test 48 heures plus tard avec une bandelette neuve et un nouvel échantillon d'urine. Si vos résultats sont toujours négatifs et que vous croyez être enceinte, nous vous conseillons de consulter un médecin.

Le seuil minimal de détection d'HCG par la bandelette Ovry se situe à 10mIU/ml. Les échantillons d'urine contenant des taux d'HCG égaux ou supérieurs au seuil minimal de détection donneront des résultats positifs. Les échantillons d'urine contenant des taux d'HCG inférieurs au seuil minimal de détection peuvent aussi donner des résultats positifs, révélés par la présence d'une bande très pâle dans la zone de test (T).

On trouve aussi des taux élevés d'HCG dans certaines maladies comme la maladie trophoblastique gestationnelle (MTG) et certains néoplasmes non trophoblastiques. C'est pourquoi votre médecin doit vérifier la présence de ces maladies ou d'autres problèmes de santé avant de poser un diagnostic de grossesse.

Contenu de la trousse Ovry

- Sachets d'aluminium scellés contenant chacun une bandelette pour le test de grossesse et un absorbeur d'humidité
- Contenant en plastique propre et sec pour collecter l'échantillon d'urine
- Mode d'emploi

Restrictions

- Comme pour tout test, le diagnostic ne doit pas reposer sur le résultat d'un test isolé. Le diagnostic devrait être posé par votre médecin après évaluation de tous les signes cliniques et de laboratoire connexes.
- Un faible taux d'HCG très tôt au début d'une grossesse peut donner un résultat négatif. Si l'on suppose tout de même une grossesse, il convient de répéter le test deux jours plus tard.
- Si un échantillon d'urine est trop dilué, le taux d'HCG peut se situer sous le seuil minimal de détection. Si l'on suppose tout de même une grossesse, il convient de répéter le test deux jours plus tard.
- Un taux élevé d'HCG peut également être causé par certaines affections, dont la maladie trophoblastique gestationnelle (MTG), la protéinurie, l'hématurie, le choriocarcinome et le tératome ovarien; c'est pourquoi si un test est positif, un médecin doit confirmer que vous ne souffrez pas de ces affections avant de diagnostiquer une grossesse.
- Les substances qui interfèrent avec le système immunitaire, comme celles utilisées dans les traitements par anticorps, peuvent invalider le résultat du test.
- Une grossesse extra-utérine ne peut pas être distinguée d'une grossesse normale par un test mesurant l'HCG. Seul un médecin peut diagnostiquer une grossesse extra-utérine.
- Les patientes sous chimiothérapie doivent confier à un médecin l'administration de leur test de grossesse.
- Un test d'HCG peut être positif plusieurs semaines après un accouchement, un avortement ou une fausse couche.
- Si vous effectuez un test avant la date prévue de vos règles, des résultats faiblement positifs au début peuvent devenir négatifs plus tard en raison d'une interruption naturelle de la grossesse. On parle alors souvent de grossesse chimique. Pour celles qui ont des antécédents de perte et/ou qui ont du mal à concevoir, il est recommandé d'attendre la date prévue de vos règles pour éviter le chagrin qui peut résulter de la détection d'une grossesse chimique avec un test ultra-sensible.
- Les traitements affectant les niveaux d'HCG (tels que les piqûres de déclenchement de la FIV), peuvent provoquer de faux résultats. Consultez un médecin pour savoir comment effectuer correctement le test si vous prenez des médicaments hormonaux ou si vous suivez un traitement hormonal.


Mode d'emploi du test de grossesse Ovry

1

Ouvrez le sachet scellé en le déchirant depuis l'entaille et retirez-en la bandelette. Tenez la bandelette par sa partie colorée.

2

En tenant la bandelette à la verticale, plongez sa partie fléchée dans l'échantillon d'urine. Ne trempez pas la bandelette au-delà de la ligne « MAX ».

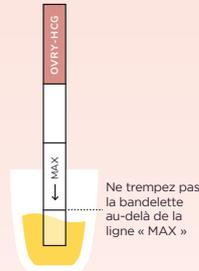


3

Retirez la bandelette de l'échantillon une fois l'urine bien absorbée par celle-ci, soit environ 5-10 secondes, et déposez-la à plat sur une surface sèche, propre et non absorbante en vous assurant que l'indication « MAX » est visible.

4

Lisez les résultats après 5 minutes en vous référant aux instructions de la rubrique « Interprétation des résultats ».

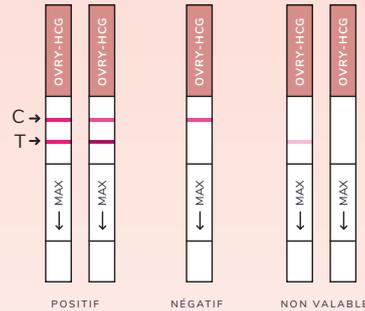

Remarque : Un test peut se révéler positif après une minute si l'urine renferme un taux élevé d'HCG. Pour confirmer un résultat négatif, attendre 10 à 15 minutes.

Mise en garde : Ne pas interpréter les résultats après 15 minutes

Les résultats lus après 15 minutes ne sont pas précis car l'urine s'évapore et eut parfois révéler une légère "ligne d'évaporation" incolore. Cette ligne d'évaporation n'est pas une indication de grossesse. Pour éviter toute confusion, n'interprétez pas les résultats après 15 minutes.

Interprétation des résultats

Positif (enceinte) Deux bandes de couleur apparaissent : Une première bande de couleur rose clair apparaît dans la zone de contrôle (C) et une seconde bande de couleur, mais d'intensité variable, apparaît dans la zone de test (T) sous la première bande rose clair, ce qui signifie que vous êtes enceinte.

REMARQUE : Si la couleur de la zone de test (T) est très pâle, nous vous conseillons de répéter le test deux jours plus tard avec une bandelette neuve et un nouvel échantillon d'urine, ou de consulter un médecin.

Négatif (pas enceinte) Une seule bande rose clair apparaît dans la zone de contrôle (C) et aucune bande n'apparaît dans la zone de test (T), ce qui signifie qu'aucune grossesse n'a été détectée. Si vous croyez quand même être enceinte, répétez le test après 48 heures avec une bandelette neuve et un nouvel échantillon d'urine. Si les résultats sont encore négatifs, nous vous conseillons de consulter un médecin.

REMARQUE : Une bande rose clair devrait toujours apparaître dans la zone de contrôle (C), que le test soit négatif ou positif. Cette bande rose indique que vous avez bien suivi le mode d'emploi.

Non valable Après utilisation, aucune bande colorée n'apparaît dans la zone de contrôle (C). Répétez le test avec une bandelette neuve. Si le prochain test se révèle aussi non valable, veuillez noter le numéro de lot sur l'emballage et communiquer avec nous par l'intermédiaire de notre site web (www.myovry.ca).

Autre matériel requis (non fourni)

- Chronomètre (montre, horloge ou cellulaire)

Mises en garde

- Ne pas avaler. Cette trousse est pour usage externe seulement.
- Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur chaque sachet.
- Ne pas réutiliser une bandelette. Les bandelettes sont à usage unique.
- Ne pas utiliser les bandelettes dont le sceau du sachet est endommagé.
- Tenir hors de la portée des enfants.

Pour diagnostics in vitro uniquement.
Ne doit pas être pris par voie interne.

Collecte de l'échantillon d'urine pour faire le test de grossesse Ovry (quand et comment)

- Vous pouvez faire le test n'importe quand dans la journée, **mais l'urine du matin est préférable en raison de son taux supérieur d'HCG.**
- Urinez directement dans un contenant en plastique ou en verre propre et sec.

Conservation

- Garder les sachets scellés entre 2 et 30 °C (36 à 86 °F) jusqu'à la date de péremption.
- Ne pas exposer les sachets aux rayons de soleil, à l'humidité, à la chaleur, ou au gel.
- Vous devez utiliser chaque bandelette immédiatement après l'avoir retirée de son sachet d'aluminium.

Questions ou commentaires?
Nous aimerions recevoir de vos nouvelles!

Envoyez-nous un email à support@myovry.com ou visitez-nous en ligne à www.myovry.ca