



**T-PULL**  
DOOR CLOSER

# Directions

**Le ferme-porte T-Pull est prêt à être installé. Pelez et collez l'adhésif 3M sur une surface propre.**

- Déterminez la hauteur et la distance de saisie (assis ou debout)
- Assurez-vous que la surface est propre, sèche, plate et lisse
- Assurez-vous que la trajectoire de pivotement T-Pull n'interfère pas avec le fonctionnement de la porte
- Pelez le dos de l'adhésif 3M pour exposer l'adhésif
- Appuyez et maintenez la surface adhésive sur la porte pendant 60 secondes
  - La liaison adhésive se renforce en 72 heures
  - La température d'application optimale se situe entre 10°C et 37°C
  - La température de fonctionnement de l'adhésif, en fonction de la charge, se situe entre -40°C et 90°C

**L'adhésif n'est PAS permanent.** Bien que l'adhésif est fort et soutient une forte traction horizontale, la durée de vie de l'adhésif dépend de son environnement.

**Les vis sont incluses pour une installation permanente** et elles sont destinées à être utilisées avec l'adhésif.

## Où positionner le ferme-porte T-Pull

En cas de doute, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé.



## Lignes directrices pour le positionnement du T-Pull :

- 1 Assurez-vous que l'extrémité de saisie du T-Pull pointe à l'opposé de la poignée de porte.
- 2 Assurez-vous que le T-Pull est placé de manière afin de pouvoir l'atteindre lors de la fermeture de la porte.
- 3 Assurez-vous que le T-Pull n'interfère pas avec les charnières de la porte lorsque la porte se ferme.
  - L'installation verticale (haut/bas) tout en tirant horizontalement peut affaiblir l'adhésif et la poignée au fil du temps.
  - L'emplacement optimal du T-Pull dépend de l'utilisateur, qui peut être au-dessus ou en dessous de la poignée de porte d'origine.



- Le T-Pull ne doit jamais être utilisé comme poignée de support pour le transfert ou la stabilité.
- Pour éviter les blessures, la poignée T-Pull doit être rétractée lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Les portes vitrées ou coupe-feu n'ont pas été testées avec le T-Pull.
- La version numérique de ce document est disponible au site : [www.t-pull.com](http://www.t-pull.com)



Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant votre T-Pull, veuillez envoyer un courriel à: [hello@t-pull.com](mailto:hello@t-pull.com)