



CONSEJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE TU MEDIDOR DE COMPOSICIÓN CORPORAL DOMÉSTICO



CONSEJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE TU MEDIDOR DE COMPOSICIÓN CORPORAL DE USO DOMÉSTICO

1. Por ser un modelo de la línea doméstica, no tienen refacciones ni servicio técnico. Estos medidores de composición corporal (MCC) están compuestas únicamente por la tarjeta madre y la cubierta exterior, esta tarjeta está sellada e integrada. Tanita no suministra tarjetas madre ni ninguno de sus componentes como refacción.
2. Mantén tu MCC en lugar seco y fresco.
3. Realizar la medición siempre sobre una superficie plana, nivelada y dura, no sobre tapete.
4. Si tu MCC es segmentaria, jalar con cuidado las manijas cuando vaya a realizar la medición, estas son de cable retráctil y si las jalan duro se pueden zafar, igual con mucho cuidado al regresarlas, no soltarlas o dejarlas caer.
5. Limpiar los electrodos solo con unas gotas de alcohol y un trapito o papel, **NO MUCHO** alcohol ya que puede derramarse y entrar debajo de los electrodos y corroer los cables que están debajo, dañando la báscula.
6. Si por un tiempo no van a utilizar la báscula, quítele las pilas, aunque esté apagada las pilas siguen enviando corriente y al no usarse estas pueden derramar líquido o sulfatarse, si este líquido llega a la tarjeta madre dañara toda la báscula.

Siguiendo estos consejos la báscula le durará mucho tiempo.



 ventas@nesss.com.mx

 (55) 4744 4822

 (55) 8172 3275

www.nesss.com.mx