



MOBI

MANUAL DE USUARIO

meibi.

hey!

Disfruta del placer anal sin
preocupación con **MOBI**.

Antes de sumergirte en la magia que
tendrás con **MOBI**, dedica un momento
a revisar la información que se te
proporciona en este manual de usuario.

INFORMACIÓN GENERAL

MOBI es una ducha anal de silicona ideal para limpiar la zona del ano y el recto, evitar sorpresas y hacer que el sexo anal sea aún mejor.

MOBI te garantiza salud e higiene total. Es ergonómico, muy fácil de usar e insertar, manejo y extracción.

Importante:

Para una mejor experiencia con **MOBI** es básico usar un lubricante base agua.




Material	Silicón + ABS
Tamaño	13.5 cm x 6 cm x 0.8 cm (5.5cm de inserción)
Capacidad	120 ml
Colores	Negro
Grado de resistencia	Waterproof

¿CÓMO USAR A MOBI?

1. Separa la boquilla de la pera y llénala con agua tibia.
2. Después, vacíala apretándola para extraer el agua. A continuación, llena la pera con agua a temperatura templada.
3. Lubrica el extremo de la boquilla y del ano con lubricante a base de agua; una vez lubricadas las áreas, introduce en el ano. Puedes sentarte en el inodoro para una mejor inserción.
4. Una vez insertada la boquilla en el ano, aprieta la pera suavemente para que el agua penetre en el recto.
5. Cuando hayas introducido todo el líquido, deberás extraer la boquilla sin dejar de apretar la pera.
6. Mantén el esfínter apretado para mantener el agua dentro del recto durante unos segundos hasta que sientas el impulso de expulsarla.
7. Repite varias veces si lo deseas, hasta que el agua se expulse totalmente clara.

¿DÓNDE USAR A MOBI?

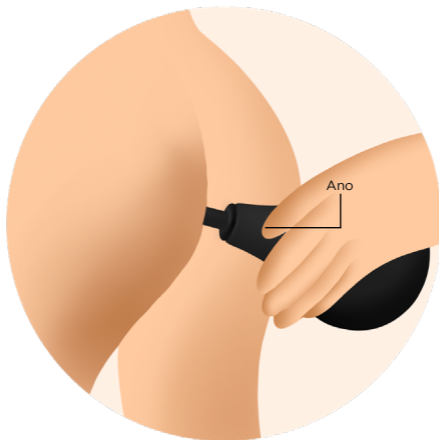

LIMPIEZA

Limpia siempre minuciosamente a **MOBI** antes y después de cada uso.

Lava a **MOBI** con agua templada y jabón bactericida. Enjuágalo con agua caliente limpia.

Sécalo con una toalla o trapo que no esté deshilachado, ni deje pelusas u otros restos textiles.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

La vida de **MOBI** aumentará bastante con un mantenimiento y cuidado adecuado.

Te recomendamos no usar lubricante a base de silicona, porque podría provocar que la silicona de **MOBI** se mantenga pegajosa y dañe el material. Un lubricante a base de agua es la opción más segura.

No utilices aceite de masaje o crema para manos como lubricante.

No dejes a **MOBI** expuesta a la luz solar directa y NUNCA la expongas a altas temperaturas.

Guarda a **MOBI** en un espacio donde no entre el polvo y de preferencia que no esté en contacto con otros juguetes.

Importante:

Este aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

No botes la batería en la basura. Las baterías de litio se consideran desechos peligrosos. Lleva la batería a un centro local de desechos electrónicos. Busca en línea centros de desechos electrónicos en tu zona.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Los usuarios de este producto lo utilizan con sus propios riesgos y bajo su única y exclusiva responsabilidad.

meibi elude todo tipo de responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse del uso de este producto.

El modelo puede ser modificado para su mejora sin previo aviso.

Para más información, visite:
www.meibi.mx

Soporte técnico
sosporte@meibi.mx



meibi.