



CE

Präsentation

PerfectClean® ist das erste System, das alle Arten von Hörgeräten in einem Arbeitsgang reinigt, desinfiziert und trocknet.

Das moderne und schlanke Design kombiniert mit der besten Technologie ermöglicht Ihnen einen einfachen und bequemen Gebrauch. PerfectClean® erhält die optimale Funktionalität Ihrer Hörgeräte, Tag für Tag.

Spezifikation



**Entfernt
Ohrenschmalz und
Verunreinigungen
restlos**

Verstärkung des
Effekts durch das
patentierte Vortex
Power System



**Trocknung durch
patentiertes
Ventilatorensystem**

- Selbstregulierende
Temperatur bei 45°C +/- 3°C
- Kontrollierte Belüftung
- Optimierter und
konstanter Luftstrom
- Feuchtigkeitsentzug



Reinigungszyklus Auto-Stop

- Automatische
Abschaltung der UV-C
Lampe zu Ihrer
Sicherheit



UV-C Lampe

- Desinfektion mittels
Kurzwellen (253.7nm)
- Beseitigt über 99%
der Pilze und
Bakterien
(durch Labore getestet)
- Durch Tests bestätigt:
Keine Schäden an der
Oberfläche der
Hörgeräte



Antibakterielle Lösung

**Desinfiziert und beseitigt
Ohrenschmalz**


Kontrollleuchte

- Blau - an > Betriebsbereit (Standby)
- Blau - langsam blinkend > Reinigungsvorgang
- Blau - schnell blinkend > Reinigungslösung nachfüllen

Zentrale Bedieneinheit


- Eleganter Druckknopf mit Sensor

| | |
|--|--------------------|
| Verdunstung | 90 min. |
| Wassermenge der Verdunstung auf Hörgeräten | 40 mm ³ |

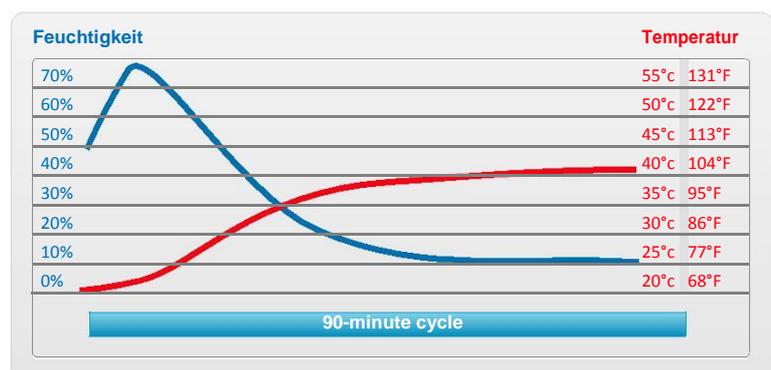

Test unter 25°C / 77°F und Luftfeuchtigkeit von 60%

Elektrische Spezifikationen


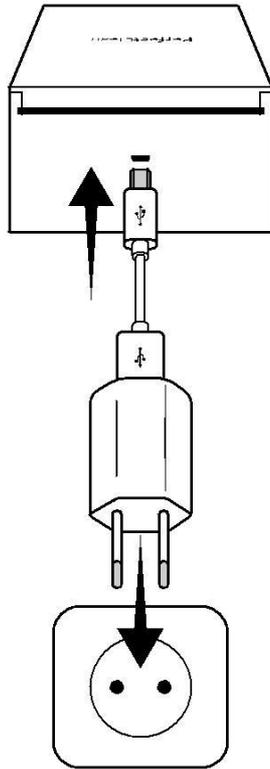


- Spannung: 5V
- Max Leistungsaufnahme: 4W
- Standby-Verbrauch: < 0.04W

5V Adapter

- Input: 100-240 V AC / 50-60Hz
- Output: 5V DC

Abmessungen

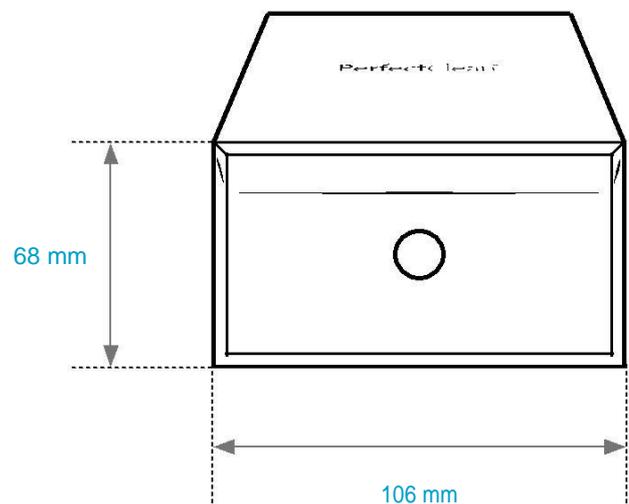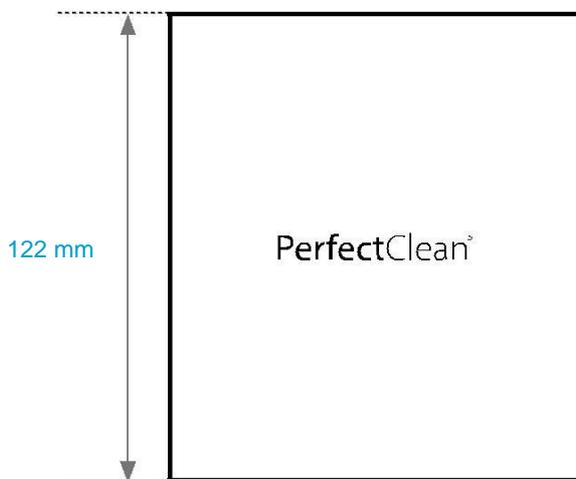

- Innemaße (BxHxT): 71 x 18 x 87 mm
- Gewicht: 400g

Lieferumfang

PerfectClean® enthält ein Stromkabel und einen AC Adapter.

Eigenschaften

PerfectClean® ist ein einzigartiges elektronische System, das drei wesentliche Funktionen für alle Arten von Hörgeräten bietet: Reinigung, Trocknung und Desinfektion.

Diese Merkmale ermöglichen dem Benutzer die optimale Funktionalität seiner Hörgeräte um sie jeden Tag zu genießen.

PerfectClean® enthält einen Mikroprozessor, der das Zusammenspiel verschiedenen Technologien steuert.

• Reinigung - Desinfektion (20 Minuten)

PerfectClean® arbeitet mit einer nachfüllbaren antibakteriellen Lösung (erfüllt die Voraussetzungen des NF bactericidal standard IN 1040).

Die Lösung entfernt Ohrenschmalz und Verunreinigungen restlos. Darüber hinaus wurde durch zahlreiche Tests bestätigt, dass die Reinigungsschritte durch das patentierte Power Vortex System optimiert wurden.

• Trocknung (65 Minuten)

Hörgeräte sind täglich einem Verschmutzungsrisiko ausgesetzt. Durch Schweiß und Feuchtigkeit laufen die elektronischen Komponenten Gefahr von Oxidation. Häufig sind Ausfälle Feuchtigkeitsbedingt. Verschiedene Tests haben die Wirksamkeit von PerfectClean® Trocknung System für alle Arten von Hörgeräten bestätigt.

Das Trocknungssystem arbeitet mit einem Ventilator, der durch pulsieren heiße Luft verteilt. Die Temperatur in der Reinigungskammer wird durch ein elektronisches System reguliert, sodass die Temperatur nie 45°C überschreitet und somit die Hörgeräte nicht beschädigt werden.

• Desinfektion (5 Minuten)

Das Ultra Violette (UV-C) Desinfektionssystem (basierend auf Kurzwellen) erreicht durch die 360° Anordnung alle Oberflächen des Hörgeräts. Durch das UV-C Licht werden über 99% der Viren und Bakterien vernichtet und reduziert jucken und Infektionen des Gehörgangs. Die UV Lampe leuchtet während den letzten fünf Minuten des Reinigungsvorganges und schaltet sich danach automatisch ab. Die Wirksamkeit des Desinfektionssystems (bakterizid und fungizid) wurde durch ein internationales Labor zertifiziert. Die Tests sind im Einklang mit den Vorschriften für Desinfektionen im medizinischen Bereich. Dasselbe Labor stellte in seinen Tests sicher, dass die Geräte bei der Reinigung nicht beschädigt wurden.

Verwendungszweck

PerfectClean® ist dazu bestimmt alle Arten von Hörgeräten und Otoplastiken zu reinigen, trocknen und desinfizieren, damit Ausfälle durch Ohrenschmalz, Feuchtigkeit und Verunreinigungen vermieden werden.

Ein täglicher Gebrauch verhindert Hautirritationen und Ekzeme. Es verlängert die Lebensdauer der Hörgeräte und erhält ihre Funktionalität.

Gebrauchshinweise

Reinigungslösung nur nachfüllen, wenn die Kontrollleuchte dies anzeigt. Nachfüllpackung restlos einfüllen. Stellen Sie sicher, dass der Deckel geschlossen ist, bevor Sie den Reinigungsvorgang starten, da das Gerät sonst nicht startet. Deckel während des Reinigungsvorgangs

geschlossen halten. Wenn der Reinigungsvorgang beendet ist, schaltet PerfectClean® automatisch aus.

Filterreinigung (vor jedem Nachfüllen)

1. Stellen sie das PerfectClean® mit dem Startknopf zu Ihnen gerichtet auf.
2. Filterkappe durch Drehung nach links auf die Position öffnen abnehmen.
4. Reinigen Sie den Filter mit heißem Wasser oder einer Reinigungstablette (in einem Glas).
3. Filterkappe in Position öffnen einsetzen und nach rechts auf Stellung geschlossen drehen.

Behälter entleeren (bei Reisen oder Transport)

1. Stellen sie das PerfectClean® mit dem Startknopf zu Ihnen gerichtet auf.
2. Filterkappe durch Drehung nach links auf die Position öffnen abnehmen.
3. PerfectClean® über einen Abfluss halten, damit die Flüssigkeit auslaufen kann.
4. Filterkappe in Position öffnen einsetzen und nach rechts auf Stellung geschlossen drehen.

Vorsichtsmaßnahme für den Gebrauch

PerfectClean® darf nur von Personen die im Vollbesitz ihrer geistigen Fähigkeiten sind benutzt werden.

Von Kindern fernhalten. Jedwede Tätigkeit außer Reinigung und Pflege des Kunden muss vom Kundendienst des Herstellers oder qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. PerfectClean®, die Stromversorgung, den Stecker oder den Adapter nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aussetzen. Falls das Stromkabel oder der Stecker beschädigt sind das Gerät nicht benutzen und die betreffenden Teile ersetzen. Den Adapter nur mit einem originalen Adapter ersetzen.

PerfectClean® nur auf einer ebenen und stabilen, trockenen Unterlage betreiben. Niemals das PerfectClean® kippen oder umdrehen, auch nicht wenn es nicht in Betrieb ist. Nicht direkt in das Licht der UV-C Lampe blicken. Stromkabel am Stecker und nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen.

Hörgeräte müssen ausgeschaltet sein und die Batterien müssen entfernt sein bevor sie mit PerfectClean® gereinigt werden.

Zur Reinigung von Perfect Clean keine chemischen Lösungs- und Reinigungsmittel benutzen. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise erlischt die Garantie. Der Hersteller haftet nicht für Schäden die vom Benutzer durch unsachgemäßen Gebrauch zu verantworten sind.

Garantie

24 Monate - (Kabel und Netzgerät eingeschlossen). Im Falle einer Fehlfunktion, Kontakt zum Händler aufnehmen. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Es besteht keine Garantie für Schäden die auf Grund normaler Abnutzung entstehen, Wasserschäden, unsachgemäßer Gebrauch, vernachlässigte Pflege, Gewalteinwirkungen sowie Eingriffen, die nicht vom Service erfolgten. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden die durch Schwankungen im Stromnetz oder Blitzschlag verursacht werden. Bei Gewitter Netzstecker ziehen.

Standards

Perfect Clean® erfüllt die Voraussetzungen in der Kategorie der medizinischen Geräte der Klasse I, gemäß European Directive 93/42/EEC bezüglich medizinischer Geräte.

Perfect Clean® entspricht den Umweltschutzbedingungen wie 2004-108-CE (electromagnetic compatibility) und 2002-96-EC Directive (on waste electrical and electronic equipment (WEEE)).

Sicherheitsstandards

- Standard EN 60601-1

NEMC Compliance to

- Standard EN 60601-1-2
- Standard FCC Part 18 + NMB 001
- EN55011 (CISPR11) Class B
- EN61000-3-2, 3 (EMC IMMUNIT)
- EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11(EMC EMISSION)