



Operating range
Betriebsreichweite
Plage de fonctionnement
Rango de funcionamiento

Roger microphone (e.g. Roger inspiro)
Roger-Mikrofon (z.B. Roger inspiro)
Microphone Roger (p. ex. Roger inspiro)
Micrófono Roger (ej. Roger inspiro)




⚠ Out of range! If distance greater than 20 meters/65 feet
Ausser Reichweite! Wenn der Abstand größer als 20 Meter ist
Hors de portée! Si distance supérieure à 20 mètres
¡Fuera de alcance! Si la distancia es mayor que 20 metros




Audio connection
Audio-Anschluss
Connexion audio
Conexión de audio

Roger DigiMaster

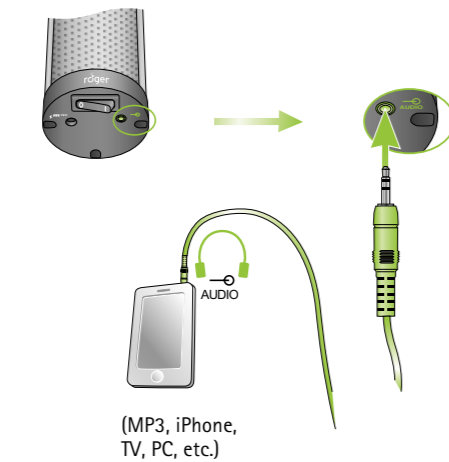

Network compatibility
Netzwerk-Kompatibilität
Compatibilité avec le réseau
Compatibilidad con las redes

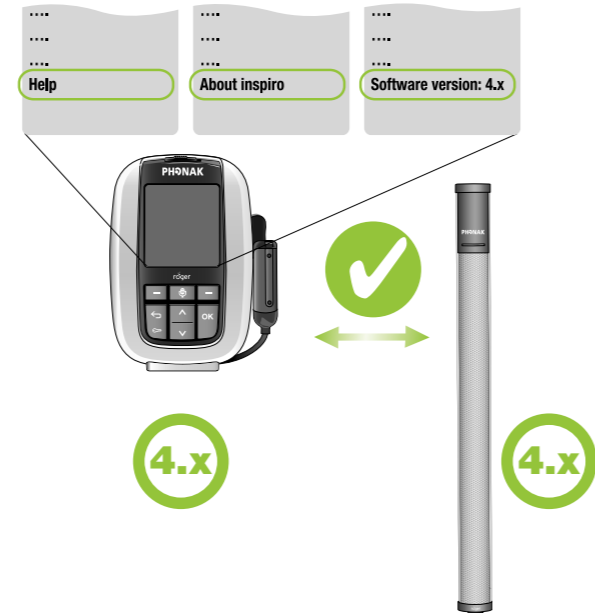

Network compatibility
Netzwerk-Kompatibilität
Compatibilité avec le réseau
Compatibilidad con las redes

⚠ Roger DigiMaster software version 4.x is only compatible with other devices running software version 4.x or later. Use Roger inspiro to check Roger DigiMaster's firmware version.


In einem Netzwerk ist die Roger DigiMaster Software-Version 4.x nur mit anderen Geräten kompatibel, die ebenfalls über die Version 4.x verfügen. Verwenden Sie Roger inspiro um die Roger DigiMaster Software-Version zu überprüfen.

Dans un réseau, la version logiciel 4.x du Roger DigiMaster est seulement compatible avec des appareils ayant la version 4.x ou plus élevée. Utilisez Roger inspiro pour vérifier la version logiciel du Roger DigiMaster.

Dentro de una red, la versión de software 4.x de Roger DigiMaster sólo es compatible con otro dispositivo que utilice la versión de software 4.x o posteriores. Utilice Roger inspiro para comprobar la versión de software de Roger DigiMaster.



Indicator light (LED status)
Optische Anzeige (LED-Status)
Témoin lumineux (LED status)
Indicador de luminoso (LED status)

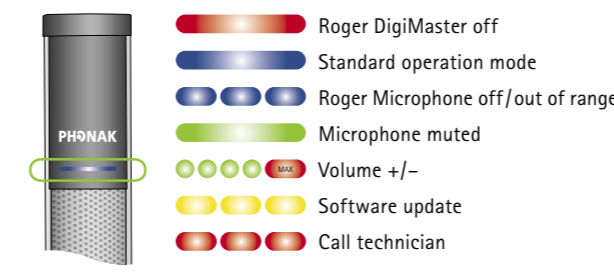

Operating conditions
Betriebsbedingungen
Conditions de fonctionnement
Condiciones de funcionamiento

+0° to +40° Celsius / +32° to +104° Fahrenheit
<95% (non condensing) relative humidity/relative Luftfeuchtigkeit/
humidité relative/ humedad relativa.

Manufacturer:
Phonak Communications AG
Laenggasse 17
CH-3280 Murten
Switzerland

EU Representative:
Phonak GmbH
D-70736 Fellbach-Oeffingen
Germany

www.phonak.com/roger

025-3163M1.00/2013-04/A+W Printed in Switzerland © Phonak AG All rights reserved




PHONAK
life is on


Start

Components and functions
 Komponenten und Funktionen
 Composants et fonctions
 Componentes y funciones

Roger DigiMaster

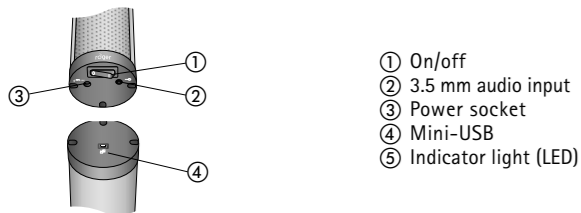

- ① On/off
- ② 3.5 mm audio input
- ③ Power socket
- ④ Mini-USB
- ⑤ Indicator light (LED)

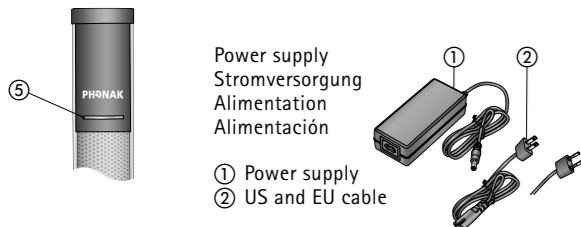

Power supply
 Stromversorgung
 Alimentation
 Alimentación


- ① Power supply
- ② US and EU cable

Package contents may vary slightly depending on your country
 Packungsinhalt kann je nach Land variieren
 Le contenu peut varier selon les pays
 El contenido puede variar en función del país


Start

Components and functions
 Komponenten und Funktionen
 Composants et fonctions
 Componentes y funciones


Option:
 DigiMaster Floor stand + bag

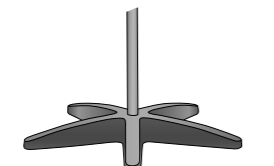

Option:
 Wall mount kit

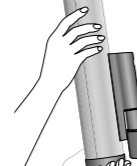


Option:
 UK and AU cable

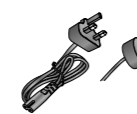

1

Mains
 Stromversorgung
 Alimentation
 Alimentación

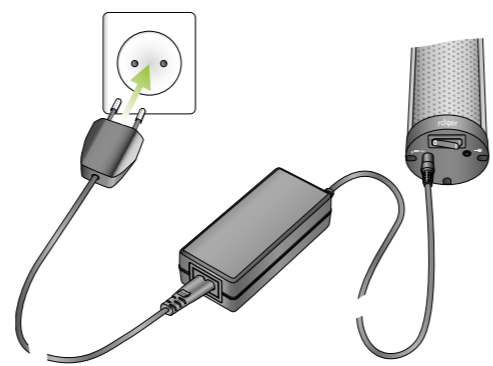


2

Switching Roger DigiMaster on
 Roger DigiMaster einschalten
 Enlencer Roger DigiMaster
 Encender el Roger DigiMaster



3

Connecting Roger DigiMaster to Roger inspiro
 Roger DigiMaster mit Roger inspiro verbinden
 Connecter Roger DigiMaster avec Roger inspiro
 Conexión de Roger DigiMaster con Roger inspiro

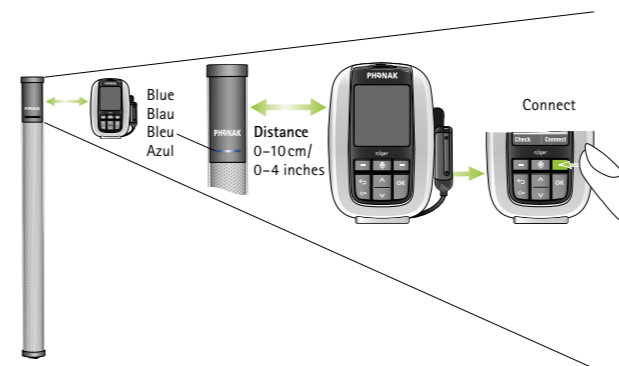

⚠ Connect Roger DigiMaster to Roger inspiro before first use (Connect).


Verbinden Sie Roger inspiro mit Roger DigiMaster vor der ersten Inbetriebnahme (Connect).

Connecter Roger DigiMaster avec Roger inspiro avant la première utilisation (Connect).


Conecte Roger DigiMaster con Roger inspiro antes del primer uso (Connect).

3

Connecting Roger DigiMaster to Roger inspiro
 Roger DigiMaster mit Roger inspiro verbinden
 Connecter Roger DigiMaster avec Roger inspiro
 Conexión de Roger DigiMaster con Roger inspiro

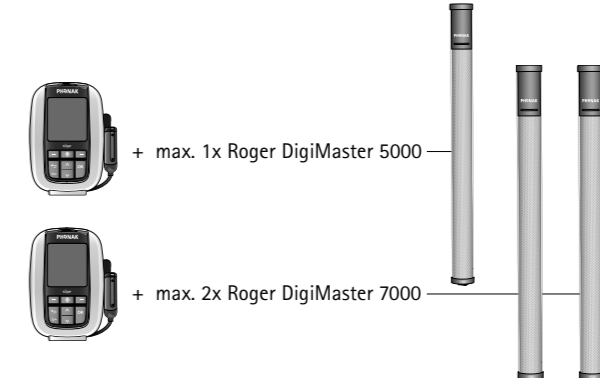


Display indicator

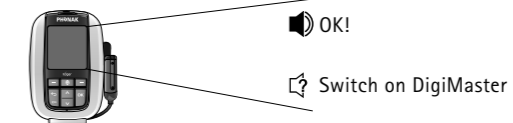

4

How to use Roger DigiMaster
 Roger DigiMaster benutzen
 Comment utiliser Roger DigiMaster
 Cómo utilizar Roger DigiMaster

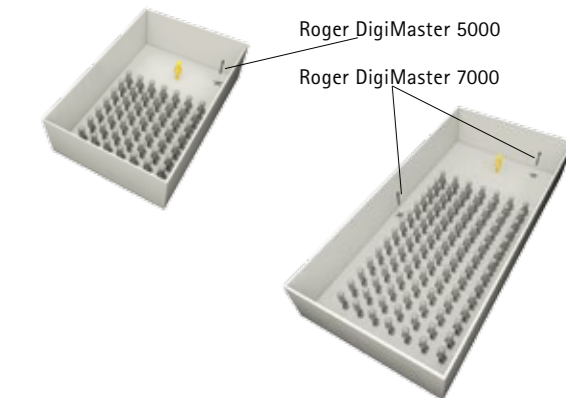

⚠ Same loudspeaker position whether using floor stand or wall mount.

Gleiche Lautsprecherposition mit Stativ oder Wandmontage.

Même position des haut-parleurs avec le pied ou la fixation murale.

Misma posición del altavoz ya sea sobre el soporte de pie o instalado en la pared.