

**FICHA TÉCNICA**  
**APOSITO CON FORMULA GEL CONTROLADA DuoDERM® CGF® EXTRA THIN**  
**PROVEEDOR: BOSTON MEDICAL DEVICE DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.**

PRODUCTO	
<b>Nombre genérico</b>	Apósito Hidrocoloide
<b>Nombre comercial</b>	DuoDERM® CGF® Extra Thin Apósito Hidrocoloide.
<b>Descripción</b>	Apósito oclusivo hidrocoloide.
<b>Registro sanitario</b>	0229C2013 SSA
<b>Uso</b>	Ulceras dérmicas y heridas superficiales, secas a ligeramente exudativas, heridas postquirúrgicas, apósitos protectores como en áreas sujetas a fricción o que requieran contorsión como rodillo y cotobelo.
<b>Presentaciones</b>	187961 - 5x20 cm (Cj x10) 187955 - 10x10 cm (Cj x10) 187901 - 7.5x7.5 cm (Cj 20)
<b>Composición del producto</b>	Sustancias Hidrocoloides: Carboximetil Celulosa Sódica – Pectina USP- Gelatina. Soporte: Espuma / Película Laminada en Poliuretano.
<b>Marca</b>	ConvaTec.
<b>Fabricante</b>	ConvaTec Inc.
<b>Características y acciones del producto</b>	Oclusivo: DuoDERM CGF Extra Delgado es impermeable a los líquidos, los gases y los microorganismos incluidos los virus del SIDA y la Hepatitis, reduciendo los riesgos de invasión bacteriana y viral. Retiene el exudado y mantiene el medio ambiente húmedo óptimo para el proceso de cicatrización. Mantiene el pH ligeramente Acido (5,0 – 6,0): reduce los riesgos de infección, por mayor actividad de los macrófagos en el control del crecimiento bacteriano. Favorece el desbridamiento autolítico: mantiene la humedad en el lecho de la herida favoreciendo la acción de las enzimas endógenas para la remoción natural del tejido necrótico. Absorción de Exudado: las sustancias hidrocoloides tienen capacidad de absorber y controlar el exudado, permitiendo cambios de apósito entre 1 y máximo 7 días. Impermeable a los líquidos: reduce los riesgos de contaminación de la lesión y mejora la calidad de vida del paciente ya que le permite realizar el baño general en ducha.
<b>Recomendaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se recomienda leer el instructivo de aplicación disponible en el empaque antes de su aplicación.</li> <li>• Valorar el lecho de la lesión (condiciones de la herida) y la piel circundante.</li> <li>• Limpiar el lecho de la lesión y la piel circundante con solución salina normal, sin utilizar soluciones antisépticas. Secar bien la piel perilesional para asegurar la adhesividad del apósito a la piel sana.</li> <li>• Remover la mayor cantidad de tejido necrótico posible antes de iniciar la terapia o aplicar DuoDERM Gel.</li> <li>• Elegir un tamaño de apósito que sobrepase por lo menos 3 cm, el tamaño de la lesión.</li> <li>• Cambiar el apósito cuando se filtre por alguno de sus bordes.</li> <li>• Explicar al paciente las características del drenaje que se encuentra al retirar el apósito.</li> <li>• No utilizar el apósito en combinación con otros productos para el cuidado de las heridas no probados clínicamente por ConvaTec y sin autorización médica.</li> <li>• No debe utilizarse en individuos con sensibilidad o que hayan presentado reacción alérgica al apósito o a sus componentes.</li> <li>• La esterilidad está garantizada a menos que el envase unitario esté dañado o abierto antes de su uso.</li> <li>• Temperatura de almacenamiento 10°C – 25°C.</li> </ul>
<b>Empaque secundario</b>	Caja de cartón.
<b>Empaque primario</b>	Filme de polietileno-poliéster / papel.
<b>País de origen</b>	Estados Unidos.
<b>Vida útil</b>	5 años.