

ALKASEPTIC 10 FICHA TÉCNICA

Está especialmente formulado para la desinfección y/o esterilización de instrumental de endoscopia y todo el material termosensible.

La mejor elección para hospitales, clínicas, consultas médicas y dentales.

Presentación comercial, frasco de 1 lt con dosificador de 20 ml., caja con 6 frascos.

Características:

ALKASEPTIC 10 es una reparación desinfectante líquida con 0.17% o 0.51% de Glutaraldehído potencializado por agentes tensioactivos.

Es de amplio espectro ya que tiene poder bactericida, micobactericida, fungicida y esporicida.

Instrucciones de uso

Diluir una dosis de 20 ml o 60 ml de ALKASEPTIC 10 concentrado por 1 litro de agua, obteniendo la concentración óptima del 0.17% o 0.51% de Glutaraldehído.

1 litro de solución concentrada permite preparar hasta 50 litros de solución activa.

La solución de ALKASEPTIC 10 preparada, se utiliza cuantas veces sea necesario en diferentes procedimientos será renovada cada 30 días.

ALKASEPTIC 10 concentrado es muy estable, la solución tiene una caducidad de 3 años.

Principios activos

Glutaraldehído potencializado al 10.5%

Tensioactivos no catiónicos menor al 3%.

Tensioactivos no iónicos menor al 3%.

Inhibidores de corrosión

Tiempo de acción

Proceso	Bajo	Medio	Alto	Completo
Desinfección	30 seg.	2 min.	20 min.	
Esterilización (esporicida)				60 min.*

Tiempo de contacto recomendado

Bactericida NMX –BB-040-SCFI-1999	0.17%	30 segundos.
Bactericida NMX –BB-040-SCFI-1999	0.17%	2 minutos.
Bactericida AFNOR NF-T 151	0.125%	5 minutos.
Fungicida AFNOR N-T 72-201	0.060%	15 minutos.
Virucida AFNOR NF-T 72-180	0.060%	15 minutos.
Micobacterium Tuberculois	0.060%	15 minutos.
Esporicida ASTM E - 1766 - 95	0.060%	60 minutos.*

Ventajas

Trabaja libre de corrosión comprobado ante la norma ASTM G 31 – 72, no daña el instrumental, realizando una desinfección de alto nivel y/o esterilización en endoscopios, fibroscopios y material termosensible.

Es seguro para el personal que lo manipula, ALKASEPTIC 10 una vez diluido NO ES IRRITANTE para la piel y ojos, según la norma 018 de la STPS .

No tiene un olor irritante para las mucosas.

No necesita testigo, ALKASEPTIC 10 es una solución que se mantiene estable en el personal.

ALKASEPTIC 10 es una formulación que permite disminuir la grave y altísima toxicidad que afecta al personal, por la emanación de vapores de glutaraldehído. Se reduce la emanación de 0,2 partes por millón, que provoca el glutaraldehído al 2% actualmente en uso, a tan solo 0.004 partes por millón.

No es necesario habilitar sistemas especiales de ventilación.

Finalmente, por su duración, baja toxicidad, fácil manipulación y características propias resulta ser el mas económico, rápido, no toxico y eficaz del mercado.

Es biodegradable.

***Es imperativo el uso previo de algún detergente enzimático y una dilución de 60 ml. X litro.**