



ENZYMEX P

Registro Sanitario: 0457C2012 SSA
Clave: 060.066.0971

DETERGENTE MULTIENZIMATICO COMPUESTO DE CLORURO DE DIDECILDIMETILAMONIO

CON PH QUE ASEGURE LA ACCION OPTIMA DE LAS ENZIMAS, ACTIVO
EN TODO TIPO DE AGUA

INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO

ENDOSCÓPIOS



OFTALMOLOGÍA



■ ÁREAS DE APLICACIÓN

■ Quirófano, material quirúrgico, endoscopio y oftalmología

■ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Espectro completo en 5 minutos
- El polvo garantiza la preservación y eficiencia de las enzimas
- Disponible en dosis solubles en agua, que permite:
 - reducir los desechos
 - evitar las sobredosis y el contacto directo con el producto
- Eficaz contra los biofilms
- Preserva la integridad del material quirúrgico
- Sin sustancia CMR* incluyendo NTA**
- Uso posible en baños ultrasónicos

* Cancerígeno, Mutagénico
tóxico para la reproducción
** Ácido nitrilo-acético



Fotografía no contractual

Fb Franklab®
notre expertise l'Ultra-Propreté



0.5%

CE
0459

ENZYMEX P

DETERGENTE MULTIENZIMATICO COMPUESTO DE CLORURO DE DIDECILDIMETILAMONIO CON PH QUE ASEGURE LA ACCION OPTIMA DE LAS ENZIMAS, ACTIVO EN TODO TIPO DE AGUA

■ MODO DE USO

■ Preparación de baño a 0.5%:

- Usar guantes, gafas y delantal de protección personal
- Verter 1 dosis de 20g en 4 litros de agua de la red y homogeneizar la solución.

■ Utilización:

- 1- Sumerja completamente los dispositivos médicos sucios en el baño enzimático
- 2- Cepille los dispositivos médicos y frotelos si es necesario
- 3- Tiempo de contacto:
 - **Instrumentos quirúrgicos:** 5 minutos
- 4- Enjuague con abundante agua
Renueve el baño enzimático después de cada uso

■ PROPIEDADES DESINFECTANTES

Actividades	Normas	Concentración	Tiempo de Contacto
Bactericida	EN 13727	0.5%	5 minutos
	EN 14561	0.5%	5 minutos
Levuricida	EN 13624	0.5%	5 minutos
	EN 14562	0.5%	5 minutos
Virucida	EN 14476 PRV (Modelo de virus de Hepatitis B)	0.5%	5 minutos

■ PRECAUCIONES DE USO

Consulte la hoja de seguridad (FS 010436)

■ CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: **Polvo**
- Color: **Blanco**
- pH a 0.5%: **10.8**
- Caducidad: **2 años**

■ COMPOSICIÓN

- Agentes tensioactivos no iónicos
- Amonio cuaternario
- Enzimas
- Agentes secuestrantes

■ ACONDICIONAMIENTO

- Bolsa con 12 dosis de 20g
- Bolsa con 12 dosis de 25g
- Bolsa con 10 dosis de 20g



Fotografía no contractual

Producto peligroso - observe las precauciones de uso. Antes de usar, lea la etiqueta y la información del producto. Dispositivo médico clase IIb.

INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES, SA DE CV

01(222) 403 99 81 / 01 (55) 7231 3843

imdbox@imd-home.com.mx

www.imd-home.com.mx



**FT
830**

F6v5_09.2017