

⚠ **RECOMENDACIONES PARA EL USO Y CUIDADO DE LA BALANZA**

1. La plataforma de vidrio será resbaladiza si está mojada o húmeda. ¡Manténgala seca!
2. Permanezca quieto sobre la balanza cuando se pesa.
3. NO golpee la balanza ni permita que se caiga.
4. Trate la balanza con cuidado ya que es un instrumento de precisión.
5. Limpie la balanza con un paño húmedo y evite que ingrese agua en ella. NO utilice sustancias de limpieza químicas ni abrasivas.
6. Mantenga la balanza en un lugar fresco con aire seco.
7. Mantenga siempre su balanza en posición horizontal.
8. Si la balanza no se enciende, verifique si se instalaron las pilas o si el nivel de las pilas es bajo. Coloque pilas nuevas.
9. Si aparece error en la pantalla o no se puede apagar la balanza durante un tiempo prolongado, quite las pilas durante 3 segundos aproximadamente, luego instálelas nuevamente para subsanar una falla leve. Si no puede resolver el problema, comuníquese con su distribuidor o proveedor y consúltele.

IMPORTANTE

Esta balanza es para uso exclusivamente doméstico y no puede usarse con fines comerciales.

Garantía

Fecha de compra:

Comercio:

Esta garantía es válida por el término de 1 año a partir de la fecha de adquisición contra todo defecto de fabricación o en materiales empleados, no cubriendo eventuales daños producidos por el uso incorrecto del equipo ni tampoco roturas, maltrato o intervención en reparaciones de personal no autorizado. Para que esta garantía tenga validez, debe presentar este manual con la fecha de compra, el sello del comercio donde fue adquirido y la respectiva factura de compra.

Importa, Distribuye y Garantiza: TENACTA S.A.
Girardot 1449 (C1427 AKE) C.A.B.A. - Argentina
Tel: (5411) 4554-7444 Fax: (5411) 5195-0010
www.aspensalud.com.ar / info@tenacta.com.ar



Hecho en China

110007-R00

 **ASPEN**
CONTROL PROFESIONAL EN EL HOGAR

Balanza de Baño Digital


Manual de Uso



EB3110H


• El artículo real puede diferir de las fotografías y o ilustraciones.

■ PILAS

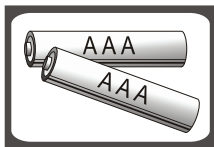

2 pilas AAA de 1,5V.

■ PARA CAMBIAR LAS PILAS

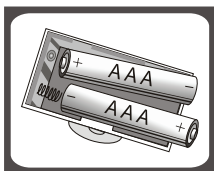

- Abra la tapa del compartimento para pilas en la parte posterior de la balanza.
- Instale las pilas nuevas colocándolas debajo del contacto y luego presiónelas hacia abajo. Verifique que la polaridad concuerde.

■ FUNCIONAMIENTO




Paso 1. Para asegurar precisión, coloque la balanza sobre una superficie firme y plana. Evite apoyarla sobre alfombras o superficies suaves.



Paso 2. Súbase a la balanza suavemente; la balanza se encenderá automáticamente. Permanezca parado sobre la balanza sin moverse y espere hasta que su peso en la pantalla se estabilice y el valor quede fijo.


- Peso máximo: 180 kg
- División: 100 g

■ APAGADO AUTOMÁTICO

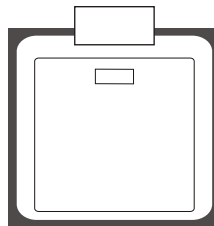

Cuando se baja de la balanza, se apagará automáticamente. El apagado automático se produce si la pantalla muestra el mismo peso durante aproximadamente 8 segundos.

■ INDICACIÓN DE SOBRECARGA

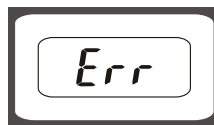


Sobrecarga de la balanza. (La capacidad de peso máxima está indicada en la balanza). Bájese para evitar daños.

■ INDICACIÓN DE NIVEL DE PILA BAJA



El nivel de las pilas es bajo. Instale una nueva pila.

■ NUEVA MEDICIÓN

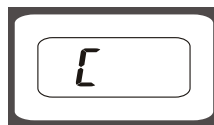

Aparece "C" cuando se baja de la balanza. Significa que hay error en la lectura del peso. Realice una nueva medición.