

ASPEN

Masajeador de mano con percusión

COMFORT MULTICORPORAL

Manual de Usuario



Mod.: CPM-3200

Estimado cliente, TENACTA S.A. le agradece el haber adquirido el presente producto. Estamos convencidos de que valorará su calidad y fiabilidad, siempre buscando satisfacer al consumidor. Este manual del usuario ha sido redactado en conformidad con la normativa vigente.

Contenido

Advertencias de Seguridad _____	Pag. 2-3
Unidad Principal y Accesorios _____	Pag. 4
Descripción de las partes	
Accesorios	
Guía de funcionamiento del equipo _____	Pag. 5
I. Preparación	
II. Funcionamiento	
III. Después de su uso	
IV. Recarga de la batería interna	
V. Estado de los LEDs	
Mantenimiento del equipo _____	Pag. 6
Como guardar su equipo	
Limpieza	
Precaución	
Especificaciones _____	Pag. 6
Resolución de Problemas _____	Pag. 7
Garantía _____	Pag. 7

Advertencias De Seguridad

- Para garantizar una operación segura y adecuada del equipo, no lo utilice sin antes leer este manual de usuario con suma atención.
- Después de sacar el equipo del embalaje, controle que el suministro esté completo conforme al dibujo, y que no haya sufrido daños durante el transporte. En caso de duda, no utilice el equipo y póngase en contacto con nuestros servicios técnicos autorizados.
- Antes de conectar el equipo, controle que los datos de la tensión de red indicados en la etiqueta regulatoria correspondan a los de la red eléctrica disponible. La etiqueta regulatoria está adherida en la fuente de alimentación y en el masajeador.
- Este equipo solo debe ser usado con la fuente de alimentación suministrada.
- En caso de dañarse el cable de conexión, debe ser sustituido con otro cable o por otra fuente de alimentación que está disponible en nuestros servicios técnicos autorizados.
- ¡Los materiales del embalaje no son juguetes para niños! Mantenga la bolsa de plástico fuera del alcance de los niños; ¡Riesgo de asfixia!
- Mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas. Debe supervisarse que los niños no jueguen con el producto.
- Este equipo no debe ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, salvo que hayan sido instruidas o supervisadas en el uso del equipo por una persona responsable de su seguridad.
- NO toque jamás el equipo con las manos o los pies mojados o húmedos.
- NO exponga el equipo a la humedad o al efecto de los agentes atmosféricos (lluvia, sol).
- NO tire de la fuente de alimentación o del equipo para desenchufarlo del tomacorriente.
- Desconecte el equipo de la alimentación eléctrica antes de llevar a cabo operaciones de limpieza o mantenimiento, o si no va a utilizarse.
- En caso de avería o problemas de funcionamiento del equipo, apáguelo y no lo manipule indebidamente. Si es preciso repararlo, diríjase únicamente a nuestros servicios técnicos autorizados.
- No utilice ningún otro accesorio que no esté recomendado por el fabricante.
- El masaje debe percibirse siempre como algo agradable y relajante. Cambie la zona a tratar, o interrumpa el masaje, si percibe dolor o molestia.


Advertencias De Seguridad

- Este equipo se debe utilizar únicamente con el fin para el cual ha sido proyectado, es decir, como masajeador para uso doméstico. Cualquier otro uso se considera impropio y por tanto peligroso.
- ¡NUNCA sumerja el equipo en el agua, ni en ningún otro líquido!
- NO deje caer el equipo.
- NO use el equipo bajo mantas, o junto a calentacamas o calentadores eléctricos.
- NO aplaste o pliegue el equipo, ni lo utilice en exteriores.
- NO use el equipo durante más tiempo del recomendado. Después de 15 minutos de tratamiento es aconsejable descansar por lo menos durante 20 minutos. Evite el contacto con objetos puntiagudos o duros que puedan dañar al equipo.
- En caso de dudas en cuanto a las propias condiciones de salud, consulte a su médico antes del uso. Sobre todo en caso de:
 - a. Problemas de circulación sanguínea o sensibilidad cutánea reducida.
 - b. En presencia de graves enfermedades o después de haber sido operado.
 - c. En presencia de resfriados con fiebre, várices, trombosis, inflamaciones venosas, ictericia, diabetes, enfermedades nerviosas (tipo ciática), tuberculosis, tumores, hemorroides, contusiones o inflamaciones agudas.
- Tampoco se debe utilizar el equipo en los siguientes casos:
 - a. Mientras se está conduciendo algún vehículo u operando maquinaria.
 - b. En animales.
 - c. En presencia de enfermedades del sistema cardiocirculatorio y dolor de cabeza.
 - d. En caso de hinchazón, quemaduras, heridas abiertas, heridas frescas, hematomas, hemorragias u otras lesiones en la espalda o en las piernas.
 - e. Durante el sueño.
 - f. Después de haber tomado fármacos o consumido alcohol o drogas.
- Se desaconseja utilizar el equipo a los portadores de marcapasos, implantes y otros dispositivos similares, a las mujeres en estado de gestación y en caso de dolores de naturaleza desconocida.
- El equipo transmite calor a través de la superficie. Las personas insensibles al calor deben prestar atención durante el uso del mismo.
- No coloque ni guarde el equipo donde pueda caerse o ser arrastrado dentro de un recipiente o pileta. Coloque el equipo en un lugar seguro.
- No lo utilice en habitaciones húmedas (por ejemplo toilettes y salas de baño).
- El equipo ha sido fabricado exclusivamente para uso doméstico y no debe utilizarse para finalidades profesionales o médicas.

Unidad Principal y Accesorios

Descripción de las partes

- 1) Conexión para cabezal
- 2) Etiqueta regulatoria del masajeador
- 3) LEDs indicadores de uso y carga
- 4) Perilla control de intensidad
- 5) Mango antideslizante
- 6) Conector de alimentación
- 7) Fuente de alimentación
- 8) Etiqueta regulatoria de la fuente de alimentación
- 9) Plug de alimentación
- 10) Cable de conexión

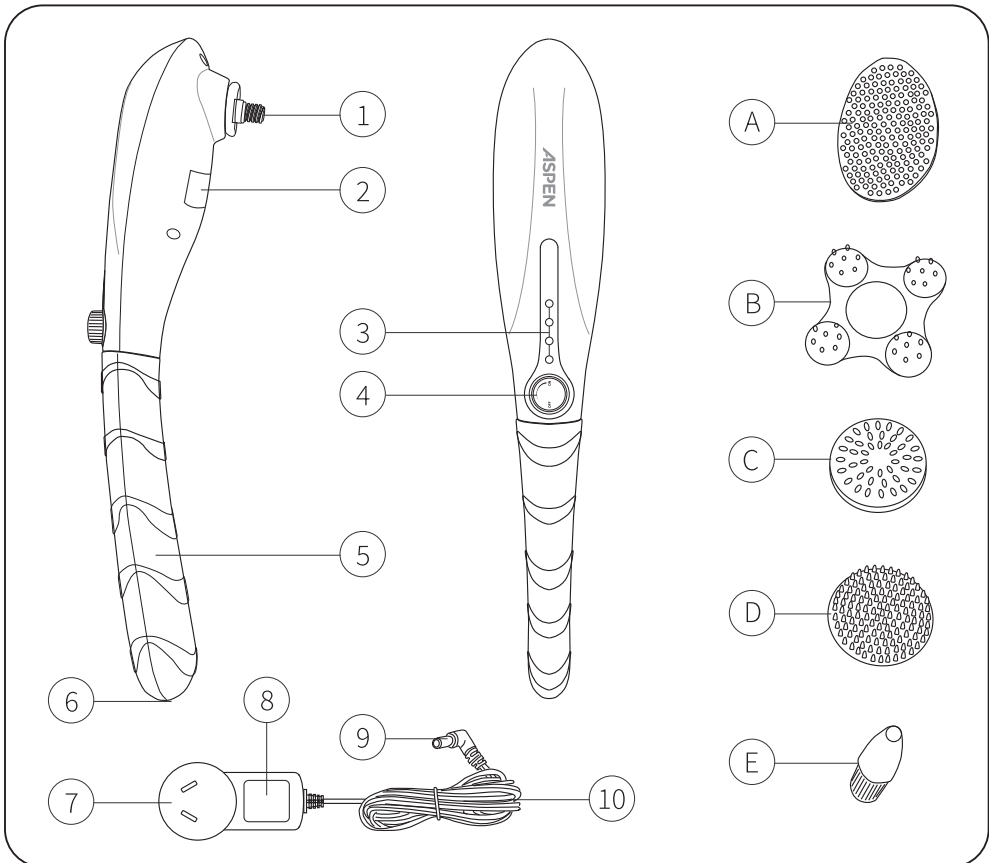

Accesorios

- A. Cabezal de masaje en forma de U
- B. Cabezal de masaje de 4 mandíbulas
- C. Cabezal de masaje para uso con aceite corporal
- D. Cabezal de masaje con peine
- E. Cabezal de masaje puntual

Guía de funcionamiento del equipo

I. Preparación

1. Antes de usar el equipo:

- Seleccione el cabezal de masaje adecuado.
- Conecte el plug de alimentación ⑨ en el conector ⑥ ubicado en la parte inferior del mango antideslizante ⑤.
- Conecte la fuente de alimentación ⑦ al tomacorriente.

II. Funcionamiento

1. Gire la perilla ④ en el sentido horario de las agujas del reloj para encenderlo, escuchará un sonido de "clic" cuando se active.
2. Para aumentar la intensidad de la vibración, gire gradualmente la perilla ④ en el sentido horario de las agujas del reloj.
3. Para disminuir la intensidad de la vibración, gire gradualmente la perilla ④ en sentido antihorario.
4. Para apagarlo gire en sentido antihorario, el equipo se apagará después de un sonido de "clic".

III. Después de su uso

Desconecte la fuente de alimentación ⑦ del tomacorriente.


IV. Recarga de la batería interna

NOTA: El masajeador posee una batería interna la cual permite utilizar el mismo sin que éste se encuentre conectado a la red eléctrica.

1. Conecte el plug de alimentación ⑨ en el conector ⑥ ubicado en la parte inferior del mango antideslizante ⑤.
2. Conecte la fuente de alimentación ⑦ al tomacorriente.

Nota: Cargue durante al menos 1 hora antes del primer uso hasta que los 4 LEDs azules ③ queden fijos.

V. Estado de los LEDs

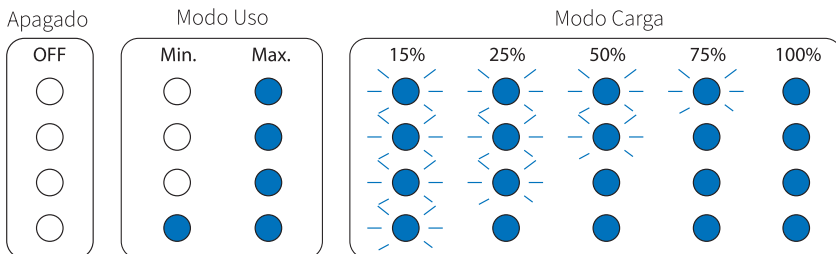

Nota: No es posible utilizar el masajeador mientras éste se encuentre en modo de carga.

IMPORTANTE

- No toque el cabezal ① mientras el equipo este en carga.
- Mantenga el equipo apagado durante la carga.

Una vez que esté completamente cargado, desconecte el plug de alimentación ⑨ del conector ⑥ y la fuente de alimentación ⑦ del tomacorriente.

Mantenimiento del equipo

Como guardar su equipo

- Coloque el masajeador en su caja o en un lugar seguro, seco y fresco.
- Enrolle el cable de conexión ⑩ y guarde la fuente de alimentación ⑦.



Limpieza

- Evite sumergir el equipo en cualquier líquido con el objeto de realizar la limpieza.
- Desenchufe el equipo y déjelo enfriar antes de limpiarlo.
- Limpie solo con una esponja suave y ligeramente humedecida.
- No permita que entre agua, o cualquier otro líquido, dentro del equipo.
- Para limpiar el equipo evite el uso de limpiadores abrasivos, cepillos, gasolina, kerosén, líquidos limpia vidrios o limpia muebles, ni utilice solventes de pinturas.
- Para la reparación de este equipo solicitamos ponerse en contacto con alguno de nuestros servicios técnicos autorizados.
- El equipo cuenta con garantía del fabricante, consulte el listado adjunto para conocer los detalles.



Precaución

- No debe colgar el masajeador sostenido por el cable de conexión ⑩.
- Para eliminar cualquier riesgo de lesión, solo se debe ejercer una fuerza suave contra el masajeador durante su uso.

Especificaciones

Nombre del producto:	Masajeador de Mano con Percusión
Marca:	ASPEN
Modelo:	CPM-3200
Tensión de entrada:	9,0V  1,0A 
Seguridad eléctrica:	Clase III
Dimensiones del masajeador:	412mm x 97mm x 70mm
Peso del masajeador:	1.0 Kg (sin la fuente de alimentación)

Fuente de alimentación

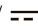Marca:	ASPEN
Modelo:	IVP0900-1000A
Tensión de entrada:	100-240V~ 50/60Hz 0,5A
Tensión de salida:	9,0V  1,0A 
Seguridad eléctrica:	Clase II

Contenido

Masajeador CPM-3200, 5 Cabezales intercambiables de masaje, Fuente de alimentación, Manual de usuario y Lista de servicios técnicos autorizados

Resolución de Problemas

Estos equipos se fabrican con los estándares más elevados. No hay partes que puedan ser reparadas por el usuario. Véanse las siguientes soluciones para cuando ocurran fallas de funcionamiento.

Condiciones	Soluciones
No funciona en absoluto	<ol style="list-style-type: none">1. El masajeador tiene la batería interna descargada.2. Vuelva a cargar el mismo hasta que los 4 LEDs azules queden fijos.
Durante el funcionamiento, los indicadores LEDs están funcionando pero no el masajeador	El masajeador puede haberse sobrecalentado luego de un período prolongado de utilización. Se debe enfriar para automáticamente reanudar su estado normal de funcionamiento. Desconecte la alimentación y permita que el masajeador se enfríe durante 30 a 50 minutos.
Sin operación de masaje	<ol style="list-style-type: none">1. Encienda el equipo girando la perilla.2. Verifique el estado de los LEDs por si la batería interna necesita carga.
Parada repentina	<ol style="list-style-type: none">1. Verifique el estado de los LEDs y vuelva a conectar la fuente de alimentación para la recarga.
El masajeador no funciona	<ol style="list-style-type: none">1. Asegúrese que el masajeador esté completamente cargado, la luz indicadora de carga debe estar azul fijo.2. Reinicie el masajeador conectando el cable de conexión, conecte la fuente de alimentación al tomacorriente durante por lo menos 3 segundos, y luego desenchufe. Ahora intente encender de nuevo el equipo.
El masajeador no comienza a funcionar de inmediato	<ol style="list-style-type: none">1. El masajeador puede tardar hasta 3 segundos en comenzar.2. La perilla no ha sido girada lo suficiente, asegúrese de escuchar un click durante el giro.3. Compruebe que los LEDs indicadores estén encendidos, de lo contrario gire la perilla correctamente.

Garantía

Fecha de compra:

Comercio:

Esta garantía es válida por el término de 1 año a partir de la fecha de adquisición contra todo defecto de fabricación o en materiales empleados, no cubriendo eventuales daños producidos por el uso incorrecto del equipo ni tampoco roturas, maltrato o intervención en reparaciones de personal no autorizado. Para que esta garantía tenga validez, debe presentar este manual con la fecha de compra, el sello del comercio donde fue adquirido y con su respectiva factura de compra.

Importa, Distribuye y Garantiza:

TENACTA S.A.

Manuel García 50, Planta Baja (C1284ACB) C.A.B.A. - Argentina

Tel.: (5411) 2206-1730

www.aspenweb.com.ar / info@tenacta.com.ar

Hecho en China