



Содержание набора:

Две специальные 10-мл пробирки для отделения сыворотки

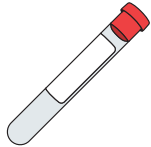


Адсорбирующие мешочки

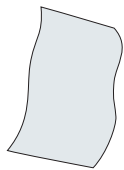

Картонная коробка



Пакет с застёжкой

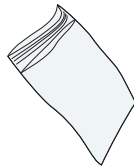

Бланк заявки для заполнения




* Наборы для отправки в Канаду также включают следующее:

- Отгрузочная этикетка
- Накладные
- Заклеивающийся пакет


Отгрузки в пределах США и Канады:

FedEx Express Медицинская упаковка с оплатой расходов по доставке отправителем

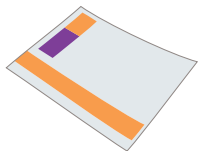

Либо

Приоритетная доставка USPS (Priority Mail) Услуга Маленькая коробка по единому тарифу (Small Box Flat Rate) штаты WA, AK, HI, & PR

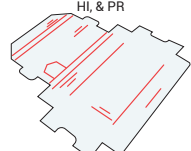

Прием пищи и лекарственных препаратов:

Рекомендуется, чтобы Вы придерживались своих обычных пищевых привычек и употребляли, по возможности, разнообразные продукты в течение нескольких недель до сбора образца крови, если только Ваш лечащий врач не назначит Вам иное.

Избегайте употребления продуктов, которые потенциально могли привести к произошедшей неблагоприятной реакции и/или анафилаксии, так как вторичное воздействие может привести к летальному исходу.

Иммуносупрессивные препараты, такие как пероральные или интраназальные кортикостероиды (например, преднизолон, беклометазон, флутиказон, триамцинолон) и суспензии и кремы с кортизоном местного применения, в дополнение к иммуномодулирующим препаратам, могут повлиять на результаты анализов по определению антител.

Важно:

Панели определения антител к пище, ингаляторам и плесени
Лаборатория должна получить образец биоматериала в течение 14 дней с даты сбора при транспортировке при нормальной температуре окружающей среды

Панель антител при целиакии
Лаборатория должна получить образец биоматериала в течение 10 дней с даты сбора при транспортировке при нормальной температуре окружающей среды

US Biotek Laboratories НЕ является поставщиком услуг в рамках программ Medicare или Medicaid. Стоимость выполняемых нами анализов не подлежит возмещению по указанным программам.

Во избежание отбраковки образцов, учтите следующее:

Наклейте этикетку на Пробирку для транспортировки сыворотки с указанием следующих данных: ФИО полностью, дата рождения, датой сбора образцов. Пробирка с образцом, на которой отсутствует эта информация, будет отклонена.

ФИО пациента на пробирке для транспортировки сыворотки должно точно совпадать с ФИО пациента в Бланке заявки на анализ. НЕ используйте никнеймы или аббревиатуры.

Для Панели определения антител IgE к ингаляторам требуется указать почтовый индекс пациента.



Остались вопросы? Отправьте нам письмо на contact@karimchubin.com

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРУ И ОТПРАВКЕ ОБРАЗЦА СЫВОРОТКИ

Панели определения антител к пище, ингаляторам и плесени / Food Panel
Панель антител и антигенов к Кандиде / Candida
Панель антител при целиакии / Celiac



Внимательно прочтите этот документ, прежде чем использовать содержимое данного набора.

Панель Антитела IgA при целиакии и специфические антитела IgA не подходит для младенцев на грудном вскармливании. Любой анализ на антитела IgE не применяется для детей младше 10 лет.



Важные инструкции по отправке

На специальных пробирках для отделения сыворотки и в бланке заявки на анализ разборчиво напишите свои данные: имя пациента (имя и фамилию), дату рождения и дату сбора образцов.

В бланке заявки на анализ требуется также указать:

- Имя практикующего врача
- Запрошенный анализ
- Хранение образцов
- Информация об оплате.

Отсутствие бланка заявки или неполностью заполненный бланк заявки увеличивает время приема образца и обработки заказа. Образцы сохраняются при транспортировке при нормальной температуре окружающей среды. В целях отслеживания сохраните копию номера накладной (номера отслеживания).

Отгрузки в пределах США

Заполните наклейку FedEx Express об оплате расходов по доставке на Медицинскую упаковку FedEx. Это должна быть наклейка о предоплате доставки службой FedEx в 2-х дневный срок в нижеперечисленные 48 штатов.

Свяжитесь со службой FedEx для забора отправки по телефону: 1.800.463.3339.

НЕ оформляйте и не запрашивайте отправки FedEx с забором груза в субботу. Это может повлечь за собой дополнительные расходы по доставке.

Внимание : штаты Вашингтон, Аляска, Гавайи и Пуэрто-Рико

отправляют образцы через почтовую службу США с использованием услуги Приоритетная предоплаченная маленькая коробка по единому тарифу (Priority Mail Small Flat Rate Box), в коробке, которая предоставляется на почте. Более срочная доставка осуществляется за счет практикующего лечащего врача.

Отправки из Канады

Содержимое отправки включает:

- 1 большую Медицинскую упаковку
- 1 заклеивающийся пакет FedEx с почтовой этикеткой (прилагается к Медицинской упаковке)
- 2 накладных (прилагаются к пакету Fed-ex)
- 1 коммерческий инвойс (прилагается к пакету Fed-ex)

Вложите картонную коробку внутрь Медицинской упаковки FedEx и заклейте.

Не уберите приложенные накладные и коммерческий инвойс изнутри заклеивающегося пакета FedEx.


Свяжитесь со службой FedEx для забора отправки по телефону: 1.800.463.3339.

Отгрузки за пределами США и Канады


Клиент несет ответственность за стоимость доставки.

Инструкции по сбору образца сыворотки


Внимательно следуйте инструкциям по сбору образца.

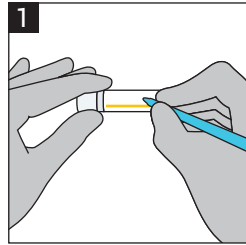


Разборчиво напишите Ваши данные: ФИО, дату рождения, пол и дату сбора биоматериала на двух специальных пробирках для отделения сыворотки.

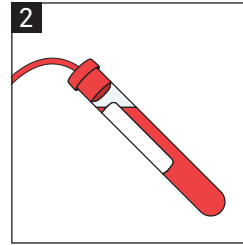


Соберите кровь, используя две специальные пробирки для отделения сыворотки. Одна полностью заполненная пробирка обычно дает около 3-4 мл сыворотки.

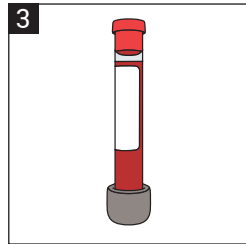


Дайте крови свернуться при обычной температуре окружающей среды в течение 30 минут.

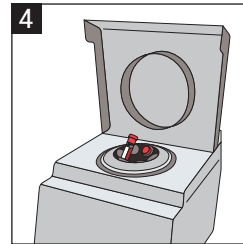


Осуществите центрифугирование при 3000 об / мин в течение 15 минут.

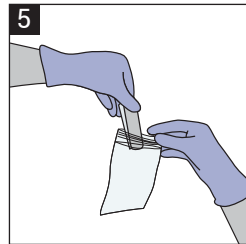


Поместите обе пробирки для отделения сыворотки в малый герметично закрывающийся пакет с абсорбирующим мешочком.

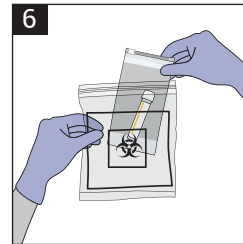

Поместите этот пакет в прилагаемый специальный Пакет для безопасной транспортировки биологических материалов.

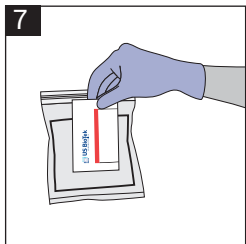

Вложите заполненный бланк заявки во внешний карман специального Пакета для биологических материалов.

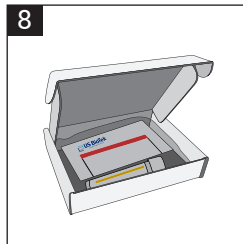

Поместите Пакет для биологических материалов во всем содержимым в упрочненную картонную коробку.

Specimen Collection Instructions Cont.



США и Канада:
Положите упрочненную картонную коробку в Медицинскую упаковку FedEx Express. Надежно запечатайте.



Либо

Положите упрочненную картонную коробку в Маленькую коробку с единым тарифом USPS Priority Mail. Надежно запечатайте.

Требования к сыворотке:

Объемы сыворотки указаны в Бланке заявки на тест. Недостаточный объем образца биоматериала может привести к невозможности выполнить анализ для всех заказанных панелей. Уведомление о панелях, анализы из которых не удалось выполнить, выдается вместе с результатами частично выполненных анализов.

Гемолизированные, липемические или иктеричные образцы сыворотки не будут приняты.