

Composants du kit US

- 1 - Boîte à outils
- 1 - Formulaire de demande de test
- 1 - Plateau de collection
- 1 - Flacon d'échantillons *
- 2 - Gants
- 1 - Sac à spécimen à fermeture éclair
- 1 - Matériel absorbant
- 1 - FedEx Clinical Pak Mailer

Si vous manquez l'un des composants nécessaires ou si vous avez des questions sur la collecte, veuillez appeler le service clientèle de Diagnostic Solutions Lab au 877-485-5336.


STOOL COLLECTION

*Évitez tout contact de la peau et des yeux avec le liquide du flacon d'échantillons. Si vous recevez du liquide dans les yeux, rincez-les à l'eau pendant 15 minutes. Si votre peau entre en contact avec le liquide, lavez-la avec de l'eau et du savon. En cas d'ingestion, veuillez contacter un médecin.

COLLECTE des selles

SUIVEZ LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT - UNE COLLECTE INAPPROPRIÉE RISQUE D'ANNULER LES RÉSULTATS

1

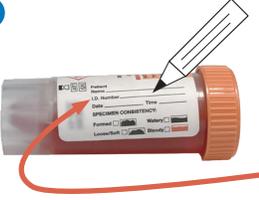

REMARQUE : Veuillez lire toutes les instructions et les composants du kit de prélèvement avant de commencer votre prélèvement d'échantillons. N'arrêtez PAS de prendre des médicaments sur ordonnance, sauf si votre médecin vous le demande.

Inscrivez le nom du patient, sa date de naissance (sur la ligne du numéro d'identification*) et la date de prélèvement sur le flacon de spécimen.

*Non Numéro d'identification - Utilisez l'espace pour la date de naissance.

4



A) Mélangez soigneusement les selles et le liquide avec la cuillère (attachée au bouchon).

B) Remettez le capuchon en place et agitez vigoureusement le flacon pendant 30 secondes.


2



Si possible, évacuez l'urine avant de recueillir les selles pour éviter de la mélanger à votre échantillon de selles.

Mettez des gants et faites passer les selles dans le plateau de collecte fourni.


5

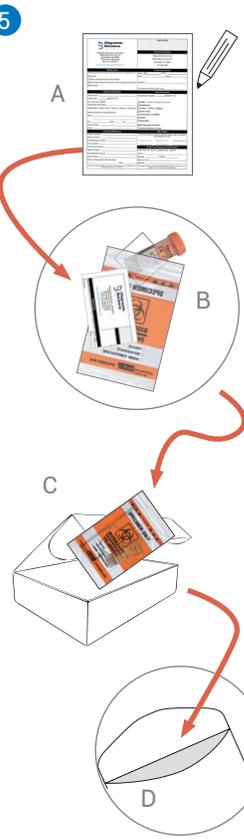

A) Remplissez entièrement le formulaire de demande de test et placez-le dans le porte-documents du sac à échantillons.

REMARQUE : Veuillez à inscrire la date de prélèvement de l'échantillon sur le formulaire. Le type de paiement doit être rempli et le paiement inclus pour traiter l'échantillon.

3

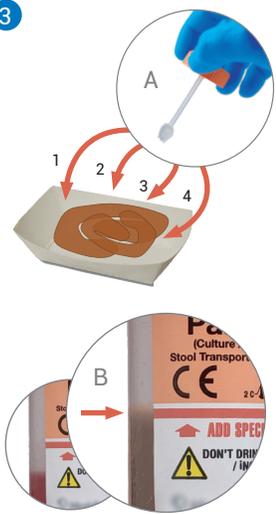

NE JETEZ PAS LE LIQUIDE ROSE DANS LE FLACON D'ÉCHANTILLON.

A) À l'aide de la cuillère fixée au bouchon de la fiole à échantillons, placez dans la fiole des selles provenant de plusieurs zones de l'échantillon
*C'est-à-dire d'au moins 4 zones de gauche à droite

B) Remplissez la fiole jusqu'à la "ligne de remplissage" rouge indiquée sur l'étiquette.

Si vous n'ajoutez pas suffisamment de matière, le laboratoire risque de ne pas être en mesure de traiter l'échantillon.

B) Placez la fiole à échantillon bouchée contenant l'échantillon de selles collecté dans le sac à échantillon avec le tampon absorbant et fermez le sac.

C) Placez le sac à échantillons avec l'échantillon collecté et le formulaire de demande de test dans la boîte du kit.

D) Renvoyez la boîte à kit remplie au laboratoire Diagnostic Solutions en utilisant l'enveloppe FedEx Clinical Pak fournie.

Voir les instructions d'expédition ci-dessous.**

**L'échantillon doit être reçu dans les 6 jours suivant le prélèvement. Si vous ne pouvez pas expédier l'échantillon le jour du prélèvement, veuillez le réfrigérer et l'expédier dès que possible, de préférence dans les 3 jours.

Instructions d'expédition

Veuillez nous contacter pour planifier le ramassage au moins 3 jours à l'avance en utilisant l'e-mail contact@karimchubin.com.

Si vous avez encore des questions, veuillez s'il vous plaît nous écrire à l'adresse suivante: contact@karimchubin.com