

Содержимое набора:

- 1 – Коробка для набора
- 1 – Бланк заявки
- 1 – Лоток для сбора образца
- 1 – Контейнер для образца\*
- 1 – Медицинский упаковочный пакет FedEx
- 2 – Перчатки
- 1 – Абсорбент
- 1 – Пакет для образца с zip-застежкой

STOOL COLLECTION

\*Избегайте попадания жидкости из контейнера для образцов на кожу и в глаза. Если в глаза попадет эта жидкость, промойте глаза водой в течение 15 минут. При попадании на кожу - промойте водой с мылом. При попадании внутрь, пожалуйста, обратитесь к врачу.

## СБОР ОБРАЗЦА КАЛА

ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ – НЕПРАВИЛЬНЫЙ СБОР ОБРАЗЦА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕВЕРНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ

**1**




**ПРИМЕЧАНИЕ:** Пожалуйста, ознакомьтесь со всеми инструкциями и компонентами набора для сбора образцов перед началом сбора образцов. НЕ прекращайте прием отпускаемых по рецепту лекарств, если это не предписано вашим врачом.

Напишите ФИО пациента, дату рождения (в строке **Идентификационный номер\***) и Дату сбора на специальном контейнере.

\* Идентификационный номер отсутствует – Используйте данное поле для записи даты рождения.

**4**



**А)** Тщательно перемешайте кал и жидкость ложечкой (прикрепленной к крышке).

**Б)** Плотно закройте крышку и энергично встряхните контейнер в течение 30 секунд.

**2**



Если возможно, опорожните мочевой пузырь перед сбором кала, чтобы избежать смешивания ее с образцом кала.

Наденьте перчатки и соберите кал в специальный лоток.


**5**



**А)** Полностью заполните Бланк заявки на анализ и поместите заполненный бланк в карман для документа на пакете для образцов.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Обязательно укажите дату сбора образцов в Бланке. Тип оплаты должен быть заполнен, и данные об оплате должна быть приложены для обработки образца.

**3**

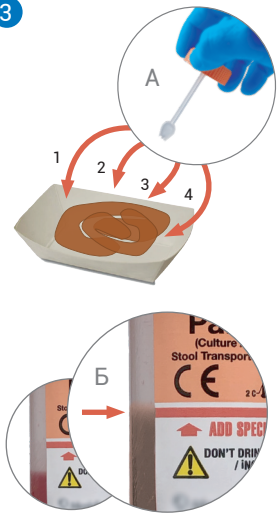

**НЕ ВЫЛИВАЙТЕ РОЗОВУЮ ЖИДКОСТЬ ИЗ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ОБРАЗЦОВ.**

**А)** Используя ложечку, прикрепленную к крышке контейнера для образца, наберите в нее кал из разных частей образца в контейнер.  
\* из 4 частей в порядке слева направо

**Б)** Заполните контейнер до красной "Линии заполнения", указанной на этикетке.

Недостаточное количество образца может привести к тому, что лаборатория не сможет обработать образец.

**В)** Поместите закрытый контейнер с образцом, содержащий собранный образец кала, в пакет для образцов вместе с абсорбирующим мешочком и запечатайте пакет.

**С)** Поместите пакет для образцов с собранным образцом и бланком заявки на анализ в коробку.

### Инструкции по отправке

Пожалуйста, свяжитесь с нами для вызова курьера по меньшей мере за 3 дня, написав на эл.почту [contact@karimchubin.com](mailto:contact@karimchubin.com).