

CIDEZYME™

Detergente enzimático



CIDEZYME™

Detergente enzimático

Descripción Genérica:

Detergente Monoenzimático
(Enzima: Proteasa)



Códigos del producto:

2260 (5 litros)

2258 (1 litro)



Descripción General

El detergente enzimático CIDEZYME™ es un líquido concentrado, especialmente formulado para la limpieza manual de instrumental médico quirúrgico y de endoscópicos flexibles antes de la desinfección de alto nivel o de la esterilización del dispositivo médico. El detergente proporciona un proceso de limpieza de un solo paso, donde la enzima degrada materia orgánica como sangre, heces o moco, mientras el surfactante retira el restante de materia del dispositivo.

Presentación comercial:

Galón por 5 litros / Galón por 1 litro

Vencimiento:

24 Meses

Especificaciones Técnicas

Enzima:

Proteasa

pH:

Neutro 7.8 a 8.8.

Disposición final:

Este producto podrá desecharse conforme a las normativas nacionales, federales, estatales y locales, o según las políticas y procedimientos del centro de atención sanitaria.

Almacenamiento:

Debe ser almacenado en su recipiente original a una temperatura controlada de 15°- 30°C (59°- 86°F). Coloque la tapa cuando no lo utilice. Evite temperaturas mayores a 40°C.

Instrucciones de uso:

El producto es efectivo preparando 8 mililitros por cada litro de agua a temperatura ambiente. Para equipo sucio, dejar en inmersión a partir de un (1) minuto inmediatamente después del procedimiento quirúrgico. Para equipo sucio con materia orgánica que se haya secado, se recomienda doblar la dosis del detergente enzimático.

Precauciones y advertencias:

Evite el contacto con piel y ojos: para ello, utilice protección ocular y guantes de goma. En caso de contacto limpiar con abundante agua y acudir al médico si se produce irritación. Puede ser nocivo si se ingiere. Si esto ocurriera, buscar auxilio médico. Úselo en áreas ventiladas.



Nota: consulte siempre el instructivo de uso, para recomendaciones más detalladas.