

# PRESEPT™

## Tabletas Desinfectantes de Nivel Intermedio




# PRESEPT™

## Tabletas Desinfectantes de Nivel Intermedio

### Descripción Genérica:

Tabletas (pastillas) Desinfectantes de Nivel Intermedio de Dicloroisocianurato de Sodio

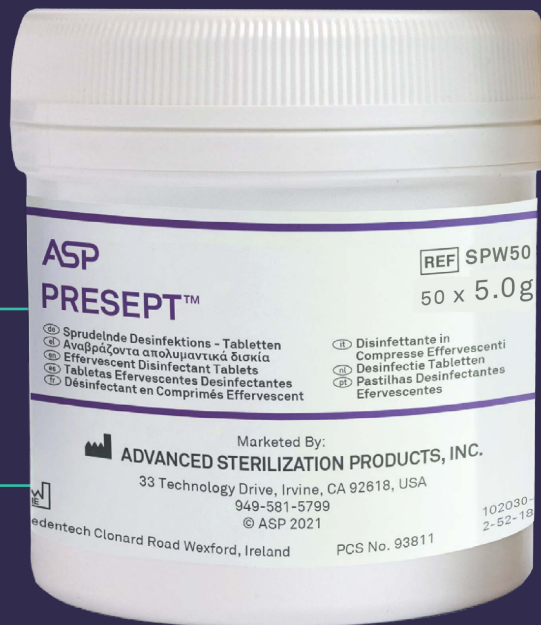

### Códigos del producto:

SPW50 (Tabletas)

## Descripción General

Dicloroisocianurato de Sodio o Triclosene de Sodio en una base efervescente. Disueltas en agua, las tabletas forman una solución de ácido hipocloroso de un pH óptimo y una eficaz acción desinfectante, proporcionando soluciones de solidez predeterminada sin residuos tóxicos. Se utiliza como desinfectante de nivel intermedio para desinfectar superficies duras (Ej.: superficies de laboratorios, superficies de trabajo, pisos, etc.) y para los ítems no críticos como cristal de laboratorio e instrumentos de acero inoxidable.

### Presentación comercial:

Descripción

Presentación

Unidad de Venta

PRESEPT™

Tabletas x 5 gramos Frasco x 50 tabletas

Caja x 6 frascos

## Instrucciones de Uso:

Las tabletas tienen una concentración fija y estable. No deben usarse más tabletas que las indicadas en la tabla de uso a continuación.

Desinfección	Concentración Necesaria de cloro disponible	Índice de Dilución en Agua (Tableta/5g)	Instrucciones Adicionales
Manchas de sangre*	10 000 ppm	9 pastillas en 2,5 litros	Verter sobre la sangre. Con guantes, limpiar con un paño desechable saturado de desinfectante.
Frascos para pipetas*	2 500 ppm	9 pastillas en 10 litros	Colocar los comprimidos en el frasco para pipetas lleno de agua. Desechar todos los días.
Uso general en laboratorio o medioambiental*	1 000 ppm	3,5 pastillas en 10 litros	Limpia las superficies con un paño desechables saturado de desinfectante.
Biberones o tasas para bebés, utensilios de acero inoxidable, porcelana, cristalería y tubos de goma/plástico	140 ppm	1 pastilla en 20 litros	Sumergir durante 1 hora.
Utensilios de cocina y vajilla	140 ppm	1 pastilla en 20 litros	Enjuagar de 1 a 2 minutos.
Ropa blanca sucia o infectada	140 ppm	1 pastilla en 20 litros	Sumergir durante 1 hora antes del lavado.
Superficies de trabajo, armarios, pisos, etc.	140 ppm	1 pastilla en 20 litros	Lave
Paños, mopas, etc.	60 ppm	1 pastilla en 46 litros	Remojar para limpiar con lejía y desodorizar.

\*Requisitos del código Howie para su uso en laboratorio.

## Consideraciones Importantes:

- Las tabletas ofrecen una concentración exacta, facilitando su uso.
- Este producto es fácil de almacenar por las dimensiones reducidas de los frascos.

### Vencimiento:

60 meses

### Eliminación:

Deseche el contenido o recipiente de acuerdo con las normativas locales, regionales, nacionales o internacionales.

### Almacenamiento:

Conservar en un lugar bien ventilado. Mantener el envase bien cerrado. Guarde todas las tabletas PRESEPT en su envase original y almacénese a temperaturas entre 15 y 30 °C (59 a 86° F). Sustituya el tapón entre usos.

### Fabricante:

Advanced Sterilization Products, Inc.

### Ingredientes:

Dicloroisocianurato de sodio: 50%  
Base efervescente: 50%

### Actividad:

La solución es eficaz contra todas las bacterias vegetativas, hongos, virus y esporas de bacterias.

### Dilución:

Seleccione el número necesario de tabletas para preparar la concentración requerida de la solución PRESEPT haciendo referencia a la Tabla de instrucciones de dilución. Todas las soluciones deben prepararse a diario.



**Nota: Consulte siempre el instructivo de uso, para recomendaciones más detalladas.**

Los nombres de productos en mayúscula son marcas comerciales de ASP Global Manufacturing GmbH.

**En Bolivia:** Reg. San. DI-58077/2021. **En Chile:** Advanced Sterilization Products Chile SpA. Avenida Sánchez Fontecilla # 310 oficina 201, Las Condes, Santiago. Producto no regulado. **En Colombia:** Advanced Sterilization Products Colombia S.A.S. (ASP™) Carrera 19 No. 100 -45. Bogotá. Certificado de no requiere Reg. San. 2020016264. **En El Salvador:** Reg. San. IM-042316072020. **En Guatemala:** Reg. San. PHH-41. **En Honduras:** Reg. San. HN-DM-0721-0214. **En Nicaragua:** Reg. San. I103-091220-8313. **En Panamá:** ASP Panamá S de RL, Oceania Business Plaza, Piso 21, Oficina 21D, Ciudad de Panamá. Reg. San. 88887. **En República Dominicana:** Producto no regulado. **En Uruguay:** eMedical Group. Uruguay 1525 – Montevideo. Reg. San. 86029.

©Advanced Sterilization Products Colombia S.A.S. (ASP™) 2022. Todos los derechos reservados. Contenido destinado a profesionales de la salud. 000037-220913