


JELONET [◇] Apósito de gasa parafinada

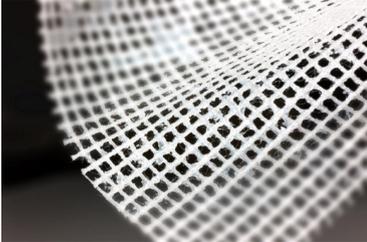

Descripción

Es una gasa parafinada con tejido abierto tipo Leno.

Modo de acción

Jelonet proporciona una capa protectora para la herida, en donde se deposita parafina a través de una malla de acetato, que gracias a su tejido tipo Leno, permite el libre paso de exudado hacia un apósito absorbente.

Indicaciones

Jelonet está indicado para heridas como abrasiones y escaldaduras menores, sitios donadores y receptores de injertos, heridas con pérdida de piel así como para heridas crónicas de úlceras de pierna y úlceras por presión.

Beneficios

- Permite que el exudado de la herida se drene hacia un apósito absorbente.
- Minimiza el deshilado cuando el apósito se recorta al tamaño y forma de la herida.
- Reduce el dolor en los recambios al ser suave y de baja adherencia.
- Al retirar el apósito, se realiza de manera atraumática.
- Protege la herida al utilizarse como interface.
- Compatible con cualquier tipo de medicamento tópico.

Características

- Malla de acetato con tejido tipo Leno.
- Cubierta impregnada de parafina suave

Instrucciones de uso

Jelonet debe aplicarse bajo supervisión médica. Utilice siempre técnicas asépticas

1. Preparación:

- Utilice los protocolos clínicos existentes para limpiar la herida.
- Seleccione el apósito del tamaño y forma adecuados.
- Compruebe que la piel alrededor de la herida esté limpia, seca y libre de grasas, jabones o detergentes, quitando el exceso de humedad.

2. Aplicación del apósito

- Recorte el apósito a la forma y tamaño de la herida.
- Retire el papel protector que contiene al apósito.
- Sujete el apósito y aplíquelo directamente en la herida.

3. Frecuencia del cambio del apósito

- Como apósito primario para abrasiones, escaldaduras menores, sitios donantes e injertos, el cambio debe realizarse según criterio clínico .
- Como apósito de interface, debe realizarse de acuerdo al apósito secundario, por razones necesarias.

4.Retirada del apósito

- Levante una esquina del apósito transparente y tire paralelamente a la piel con suavidad para desprender de la herida.

Composición

- Malla
- Cubierta
- Acetato
- Impregnado de parafina

JELONET [◇] Apósito de gasa parafinada

Presentación

Código Producto	Descripción	Unidad mínima de venta
7404	10 x 10 cm	10
7409	10 x 10 cm	100
7459	10 x 40 cm	10

INVIMA2018DM-0017831

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 0086 CE n° CE 00356 Clase CE IIb, estéril Smith & Nephew, S.A.U ISO 9001:2008 			 72 meses   25°C  	 Smith & Nephew Medical Limited Hull HU3 2BN England. Distribuidor Smith & Nephew, SAU

Leyenda símbolos

	No contiene látex		Producto esterilizado por irradiación
	Caducidad		No reutilizar
	Manténgase en lugar seco		Temperatura de almacenamiento
	No exponer el producto a la radiación solar		No utilizar si el envase está abierto o dañado
	Fabricante		

Smith&Nephew Colombia SAS
 Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3,
 Bogotá
 Tel: 57 (1) 605 7373
www.smith-nephew.com

[◇] Marca registrada
 Smith&Nephew