

The image shows several BD AutoShield Duo syringes. One is in the foreground, lying horizontally, with its needle and orange plunger visible. The syringe is white with a clear barrel and a purple cap. The BD logo is printed on the side. In the background, several other syringes are standing upright, slightly out of focus. The overall scene is brightly lit with a soft, white background.

BD AutoShield™ Duo

Veiligheidspennaald met dubbele automatische naaldbescherming
0,30mm (30G) x 5mm

Veiliger werken



Helping all people
live healthy lives




BD

Helping all people
live healthy lives

Introductie van de BD AutoShield™ Duo

De BD AutoShield™ Duo is de enige veiligheidspennaald die beschikbaar is in 5mm, 30G met dubbele automatische naaldbescherming.

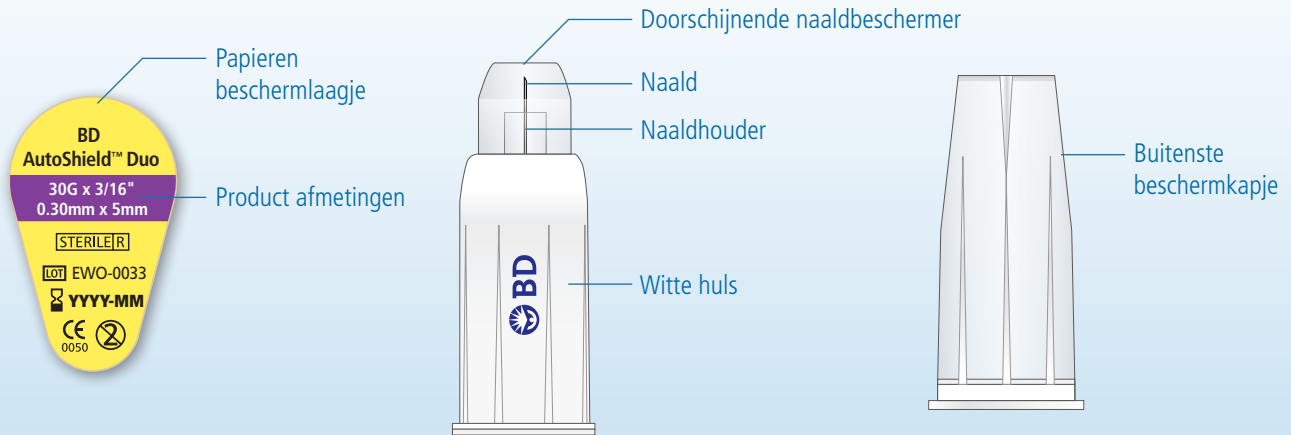

Introductie van de
BD AutoShield™ Duo

De BD AutoShield™ Duo
op de pen bevestigen

De injectie uitvoeren
in 3 stappen


De BD AutoShield™ Duo
verwijderen

BD AutoShield™ Duo
Veiligheidspennaald met **DUBBELE** automatische naaldbescherming

Veiliger werken



Voor gebruik

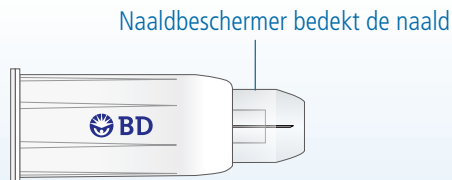

Na gebruik

Geactiveerde naaldbeschermers met **rode** indicatielijn



Introductie van de
BD AutoShield™ Duo

De BD AutoShield™ Duo
op de pen bevestigen

De injectie uitvoeren
in 3 stappen


De BD AutoShield™ Duo
verwijderen

BD AutoShield™ Duo
Veiligheidspennaal met **DUBBELE** automatische naaldbescherming


Veiliger werken




De BD AutoShield™ Duo op de pen bevestigen voor de injectie

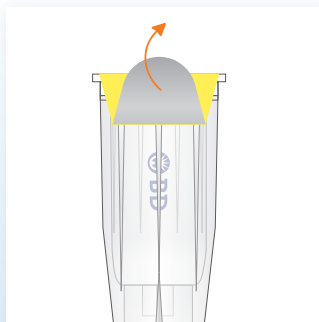

Verifieer de integriteit van elke naald. Verwijder het papieren beschermlaagje van de pennaal.

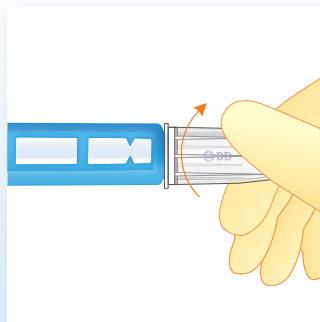

Terwijl u het buitenste beschermkapje vasthoudt, drukt en draait u de pennaal rechtsonder op de pen tot u weerstand ondervindt.

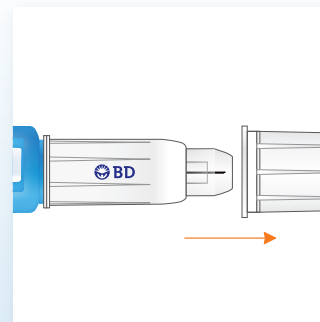

Trek in een rechte beweging **ENKEL** het buitenste beschermkapje weg.

Introductie van de
BD AutoShield™ Duo

De BD AutoShield™ Duo
op de pen bevestigen

De injectie uitvoeren
in 3 stappen


De BD AutoShield™ Duo
verwijderen

BD AutoShield™ Duo
Veiligheidspennaal met **DUBBELE** automatische naaldbescherming


Veiliger werken



Spuit 2 eenheden weg totdat er vloeistof uit de naald komt (zie instructies fabrikant).

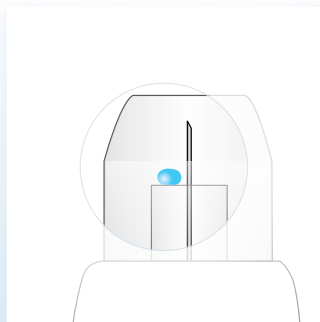

Opmerking: Het is mogelijk dat er een druppel vloeistof in de naaldbescherming terecht komt, waardoor er overtollige vloeistof kan achterblijven op de huid na de injectie.

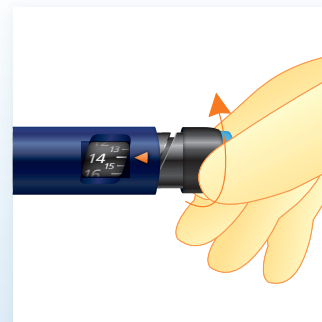

Stel de voorgeschreven dosis in op de pen (volgens de instructies van de fabrikant).

Introductie van de
BD AutoShield™ Duo

De BD AutoShield™ Duo
op de pen bevestigen

De injectie uitvoeren
in 3 stappen

De BD AutoShield™ Duo
verwijderen

De injectie uitvoeren in 3 stappen



U gaat nu zien hoe een injectie met de BD AutoShield™ Duo gegeven dient te worden.

Er zijn twee verschillende technieken afhankelijk van het protocol in uw instelling:

- **ZONDER** huidplooi

Aanbevolen injectietechniek voor een veilige injectie met de 5mm pennaald.

- **MET** huidplooi

Alternatieve techniek wanneer er risico is op een intramusculaire injectie.

BD AutoShield™ Duo
Veiligheidspennaald met **DUBBELE** automatische naaldbescherming

Veiliger werken



Helping all people
live healthy lives

ZONDER
huidplooi

Stap 1




Houd de pen zoals aangegeven.
Uw duim mag de injectieknop niet aanraken tijdens deze stap.

Stap 2



Breng de naald loodrecht in de huid in een vloeiende beweging. De doorschijnende naaldbescherming trekt zich terug en de witte huls sluit aan op de huid.

Stap 3

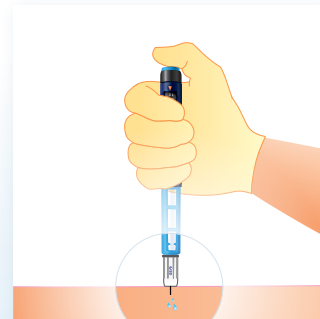

Oefen een constante druk uit op de huid en **injecteer de dosis** door de injectieknop met uw duim in te drukken.
Verwijder de naald **NIET** vooraleer de volledige dosis geïnjecteerd is. (zie instructies van de fabrikant)

Introductie van de
BD AutoShield™ Duo

De BD AutoShield™ Duo
op de pen bevestigen

De injectie uitvoeren
in 3 stappen

De BD AutoShield™ Duo
verwijderen

BD AutoShield™ Duo

Veiligheidspennaal met **DUBBELE** automatische naaldbescherming

Veiliger werken



Helping all people
live healthy lives

**MET
huidplooi**

Stap 1



Houd uw duim omhoog!

Indien er risico is op een eventuele intramusculaire injectie, neemt u een brede huidplooi (ongeveer 2,5 cm tussen de vingers).

Houd de pen zoals aangegeven. Uw duim mag de injectieknop niet aanraken tijdens deze stap.


Stap 2



Houd uw duim nog altijd omhoog!

Breng de naald loodrecht in de huid in een vloeiende beweging. De doorschijnende naaldbescherming trekt zich terug en de witte huls sluit aan op de huid.

Stap 3

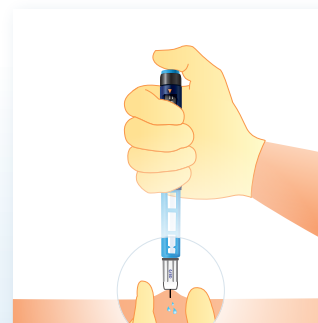

Oefen een constante druk uit op de huid en **injecteer de dosis** door de injectieknop met uw duim in te drukken.

Verwijder de naald **NIET** vooraleer de volledige dosis geïnjecteerd is. (zie instructies van de fabrikant)

Introductie van de
BD AutoShield™ Duo

De BD AutoShield™ Duo
op de pen bevestigen

De injectie uitvoeren
in 3 stappen


De BD AutoShield™ Duo
verwijderen

BD AutoShield™ Duo
Veiligheidspennaald met **DUBBELE** automatische naaldbescherming

Veiliger werken



**MET
huidplooi**

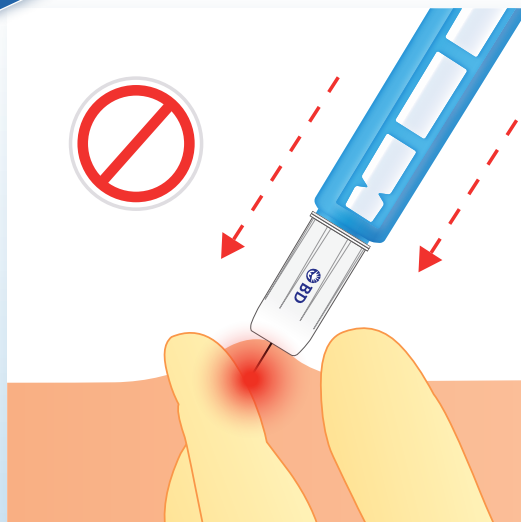

Opgepast!

NEEM NOOIT een huidplooi kleiner dan 2,5 cm tussen de vingers.

VERMIJD het injecteren met een insulinenpen onder een hoek van 45°, zoals gebruikelijk met een insulinespuit.

Injecteer **NIET** met de naald onder een hoek in de richting van uw vingers. Dit kan leiden tot prikongevallen.

Introductie van de
BD AutoShield™ Duo

De BD AutoShield™ Duo
op de pen bevestigen

De injectie uitvoeren
in 3 stappen


De BD AutoShield™ Duo
verwijderen

BD AutoShield™ Duo
Veiligheidspennaald met **DUBBELE** automatische naaldbescherming

Veiliger werken




De BD AutoShield™ Duo verwijderen

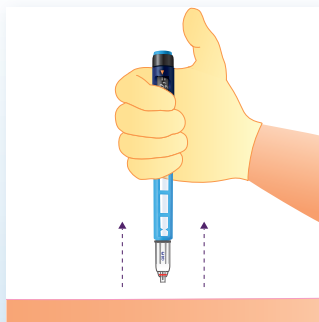

Nadat de volledige dosis geïnjecteerd is, verwijdert u de pen van de huid. De naaldhouder schuift automatisch op zijn plaats en wordt vergrendeld.



Een rode indicatielijn verschijnt om aan te geven dat de naaldbescherming vergrendeld is en dat de pennaald gebruikt is.

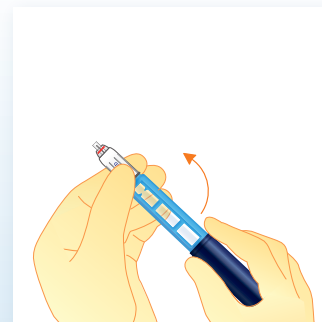

Houd de pennaald altijd vast aan de witte huls wanneer u ze verwijdert. Draai de pen linksom.

Introductie van de
BD AutoShield™ Duo

De BD AutoShield™ Duo
op de pen bevestigen

De injectie uitvoeren
in 3 stappen

De BD AutoShield™ Duo
verwijderen

BD AutoShield™ Duo

Veiligheidspennaald met **DUBBELE** automatische naaldbescherming

Veiliger werken





Helping all people
live healthy lives

Aansluitstuk met de pen
is beveiligd.

De beveiliging is
bevestigd wanneer
het oranje scherm
ingeschakeld is en
de naald bedekt is.

PLAATS uw vingers
NIET op de geactiveerde
naaldbeschermers.

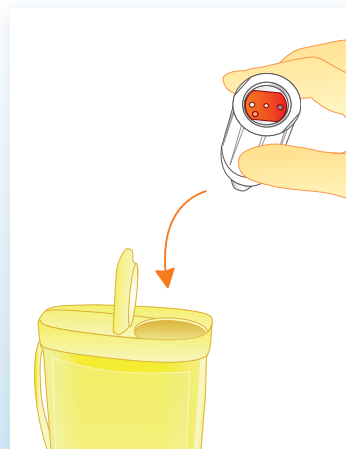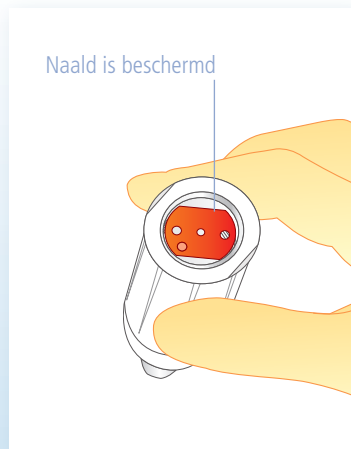

**Gooi de gebruikte
pennaald in een
naaldencontainer.**

Opmerking: Gooi alle plastic
verpakkingen weg.

Introductie van de
BD AutoShield™ Duo



De BD AutoShield™ Duo
op de pen bevestigen

De injectie uitvoeren
in 3 stappen

De BD AutoShield™ Duo
verwijderen

Thin wall technologie

Zoals de BD Micro-Fine™+ pennaalden, wordt de nieuwe BD AutoShield™ Duo pennaald gemaakt volgens de thin wall technologie. Dit betekent dat de naalden de afmetingen van hun zeer fijne buitendiameter behouden maar een grotere binnendiameter krijgen.

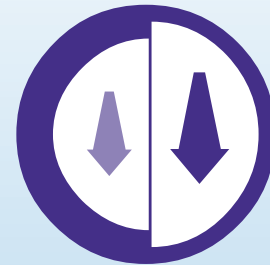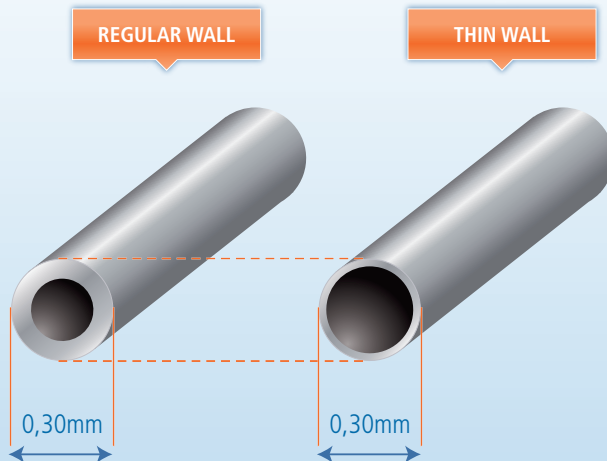

BD AutoShield™ Duo
Veiligheidspennaal met **DUBBELE** automatische naaldbescherming

Veiliger werken



Helping all people
live healthy lives

Past op alle pennen die gebruikt worden voor de behandeling van diabetes

Zoals alle BD Micro-Fine™+ pennaalden past de nieuwe BD AutoShield™ Duo op alle pennen die gebruikt worden voor de behandeling van diabetes*.



*Alle claims zijn correct op het moment van publicatie, September 2011. Alle claims zijn enkel van toepassing op diabetes medicatie en systemen beschikbaar in de Benelux.

Nu is het aan u om een injectie te geven met de BD AutoShield™ Duo!



BD, BD Logo, BD Micro-Fine and BD AutoShield zijn handelsmerken van Becton, Dickinson and Company. ©2011 BD. Alle andere merken zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars. Alle claims zijn correct op het moment van verschijnen, September 2011. Alle claims zijn enkel van toepassing op diabetes medicatie en systemen beschikbaar in de Benelux.