

FRÍO®

ASTRID EURO

'Freedom' met een Frio

Aanbevolen
door Diabetes
deskundigen

- Houdt insuline dagenlang op veilige temperatuur
- Gebruikt alleen water om te activeren
- Heeft geen koelelement of elektriciteit nodig
- Is keer op keer te gebruiken
- Is in verschillende maten en kleuren verkrijgbaar

Frio

VIVA

**INSULINE
REISTAS**

www.frio.eu



5 039345 000005

VIVA

HOUDT INSULINE VEILIG OP REIS

Inhoud

Elke FRÍO® bestaat uit twee delen:

1. Binnentas bestaande uit poly-katoen met banen gevuld met kristallen.
2. Cambrelle® buitentas.

Handleiding

1. Schud de **binnentas** totdat de kristallen gelijkmatig over de banen verdeeld zijn.
2. Leg de binnentas in zijn geheel in **koud water voor maximaal 12 minuten**.
3. De kristallen zijn nu opgezwollen tot een semi-harde gel. Niet laten zwellen totdat de banen strak staan. Als dit toch gebeurt moet het teveel aan vocht op natuurlijke wijze verdampen, totdat de tas teruggekeerd is tot een bruikbare maat.
4. Haal de binnentas uit het water en met een handdoek afdeppen. Daarna de tas 10 minuten laten liggen om het vocht te absorberen. De banen zwellen nog iets in deze periode.
5. Uw gekoelde insuline in de ge activeerde binnentas en het geheel in de Cambrelle® buitentas.

Uw FRÍO® is nu klaar voor gebruik!

- Uw ge-activeerde FRÍO® niet in eenafgesloten ruimte bewaren.
- Een FRÍO® moet ademen omdat de verkoeling verkregen wordt door verdamping van het vocht uit de binnentas. Het vocht moet weg kunnen, vandaar dat uw FRÍO® regelmatig in contact moet zijn met de lucht. De FRÍO® kan in uw bagage urenlang, dat is geen probleem, maar de FRÍO® moet ook regelmatig ademen. Doordat u uw insuline regelmatig

gebruikt, komt de tas meestal automatisch in contact met de lucht.

- U kunt uw insuline vanuit uw FRÍO® in een koelkast plaatsen indien aanwezig. Plaats uw FRÍO® tas echter **NOOIT** in de koelkast.

Doorlopend gebruik

De FRÍO® binnentas moet pas dan weer in het water gelegd worden, wanneer de gel zich begint terug te vormen tot kristallen; m.a.w. u kunt weer kristallen in de banen voelen. Als de tas doorlopend in gebruik is, zijn de onderdompelingstijden korter, b.v. 4-5 minuten.

Rustperiode

Indien u uw FRÍO® een periode niet gebruikt, droog de binnentas dan zo goed mogelijk uit op een natuurlijke wijze totdat de gelei geheel is teruggekeerd tot kristallen. Daarna even schudden zodat de kristallen niet aan elkaar kleven. In een droge ruimte bewaren. Afhankelijk van de lokale klimatologische omstandigheden kan een FRÍO® iets verschillend reageren.

Aktiveer de FRÍO® zoals aangegeven en de FRÍO® geeft u een lange tijd plezier en zorgeloos reizen.

Naarmate de levensduur van de FRÍO® toeneemt, wordt de her-activerings tijd langer. Echter, zolang de kristallen zich toteen gel omvormen, functioneert uw FRÍO® goed.

Wanneer de kristallen zich niet meer omvormen tot gel, zult u genoodzaakt zijn een nieuw model te bestellen.

Veel plezier!

FRÍO®, Postbus 81120, 3009 GC ROTTERDAM

telefoon 010 340 0 368

fax 00 44 1348 837 554

www.frio.nl www.frio.be

www.frio.eu