



luminette® Glasses 3

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| (EN) User manual | (FI) Käyttöopas |
| (DE) Gebrauchsanleitung | (IT) Istruzioni per l'uso |
| (FR) Mode d'emploi | (CZ) Uživatelský manuál |
| (NL) Gebruiksaanwijzing | (ES) Modo de empleo |
| (DA) Brugervejledning | (RU) Руководство пользователя |
| (SV) Användarmanual | (PL) Podręcznik użytkownika |
| (NO) Bruker Manual | |

Lucimed S.A.
Rue le marais 12a 4530 Villers-le-Bouillet | Belgium
www.myluminette.com | info@lucimed.com
Tel : +32 4 369 48 36 | Fax: +1-800390-5913



Model : Glasses 3
User manual Luminette 3 EU-US V2

EN - DE - FR - NL - DA - SV - NO - FI - IT - CZ - ES - RU - PL

Figure 1 – The Luminette and its accessories

Abbildung 1 – Die Luminette und ihr Zubehör

Figure 1 – La Luminette et ses accessoires

Afbeelding 1 – De Luminette en de accessoires

Figur 1 – Luminette og tilbehør

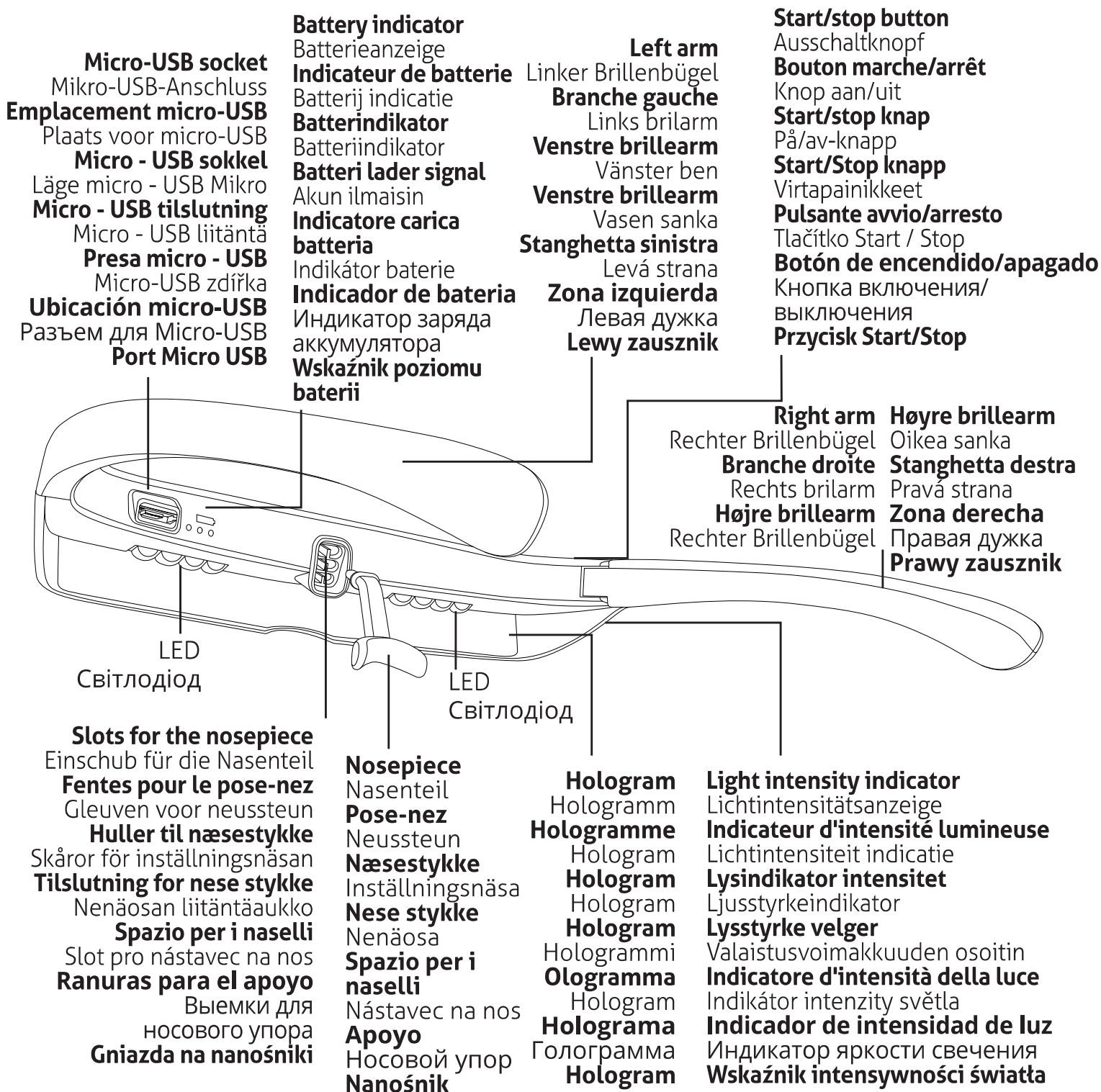


Figure 1 – Luminette och dess tillbehörs

Figur 1 – Luminette og tilbehør

Kuva 1 – Luminette ja sen osat


Figura 1 – La Luminette ed i suoi accessori

Obrázek č. 1: Brýle Luminette® a jejich příslušenství

Figura 1 – La Luminette y sus accesorios

Рисунок 1 – Очки Luminette и дополнительные детали

Rysunek 1 – Luminette i akcesoria

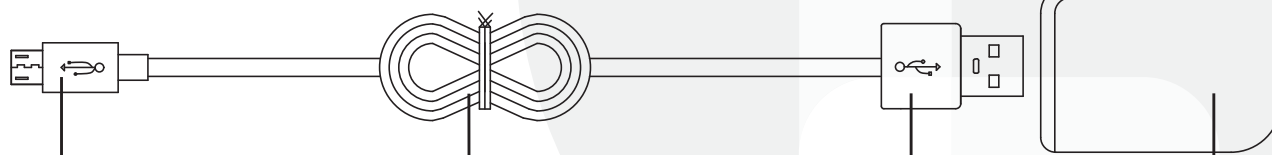

Micro - USB plug

Mikro - USB - Stecker

Connecteur micro-USB

Uiteinde Micro-USB

Micro - USB stik

Mikro - USB - konektor

Micro - USB Stikk

Micro - USB liitin

Connettore micro - USB

Micro-USB konektor

Connector micro- USB

Штекер для Micro-USB

Wtyczka Micro USB

Cable

Kabel

Câble de chargement

Oplading kabel

Ledning

Laddkabel

Kabel

Kaapeli

Cavo

Kabel

Cable de carga

Кабель

Kabel

USB plug

USB-Stecker

Connecteur USB

Utieinde USB

USB

USB sladd

USB Stikk

USB -pistoke

Connettore USB

USB konektor

Conector USB

Штекер для USB

Wtyczka USB

Charger

Ladegerät

Chargeur

Oplader

Oplader

Laddare

Lader

Laturi

Caricabatteria


Nabíječka

Cargador

Зарядное

устройство

Ładowarka

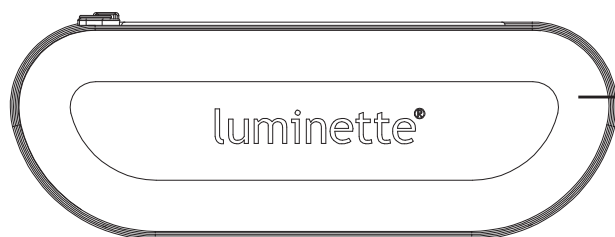

Protection case

Schutzhülle

Housse de protection

Bescherming hoes

Beskyttelsescover

Dammskydd

Opbevarings kasse

Säilytyskotelo

Custodia protettiva

Ochranné pouzdro

Funda de protección

Защитный чехол

Etui

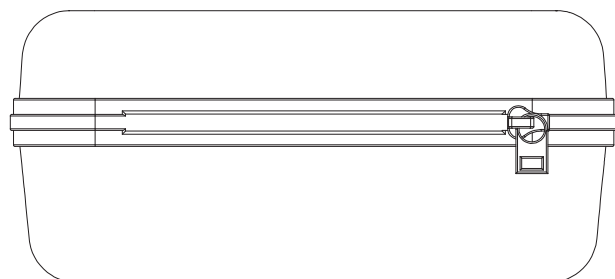


Figure 2 – Positioning the Luminette
Abbildung 2 – Positionierung der Luminette
Figure 2 – Positionnement de la Luminette
Afbeelding 2 – Positie van de Luminette
Figur 2 – Placering af Luminette
Figur 2 – Placering av Luminette
Figur 2 – Posisjonering av Luminette
Kuva 2 – Luminetten käyttöasento
Figura 2 – Posizionamento della Luminette
Obrázek č. 2: Umístění brýlí Luminette
Figura 2 – Colocación de la Luminette
Рисунок 2 – Расположение очков Luminette на лице
Rysunek 2 – Ustawienie Luminette

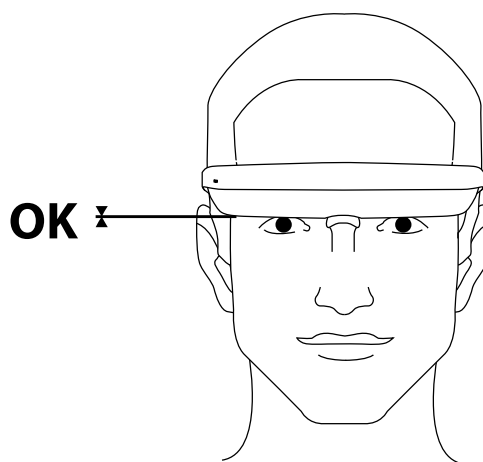
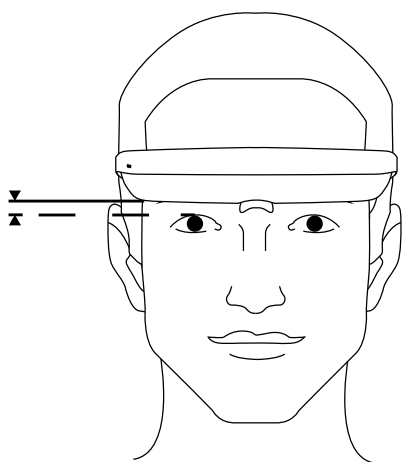
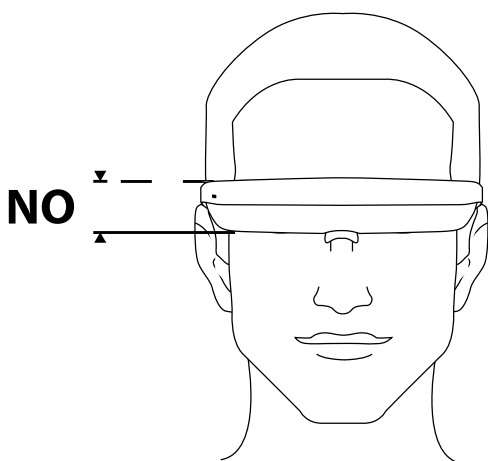


Figure 3 – Positioning while wearing eyeglasses

Abbildung 3 – Postionierung für Brillenträger

Figure 3 – Positionnement avec lunettes de vue

Afbeelding 3 – Plaatsen met een medische bril

Figur 3 – Placering over briller

Figur 3 – Positionering med glasögon

Figur 3 – Posisjonering hvis du bruker briller

Kuva 3 – Käyttöasento silmälaseja käytettäessä


Figura 3 – Posizionamento con occhiali da vista

Obrázek č.3: Umístění brýlí Luminette® při nošení dioptrických brýlí

Figura 3 – Colocación con gafas de visión

Рисунок 3 – Расположение Luminette при ношении очков для коррекции зрения

Rysunek 3 – Ustawienie w przypadku korzystania z okularów korekcyjnych

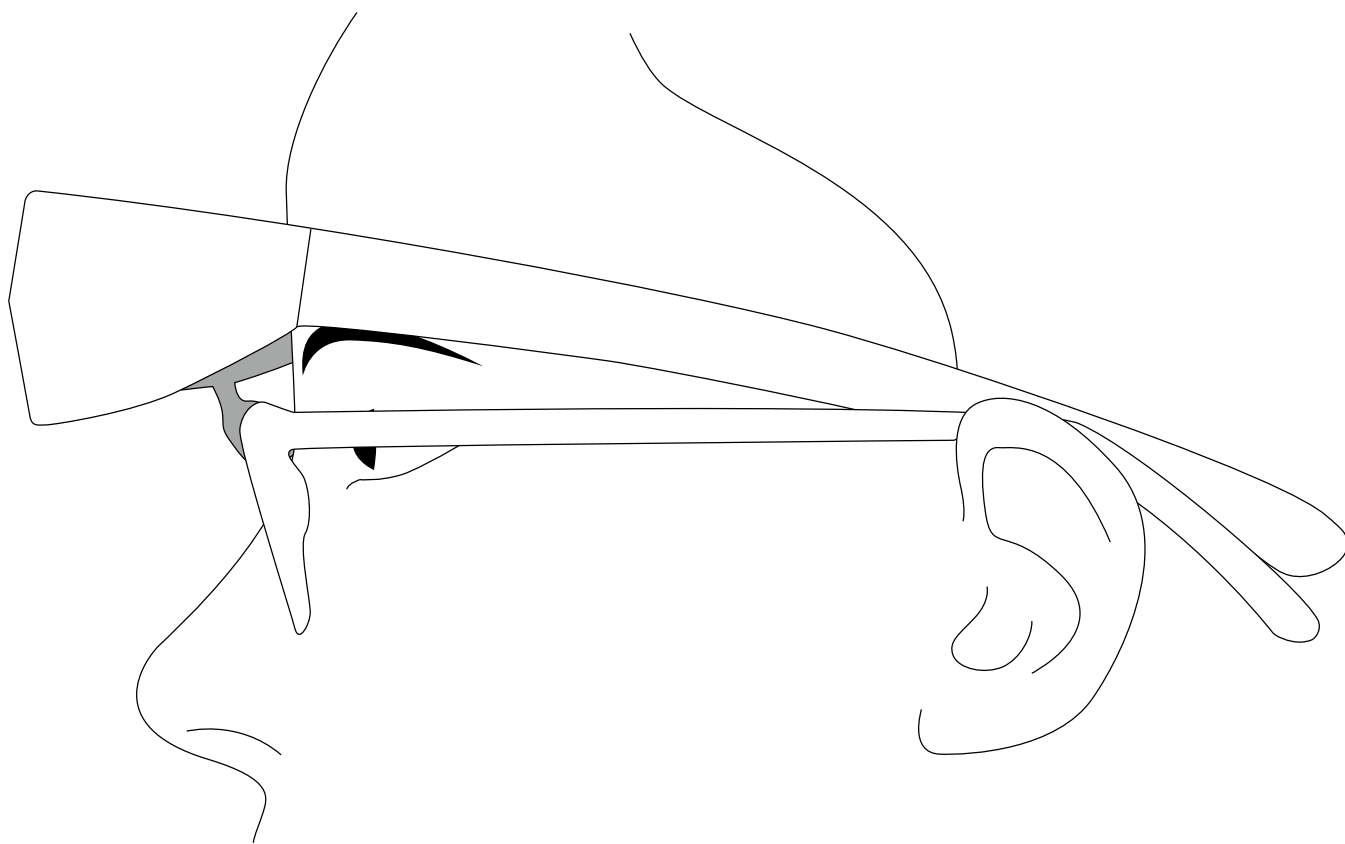

NL

I. Inleiding

Wij feliciteren u voor de aankoop van uw Luminette® en heten u welkom in de wereld van de draagbare lichttherapie!

Voordat u uw Luminette® opzet en gebruikt, nodigen wij u uit deze gebruiksaanwijzing eerst aandachtig te lezen. Wij raden u ook aan die zorgvuldig te bewaren en de tijd te nemen om uw toestel te ontdekken met behulp van afbeelding 1.

A. De rol van het licht

Ons menselijk brein gebruikt de licht/duister cyclus om onze interne functies te synchroniseren, zoals het humeur, de eetlust, de spijsvertering, de slaap, de libido enzovoort. Die circadiaanse ritmes, die zich over een periode van 24 uur herhalen, vormen onze biologische klok.

De melatonine is wat wij gewoonlijk «het slaaphormoon» noemen. Zodra de avond valt, scheiden onze hersenen deze hormoon af en worden we slaperig. 's Morgens, bij daglicht, stopt deze afscheiding van het slaaphormoon. Uitgerust kunnen we vol energie gemakkelijk opstaan.

Het licht heeft een regulerende werking op onze biologisch klok maar is eveneens heel belangrijk voor ons humeur. Het verhoogt onze waakzaamheid en verbetert onze fysieke en intellectuele prestaties.

B. Lichttherapie

In bepaalde situaties zit onze biologische klok niet meer op één lijn met onze externe omgeving. Onze circadiaanse ritmes zijn niet langer gesynchroniseerd.

Dit is het geval in de winter wanneer er onvoldoende licht is en sommige mensen de winterblues of een seizoensgebonden depressie krijgen. Dit wordt ook vastgesteld bij sommige personen die de neiging hebben te vroeg of te laat in slaap te vallen. Het tijdsverschil of de «jetlag» is een andere verstoring van onze biologisch klok. Ten slotte zijn er ook de stoornissen veroorzaakt door werk in ploegendienst (dit betreft meer dan 10 % van de werknemers in Europa) en die voortaan als echte ziektes worden erkend.

Deze stoornissen kunnen worden verzacht en zelfs helemaal verdwijnen bij een correct gebruik van licht en duister. Bij onvoldoende natuurlijk licht is lichttherapie de oplossing die de grootste voordelen biedt en het minst neveneffecten veroorzaakt.

C. Toepassingen

- Winterblues
- Vermoeidheid en energievermindering
- Een verstoord slaappatroon
- Jet-lag
- Stoornissen ten gevolge van werk in ploegendienst

D. Contra-indicaties

Ongeacht de reden waarom u uw Luminette® gebruikt, raden wij u aan om het apparaat niet langer dan de aanbevolen tijdsduur per dag te gebruiken.

Er zijn weinig contra-indicaties.

Indien u aan een oogziekte lijdt (glaucoom, retinitis of retinopathie, maculaire degeneratie) raden wij u aan een oogarts te raadplegen alvorens de Luminette® te gebruiken. Indien u aan grauwe staar lijdt, kan lichttherapie minder efficiënt zijn.

Als u lijdt aan een psychiatrische aandoening (depressie, hysterie, neurose en psychose), is het raadzaam om een arts te raadplegen vóórdat u het apparaat gebruikt.

Ten slotte raden wij u af de Luminette® te gebruiken wanneer u een voertuig bestuurt of met een machine werkt waarvoor een breed gezichtsveld en uw volledige aandacht wordt vereist.

De Luminette kan ook over contactlenzen of met een medische bril worden gedragen. Voor optimale resultaten dient de neussteun van de Luminette achter de medische bril geplaatst te worden. Het is niet raadzaam om de Luminette te gebruiken met een zonnebril of een kleurfilterende bril.

E. Mogelijke reacties

Mogelijke bijwerkingen van licht van dit apparaat zijn van een relatief milde en voorbijgaande aard. Mogelijke bijwerkingen zijn onder andere:

- Hoofdpijn
- Misselijkheid.
- Vermoeide ogen of visuele stoornissen, intraoculaire druk.
- Agitatie, verdoofd gevoel, prikkelbaarheid/schrikachtigheid en zeer zelden hypomanie of manie

Maatregelen om deze bijwerkingen te voorkomen, te beperken of te verlichten:

- Gebruik het apparaat altijd in een goed verlichte kamer.
- Verlaag de lichtintensiteit als deze reacties optreden.
- Gebruik het apparaat een paar dagen niet om de reacties te laten verdwijnen. Probeer het daarna opnieuw.

F. Veiligheid

Dit apparaat is in conformiteit met de technische regelgeving en de veiligheidsnormen die van toepassing zijn op elektronic apparaten en wat betreft de blootstelling aan elektromagnetische velden (CEM).

Om de levensduur van uw Luminette® te garanderen vragen wij u om:

- enkel de oorspronkelijke accessoires te gebruiken;
- uw Luminette® nooit in water onder te dompelen;
- uw Luminette® niet met water te reinigen;
- uw Luminette® noch in de zon, noch op een vochtige of stoffige plek te laten liggen.
- Maak uw Luminette na elk gebruik schoon

Attentie!

- Wijzigingen van het apparaat en de accessoires zijn niet toegestaan.
- Dit apparaat kan niet worden aangesloten via een verlengsnoer of een multistopcontact.
- Gebruik het apparaat altijd met de bijbehorende adapter of een ander compatibel systeem volgens de specificatie in de gebruiksaanwijzingen.
- De adapter fungeert als scheidingsschakelaar op het netwerk en dient altijd gemakkelijk bereikbaar te zijn.
- Wij wijzen u erop dat de buitenkant van de centrale behuizing een temperatuur van 49°C kan bereiken
- In geval van wederzijdse interferentie - van elektromagnetische of eender welke aard - met andere apparaten, het apparaat verwijderen.
- Luminette mag niet naast andere apparaten worden gebruikt of op andere apparaten worden gestapeld, omdat dit storingen kan veroorzaken. Als

dit gebruik noodzakelijk is, moeten dit apparaat en de andere apparaten worden gecontroleerd op normaal gebruik.

- Het gebruik van andere accessoires en kabels dan die gespecificeerd of geleverd kan een verhoging veroorzaken van elektromagnetische emissies of een vermindering van de immuniteit van dit apparaat, en bijgevolg een onjuiste werking veroorzaken.
- Draagbare communicatieapparatuur met radiofrequentie (inclusief randapparatuur zoals antennekabels en externe antennes) mag niet worden gebruikt op een afstand van minder dan 30 cm (12 inches) tot eender welk deel van Luminette, inclusief kabels gespecificeerd. Anders kunnen de prestaties van deze apparaten worden verminderd.

II. Gebruik

A. Waarvoor gebruik ik mijn Luminette®?

1. Om de winterblues tegen te gaan

U kampt met een gebrek aan energie en motivatie, u kunt 's morgens moeilijk opstaan, u hebt zin in een winterslaap, u knabbelt meer, u voelt dat u aan libido verliest? Waarschijnlijk bent u in een periode van winter blues. Ook wel «seizoensgebonden gemoedsstoornis» genoemd, dat is het resultaat van een vermindering van lichtsterkte in de herfst en de winter.

Wij raden u zo snel mogelijk na het ontwaken een sessie lichttherapie aan.

2. Om te strijden tegen vermoeidheid en energievermindering

De Luminette imiteert de gunstige werking van de zon en stimuleert de specifieke receptoren in de ogen, waardoor het energieverwekkende respons van het lichaam op het licht wordt ontketend. Dit helpt mee in de strijd tegen energievermindering, waardoor u zich fitter, actiever en levenslustiger voelt, en uw humeur zal verbeteren.

We raden u zo snel mogelijk na het ontwaken een sessie lichttherapie aan.

3. Om slaapstoornissen te bestrijden

Sommige slaapstoornissen worden veroorzaakt door een vervroeging of een verlating van de biologische klok. In dit geval brengt lichttherapie een oplossing.

Een vertraagde slaapfase

Hebt u de neiging om te laat in te slapen en hebt u moeite om 's ochtends op te staan? Wij raden u dadelijk na het ontwaken een sessie lichttherapie aan.

Een vervroegde slaapfase

Hebt u moeite om 's avonds wakker te blijven en wordt u te vroeg wakker? Wij raden u een sessie lichttherapie in de late namiddag of de vroege avond aan, twee à drie uur voor het tijdstip waarop u wilt gaan slapen.

4. Om tijdsverschil weg te werken

Het tijdsverschil of «jet lag» is het gevolg van een vlugge overgang naar verschillende tijdszones, meestal per vliegtuig. Het uit zich door een verstoring van de biologische klok: slapeloosheid, slaperigheid, lichamelijke en mentale vermoeidheid, gemoedsstoornissen, concentratiemoeilijkheden... Eenvoudige tips en het gebruik van uw Luminette® kunnen dit aanzienlijk verbeteren.

- Tijdens de vlucht

Regel uw uurwerk op het uur van uw bestemming, drink veel water en beperk het verbruik van alcohol, koffie en thee.

- Bij de aankomst

Indien u naar het oosten reist, en eenmaal ter plaatse, raden wij u aan de eerste dag tijdens de voormiddag het zonlicht te vermijden (door het dragen van een blue blocker bril of hoge UV-bescherming zonnebrillen) en van het namiddaglicht te genieten (of bij gebrek, van uw Luminette®) teneinde het melatoninegehalte laag te houden. Vervroeg uw sessie met twee uur elke dag tijdens de volgende dagen en let erop niet vooruit te lopen op uw gewoon uur van ontwaken.

Indien u naar het westen reist, raden wij u aan wanneer u ter plaatse bent, wakker te blijven zolang het dag is en uw Luminette® in het begin van de namiddag te dragen (tussen 12u00 en 15u00). Maar ga slapen zodra het nacht wordt.

5. Om het werk in ploegendienst te optimaliseren

Als u meer dan drie dagen achter elkaar 's nachts werkt, en u hebt moeite om op uw werk en/of het traject terug naar huis wakker te blijven, dan raden wij u net voordat u uw werk begint een sessie lichttherapie aan, en in geval van slaperigheid, een tweede sessie tijdens de pauze op uw werk.

Uit voorzichtigheid raden wij u aan contact op te nemen met uw arbeidsgeneesheer. Zou u een gepersonaliseerd programma willen? Download de gratis app van Myluminette die in de App Store en de Google Play Store beschikbaar is.



B. Hoelang duurt een sessie lichttherapie?

De aangeraden gebruiksduur hangt af van de lichtintensiteit die het oog opvangt. Voor uw Luminette® kunt u drie verschillende lichtsterktes selecteren.

De tabel hieronder toont de aanbevolen gebruikstijden van uw Luminette® volgens de gekozen positie.

Positie (bij het inschakelen)	Aangeraden gebruiksduur (in min.)
1	60
2	30
3	20

De gekozen lichtsterkte wordt aangegeven door de 3 lichtintensiteit LED indicaties (zie figuur 1). Wanneer de sessie voorbij is, knippert de bril drie keer en schakelt dan automatisch uit.

C. Hoe vaak moet ik de Luminette gebruiken?

Gebruik de Luminette elke dag op het juiste tijdstip voor de gewenste resultaten. Wij raden u aan om de Luminette elke dag op dezelfde tijd te gebruiken, behalve als u te maken hebt met jetlag.

D. Wanneer kan ik het effect van de Luminette merken?

Sommige mensen gaan het stimulerende effect merken vanaf het eerste gebruik. Andere gaan het merken binnen 1 tot 2 weken van dagelijkse gebruik.

E. Hoe moet ik mijn Luminette® aanzetten? Opladen van de batterij

Alvorens uw Luminette® voor de eerste keer aan te zetten, raden wij u aan de batterij op te laden.

Hier toe:

- sluit u het uiteinde van de Micro USB-kabel aan op de voorziene plaats van uw Luminette® (zie afbeelding 1) en steekt u het andere uiteinde USB Standard in de oplader;
- nu steekt u de oplader in het stopcontact;
- wanneer de batterij helemaal opgeladen is, trekt u de oplader uit het stopcontact (de oplaadtijd is 2 uur).

U kunt uw Luminette® ook opladen door ze met de geleverde USB-kabel aan te sluiten op uw computer.

Aanduidingen bij het opladen:

- Wanneer je Luminette® aan het opladen is, knipperen de 3 LED batterij indicatielampjes traag in een cyclus.
- Wanneer je Luminette® volledig opgeladen is, stoppen deze 3 LED batterij indicatielampjes te knipperen en blijven ze branden.
- Gaat er iets fout (defect van de batterij of het circuit) dan knippert deze LED snel en zonder onderbreking.
- Het apparaat kan tijdens het opladen niet worden gebruikt.

Autonomie van de batterij:

De autonomie hangt af van de gekozen intensiteit. Het Luminette® apparaat moet minstens tien sessies kunnen meegaan.

Wanneer je het apparaat uitzet, lichten 1 à 3 batterij LED indicatielampjes op om je een indicatie te geven van de batterijduur (3 LEDs = maximum; 2 LEDs = de batterij is nog 2/3 opgeladen; 1 LED = de batterij is voor 1/3 opgeladen; 1 knipperende LED = de batterij is onvoldoende opgeladen om een volledige sessie te voltooien).

Wij raden u aan om uw Luminette® op te laden als er bij het stopzetten van het apparaat niet meer dan 1 LED aan is.

F. Aan-en uitzetten

Attentie: Het beschermende laagje op het hologram dient voor het eerste gebruik verwijderd te worden.

Verzekert u ervan dat de batterij goed is opgeladen zodat uw Luminette® de hele duur van het ingestelde programma kan functioneren, dat wil zeggen de sessie van de volledige behandeling.

Druk kort op de toets Aan-Uit om uw Luminette® aan te zetten (zie afbeelding 1).

Druk kort op de toets Aan-Uit om de lichtsterkte te wijzigen. De wijziging gebeurt op kringloopwijze: niveau 1, dan niveau 2, dan niveau 3, dan terug naar niveau 1, enzovoort.

De Luminette® blijft branden gedurende een gedefinieerde periode, knippert drie keer wanneer deze periode verstreken is en schakelt dan automatisch uit.

Om je Luminette® tijdens een sessie uit te schakelen, houd je de aan/uit-knop ingedrukt (gedurende 2 seconden).

G. Hoe zet ik mijn Luminette® op?

Om echt doeltreffend te zijn en voor uw comfort, dient u de Luminette® goed op uw neus te plaatsen.

Zo plaatst u uw Luminette® in de juiste positie:

- Plaats het neusstuk in één van de drie gleuven (zie figuur 1). Een "klik" geluid betekent dat je het neusstuk er correct hebt in geplaatst. Om het er terug uit te nemen, dien je er stevig aan te trekken.
- Plaats het soepele deel van de neussteun op de plek tussen de neus en het voorhoofd. De onderkant van de holografische vizier dient zich net boven de ooglijn te bevinden (zie afbeelding 2) als u in de spiegel kijkt. Zorg ervoor dat de blauwe lichtstrip mooi over uw ogen past.

Opgepast, als u een bril draagt dient u de neussteun van uw Luminette® achter de neussteun van uw brilmontuur te plaatsen (zie afbeelding 3).

Bij het starten van de sessie, houdt u uw ogen open. U kunt daarna gewoon doorgaan waarmee u bezig was.

Attentie: om veiligheidsredenen mag uw blik niet direct in de LED's gericht zijn.

Vind de perfecte montage: Luminette past voor iedereen. Als u het toch een beetje lossier of strakker wil, plooi dan voorzichtig de slapen naar binnen of naar buiten. Voor een nog betere pasvorm, plaatst u de bijgeleverde witte plastic "oorhaakjes" aan het uiteinde van de slapen.

H. Hoe onderhoud ik mijn Luminette®?

Dit toestel is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Berg het toestel na elk gebruik op in de beschermende hoes op een droge plaats.

Om uw Luminette® schoon te maken, kunt u een zachte, met wat schoon water bevochtigde doek nemen.

Bescherm ook het breekbare holografische oogschermbeschermer en vermijd vingerafdrukken. Komen er toch nog vlekken op ondanks uw voorzorgen, reinig ze eenvoudig met een katoenen doekje.

Elk ernstig incident met Luminette moet worden gemeld aan Lucimed en de bevoegde autoriteiten van uw land.

III. Garantie en Dienst na verkoop

A. Garantie

Lucimed garandeert de werking van zijn apparaten als ze gebruikt worden overeenkomstig met de gebruikersvoorschriften en geeft een garantie tegen elke fabricagefout. Deze garantie dekt de onderdelen en de arbeidskosten. Is het apparaat defect, dan verzekert Lucimed gratis de herstelling gedurende 2 jaar, te rekenen vanaf de datum van aankoop.

De garantie is enkel geldig op vertoon van een bewijsstuk (garantiekaart, volledig ingevuld en afgestempeld of de aankoopfactuur). De datum van herstelling moet binnen de garantieperiode vallen.

De garantie dekt geen defecten ten gevolge van een ongeluk, ongepast gebruik of nalatigheid, en wanneer er wijzigingen of herstellingen die door onbevoegde personen zijn uitgevoerd.

Deze garantie geeft in geen geval recht op schadevergoeding.

Lucimed verzekert de dienst na verkoop tijdens en na de garantieperiode in alle landen waar het product officieel verdeeld en verkocht wordt.

De gebruiker geniet in ieder geval van de voorwaarden van artikel 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek betreffende de wettelijke garantie.

Gelieve het serienummer en de aankoopdatum in al uw briefwisselingen te vermelden.

Als u een probleem tegenkomt, kunt u een bezoek brengen aan www.myluminette.com voor assistentie.

Opgepast! Indien u deze gebruiksaanwijzingen verloren bent, kunt u ze steeds raadplegen en downloaden op de website www.myluminette.com.

B. Accessoires

De volgende accessoires zijn bij aankoop beschikbaar:

- Adapter en oplaadkabel (EU): referentie KYTW050100BV-03 of KYT050100BC-05
- Beschermende hoes: referentie CASE02

IV. Milieu

Als het apparaat niet meer werkt, gooi het dan niet weg met het huisvuil, maar breng het naar een recyclingepark. Het apparaat kan gerecycleerd worden. Zo draagt u bij tot de milieubescherming.

De herlaadbare batterij van uw Luminette® bevat schadelijke stoffen voor het milieu. Alvorens het apparaat als elektronische afval weg te gooien, gelieve de batterij eruit te nemen en ze naar het containerpark te brengen. Is het niet mogelijk de batterij te verwijderen, kunt u het apparaat bij uw verkoper afgeven.

Om de oplaadbare batterij eruit te nemen:

- gelieve u ervan te verzekeren dat het apparaat niet meer aangesloten is en de batterij leeg is;
- draait u de 2 schroeven van de brilarmen los met een schroevendraaier;
- verwijdert u de plastic dop van de oplaadbare batterij;
- Ontkoppel de oplaadbare batterij.

V. Technische specificaties

A. Kenmerken van het apparaat

Algemeen	
Handelsmerk	Luminette®
Modelreferentie van het apparaat	Glasses 3
Modelreferentie van de adapter (EU) + kabel	KYTW050100BV-03 of KYT050100BC-05

Elektrisch	
Nominaal ingangsvoltage van de adapter	100-240V AC
Nominale ingangsfrequentie van de adapter	50-60 Hz
Nominaal uitgangsvoltage van de adapter	5V DC
Nominale uitgangsvermogen van de adapter	5W
Type energievoorziening	
2 Oplaadbare lithium-ion batterij	3.7V 150 mAh
Classificatie	
Gebruiksaanwijzing	Doorgaand
Isolatieklasse apparaat	Interne elektrische bron (batterij)
Isolatieklasse adapter	II
Ingress beschermingscode	IP20
Fysieke kenmerken	
Afmetingen	17 x 16 x 3 cm
Gewicht	51 gr
Lichtintensiteit in positie 1	+ - 500 lux
Lichtintensiteit in positie 2	+ - 1,000 lux
Lichtintensiteit in positie 3	+ - 1,500 lux
Spectrale kenmerken	
Piek 1 Golflengte Bandbreedte	468 nm 70 nm

Piek 2 Golflengte Bandbreedte	570 nm 100 nm
Nominal Spectral irradiance (100% intensity) Maximal Spectral irradiance (100% intensity) Maximal variation of the output	21,8 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 25,4 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ $\pm 7\%$
Gebruiksomstandigheden	
Temperatuur	5 °C - +40 °C
Relatieve vochtigheid	15 % - 93 %
Bereik atmosferische druk	700 hPa - 1060 hPa
Opslagcondities	
Temperatuur	-25 °C - +70 °C
Relatieve vochtigheid	15 % - 93 %
Verwachte gebruiksduur	
Levensduur apparaat	6 jaar
Levensduur adapter	3 jaar

B. Symbolen

De volgende symbolen kunnen op het apparaat voorkomen:

Symbolen	Beschrijving
	Vervaardigd door: Lucimed SA, Rue le Marais 12a, 4530 Villers-le-Bouillet, België Tel. : +32 4 369 48 36
	Productiedatum
 SN 0000	Serienummer
	Raadpleeg de verstrekte gebruikersgids.
	Dit toestel dient niet verwijderd te worden binnen een standaard afvalprocedure, maar via een ophaaldienst voor verwerking en hergebruik.
	Raadpleeg de verstrekte gebruikersgids zorgvuldig.
IP20	Beschermingsgraad tegen penetratie van vreemde voorwerpen en van water
	Op een droge plek bewaren.
	De verpakking van dit apparaat kan verwerkt worden voor hergebruik.
CE	CE betekent Europese Conformiteitsverklaring.

C. Verantwoordelijkheid van de fabrikant

Als fabrikant nemen wij de verantwoordelijkheid van de veiligheid, de betrouwbaarheid en de werking van het apparaat op, dit enkel wanneer het gebruikt wordt overeenkomstig met de gebruikersaanwijzing en wanneer wijzigingen en herstellingen worden uitgevoerd door personeel dat door ons erkend werd.

Wij verzoeken u om contact op te nemen met de fabrikant als u hulp nodig heeft bij de installatie, het gebruik of het onderhoud van het apparaat, of als u onverwachts een probleem tegenkomt.